

起立保持訓練具



heart leaf prone

ハート・リーフ・プロン

取扱説明書



この度は、ハートリーフプロンをお買い上げいただきありがとうございます。

この説明書は、本製品の機能を十分に生かす操作方法や、安全にご使用いただく為の注意事項などを記載しています。

ご使用前に、この説明書をよくお読みの上正しくお使いください。また、その後はこの説明書を大切に保管し必要に応じて繰り返しお読み下さい。

 **Pacific Supply**

ハートリーフプロンとは……

ハート(heart)は、心・愛情・おもいやりを表し、両親や兄弟の愛情と、私たち(KAWAMURA)のこの商品に対する情熱・気持ちを表現しています。

リーフ(leaf)は、葉(木)を表し、やわらかで、あたたかみのある木材(ブナ材)をベースにした商品をイメージしています。

また、「葉」(特に若葉)は生命力の象徴とされています。葉が芽吹いた時、ちょうど子どもが生を受けて育ち始める大切な時期、このハートリーフ商品と一緒に生きる力・豊かな生活・人生を家族と一緒に育んでいて欲しい……

こんな思い入れから生まれた名前です。



もくじ

1. 安全にご使用いただくために……	P. 3
2. 構成部品と各部の名称……	P. 5
3. 仕様……	P. 5
4. 特徴と機能……	P. 6
5. ご使用前の点検・準備……	P. 6
6. キャスターのロック方法……	P. 7
7. 折りたたみ・組み立て方法……	P. 7
8. 角度調整方法……	P. 8
9. テーブル高さ調整方法……	P. 9
10. フットプレート角度調整方法……	P. 10
11. 胸パッド調整方法……	P. 10
12. 腰パッド調整方法……	P. 11
13. 膝パッド調整方法……	P. 11
14. 安全な使い方……	P. 12
15. 日常のお手入れ……	P. 13
16. 保管と廃棄方法……	P. 13
17. MEMO……	P. 14
18. 保証規定……	P. 15

1. 安全にご使用いただくために

警告



この表示を無視して誤った取扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- (1) 保守点検は1日1回使用前に介助者が必ず行って下さい。また、保守点検を行っていない場合は使用しないで下さい。
- (2) 使用中はキャスターのロックが確実にきいていることをたえず確認しながら使用して下さい。キャスターロックがきいていない場合、介助者が制御できなくなる恐れがあります。
- (3) 必ずキャスターのロックをかけて下さい。意図せぬ時に動き出すことがあります。
- (4) この商品は移動を目的にした商品ではありません、お子様を乗せたまま移動すると本体が壊れ落下することがあります。
- (5) 踏台や脚立のかわりに使用しないで下さい。転倒する恐れがあります。
- (6) 身体を乗り出す等して、安定性を損なうことのないようにして下さい。転倒する恐れがあります。
- (7) 本体の調整（高さや、幅調整など）する場合は確認しながら行って下さい、指を挟んだり、お子さまが落下することがあります
- (8) 直射日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブ等）の近くで使用しないで下さい。急に作動することや、熱により変色や変形する恐れがあります。
- (9) お子さま、介助者は修理改造をしないで下さい。破損等が生じた場合は必ず販売店へ修理交換をご相談下さい。
- (10) 本書の安全に関する指示事項には必ず従って下さい。
- (11) 介助者は、使用方法や取扱注意事項等が理解できるまで、ご使用にならないで下さい。
- (12) 医師・セラピストの指導のもと調整を行って下さい。

注意



この表示を無視して誤った取扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- (1) 本製品のお子さま最大体重は40kg以下（手荷物等の積載物を含む）です。40kg以上で使用されると、破損する恐れがあります。
- (2) 異常を発見したまま使わないで下さい。破損する恐れがあります。
- (3) 本書は製品とともに常に手元に保管し、必要に応じてくりかえし読んで下さい。
- (4) 製品の不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場合があります。不明な事柄については販売店まで問い合わせして下さい。
- (5) 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。
- (6) 本書中の図や写真は一部を省略したり抽象化した表現になっているものがあります。
- (7) 本書を紛失または損傷した場合は速やかに販売店までご連絡下さい。
- (8) 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁記載漏れなどに気付いた場合は販売店までご連絡下さい。
- (9) 本製品は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (10) 本書の全部または一部を無断で転載複製することを禁止します。

2. 構成部品と各部の名称

本製品は、下記の部品で基本構成されています。



3. 仕様

本製品の仕様は下記の通りです。

幅	幅	奥行
奥行	S 630	820 (mm)
材質	M 730	920 (mm)
調整機構	フレーム=スチール・メラミン焼付塗装(白) 足台=ブナ成形合板・ポリウレタン塗装(クリアー色)	
重量	φ50リフトロックキャスター(4輪)	
	S	M
	胸パッド高さ	620~850 800~1050 (mm)
	腰パッド高さ	340~700 340~900 (mm)
	膝パッド高さ	170~340 170~340 (mm)
	腰パッド幅	180~280 200~350 (mm)
	膝パッド幅	180~320 220~420 (mm)
	テーブル高さ	530~780 700~950 (mm)
	角度調整 本体90° ~70° 任意位置ハンドル固定式(角度調整ストッパー付) 足台(P=5°) ネジ固定式	
	S=16kg(オプション無しの場合) M=17kg(オプション無しの場合)	

●使用者最大体重：40Kg


4. 特徴と機能

本製品には以下の特徴があります。

1. キャスターのロック機構
キャスターをロックできます。……………操作方法 (P. 7) 参照
2. 折りたたみ機構
本体の折り畳みができます。……………調整方法 (P. 7) 参照
3. 組み立て方法
本体の組み立てができます。……………調整方法 (P. 7) 参照
4. 角度調整機構
本体角度の調整ができます。……………調整方法 (P. 8) 参照
5. テーブル高さ調整
テーブルの高さの調整ができます。……………調整方法 (P. 9) 参照
6. フットプレート角度調整
フットプレート角度の調整ができます。……………調整方法 (P. 10) 参照
7. 胸パッド調整
胸パッドの高さが調整できます。……………調整方法 (P. 10) 参照
8. 腰パッド調整
腰パッドの高さ、幅調整ができます。……………操作方法 (P. 11) 参照
9. 膝パッド調整
膝パッドの高さ・幅・回転調整ができます。……………操作方法 (P. 11) 参照

5. ご使用前の点検・準備

本製品をご購入いただいた場合は、ご使用前にまず下記のチェックを行って下さい。


注意  本製品に破損や異常がないか、ご使用前に必ず各部を点検して下さい。異常状態のまま、絶対に使用しないで下さい。

[ご使用前に必ず次の点検を行って下さい。]


- (1) キャスターのガタツキはないか
- (2) 各部品がゆるみやガタツキがなく取付けられているか
- (3) 各ベルト類に損傷や裂け等はないか
- (4) 縫製部分のほつれはないか
- (5) マジックテープ®の接着不良はないか
- (6) 各部にひび割れや欠け、変形等はないか
- (7) 各部のネジやカシメ部分に、ゆるみやガタツキはないか
- (8) その他の異常はないか

万一破損や異常を発生した場合はそのまま使用せず、必ず販売店にご連絡下さい。
異常状態のまま、絶対に使用しないで下さい。


6. キャスターのロック方法

注意  操作する場合は、指などを挟まないように注意して下さい。

(1) キャスター上部のストッパー先端を、押し込むと、固定します。

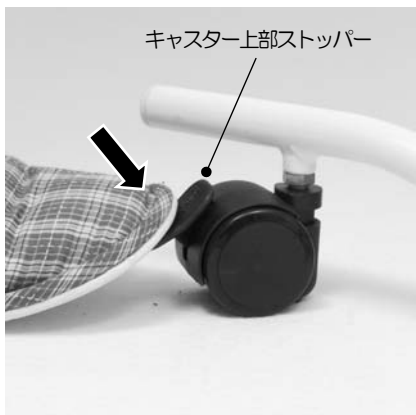


(2) キャスター上部のストッパーを、引き上げると、解除できます。

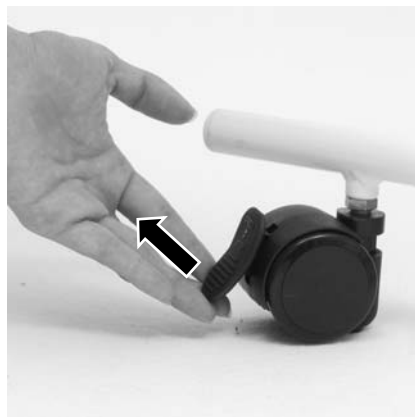

*キャスターは、車輪部分をやや浮かすようにしてロックする構造です、本体を押えながら操作すると、固定しにくくなります。その場合は本体から手を離して操作して下さい。


7. 折りたたみ・組み立て方法

警告  必ずお子さまを降ろしてから作業を行って下さい。落下してけがをする事があります。

1. 折りたたみ

- (1) キャスターのロックを外します。
- (2) スライド固定ノブをゆるめます。
- (3) テーブル前面と腰パッド下部を持ちます。
- (4) 足を後方パイプに乗せロックがかかるまで上に上げます。
- (5) ロック後スライド固定ノブを締めます。



スライド固定ノブ

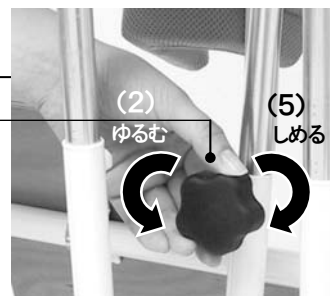

2. 組み立て

- (1) スライド固定ノブを緩めます。
- (2) テーブル前面を持ち、折りたたみロックを解除します。
- (3) テーブル前面と腰パッド部を持ち広げるようにして下に押し下ろします。
- (4) ベースパイプが当たった後、スライドパイプの角度記憶ストッパーが当たるところでノブを回し固定します。

スライド
固定ノブ

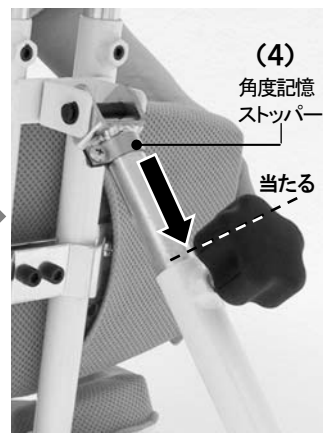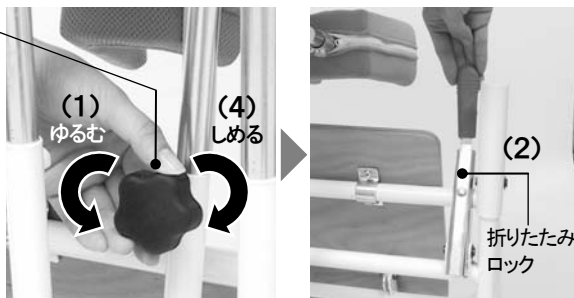

8. 角度調整方法



1. 角度調整

警告



本体を支えながら操作を行ってください。急に動き出したり、急に落下してけがをすることがあります。
医師・セラピストの指導のもと調整を行ってください。

- (1) 角度記憶ストッパーを使用する位置にセットしてください。
- (2) 胸パッドを持ちながらスライド固定ノブを緩めて下さい。
- (3) 胸パッドとテーブルスライドパイプを持ちながら角度を調整してください。
- (4) スライド固定ノブを締めます。

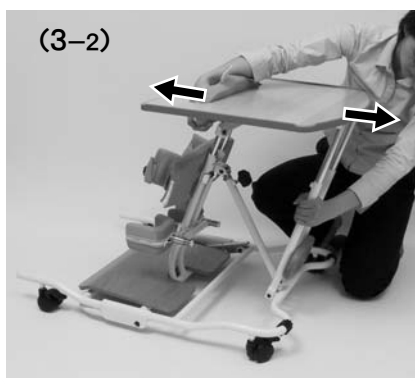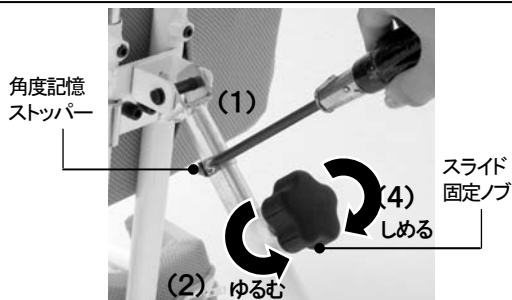



9. テーブル高さ調整方法

注意




テーブルを持ちながら、操作を行って下さい。(指などを挟まないように注意して下さい) 不意に傾くと、顔などに当たる事があります。
医師・セラピストの指導のもと調整を行って下さい。

- (1) テーブルを持ちながら、テーブルスライドパイプのネジを緩めてください。
- (2) 次に本体側のネジを緩めてください。
- (3) テーブル前面と側方を持ち高さ調整してください。
- (4) 使用位置でネジを固定してください。

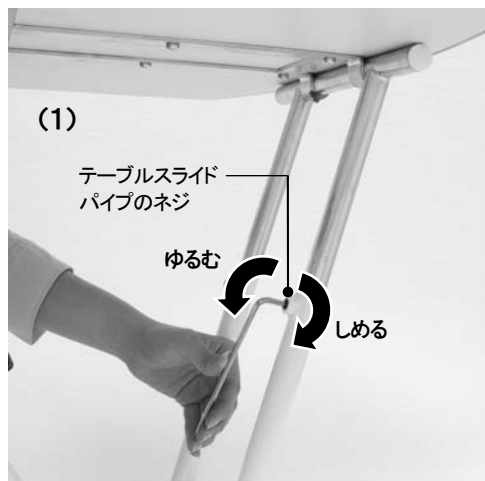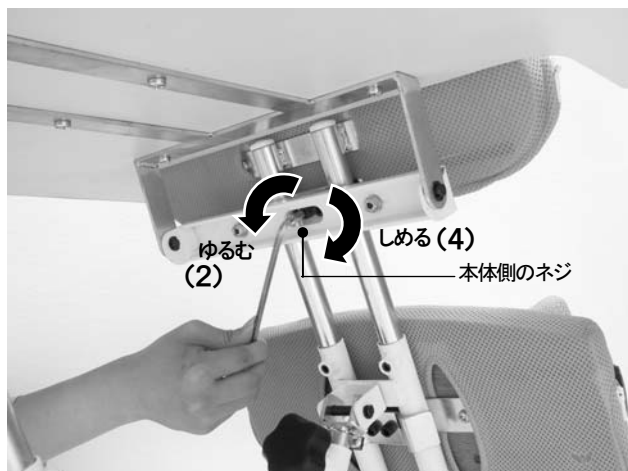


10. フットプレートの角度調整方法


注意  必ず、安全な場所で横に向け調整を行ってください。フレームの破損や手を挟む恐れがあります。医師・セラピストの指導のもと調整を行ってください。

- (1) 安全な場所で、下に傷が付かないようにシートを引き本体を倒してください。
- (2) 付属のLレンチ（大）とスパナまたはモンキーレンチを使用しネジを緩めてください。
- (3) 両方のネジを外し、使用角度にあわせネジを固定してください。

(1)




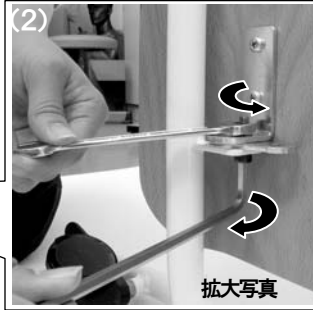


(3)

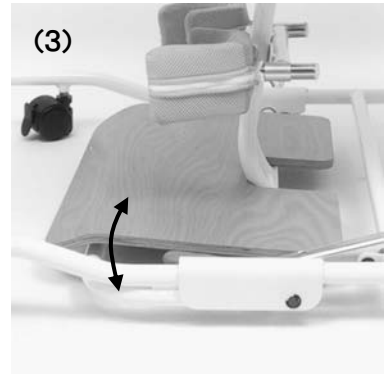


参考


金具の取り付けにより角度調整が5°ずつ調整できます。

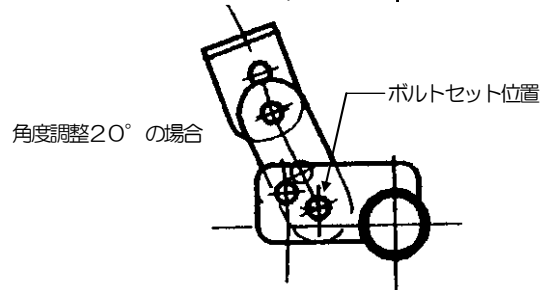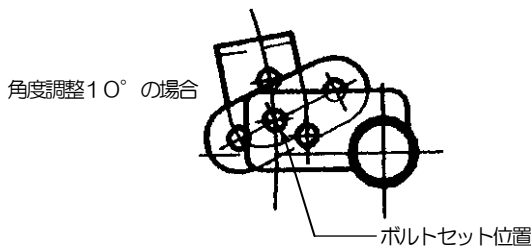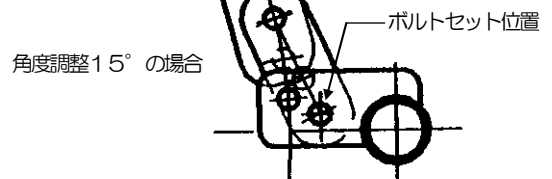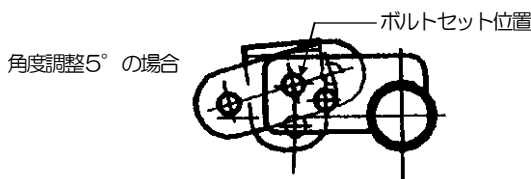


11. 胸パッドの調整方法

注意  胸パッドを持ちながら、操作を行ってください。不意に落ちたり、指を挟む事があります。

- (1) 胸パッドを持ちながらLレンチ（中）で、ネジを緩めます。
- (2) 胸パッド両端を持ち使用場所にセットします。
- (3) Lレンチにてネジを固定します。


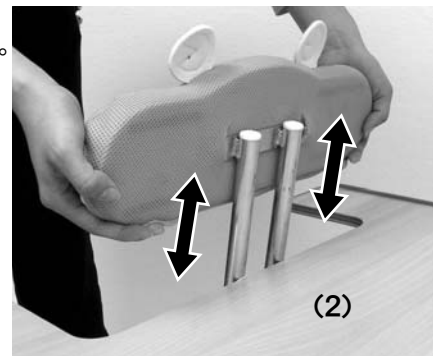


12. 腰パッド調整方法

注意  腰パッドを持ちながら操作を行って下さい。落下してけがをする事があります。
医師・セラピストの指導のもと調整を行って下さい。




1. 高さ調整

- (1) 片方の手で、腰パッドを持ちネジを緩めてください。
- (2) 両方の手で腰パッドを持ち高さを調整してください。
- (3) 使用位置にあわせたらネジを固定してください。

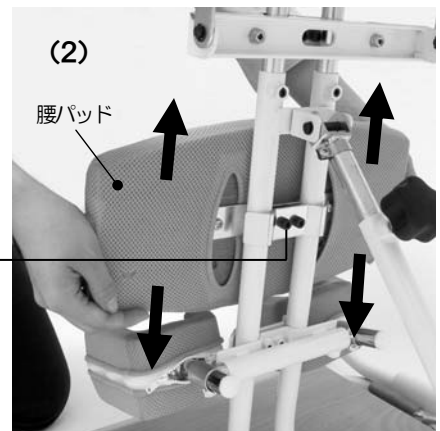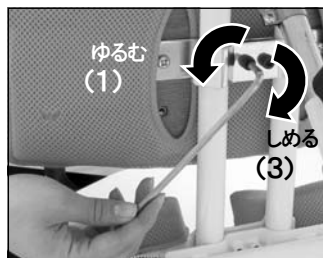


2. 幅調整

- (1) ファスナーを外します。
- (2) Lレンチ (中) でネジを緩めます。
- (3) 使用位置にパッドを移動しセットします。
- (4) ネジを固定しファスナーを閉めます。

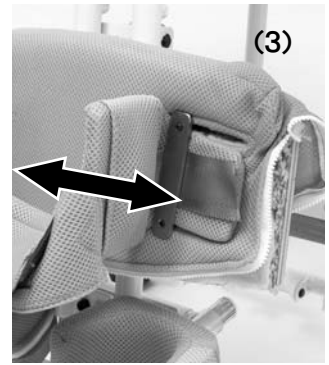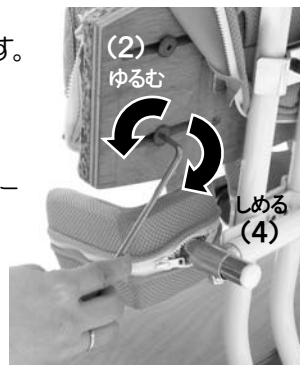
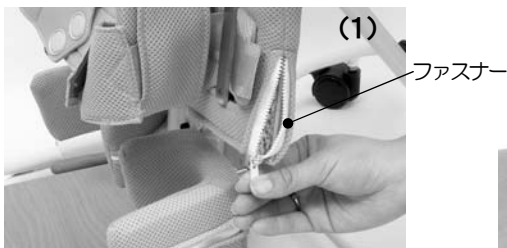


13. 膝パッド調整方法

注意  膝パッドを持ちながら操作を行って下さい。落下してけがをする事があります。
医師・セラピストの指導のもと調整を行って下さい。



1. 高さ調整

- (1) 膝パッドを持ちながら、ネジを緩めます。
- (2) パッドの両端を持ち高さを調整します。
- (3) 使用位置にセットしネジを固定します。

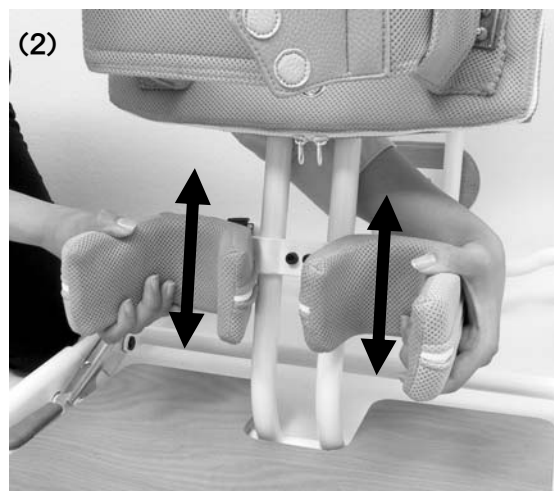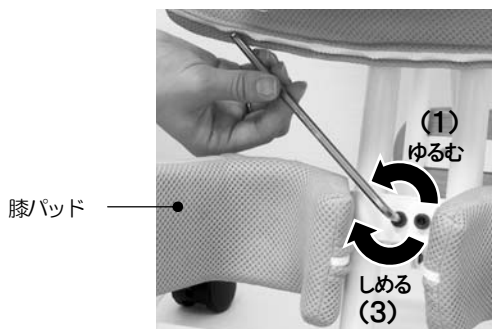



2. 幅調整

- (1) 受けパイプ裏のネジを緩めます。
- (2) パッドの端を持ち幅を調整します。
- (3) 使用位置にセットしネジを固定します。

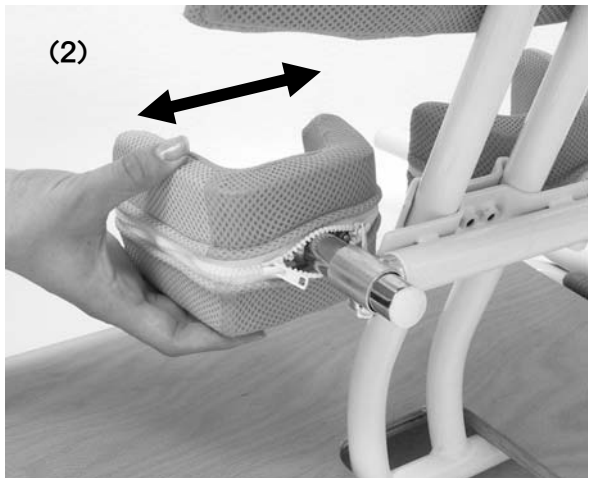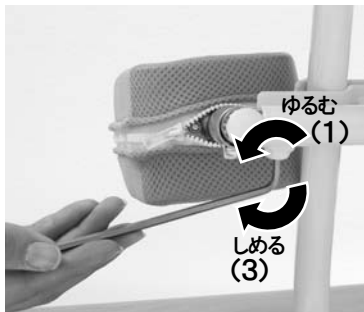


3. 回転調整

- (1) パイプ裏のネジを緩めます。
- (2) パッドの端を持ち、回転させます。
- (3) 使用位置にセットしネジを固定します。

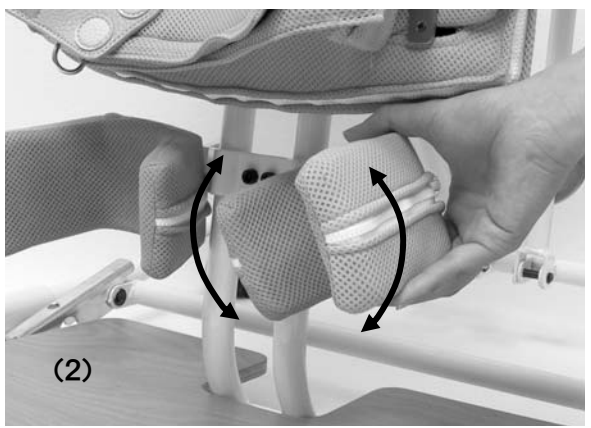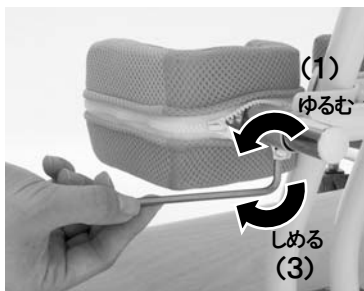

14. 安全な使い方

警告  取り扱いを誤ると使用中に不具合を生じたり、けがをすることがあります。

1. 各種ベルトとパッド

(腰ベルト、(胸ベルト)、腰パッド、胸パッド)

お子さまの姿勢安定及び落下防止の為、必ず装着して下さい。


*たるみがある場合は調整して下さい。

*医師・PT・OT・セラピストによる指導のもとで使いやすい高さに調整して下さい。
(付属のL型レンチにて、ネジを緩め調整して下さい)




2. キャスター

移動しない場合は、必ずキャスターをロックしておいて下さい (P. 7参照)

警告  このいすは、室内の使用を目的にしていますので、室外での使用はできません。室外で使用するとキャスターが壊れ、転倒してけがをすることがあります。

15. 日常のお手入れ

日常は下記のようにお手入れを行って、大切にお使い下さい。

注意  誤ったお手入れをしますと故障の原因になります。異常を発見された場合はそのまま使用せず、販売店に修理交換を申し出て下さい。

1. 木製部分 (フットレスト、テーブル)

- ・日常のお手入れは、乾いたやらかい布で、から拭きしてください。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・シンナーやアルコール系の溶剤は、絶対に使用しないでください。
- ・テーブルの上で、カッターなどを直接ご使用になることは避けてください。
- ・天板に熱いポットや湯飲みなどを直接置くことは避けて下さい。高温により、変形や変色をすることがあります。
- ・ゴム脚のついた商品を長時間置いておくと、表面に跡がのこりますので注意してください。
- ・かたい物 (機器、陶器、金属製の物) を引きずらないで下さい、表面を傷つけることがあります。

2. クッション部分 (胸パッド、腰パッド、膝パッド、各種パッド類)

- ・ほこりなどの汚れは、ブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- ・日常のお手入れは、乾いたやらかい布でから拭きしてください。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・シンナーやアルコール系の溶剤は、絶対に使用しないでください。
- ・飲み物をこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れがとれなくなります。

3. 金属部分 (フレーム部分、他)

- ・日常のお手入れは、乾いたやらかい布でから拭きしてください。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。

16. 保管と廃棄方法

水分や直射日光等をさけ、日陰で保管して下さい。
各自治体の指示にしたがい廃棄処分して下さい。

18. 保証規定

I. 保証の範囲



1. 保証期間中に品質の不完全に基づく故障を生じた場合は、この保証書により無料で修理致します。
2. 保証期間はお買い上げ後1年間です。
3. 但し、次の場合は保証期間中でも有料になります。
 - (a) 取り扱い過誤による故障
 - (b) 製品に改良を加えた場合の故障
 - (c) 天災、地震等による故障
 - (d) 消耗部品及び各部の劣化による故障・損傷
 - (e) 保証書にお買い上げ店名の記載や、捺印のない場合
 - (f) 保証書のご提示がない場合
4. 以上の保証は日本国内においてのみ有効です。
5. この保証によってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。

II. サービスのご用命

保証期間中、万一故障が生じた場合は、お買い上げ販売店へ保証書を添えてお申し出下さい。

III. ご注意

保証書の再発行は致しませんので大切に保管して下さい。

品質保証書			
本製品については上記記載の「保証規定」により正常な使用状態において、故障が生じた場合に限りお買い上げ日より「1年間」無償で修理致します。			
機種名		ハートリーフプロン	
お客様	ご住所		
	電話		
	お名前		
お買い上げ日	平成 年 月 日	保証期間	購入日より 1年
販売店 :	 川村義肢株式会社	担当者	
住所 : 〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目12番1号 TEL:072-875-8020 FAX:072-875-8041			

(販売元)

パシフィックサプライ株式会社

本社営業部	〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1 TEL 072 (875) 8011 FAX 072 (875) 8015
札幌営業所	〒003-0023 札幌市白石区南郷通り 14-北2-33 パブリックシャイン1F TEL 011 (862) 1136 FAX 011 (862) 1002
盛岡出張所 東京営業所	TEL 019 (661) 5407 FAX 019 (661) 5408 〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-12 グレイスビル 2F TEL 03 (3352) 0757 FAX 03 (3355) 3154
名古屋営業所	〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西 3-5 TEL 0568 (34) 2696 FAX 0568 (34) 2697
広島営業所	〒733-0035 広島市西区南観音 7-5-13 日イビル中田 1F TEL 082 (293) 6255 FAX 082 (293) 6299
福岡営業所	〒812-0054 福岡市東区馬出 2-2-12 TEL 092 (641) 8151 FAX 092 (641) 0444

<http://www.p-supply.co.jp/>