


移乗用具

**molift**<sup>®</sup>  
designed for life

# モーリフト スウィング・フロアー

## 取扱説明書

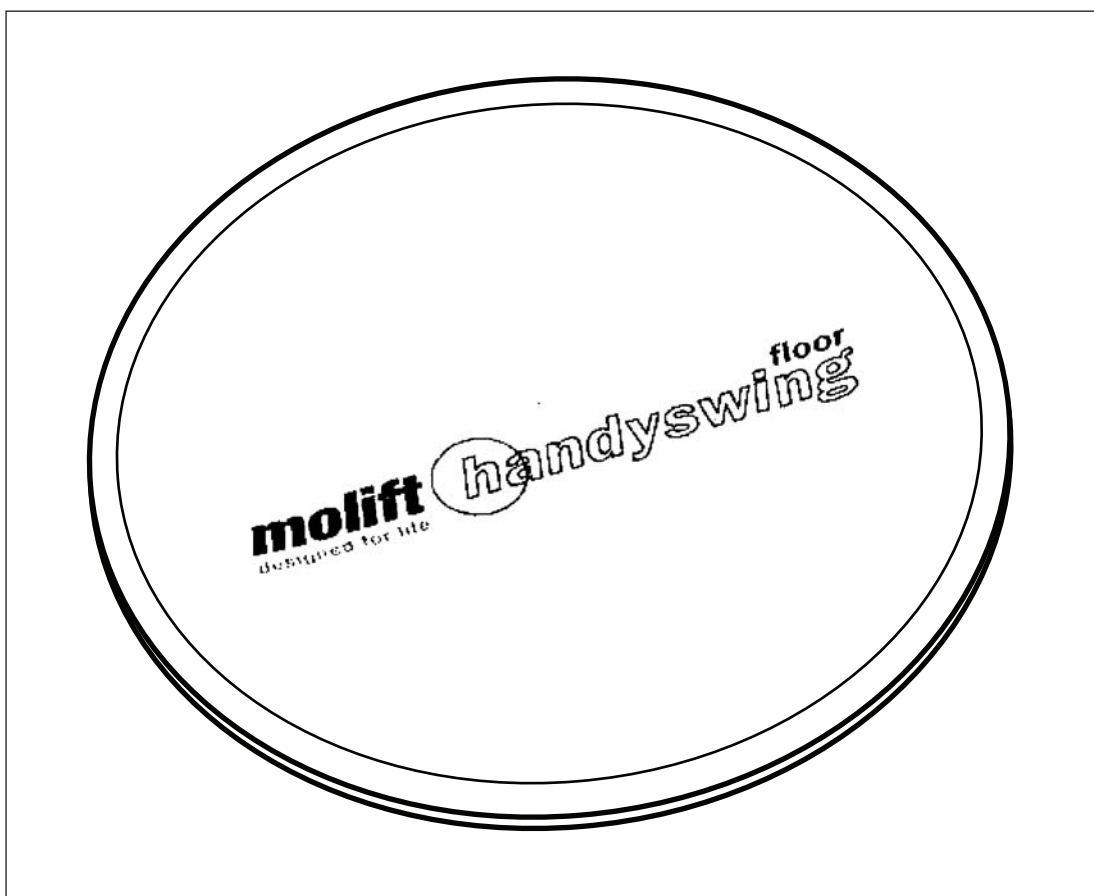

この度は『モーリフト スウィング・フロアー』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく読み、内容を理解してください。その後、大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。  
必ずご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認いただきますようお願いいたします。

**K** パシフィックサプライ株式会社

※Kマークは川村義肢株式会社の登録商標です。  
※製品に関するお問い合わせは本取扱説明書最終ページをご参照下さい。

転載複写厳禁


# もくじ

---

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1. 安全にご使用いただくために         | 3   |
| 2. 「モーリフト スウィング・フロアー」の特徴 | 3   |
| 3. 仕様                    | 3   |
| 4. 使用方法                  | 4・5 |
| 5. お手入れの方法               | 6   |
| 6. 別売品                   | 6・7 |
| 7. 廃棄方法                  | 8   |

## 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上本文をお読みください。

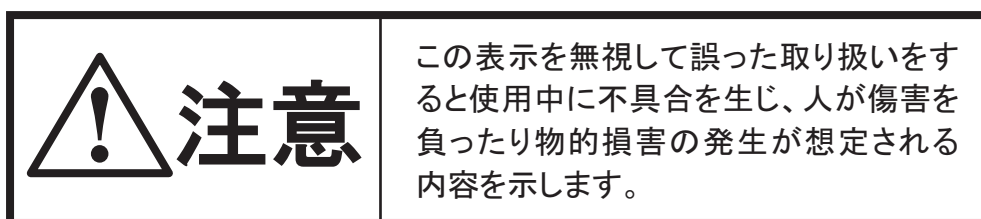

# 1. 安全にご使用いただくために

本書では、いろいろな絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方に加える恐れのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっていますので、内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



## 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 使用方法については専門家の指導を受けてください。
- ご使用前に特にお手入れのあとには、必ず以下の点を点検のうえご使用ください。
  - ・本体と本体の縁部分がほつれていたり破れていたりしないか？
  - ・本体に異物が刺さっていないか？
- 使用場所の凹凸・傾斜角度・接地面のすべりやすさ等に注意してください。
- 用途以外の使用は危険ですので、絶対になさらないでください。

# 2. 「モーリフト スウィング・フロアー」の特徴

上下2枚の円盤状のシートが中心軸を介してつながっており、軸を中心に水平回転する構造になっています。また、上下2枚のシートが接する面は滑りやすい布地で作られています。外力を加えない限り回転しないので、立ち上がりの際や立位時にグラグラしませんので、安心していただけます。

# 3. 仕様

|         |   |
|---------|---|
| サイズ     | 直径40cm  |
| 重量      | 450g  |
| 材質      | (縁) ポリプロピレン (外側) ポリ塩化ビニル<br>(内側) ナイロン (中材) ポリエステル |
| 製造国     | ノルウェー   |
| 最大使用者体重 | 140kg   |

※材質についてアレルギー反応の原因となる性質は報告されておりません。  
※商品仕様は予告なく変更する場合がございます。


# 4. 使用方法

※イラスト解説のため、ベッドのサイドレールは省略しております。

**!** **注意** 使用方法については専門家の指導を受けてください。


## 4-1 自力で移乗できる場合（車いすからベッドへの移乗）

1

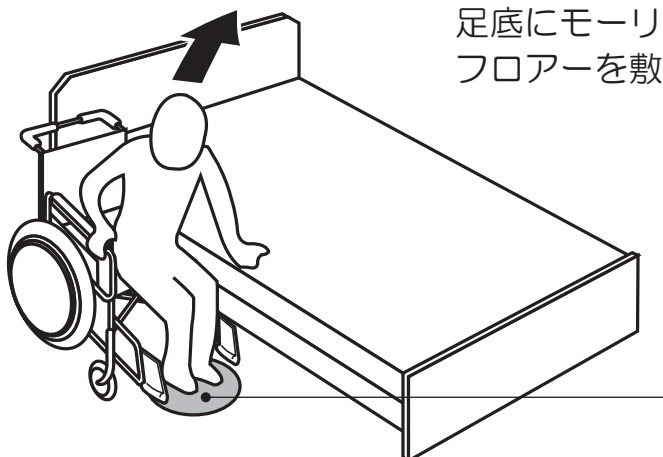


足底にモーリフト スウィング・フロアを敷きます。

2

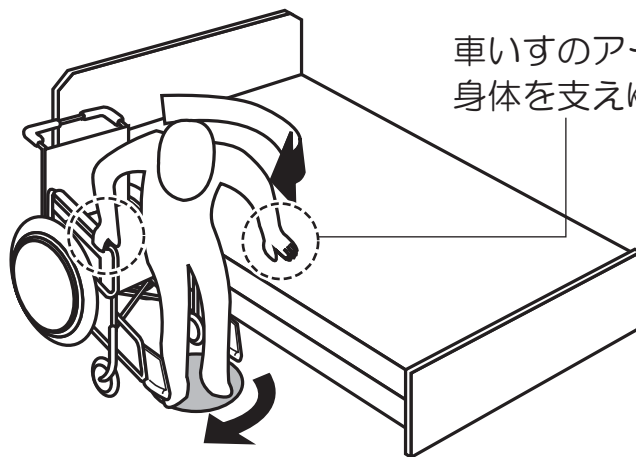

車いすのアーム部分やベッドで身体を支えゆっくりと回転します。

3

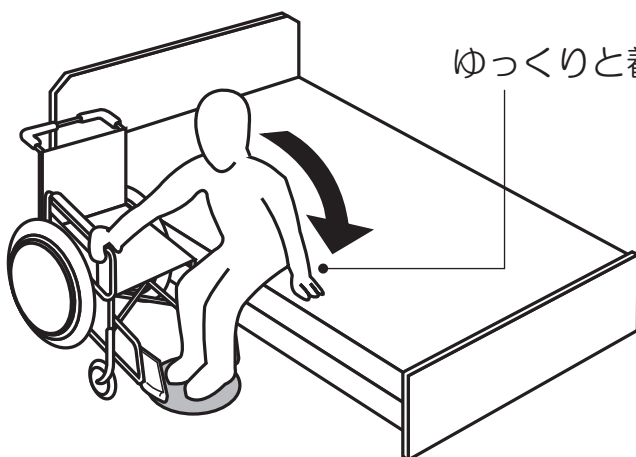

ゆっくりと着座します。

**!** **注意** 使用方法については専門家の指導を受けてください。

#### 4-2 自力で移乗できない場合（ベッドから車いすへの移乗）




対象者が端座位の状態の時に足底に敷き入れます。モーリフトサポート(別売品)を用い、立位動作の補助を行います。

※対象者の足がモーリフト スウィング・フローアの中央になるようにしてください。



立位が安定している事を確認した上で、モーリフト スウィング・フローアの縁を踏み、力を加えながら移動方向へ回転してください。この時、モーリフト サポート(別売品)のグリップをしっかりと握り、ゆっくり回転してください。

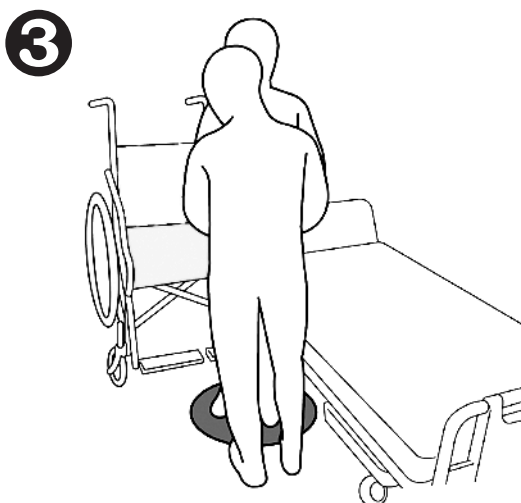

適切な位置まで回転した後、ゆっくりと着座して下さい。

※介助者がモーリフト サポート(別売品)などを併用し、より簡単に効率良く方向変換を行うことをおすすめいたします。介助者が装着することにより、対象者はしっかりとつかまることができ、安心感と安定性を得ることができます。また、対象者が装着することにより、介助者がしっかりと対象者を支持し安全な方向転換を行うことができます。

## 5. お手入れの方法

※水または石けんで手洗りするか、消毒用アルコールでお手入れしてください。

※130℃で15分の加圧殺菌(オートクレープ)が可能です。

※漂白剤のご使用はお避けください。

## 6. 別売品

### ●モーリフト マルチトランス

床から対象者を持ち上げる場合や  
ベッド上での体位変換、移乗などの  
際に使用する器具です。


■サイズ：幅420×長さ1000 (mm)

■材 質：表材/裏材：ナイロン

シート材：ポリエチレン

握り手：ポリプロピレン

¥38,640-(税込)

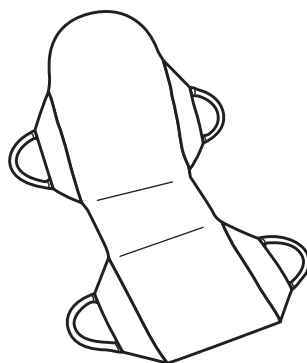



### ●モーリフト ボード

ベッド・車いす間などの移乗に使用  
します。表面素材に適切なすべりが  
あるため、対象者を持ち上げずに  
すべらせることで、移乗が安全で容  
易にできます。

■サイズ：幅330×長さ600×厚み5 (mm)

■材 質：ポリエチレン

¥26,775-(税込)

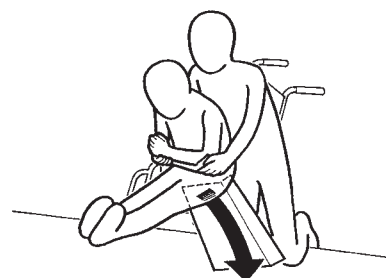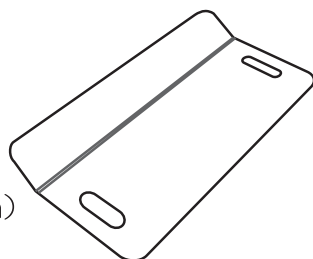

### ●モーリフト サポート

対象者や介助者の腰に装着して、  
移乗・移動動作を安全にするための  
器具です。


■サイズ：(大) 幅90×長さ750~1300 (mm)

：(小) 幅90×長さ550~1100 (mm)

■材 質：表材/裏材：ナイロン 中材：ポリエチレン

握り手：ポリプロピレン

¥23,100-(税込)

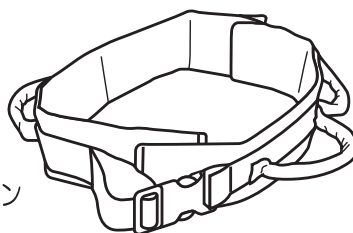

### ●介助用ヒップベルト


ベッドや車いす上の位置修正に使用  
します。

■サイズ：幅90~160×長さ1670×厚み4 (mm)

■材 質：表材：綿 ツイル

裏材：すべり止め材

¥5,145-(税込)

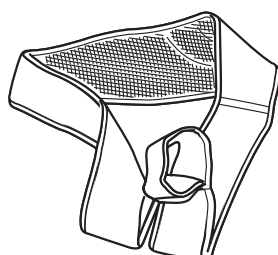


## ●ノルディックスライド(ショート)

円筒形に縫製され、内側の素材がすべりやすいので、キャタピラのようにすべらすことで、少ない力で移乗・体位変換が可能です。

■サイズ：幅600×長さ740 (mm)

■材 質：表材：ポリエステルニット／中綿ポリエステル綿  
内布：ナイロンポリウレタン特殊加工

¥16,800-(税込)

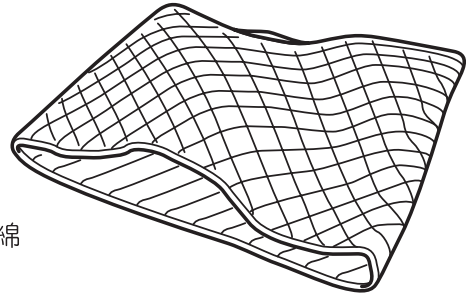


## ●キャリングバック

手さげ・ショルダー・リュックの3タイプになります。必要な補助器具が収納でき、持ち運びに便利です。

■サイズ：縦380×横610×幅125 (mm)

■材 質：ポリエステル

¥9,450-(税込)

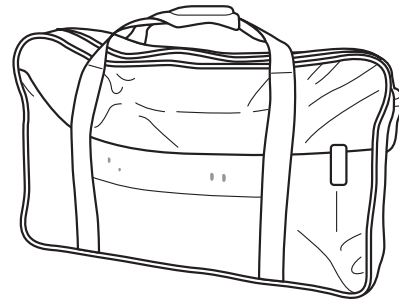



## ●モーリフト ハンディートランス

移乗する方の身体に接する側の表面（黒色メッシュ部分）は滑り止め素材を使用し、反対側（黒色部分）は摩擦を軽減する素材ですので、簡単に移動できます。

■サイズ：幅300×長さ400 (mm)

■材 質：表材／裏材：ナイロン  
中材：ポリエチレン  
握り手：ポリプロピレン

¥12,600-(税込)

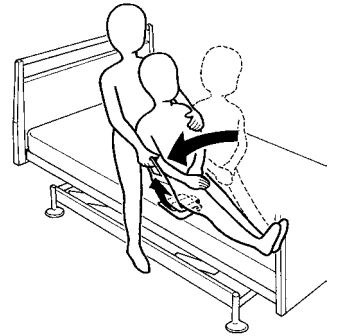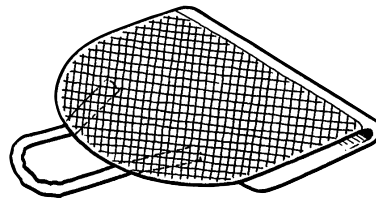

## ●モーリフト マキシトランス



摩擦を軽減し、少ない力で移乗・体位変換ができます。

ベッド・ストレッチャー間等の移乗に使用します。

■サイズ：幅600×長さ1900 (mm)

■材 質：外側／内側：ポリエステル  
中材：ポリエステル

¥85,050-(税込)

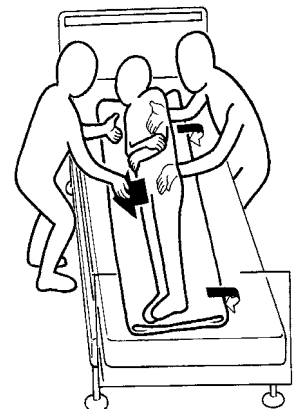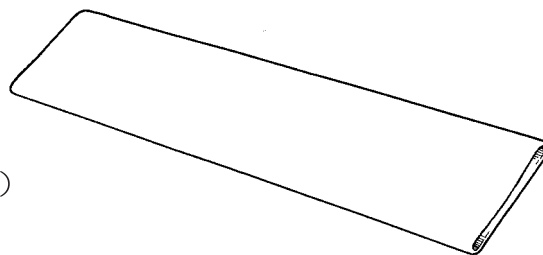

# 7. 廃棄方法

---

モーター・スイング・フロアを廃棄する際は、各自治体の規則に従ってください。

●発売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本社営業部 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1  
TEL 072 (875) 8011 FAX 072 (875) 8015

<http://www.p-supply.co.jp/>

販売店

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2008.03作成