

ICEROSS 下腿用シールインX

ICEROSS下腿用シールインXは最適な位置へシール部を動かすことができますので、断端が独特な形状の方や、敏感肌の方にも快適に装着していただけます。シールには布地が付いていますので、手の力が弱い方でも着脱しやすくなっています。また、“シームレスアナトミーコンファーマーリングファブリック”という、丈夫でありながらも柔軟性に優れた布地を導入しています。快適に軟部組織を制御し、膝窩部に不快感を与えずに膝上で伸縮します。

さらに、下腿用シールインXはユニティと互換性がありますので、スリーブ不要の最新のバキュームシステムともお使いいただけます。



ICEROSS 下腿用シールインX

対象者	
切断レベル	下腿切断
義足に加わる衝撃	弱い、中程度、強い

ライナー情報	
スタンダードサイズ	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40*
シールサイズ	20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41
厚み	3mm, 6mm

* サイズ40cmは3mm厚のみとなります。



シールイン



クッション



アクティブ
スッキング



カバー



シルケン加工

アイスロス下腿用シールインXライナー/シール

アイスロス下腿用シールインXには、スタンダードライナーにシール1つが含まれます。交換用のシールは別途ご注文をお願いいたします。

メーカー品番	製品名
I-4443XX	Iceross 下腿用シールインX - 3mm
I-4446XX	Iceross 下腿用シールインX - 6mm
I-SXT0XX	Iceross 下腿用シールインX 専用シール

ICEROSS 下腿用シールインX 専用シール

平成28年度 完成用部品価格 **¥42,600** (オズールI-SXT0-SIZE)

※シール部の追加または初期購入のシール部が破損した場合の交換用シール部です。

ライナー選択

- 採寸：皮膚の上から直接、断端末から4cm近位の周径
- 選択：採寸サイズ
(採寸したサイズと合うサイズがない場合、直下のサイズを選択してください)

シール選択

- 採寸：皮膚の上、MPTから6cm遠位の周径
- 選択：
 - 一まっすぐで球根型の断端の場合、1つ上のサイズをお選びください。
 - 円錐形の断端の場合、2つ上のサイズをお選びください。
 - 6mm厚のライナーを使用する場合、1つ上のサイズをお選びください。

注意：適切なサイズを決定するためにデモ機にてサイズをお試しされることをお勧めいたします。

シール部が移動できます

シールインXはシール部を動かすことができます。シール部には布地が取り付けられていますので、年配の方や手や体幹の力が弱い方でも着脱しやすくなっています。

最大限に快適性を高めるため、陥入や瘢痕(はんこん)組織、過敏な部分を避けて最適な位置にシールを設置してください。




継ぎ目のない、断端形状に沿う特殊開発の布地を採用

丈夫でありながら柔軟性にも優れているウェーブ機能を持つ布地を採用しています。快適に軟部組織を制御し、膝窩部をはさむことなく膝の上で伸縮します。

上品なツートーンの素材は前方と後方が分かりやすくなっています。

デルモゲルシリコン

アロエベラとワセリンが独自に配合され、最も柔らかいシリコンです。衛生的に強く皮膚を保護養生し、また皮膚組織の損傷のリスクを減らします。

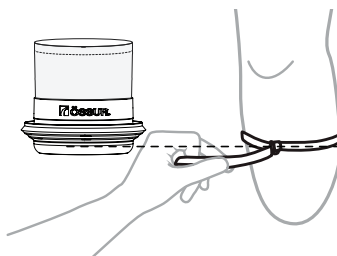

シールサイズ (cm) はシールを配置する位置の下方部を皮膚の上から直接採寸してお選びください。

ICEROSS 下腿用シールインX

平成28年度 完成用部品価格 **¥177,500**

(オズールI-4443/4446-SIZE)

※ライナー本体1本とシール部1つを含みます。