



1. Calf Cosmesis (以下、フォームカ
バー) を切る長さを決める。

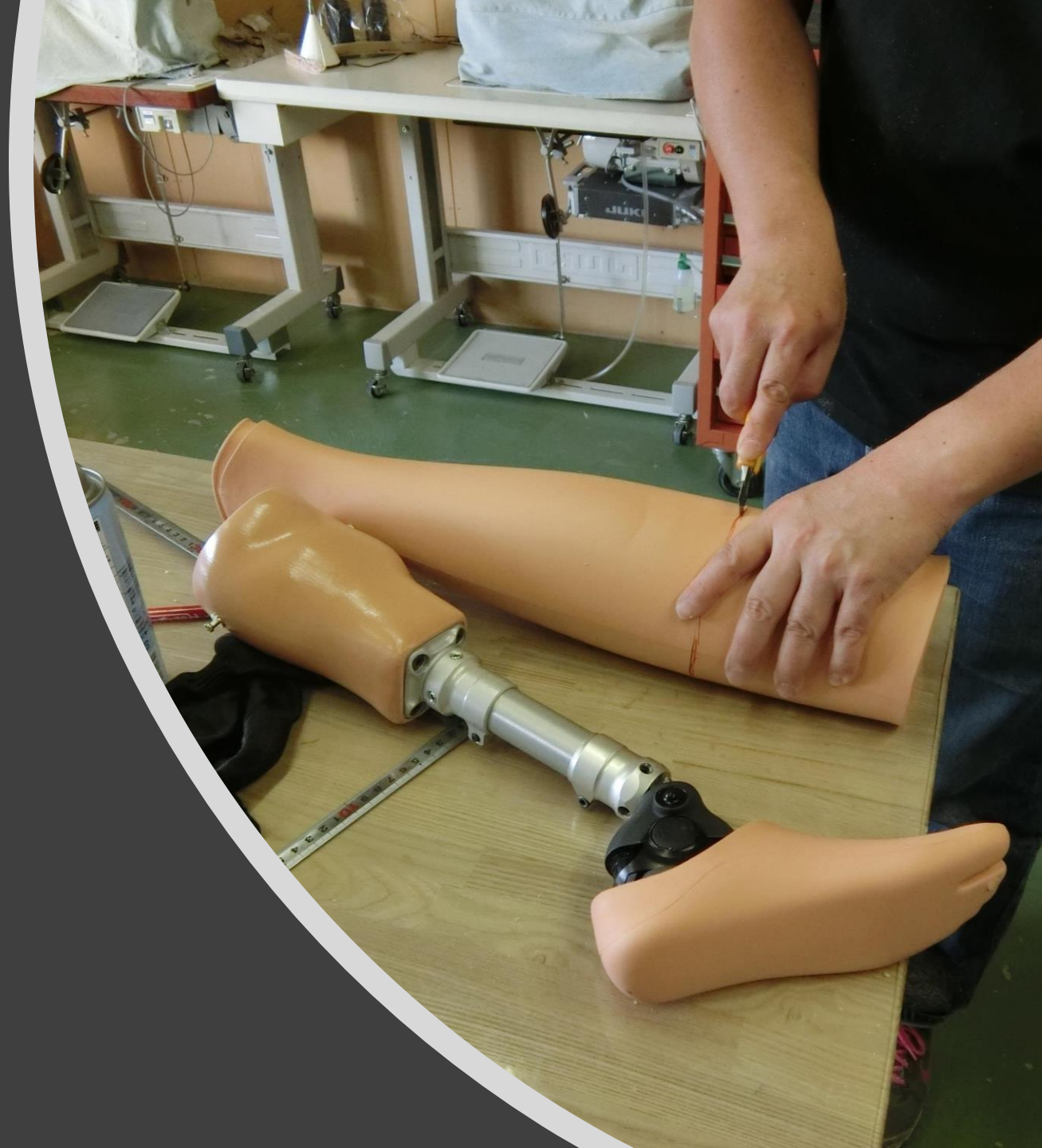

2. フォームカバーを切る。



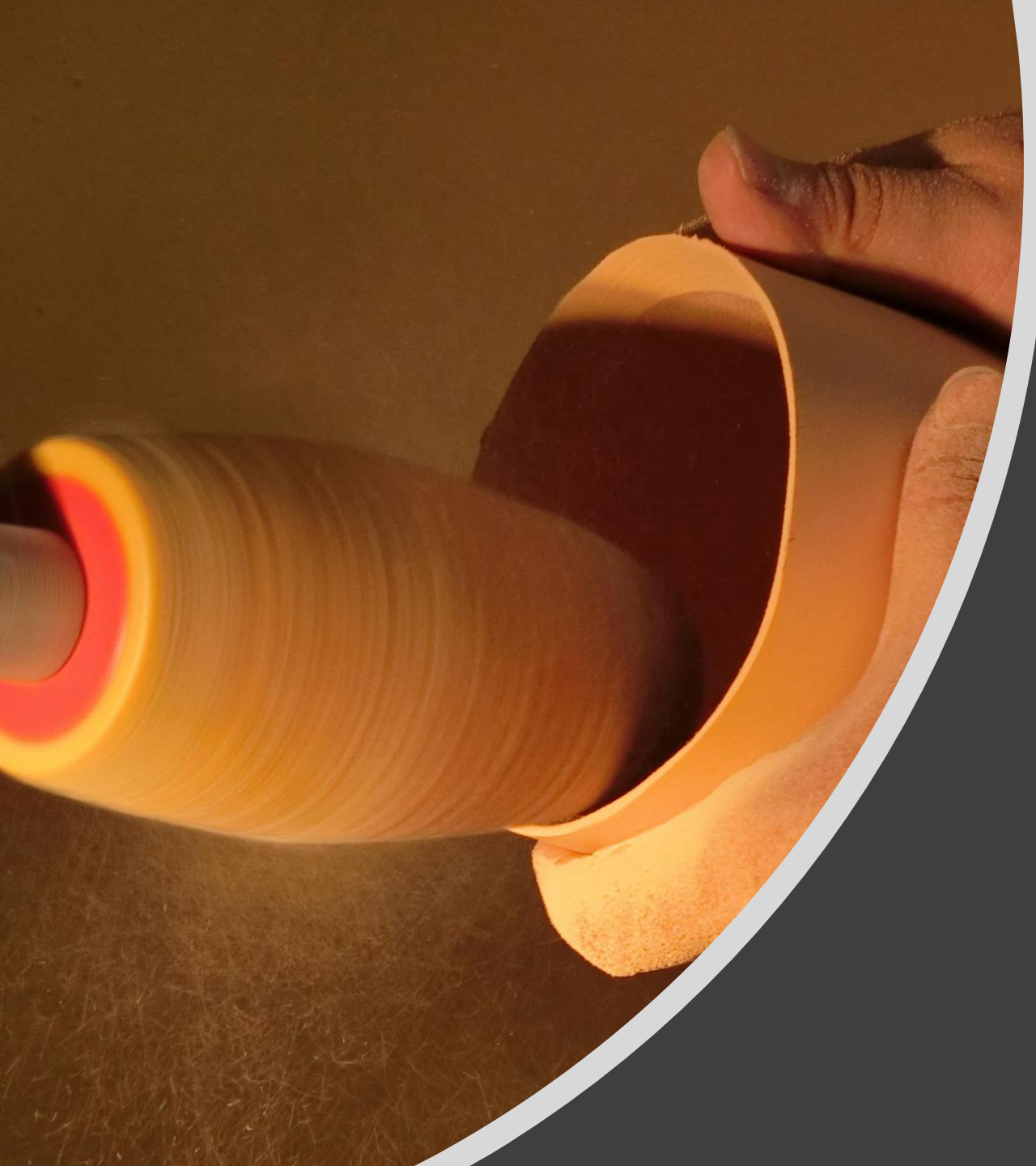

3. フォームカバーの内側近位をすく。



4. フォームカバー遠位をめくり返す。



5. プラスチックケーブルでスペクトラソックスを近位アダプターに固定する



6. シアノアクリレート系瞬間接着剤で点付けしていく。




7. ボンドをソケットおよびフォームカバー内側近位部分に塗る



8. 近位が空いている場合、ヒートガンで熱をかける。(340度で1~2分)



9. フォームカバーとソケットの境界部を幅の広い包帯等できつく巻く。

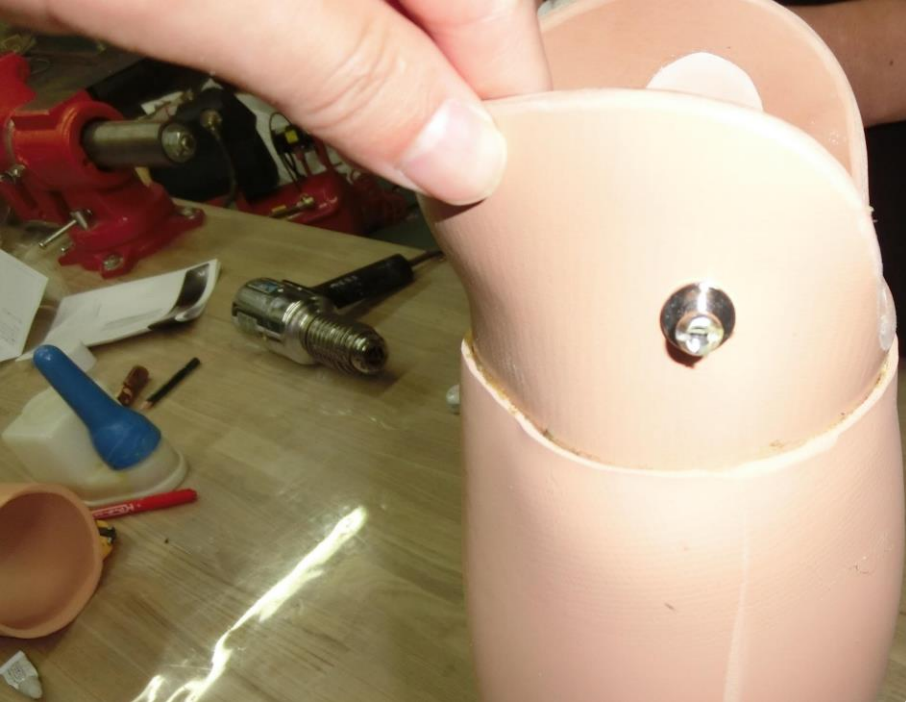



- 周径の太さが気になる場合は、フォームカバーを熱した後、幅広の包帯等で締めると、ある程度締まる。

- 足首周径を更に縮めたい場合、アキレス腱部分を熱した後、指で手技を入れるとある程度細くなる。この例では、22.8cm（加工前）から21.5cmに縮まった。





- 本フォームカバー（Calf Cosmesis; LSF024NL）に、2mm厚の外装ソックスを装着した状態
 - 足部；Pro-Flex LP Align L22
 - 義足長；40cm



- 本フォームカバー（Calf Cosmesis; LSF024NLに、2mm厚の外装ソックスを装着した状態

【周径メモ】

	加工前	加工後 + 外装ソックス装着
足首周径	22.8cm	22.6cm
最大下腿周径	36.5cm	36.5cm