



エタックストレッチャーボード

デモ機あり **immedia**  
a part of Etac


スライディングシートの中に芯材を組み合わせたユニークなボード

- 摩擦を軽減し、少ない力で移動・位置修正ができます。
- ベッド上での位置修正やベッド・ストレッチャー間の臥位移乗に使用します。
- カバーは交換可能です。
- 最大移動距離は20cmです。

品番	26180329 (本体+カバー)	26180330 (本体)	26180331 (カバー)
サイズ	幅50×長さ190cm		幅50×長さ170cm
最大使用者体重	300kg		本体準拠
材質	プラスタゾート+ナイロン	プラスタゾート	ナイロン
送料 A	<b>¥79,000</b>	<b>¥69,500</b>	<b>¥14,500</b> (税抜)

ベッドでの位置修正方法

① 位置修正前

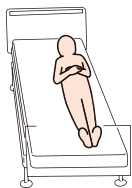


② 対象者を側臥位にし、本製品を対象者の下に敷き込みます。



③ 本製品を敷いた後、対象者を仰臥位に戻します。



④ 対象者を側方へ位置修正します。

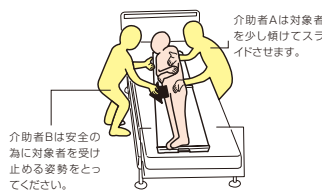

⑤ 対象者をスライドさせた後、対象者を少し傾けて本製品の側面を持って引き抜きます。




ベッドからストレッチャーへの移乗

① 上記②～④の要領で対象者をベッドの端に寄せます。その後、ストレッチャーをベッドに横付けします。



② 対象者をスライドさせた後、対象者を少し傾けて本製品の側面を持って引き抜きます。

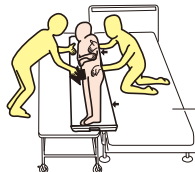



エタックマルチボード



エアーマット上でも沈み込みにくいスライディングツール

- エアーマットや柔らかいマットレス上でも位置修正や移動が容易にできます。
- 床から対象者を持ち上げる際にもお使いいただけます。

品番	26180313
サイズ	幅44×長さ100cm
重量	850g
最大使用者体重	150kg
材質	表材・裏材/ナイロン シート材/ポリエチレン 握り手/ポリエステル
JAN	4524491005406

送料 A **¥85,000** (税抜)

移乗用具

移乗用具


エタック

ベッド上での上方への位置修正

2人介助の場合




① 介助者は、それぞれの握り手を握って図のように、腰を捻らない作業姿勢で構えます。この時、脊柱は自然なカーブを保持し、膝は軽度屈曲位で体重は前側の足にかかっています。

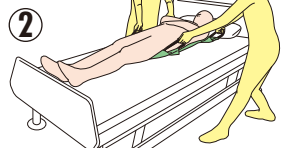


② 前側の足から、後側の足に体重を移動する事によって、対象者は、ゆっくりとベッドの上方に引き上げられます。(腕力で引っ張って対象者を動かそうとしないでください)

1人介助の場合

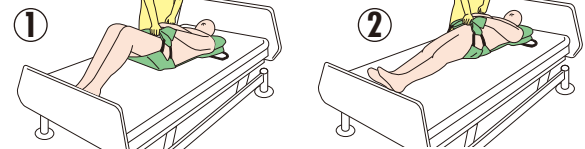

① 臀部側の握り手に、適切な布を通して、一つにまとめて握り手を作り、しっかりと握ります。もう一方の手で、手前の肩側の握り手を持ちます。

② 作業姿勢、作業技術は左図(2人介助の場合)と同じです。

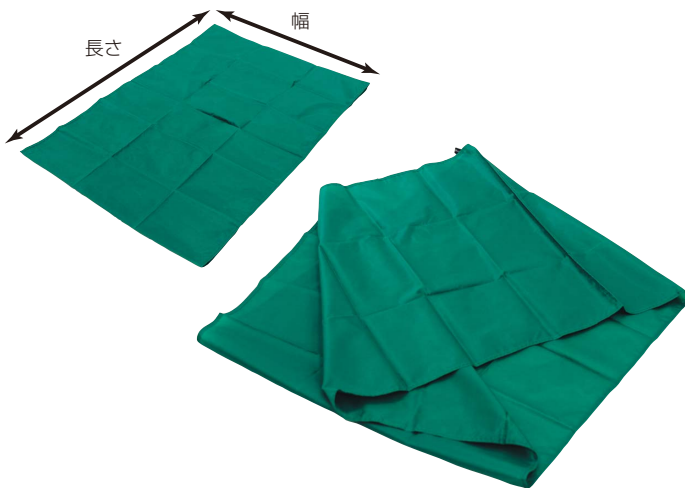

エタックスライディングシート



スライディングシート

- 摩擦を軽減し、少ない力で移動・位置修正ができます。
- ベッド上での位置修正やベッド・車椅子間の移乗に使用します。

品番	26180311	26180312
仕様	小	大
サイズ	幅72×長さ100cm	幅72×長さ130cm
重量	120g	170g
最大使用者体重	300kg	300kg
材質	ナイロン	
JAN	4524491005291	4524491005307

送料 A **¥11,000** **¥11,500** (税抜)

ベッド上での上方移動



デモ機あり 貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。送料の詳細はP182をご覧ください。

## 移乗用具

移乗用具

移乗用具

エタック




### エタックサテンシートベース(左右スライド)

デモ機あり immedia<sup>®</sup>  
a part of Etac

#### 左右方向の移動が楽に

- 左右方向にのみ滑りやすい低摩擦素材がベッド上での位置修正や寝返りを容易にします。
- ベッドシーツとしてマットレスへの常時装着が可能です。
- シートの両サイドは滑りにくい生地となっており、端座位が可能です。

#### 利用者自身による臥位から端座位への起き上がり

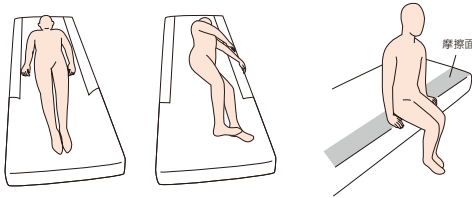

品番	26180317	26180318	26180319
品名	サテンシートベース(左右スライド)	サテンシートベース(左右スライド) L	サテンシートベース(左右スライド) Lボックス
サイズ	幅200×長さ140cm	幅200×長さ200cm	幅90×長さ200×マチ20cm
重量	510g	640g	580g
最大使用者体重	200kg		
材質	綿60%、ポリエステル40%(サテン低摩擦面/ポリエステル)		
JAN	4524491005314	4524491005321	4524491005338
送料 A	<b>¥13,500</b>	<b>¥15,000</b>	<b>¥20,500</b>


(税抜)

### エタックアシストシート

デモ機あり immedia<sup>®</sup>  
a part of Etac

#### 介助による対象者の左右方向の位置修正に

- エタックサテンシートベース(左右スライド)の上に重ねて使用します。
- アシストシートを持って介助すれば対象者の身体に直接触れず、優しい位置修正や体位変換が可能です。
- 身体の下に敷いたままお使いいただけます。

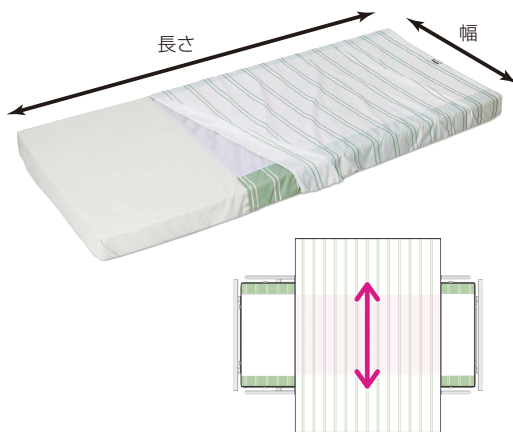

品番	26180320	26180321
品名	エタックアシストシート(小)	エタックアシストシート(大)
サイズ	幅200×長さ100cm	幅200×長さ140cm
重量	320g	330g
最大使用者体重	200kg	
材質	綿60%、ポリエステル40%	
JAN	4524491005345	4524491005352
送料 A	<b>¥8,000</b>	<b>¥8,000</b>

(税抜)

#### ベッド上での横移動(エタックサテンシートベース・エタックアシストシート使用)



① 本製品を引き出し、イラストのようにして介助者が持ちます。このときできるだけ対象者に近い位置で本製品を握るようにします(イラストでは握り方を示すために、介助者が対象者から離れています)。

② 介助者は両足を肩幅に開き、かつ前後に足を開いて立ちます。背筋を伸ばした状態で、下肢の筋力を使いながらゆっくり本製品を引いて対象者を移動させます。

#### 介助による体位交換(アシストシート)



① 上記の方法で左右どちらかに移動したあと、寝返る向きと反対側の本製品で対象者の身体を包み込みます。

② 介助者は本製品の端を握り、ゆっくり手前に引きます。このときできるだけ対象者に近い位置の本製品を握るようにします。


③ 体位変換器等を挿入します。体位変換器等を利用し、希望する体位を保持します。

### エタックサテンシートコンビ(上下スライド)

デモ機あり immedia<sup>®</sup>  
a part of Etac

#### 介助による対象者の位置修正に

- エタックサテンシートベース(左右スライド)の上に重ねて使用します。
- サテンシートコンビを持って介助すれば、上下左右いずれの方向へも位置修正が可能です。
- エタックアシストシートのように体位変換にもお使いいただけます。
- 身体の下に敷いたままお使いいただけます。

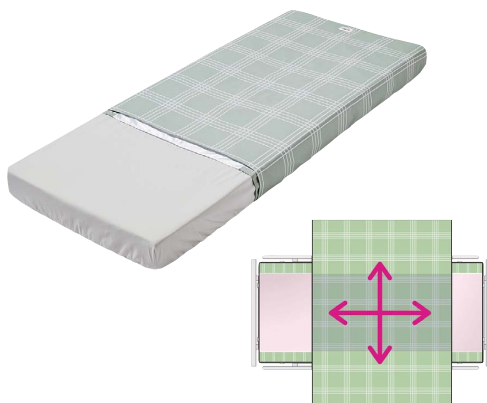

品番	26180322
サイズ	幅200×長さ140cm
重量	450g
最大使用者体重	200kg
材質	綿60%、ポリエステル40%(サテン低摩擦面/ポリエステル)
JAN	4524491005369
送料 A	<b>¥21,000</b> (税抜)