

感覚統合器具 (オーシャンスイング用抗菌カバー / サンライトスイング用抗菌カバー)

取扱説明書

この度は『オーシャンスイング用抗菌カバー/サンライトスイング用抗菌カバー』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本取扱説明書は器具を安心してご利用いただけるよう、わかりやすく説明してあります。

ご利用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。

また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

取り付け手順

1. カバーを広げ、カバーの表面が床側になるように置いてください。

※裏面(ラベルがある側)が上に向きます。

2. スイング本体の裏面を上に向けて、カバーの上に置きます。

※カバーはロープと重ならないように位置を調整してください。


3. カバーの①部を折り曲げて、スイング本体の上に置いてください。

4. カバーの②部を折り曲げて、スイング本体の上に置き、面ファスナーで①部と固定してください。

※面ファスナーはしっかり押さえて固定してください。

5. カバーの③部を折り曲げて、スイング本体の上に置き、面ファスナーで①部と固定してください。


※面ファスナーはしっかり押さえて固定してください。

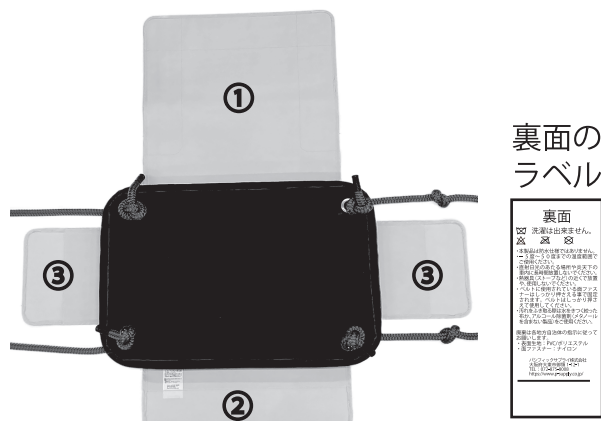

裏面のラベル



面ファスナーで固定

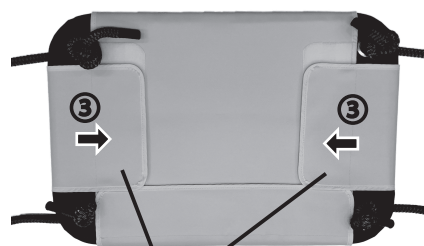

面ファスナーで固定

6. 各部に緩みや浮きがないか確認してください。
緩みや浮きがある場合は、カバーを引っ張る等して調整してください。



警告

以下を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不都合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ・面ファスナーはしっかり押さえる事で固定されます。面ファスナーをしっかり押さえて使用してください。
- ・面ファスナーを固定していない状態で使用しないでください。
- ・スイング本体とカバーの間に物や体を入れて使用しないでください。
- ・靴下を履いて使用しないでください。
- ・カバーの端を掴んで使用しないでください。
- ・汗等で濡れた場合は随時ふき取ってください。
- ・転落時のけがを防止するために、スイング本体の下やその周辺には必ずマットやクッション性の高い物を敷いてください。セラピーマットの上にエアレックスマットを重ねて敷いて使用されることを推奨します。

注意

以下を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不都合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ・本製品は洗濯できません。
- ・本製品は防水仕様ではありません。
- ・-5度～50度までの温度範囲でご使用ください。
- ・直射日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置しないでください。
- ・熱器具(ストーブなど)の近くで放置や、使用しないでください。
- ・体があたる箇所に面ファスナーが露出していないことを確認して使用してください。

日常の保守点検

下記の日常点検を行ってください。また、保守点検を行っていない場合は使用しないでください。

- ・カバー表面に穴が開いていないか。
- ・本体とカバーの間に隙間はないか。
- ・面ファスナーは固定されているか。
- ・面ファスナーに埃が溜まっていないか。

お手入れ方法

汚れをふき取る際は水をきつく絞った布か、アルコール除菌剤(メタノールを含まない製品)をご使用ください。

廃棄方法

廃棄は各地方自治体の指示に従ってお願いします。

- ・表面生地：PVC/ポリエステル
- ・面ファスナー：ナイロン

品質保証内容

(1)保証期間はご購入日から1年間です。保証期間内に発生した故障については無償交換いたします。(2)保証の対象となる部分とは本製品一式です。ただし、擦り切れやへたり等の各部の劣化による故障・損傷は除きます。(3)無償交換にはご購入の際の納品書の提出を要します。(4)次の場合には保証できません。①納品書を紛失された場合 ②誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造による故障・損傷 ③火災、地震などの天災地変による故障・損傷 ④納品書にお買い上げ日、お客様、販売店の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合 ⑤ご購入後の輸送・移動・落下などによる故障・損傷 (5)保証対象とならない故障および損傷についても、弊社の責任に帰する場合は保証期間に関わらず無償交換いたします。(6)その他 ①保証は日本国内においてのみ有効です。

取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。

必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認いただきますようお願いいたします。

取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の内容の全て、または一部を複製することはお断りいたします。