

チューブスイングの取扱注意事項説明書

本書は「チューブスイング」の取り扱いにご注意いただきたい点を記載しております。
内容をご確認の上、「感覚統合器具(スイングシリーズ)」の取扱説明書と一緒に保管してください。



<保管について>

- オゾン発生装置の近くで保管しないでください。
※オゾン濃度が高い環境下では保管をしないでください。
※材料の劣化につながり、ひび割れが発生する可能性があります。
- 直射日光が当たる場所で保管しないでください。
※材料の劣化につながり、ひび割れが発生する可能性があります。
- 力がかかる状態(重ねた状態、曲げた状態、引っ張った状態)では保管しないでください。
※製品が変形し、正しく使用できない可能性があります。

<使用について>

- オゾン発生装置の近くで使用しないでください。
- ひび割れが発生している場合は本製品を使用しないでください。
※製品の破裂につながる可能性があります。
- 製品が変形している状態で使用しないでください。
※ご使用前に真円であることをご確認ください。
※製品の破裂につながる可能性があります。
- 床に置いた状態で使用しないでください。
※製品の摩耗につながります。



ひび割れの破損例



変形例(全体のふくらみ)

< 販売元 >

k パシフィックサプライ株式会社

本社 / 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL 072(875)8008 FAX 072(875)8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

※取扱注意事項説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱注意事項説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。