



COBI REHAB®
The Positioning Company

LASAL

デンタルクッション ガイドブック



デンタルクッションは、歯科診療台用として、専用に開発されたポジショニング用クッションです。
診療中の不安や、診療台上で姿勢が崩れやすい方、不随意運動や不安定性がある方に、適しています。

k Pacific Supply

1. クッションの特長

- 患者様のお身体と診療台に対して、簡単に調整することができます
- 洗濯・消毒が可能なカバーを使用しています
- 頭部・頸部・腕部・脚部・背部それぞれをサポートするクッションがあります
- 不随意運動を最小限に抑えることができます
- スウェーデンの歯科衛生士と共同で開発されました

2. 取扱い方法

	洗 濯	乾 燥
クッションカバー	<ul style="list-style-type: none">・洗濯機の使用可(90℃まで)・消毒用エタノール、次亜塩素酸水の使用可能	<ul style="list-style-type: none">・タンブル乾燥可能・アイロン使用不可
本 体	<ul style="list-style-type: none">・中性洗剤または消毒用エタノールを含ませた清潔なガーゼなどで表面を拭いてください・水洗い/ドライクリーニング/オートクレープ洗浄はすべて使用不可	<ul style="list-style-type: none">・タンブル乾燥不可・アイロン使用不可



3. 材質

本体カバー	PU、ポリエステル
本体内部	極小ポリスチレンビーズ
クッションカバー	PU、ポリエステル

*いずれのカバーも抗バクテリア加工が施されています

*商品仕様は予告なく変更する場合がございます

4. クッションの種類

<p>品番：29341101</p> <p>デンタルネッククッション</p> 	<p>品番：29341102</p> <p>デンタルネッククッションU型</p> 	<p>品番：29341103</p> <p>デンタルヘッドサポート クッション アシンメトリ</p> 
<p>品番：29341104</p> <p>デンタルヘッドサポート クッション シンメトリ</p> 	<p>品番：29341105</p> <p>デンタルクレセントクッション</p> 	<p>品番：29341106</p> <p>デンタルセーフガード クッション Adult</p> 
<p>品番：29341107</p> <p>デンタルセーフガード クッション Child</p> 	<p>品番：29341108</p> <p>デンタルフットクッション</p> 	<p>品番：29341109</p> <p>デンタルレッグクッション リラックス Adult</p> 
<p>品番：29341110</p> <p>デンタルレッグクッション リラックス Child</p> 	<p>品番：29341111</p> <p>デンタルレッグクッション Adult</p> 	<p>品番：29341112</p> <p>デンタルシートクッション Child</p> 

5. 各クッションの使い方

(★はデモ機の貸出し可能です)

1 | ネッククッション

- ★ 首の下に入れて、使用します。
両サイドの膨らみで、左右の安定性をはかります。

品番 29341101

品名 デンタルネッククッション



2 | ネッククッション U 型

- ★ 首の下に入れて使用します。
全体の安定性をはかります。

品番 29341102

品名 デンタルネッククッション U 型



3 | ヘッドサポートクッション アシンメトリ

- 頭部の下に入れて使用します。
頭部全体の高さを補ったり、左右で頭部のバランスを
変える必要がある方向け。
*左右非対称です

品番 29341103

品名 デンタルヘッドサポートクッションアシンメトリ



4 | ヘッドサポートクッション シンメトリ

- 頭部の下に入れて使用します。
頭部全体の高さを補ったり、頭部の安定性をはかります。
*左右対称です

品番 29341104

品名 デンタルヘッドサポートクッションシンメトリ



(★はデモ機の貸出し可能です)

5 クレセントクッション

一番小さなクッションです。
ネッククッションやネッククッション U 型・
ヘッドサポートクッション各種と組合せることが多いです。

品番 29341105

品名 デンタルクレセントクッション



6 ★ セーフガーダークッション Adult

クッションの狭いところを首の下から肩にかけて
入れてください。そこから上腕・前腕を乗せて
身体の前で面ファスナーで止めてください。

品番 29341106

品名 デンタルセーフガーダークッション Adult



7 セーフガーダークッション Child

子どもの上半身を包み込み、リラックス感を与えます。
首から指先までクッションに乗せることができるので
腕が首元に行ったり、下に落下することを防げます。

品番 29341107

品名 デンタルセーフガーダークッション Child




8 ★ レッグクッションリラックス Adult

T字型のクッションで、下肢全体を支えます。縦棒部分を
膝下に入れて、臀部の方に引き寄せると股関節と身体の
緊張・腰痛を軽減することができます。
下肢の拘縮がある方におススメです。
付属のベルトを使用することで、クッションが診療台から
ずり落ちるのを防ぐことができます。

品番 29341109

品名 デンタルレッグクッションリラックス Adult

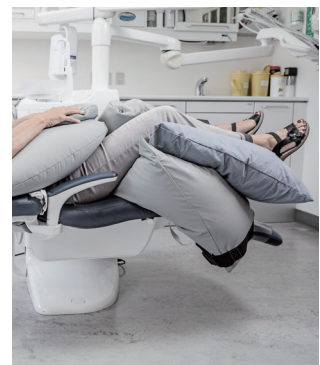

(★はデモ機の貸出し可能です)

9 レッグクッションリラックス Child

T字型のクッションで、下肢全体を支えます。
縦棒部分を膝下に入れて、臀部の方に引き寄せると
股関節と身体の緊張・腰痛を軽減することができます。
下肢の拘縮がある方におススメです。



- 品番 29341110
品名 デンタルレッグクッションリラックス Child

10 レッグクッション Adult

★ レッグクッションリラックス Adult の上に置いて使用します。
下肢・足部が外側に落ちるのを防ぎます。
レッグクッションリラックス Adult と面ファスナーで
固定することができます。



- 品番 29341111
品名 デンタルレッグクッション Adult

11 フットクッション

下腿の下に置いて使用します。
レッグクッションシリーズと組み合わせて使用することが
多いです。



- 品番 29341108
品名 デンタルフットクッション

12 シートクッション Child

診療台よりも身体が小さなお子さまに使用します。
座面と背もたれを安定させることで、背中全体を快適に
サポートします。



- 品番 29341112
品名 デンタルシートクッション Child




製品情報はこちら

デンタルクッション



 パシフィックサプライ株式会社

〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1  <https://www.p-supply.co.jp/>