

2023年7月10日
パシフィックサプライ株式会社
新規事業開発推進部 出口容子

【重要】介護用リフト「モーリフト」に関する注意喚起

モーリフトに関しまして、使用から半年の機体において「車輪を固定するネジが抜けて本体が傾き危険な状態になった」とのご報告が寄せられております。この問題に関しましてエタック社と情報を共有し、原因追及を進めておりますが、先にご使用中における日常点検時の注意点について下記の通りご案内いたします。

記

1. 対象商品：床走行リフト 全機種（写真はスマート150）
2. 発生事項：後輪を止めるネジが緩み、リフト本体が傾く
3. お願い：

日常点検の際、車輪を固定するネジと本体との間にすきまが無いことをご確認ください。



正常時：ネジとベースの間にすきまが無い



異常時：ネジとベースの間にすきまができる



本体を少し浮かして、車輪を動かすとカタカタと動きます
https://drive.google.com/file/d/1chHC5oKmTuuJ8dJo4vvnBmSB_Ykxzp2c/view?usp=sharing



万一、すきまを確認できた際は、工具を使っての締め付けが必要になります。下記までご連絡ください。

<連絡先>

パシフィックサプライ株式会社 新規事業開発推進部 出口容子

電話番号 072-875-8013

なお、本件による事故の報告は入っておりません。

→裏面の取扱説明書も参照ください

各製品の取扱説明書に記載しております日々の点検表も合わせてご参照くださいませ。

また、お気づきの点がございましたら、何なりと弊社担当営業までご連絡・ご相談くださいますよう、お願い申し上げます。お手数をおかけいたしますが何卒よろしくお願い申し上げます。

下記、取扱説明書より抜粋

- 下記の項目について毎日あるいは月1回程度、必ず点検を行ってください。

頻度	点検項目	点検内容
毎日	バッテリーの充電	充電ランプがオレンジ色に光っていないか確認してください
毎日	スリングの劣化	スリングに破れ、縫い目のほつれ等がないかを確認してください
随時/月1回	汚れ	操作ハンドルやコントローラー等の汚れをふき取ってください
月1回	コントローラーの接続	コントローラーの接続部分がきちんと接続されているか確認してください
月1回	本体、充電器の劣化	コントローラー、アクチュエーター、充電器のケーブルに傷などがないか確認してください
月1回	アームの動き	アームを上下に動かして正常に動いているか、変な音がしないかなどを確認してください
月1回	キャスターの動き	キャスターから髪の毛やごみを取り除き、動きが正常か確認してください

以上