

## ●ブックウーム

### 開発経緯&製品について

特殊教育において、実際の本に触れることが重要であると言われてはいますが、障害を持つ子ども達にとって「読書」はコンピュータに頼るケースが多いのが現状です。しかし、コンピュータでの「読書」は、実際の本に触れて読むこととは全く印象が異なり、またコンピュータ「読書」ソフトには、子ども達に人気のある一般的な本はあまり多くないのが実状です。

エーブルネット社は、「実際の本を読む経験」の価値を重要と捉え、すべての子ども達が実際に本に触れ、「読む」経験ができる支援機器、「ブックウーム」を開発しました。ブックウーム(Book Worm)は「本の虫」という意味です。ブックウームは、子ども達が実際の本に触れ、読むことを支援し、子ども達の自信や意欲を育てます。



品 番：0971  
 総録音時間：8分間  
 電 源：単3電池4本  
 (付属しません)  
 ￥39,165(税込)

### 特徴・使用方法

- 実際の本を読む経験ができるVOCAです。
- 本の内容を見開きページ毎にブックウームの各キーに録音・再生します。
  1. ページの内容をブックウームに録音する前に、録音するキー(緑と紫)と同色のシール(付属)を本の右側ページのキーと同じ高さに貼ります。
  2. 見開きページの内容を各キーへ録音します。
  3. 子ども達はページをめくり、各ページの内容が録音されているキーを押して、内容を再生します(再生は外部スイッチでも可能です)。

## ●アイトーク

### 開発経緯&製品について

子ども達が「選択」の機会を持つ方法について、これまで長年に渡り、教育現場において、取り組みが行われてきました。その方法の1つとして、スイッチやコミュニケーションエイドを2つ並べて取り付けて、使用するケースがありましたが、コスト面や取付けの際の不便さ等の問題がありました。そういった問題を解決するために開発されたのがアイトークです。

1つの製品でありながら「選択」の機会に取り組む方法として最適です。また、コミュニケーションの広がりも可能です。コスト面では同様機能を持つ製品を2つ購入するよりも大幅に抑えることができ、またマウンティングシステムへの取り付けも簡単に行えるようになりました。



### 特 徴

- 2つのメッセージを録音できるVOCAです。
- 各スイッチに8.5秒、合計17秒の録音・再生ができます。
- 電池で動く機器との接続が可能です。  
 メッセージ再生の間、機器が動きます。  
 録音する言葉と機器を関連づけて学習機会を強化することができます。

品 番：0965  
 総録音時間：17秒(各スイッチに8.5秒)  
 録音メッセージ数：2  
 電 源：角型9ボルトアルカリ電池(付属しません)  
 スイッチ直径：約6.4cm  
 付 属 品：スナップスイッチキャップ2個/  
 トイアプライアンスケール2本  
 ￥25,200(税込)

## ●トークトラックプラスウィズレベル

### 開発経緯&製品について

エーブルネット社は2001年に「トークトラック」を販売開始しました(日本未発売)。軽量で携帯性に優れ、使用しやすく、ポップな外観も人気が高く、非常に多くの方より高い評価をいただきました。多くのユーザーよりレベルの追加希望があり、今回2つのレベルを持ったトークトラックプラスウィズレベルを開発しました。

学校場面、家庭で、授業で、昼食時間・等という様に4つのメッセージを2レベル使用することができます。録音方法はとても簡単ですので、1日を通して簡単に使用することができます。

トークトラックプラスウィズレベルは自閉症や通常はハイエンド機器を使用していて速やかな返答やコミュニケーションを求めているユーザーに多く使用されています。1.2cm四方サイズのキーを押すことのできるユーザーにとっては、トークトラックプラスウィズレベルは携帯性があり、家庭や学校、社会の中での参加の機会を格段に広げます。



### 特 徴

- 腕時計型のVOCAです。
  - 4つのキー、2つのレベル(場面)にメッセージを録音できます(合計8つのメッセージを録音・再生できます)。
  - 総録音時間は70秒間です
- 各キーの録音時間
- |      | キー1 | キー2 | キー3 | キー4 |
|------|-----|-----|-----|-----|
| レベル1 | 8秒  | 8秒  | 8秒  | 14秒 |
| レベル2 | 8秒  | 8秒  | 8秒  | 8秒  |
- バンドはベルクロタイプと時計バンドタイプの2種類が付属します。
  - 外部スイッチの接続はできません。



品 番: 0891  
 総録音時間: 70秒  
 録音メッセージ数: 8つ(4キー×2レベル)  
 キーサイズ: 縦1.27cm×横1.9cm  
 電源: 充電式  
 音量調整: 2段階  
 重量: 約70g

¥27,300(税込)

## ●ビッグステップバイステップ

### 開発経緯&製品について

ビッグマックを開発後、エーブルネット社は複数のメッセージを持つシンプルな機器は、障害を持つ子ども達にとって大変有効であることを実感してきました。一連の複数のメッセージを持つことで、子ども達は周囲の人々と本当の会話コミュニケーションの機会を可能にしました。約5年前に複数メッセージタイプのVOCA (VoiceOutput Communication Aid) として初めてステップバイステップを販売開始し、非常に多くのユーザーより高い評価を受けてきましたが、ビッグマックと同じサイズでステップバイステップと同じ機能を持つ製品への要望も高くありました。その要望に応じて今回ビッグステップバイステップが開発されました。



品 番: 赤0966 青0967 黄0968  
 : 黒0969 緑0970  
 総録音時間: 75秒  
 録音メッセージ数: 75秒以内であればいくつでも録音可能  
 電源: 角型9ポルトアルカリ電池(付属しません)  
 スイッチ直径: 約12.7cm  
 重量: 約450g(電池含む)  
 付属品: スナップスイッチキャップ1個、  
 トイアプライアンスケーブル1本

¥29,715(税込)

### 特 徴

- 合計75秒録音できます。
- 録音した順番に再生するVOCAです。総録音時間内であれば、メッセージはいくつでも録音できます。