



ablet

エーブルネット社 新製品

シンプルで使いやすいパワフルVOCA スーパートーカー

言語に障害をお持ちの方のための、録音・再生型のコミュニケーションエイドです。ユーザーに合わせて必要な言葉を周囲の方が録音し、ユーザーが再生して使用します。

特徴

1. 録音時間は合計8分間!

録音できる時間の合計は8分間です。これは現在販売されている多くのVOCAに比較すると非常に長い録音時間です。それに加えて、このスーパートーカーは各キーに録音する制限時間がありません!

☆だからこんなことができる!☆

1キーで…絵本や物語、歌、劇のセリフなど
8キーで…8レベルをすべて活用して最大64個のメッセージでコミュニケーション
→ 録音時間を気にすることなく、活動に合わせて多様な活用ができます!

2. キーの数は4種類から選べる!

スーパートーカーには、1、2、4、8キーのキーガイドがそれぞれ1枚ずつ付属します。キーの数をこの4種類から選択して使用します。

☆だからこんなことができる!☆

1) ユーザーのニーズの成長に合わせてキー数の選択が可能です(導入は1キーで、選択の練習段階では2キーで…等)。
2) 活動に合わせてキー数の変更ができます(歌遊びには1キーで、おやつ選びには2キーで、本読みには4キーで、買い物場面では8キーで…等)。

3. レベル数は8レベル!

レベルとは場面や活動に合わせてメッセージを準備しておくことができるメッセージのグループのようなものです。スーパートーカーは8通りのメッセージを用意しておくことができます。

☆だからこんなことができる!☆

1) 場面に合わせてメッセージを準備できます(1レベルは朝の司会、2レベルは算数の時間で発表、3レベルは給食の時間で当番役…等)
2) 1台を複数のユーザーで共有できます(1レベルは2キーを選択して〇くん用、2レベルは4キーを選択して△△さん用…等)
3) すべてのレベルで8キーを使用すれば最大64個までのメッセージを録音できます。ユーザーのコミュニケーションの幅を大きく広げることが可能です。

4. 録音方法が簡単!

録音ボタンを長押しし、録音ランプが点灯してから、録音したいキーを押さえて録音します(弊社のホームページで録音方法を動画でご覧いただけます)。

☆だからこんなことができる!☆

活動に合わせて録音をスムーズに変更することができます。機器の操作が苦手な方も心配無用です。

5. 外部スイッチ接続OK

キーを直接押して再生する以外に、外部スイッチを1つ接続して再生することが可能です。押す度に、メッセージを順番に再生(ステップバイステップ再生)します。

☆だからこんなことができる!☆

直接キーを押すことができないユーザーも、1スイッチで活動への参加やコミュニケーションが可能になります。

6. 音量調節(音量ロック可能)

音量の調節ができます。音量調節のロック(音量調整ができなくなる)も簡単にできます。

☆だからこんなことができる!☆

外出先や大勢の人のいる場所でも音声がかかなり大きくなりますので、相手に届きます。
音量ロックができることで、ユーザーが音量調節ボタンを触り、音声を大きくしすぎたり、小さくしすぎたりすることを防ぐことができます。



ここで使用しているシンボルはP.C.S (Picture Communication Symbols) です。PCSはMayer Johnson, Inc.の登録商標です。日本では株式会社アクセスインターナショナルが取扱をしています。製品にシンボルは付属しませんので、ご了承くださいませ。

品番	19010020
総録音時間	8分間
レベル数	8レベル
キー数	1、2、4、8 (各キーガイド付)
電源	単3電池 4本 (付属していません)
本体サイズ	横310×縦225×厚さ30mm
キーサイズ	1キー:196×95mm
(各キー)	2キー:95×95mm
	4キー:95×45mm
	8キー:45×45mm
重量	約950g

¥32,000 (税込)

～スーパーカー紹介～

スーパーカー活用アイデア

1キー


- 1メッセージのコミュニケーションを導入しているユーザーに8レベルあるため1日を通してのコミュニケーション場面にメッセージを準備しておくことが可能です。レベルの組合せで多様なコミュニケーションができます。

例：家庭で：

家族を呼ぶ（「お母さんこっち来てー」「お兄ちゃん、ごはんの時間だよ」）／ベットに呼びかける／絵本を読む

学校で：

出席に答える（「はい!」）／テストの終わりの合図を言う／文化祭の劇のセリフを言う／歌を歌う／試合を観戦する時に応援する／運動会のヨーイドン!役

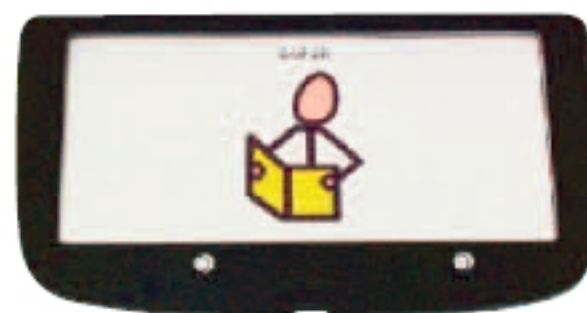

*コミュニケーションのチャンスをできるだけ多く作ることが大切です。

2キー

- 1日を通して1つのメッセージ以上を表す機会を作ります

例：いろいろな挨拶

「おはよう!」「元気?」「今日は寒いね。」「はじめまして。」

例：学習場面で参加する

本を読む：1番目のキー：繰り返し出てくる文章を読む(再生する)
2番目のキー：「ページめくって」

算数の授業：1番目のキー：問題を出題する

2番目のキー：答えを言う

- 2つから1つを選択する機会を作る場合に活用できます。

例：家庭で：どの色がいい?—シャツ/ズボン/ソックス

食べるもの：卵/ホットケーキ/ごはん

これからすること：テレビを見る/ゲームをする/本を読む

学校で：何を読む/歌う歌/どのゲーム/お昼ごはんは何を食べる/

どの色のクレヨンで色塗る/どの字を練習する/

どの動物のこと勉強する



*選択できることは次への意欲につながります。最初の段階では選択肢はどちらも肯定的なもの(ユーザーが好きなもの)にします。

4キー&8キー

- 周囲との関わり合いの中で一連のメッセージの機会を作ります。

例：意見を言う/質問をする/誰かに指示を与える/
インタビューをする/料理のレシピを伝える/誰かを笑わせる

- 学校や地域の中で一連の流れのある場面で使います

例：文化祭の劇で/学習発表会/買い物に出かける/
電話でデリバリーの注文をする…

- 楽しむ中で

例：歌をパートに分けて歌う/絵本のページを録音する/ゲームの中で

- 行動の順序を分かりやすくする(シンボルカードの音声が付いたものとして)

例：着替える/はみがき/顔を洗う/靴をはく…

- 慣れない場所に行く前に行動の見通しをつける

例：歯医者に行く(1.先生に会う/2.お話をする/3.口を開ける/
4.機械で口のそうじをする…等)



貸出機のご案内

スーパーカーは2週間、無償でお貸し出しをしています(返却時の送料のご負担とご試用時の電池の準備はお願いをしておりますので、ご了承くださいませ)。

ぜひこの機会に、スーパーカーをお試しください。ご依頼は販売店もしくはお近くのパシフィックサプライ(株)各営業所までお気軽にご連絡ください。