



補助器具紹介 —MTSサポート—

MTSサポートは、障害者や高齢者の歩行介助、立ち座りの介助、移乗介助の安全性の向上と、介助者負担の軽減を目的に、ノルウェーで開発された優れた補助器具です。

ベルトを、介助者が装着する事によって、対象者にしっかりした支えを、提供する事が出来、対象者が、装着する事により、介助者が、しっかりした握り手を確保することが出来ます。


握り手のあるベルトの装着は、立ち上がりの支援はもとより、座面に墜落させる事なく安全な着座の介助に、とりわけ有効です。

特徴

- 固定ロック型バックルが、採用されているため、姿勢の変化による胴回りの変化に対して、バックルを外すことなく、締め直すことが可能。
- 水分を吸収しない素材の為、濡れた身体に装着しても、固定力には、ほとんど影響しない。
- ベルトの内側は、滑りにくい素材のため、ずれにくい。


ベルトの長さ調整

使用者(対象者、介助者)の胴回りに対応するサイズのベルトを選びます。
ベルトの長さ調整は、背バックルで行います。
背バックルを、以下の手順で、適切な長さに、調整して下さい。

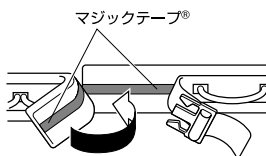


注意

■ベルトのマジックテープ®接着面は10cm以上確保して下さい。

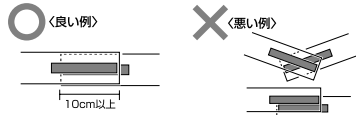


使用者の胴回りの長さに合わせて、マジックテープを、適切な位置でしっかりと重ね合わせて、固定します。
マジックベルトの接着面の長さは、安全の為、必ず10cm以上確保して下さい。

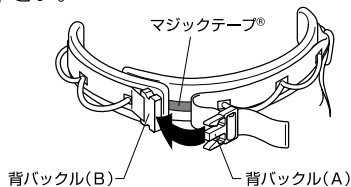


注意

■前バックル(A)は奥まで入れて「カチッ」と音がし、左図のようにになっていることを確認して下さい。

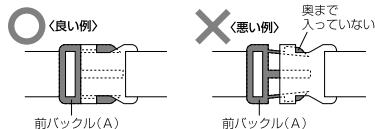


背バックルを、留めます。

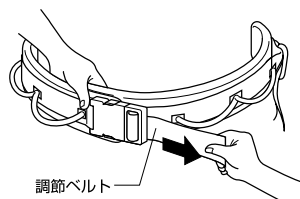

最後に、調整ベルトを引いて長さを、固定します。


ベルトの装着

使用者(対象者、介助者)の胴回りにベルトを装着し、使用者の身体の正面で、ベルトを重ね合わせて下さい。

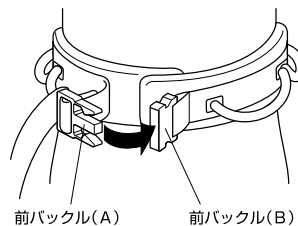


注意

■前バックル(A)は奥まで入れて「カチッ」と音がし、左図のようにになっていることを確認して下さい。

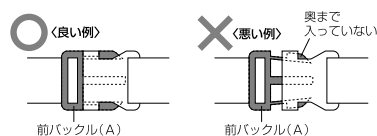

ベルトの重ね合わせ方は、図のように、前バックル(A)側のベルトの端を、前バックル(B)側のベルトの下に、重ねて合わせて、バックルを留めます。

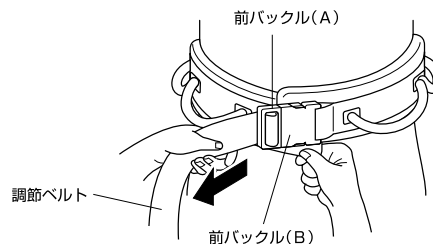

介助者は、片手で、前バックル(A)側のベルトの端を把持し、もう片方の手で調整ベルトをしっかり引いて、ベルトを装着固定します。

(介助者自身が使用する場合も装着の手順は同じです。)

椅子への着座(介助者のみベルトを使用)



対象者は、椅子に十分接近して立ちます。
 介助者は、対象者の自然な動きを妨げないで、着座させるために、十分に前傾出来る空間が取れる位置に立ちます。
 介助者が接近し過ぎると、対象者の自然な動きを阻害することになりますので、介助者の立つ位置に注意してください。
 対象者に、介助者の装着しているベルトの握り手を、持つように促します。



介助者は、対象者の両肩に、手を軽く添えて、前傾を促します。
 介助者の左手は、そのまま対象者の肩に添えて、右手を、対象者の左脇から挿入して、対象者の骨盤前部にあてがいます。



対象者に、ゆっくりと着座を促し、対象者の骨盤前部から、対象者の重心の後方移動を誘導し、適切な位置に着座させます。介助者は、後方の足から、前方への体重移動で介助しますので、介助者の足の位置が大切です。
 対象者を椅子に墜落させることなく、ゆっくり安全に着座させることができます。



椅子からの立ち上がり(両者ベルト使用)



深く腰掛けている位置からの立ち上がりを、容易にするために、座面上を少し前に出るように介助します。
 対象者に、介助者の装着しているベルトの握り手を、持つように促します。
 対象者の自然な立ち上がり動作を妨げない為に、必要な空間を確保して、介助者は、足を前後に開いて立ちます。



介助者は、左手を、対象者の右脇から挿入して、対象者が装着しているベルトの握り手を持ちます。右手を対象者の肩に軽く添えて、前傾を促し、対象者の足部に体重をしっかり載せます。
 介助者は、右手を、対象者の左脇から挿入して、対象者が装着しているベルトの握り手を、持ちます。



介助者は、対象者の自然な立ち上がりの動きを、妨げないように、対象者の動きにあわせて、前方の足から、後方に体重を移動します。

商品名	MTSサポート(大)(小)
幅	9cm
長さ	(大) 80~95cm (小) 60~75cm
重量	(大) 300g (小) 260g
材質	表材・裏材/ポリエステル 中綿ポリエチレン
品番	26180104(大) 21680105(小)
価格	¥20,895(税込)

※価格、仕様は変更する場合がございます。

※弊社ホームページにてその他の移乗用具も掲載しておりますのでご覧下さい。
 ホームページアドレス <http://www.p-supply.co.jp/>