

ボイスキャリー・ペチャラ

携帯用会話補助装置

お客さまから頂いた声を集めた結果導き出されたシンプルな携帯用会話補助装置。誰にでも簡単で分かりやすく、すぐに使えるよう会話に必要な機能のみに特化した製品です。



●価格

¥98,800(非課税)

平成19年4月1日、厚生労働省の日常生活用具給付対象品目「携帯用会話補助装置」にて非課税の適用を受けました。

●品番

16180201 プリサイズブルー

16180202 ブライトオレンジ

文字盤はシンプルに50音と数字を基本とした構成。

複雑な操作を必要としない、会話に特化したペチャラは使いやすさを第一に考えられています。

音声録音再生機能を搭載。5つのキーに各16秒、合計80秒の録音・再生ができることで、日常の挨拶などをスムーズに表現できます。

語句登録機能も搭載し、最大30文字の語句を156個まで登録することができます。

ペチャラ設定機能一覧

- 本体背面に操作ガイドを貼付することで、手元に取扱説明書が無くても分かりやすくなっています。また、2アクションで各種機能が呼び出すことができます。
- 専用電池パック(充電機)を標準装備する一方、外出先でのバッテリー切れに備えて、単3乾電池4本でも使用可能です。
- SDメモリーカード(※SDメモリーカードは付属していません)パソコンと連携ができます。作成した文書を印刷したり、文書データ、各種設定データをバックアップ、発声音をカスタマイズしたりできます。
- 音声は4種類。男性/女性/男の子/女の子。音量、読上げ速度の調節もできます。
- 文字の表示される液晶画面にはバックライトがあり、暗い場所でも画面が見えます。



本体裏面に取扱説明



SDメモリーカード

ボイスキャリアペチャラユーザー様紹介

愛知県豊橋市に住む後藤晃佑(ごとうこうすけ)君は、小学2年生。脳性まひによる肢体不自由と知的障害があります。

2007年1月からペチャラを使い始めるようになり、言葉に関するさまざまな事が成長、変化してきました。学校の授業では日直の号令や個別課題をこなします。お友達の名前、本に書いてある単語などをペチャラに入力することで、文字と音声で記憶することができるようで、使い始めてからの1年で晃佑君の言語語彙能力は急速に高まりました。

晃佑君の成長期とも重なったのでしょうか、文字・言葉の理解が高まったことで、まわりの方ともコミュニケーションがとりやすくなったとお母様は実感しています。

ただ、まだまだ世間一般でこうした携帯用会話補助装置の認知は低く、とっさのときにペチャラを使ってもまわりに理解されづらい事があるということがご家族の悩みです。そうした事がなくなるような社会が実現できれば良いですね。



ユーザーサイト案内

1. 掲示板には、ペチャラに関する疑問、使い方の紹介、などで自由に書き込みください。お客様通しのコミュニケーションの場所になればと思います。
2. ユーザー辞書は、ペチャラでうまく発音しない単語を登録し、正しく発音させることができる機能です。
3. ダウンロードページでは、システムファイル作成アプリケーション※A、取扱説明書、などがあります。
4. Q&Aは皆さまから集められたご意見、疑問などをUPしていきます。

※A システムファイル作成アプリケーション

システムファイル作成アプリケーションは、パソコンとSDメモリーカードのやり取りを分かりやすくできるようにするソフトです。掲示板と並んで、このサイトのおすすめ部分です。



ボイスキャリアペチャラ導入に関するご案内

制度について

■ 各種サービスのご案内

- 貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用頂くことができます。
- 製品をより詳しく知っていただく為、集合研修を行っております。最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
- 修理・点検の際には販売店を通じ弊社にて作業いたします。修理期間中の代替機の準備もごできます。

ボイスキャリアペチャラ製品仕様

外形寸法：W260/D187/H42mm
 重量：850g(専用電池パック付、ベルト除く)
 表示モニター：文書作成エリア、横15文字縦3行の45文字
 機能表示エリア、表示モニター下段には本製品の設定と状態、時刻、日付を表示
 バックライト調節機能 4段階(Off/1/2/3)
 キーサイズ：直径14.5mm
 キーピッチ：16.5mm
 スピーカー：耐水型直径36mm×2 最大出力0.25W×2
 外部メモリースロット：SDメモリーカードスロット×1
 専用電池パック仕様：ニッケル水素電池 4.8V1500mAh
 連続使用時間：最大約8時間(音量3/バックライト消灯、バックライト使用時は約6時間)
 充電時間：約6時間
 付属品：ACアダプター/電池パック/ベルト/スピーカー保護シール(SDメモリーカードは付属していません。)