

# 外部スイッチで使用できる

## NTTドコモのFOMA D800iDS

高齢者・障害者にも使いやすい携帯電話です!

NTTドコモから発売されているD800iDS(三菱電機製)は、従来固定ボタンだった操作部分をタッチパネルにした新しい携帯電話です。通常のボタンレイアウトはもちろんのこと、モードを変えれば、ボタンの数を6つや3つに変えて操作することもできます。



### 外部スイッチ操作

D800iDSは、外部スイッチ接続ケーブルD01(オプション品)を組み合わせることで、市販の外部スイッチで操作することもできます。ビッグスイッチ、ジェリービーンスイッチ、スペックスイッチ(エーブルネット社製:パシフィックサプライ社にて販売)等で操作可能です。

#### スイッチ1つで操作するオートスキャン機能

オートスキャン設定ONで、カーソルが上から順に自動で移動。選択したいボタンにカーソルがあたらしたら、スイッチを押して選択します。



オートスキャン設定ONの時は、タッチパネルディスプレイのどの部分を押しても、カーソルがあたっているボタンを選択することができます。

#### スイッチ2つで操作するステップスキャン機能

ステップスキャン機能は、外部スイッチを2つ使って操作します。1つのスイッチでカーソルを上から順に移動させ、もう1つのスイッチで決定します。



## D800iDSに使用できるスイッチ

NTTドコモ社製の外部スイッチ接続ケーブルD01(NTTドコモ社オプション品)を介して接続可能な製品の一例を紹介します。購入については携帯電話、外部スイッチ接続ケーブルD01はNTTドコモへ、スイッチはパシフィックサプライ各営業所までお問合せください。



### スペックスイッチ

寸法: 直径35mm  
¥7,980(税込)

# 携帯電話のご紹介

## スキャンモードでのメールやカメラ操作イメージ。

### 文字入力イメージ



行を選んで

文字を選ぶ


### 写真撮影イメージ



※スキャンモード(オートスキャン/タップスキャン)は、3キーモードでご利用頂けます。

※外部スイッチは、φ3.5mmのミニプラグに対応しています。

※外部機器連携中にハンズフリー機能を持ったイヤホンマイク(オプション品)もご利用頂けます。

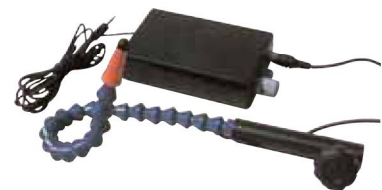

### ポイントタッチスイッチ

¥37,800(税込)

## ステータスイルミ



背面にあるイルミネーションが大きく光って、電話やメールの着信などをお知らせします。

## 確実な操作感



ボタンを押した時に振動します。操作部がタッチパネルですが、操作に実感を持てます。

## 選べる画面デザインパターン



※「FOMA」「iモード」はNTTドコモの登録商標です。

※FOMA D800iDSは、開発にあたり、横浜市総合リハビリテーションセンターにご協力頂きました。



### ピンタッチスイッチセット

¥48,900(税込)



### 光電タッチスイッチ

¥55,100(税込)



### プレスマイクスイッチ

¥39,100(税込)



### ジェリービーンスイッチ

寸法：直径64mm  
¥6,930(税込)



### ビッグスイッチ

寸法：直径123mm  
¥6,930(税込)



### ファイバースイッチ

¥64,000(税込)