


アイトーク

iTalk

取扱説明書

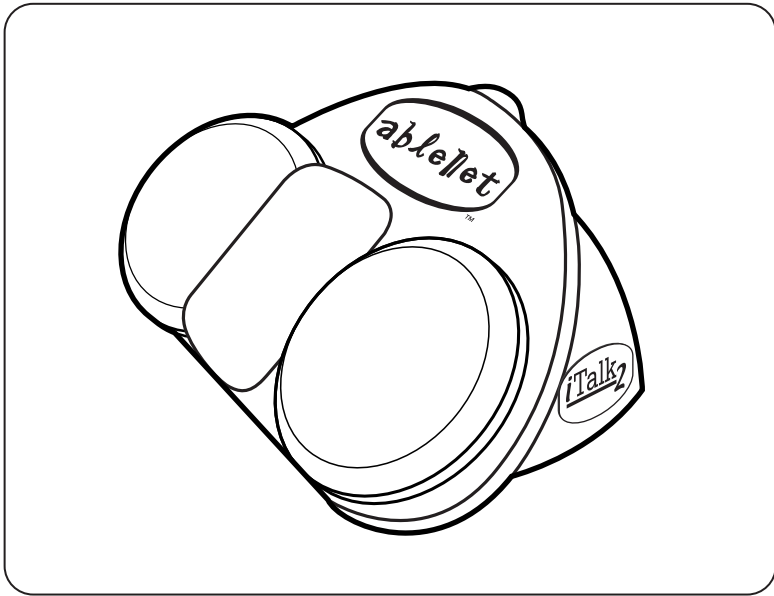

この度は「アイトーク」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書は「アイトーク」を安心してご利用いただけるようわかりやすく説明してあります。

ご利用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認下さい。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読み下さい。

k Pacific Supply

製品に関するお問い合わせは本取扱説明書最終ページをご参照下さい。

目次

1	アイトークとは	2
2	ご使用上の注意	2~4
3	構成部品と各部の名称・はたらき	5
4	使用方法	6
4-1	乾電池の取り付け	6
4-2	本体のスイッチを入れる	6
4-3	録音方法	6
4-4	再生方法	7
4-5	別のメッセージを録音する場合	7
5	機器・おもちゃを接続して動かす	8
6	スナップスイッチキャップ	9
6-1	取付方法	9
6-2	取外し方法	9
7	シンボル保管ケース	9
8	お手入れの方法	9
9	仕様	9
10	困った時には…	10

1 アイトークとは

障害のあるお子さまが参加や選択の機会を増やすためのシンプルな音声発声型のコミュニケーションエイドです。

2 ご使用上の注意

本製品の機能を十分に生かしかつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。その後大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

⚠ 注意

以下は無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的破損の発生が想定される内容を示しています。

接続する機器に関して

- ドライヤーや暖房器具などの熱器具、ミキサーや扇風機などの回転機器を接続する場合は、取り扱いには十分注意してください。一人のみで使用せず介助の方が一緒に付き添うようにしてください。
- 製品と接続する機器については、その製品に付属の取扱説明書をよくお読みになり指示に従って下さい。

万一、異常や故障が発生した場合

次のような場合はすぐに使用をやめ、乾電池を取り外して販売店にご連絡ください。そのまま使用されますと、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電につながる恐れがあります。

- 煙が出ている、異常に熱い、変なおいがする。
- 本製品内部に水や異物が入った。
- 音が出ていない、スイッチ機能が働かない。(故障状態)
- 落下したり踏んだりして外装ケースが破損したり本製品に大きな衝撃を加えた。

設置・使用する場所に関して

生命にかかわる場合に緊急用として本製品を使用しないでください。

乾電池に関して

乾電池は乳幼児や幼児の手の届くところに置かないでください。
万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。




⚠ 注意


以下は無視して誤った取扱いをすると、傷害を負ったり物的破損の発生が想定される内容を示しています。

設置・使用する場所に関して


内部部品が破損したりショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電につながる恐れがありますので次の事項を守って下さい。

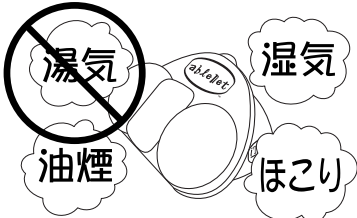


油煙、湯気、湿気、ホコリなどが多い場所で使用しない

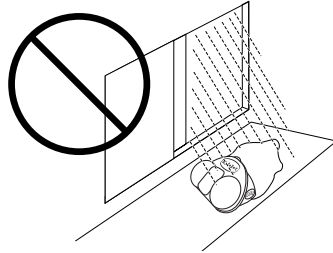

水をかけたりぬらしたりしない。

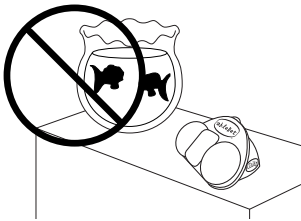

本製品の周りに花瓶・コップ・化粧品薬品や水の入った容器を置かない。

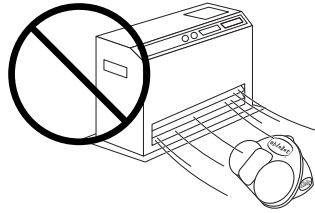


高温になる場所に放置しない。


直射日光の当たる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブなど）の近くで使用しない。熱により変色・変形や故障の原因になります。

乾電池に関して

乾電池は誤った使い方をしますと液もれや破損することがありますので次の点に注意してください。

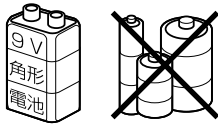

乾電池は必ず9Vの角型アルカリ乾電池（006P9V）を使用してください。それ以外の乾電池（マンガン乾電池等）は動作不良の恐れがあります。使用しないで下さい。

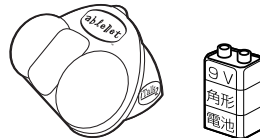

本製品を長期間使用しない時は安全のため乾電池を抜いてください。

●本製品の極性表示（＋と－）に合わせて乾電池を正しく入れてください。

注意

以下は無視して誤った取扱いをすると、傷害を負ったり物的破損の発生が想定される内容を示しています。

修理・分解に関して

使用する方および介助する方による分解や改造は絶対にしないでください。火災、感電、故障につながる恐れがあります。修理や内部の点検は、必ず販売店にご依頼ください。

その他

- 本製品を使用する方または介助する方は、使用方法や取扱注意事項が理解できるまで本製品を使用しないでください。
- 常温の範囲で使用、保管してください。常温以外で使用、保管すると、変形や破損・故障の原因になります。
- 本製品を使用する方または介助する方は、常に本書を手元に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。
- 不断の改良により詳細において本書の内容と異なる場合があります。不明な事柄については販売点までお問い合わせください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。
- 本書に規定した方法以外での使用方法に関しては、安全性は保証できません。
- 本書中の図は一部を省略したり抽象化した表現になっているものがあります。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り・乱丁・落丁・記載もれなどに気づいた場合は、販売点までご連絡ください。
- 本製品は予告なしに変更する場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で転載複製することを禁止します。

3 構成部品と各部の名称・はたらき

【内容品】


●アイトーク本体…1台




●トイケーブル…2本



●スナップスイッチキャップ…2個
(本体に取付済)

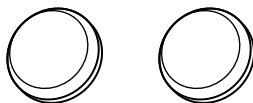

表面スイッチ
(スナップスイッチキャップ付)

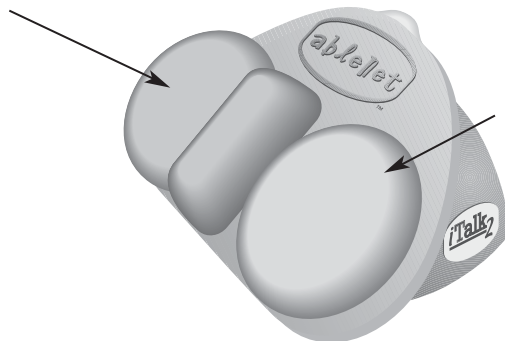

表面スイッチ
(スナップスイッチキャップ付)

録音方法の
説明

シンボル保管ケース


LEDランプ

録音ボタン

マイク

電源 及び
ボリューム
スイッチ


外部機器
制御端子

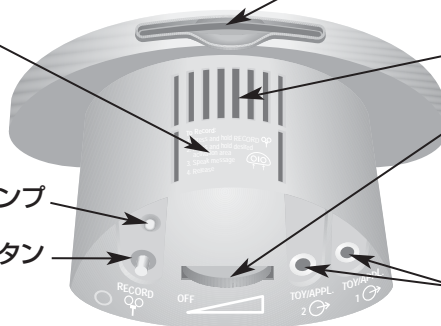

4 使用方法

4-1 乾電池の取り付け

電池ぶたを開けて、+と-に注意しながら角型9ボルトアルカリ乾電池（付属していません）を入れて電池ぶたを閉めます。

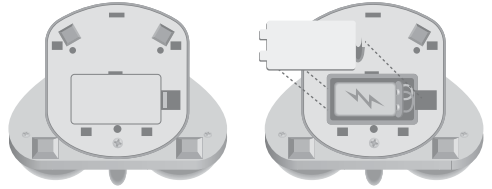

⚠️ 注意 本製品の極性表示(+と-)に合わせて乾電池を正しく入れてください。


4-2 本体のスイッチを入れる

電源 (ON/OFF) スイッチをカチッという音がするまで右に回してアイトークの電源を入れます。



4-3 録音方法

- ① 録音ボタンを押しながら同時に録音する側（右または左）表面スイッチを押します。（録音時間は各スイッチ8.5秒以内です。）
- ② 30～60cm離してマイクに向かってメッセージを録音します。（録音時間は各スイッチ8.5秒以内です。）
- ③ 録音ボタンと表面スイッチから手を離します。
- ④ もう片側にもメッセージを録音するには①～③をくりかえします。

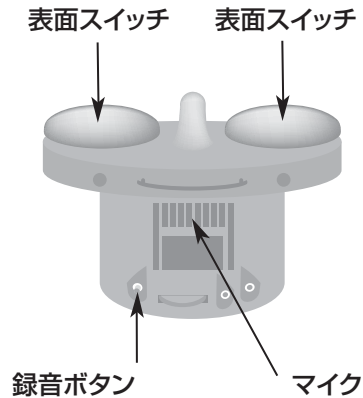


❗️ ポイント


- 最良の録音を行うコツは静かな場所でマイクを口元から30～60cm離し通常のトーンと音量で話します。
- 大声で話したりあまりマイクに近づきすぎると録音された音声の質が低下します。

4-4 再生方法

- ①音量調節のスイッチをカチッという音がするまで右に回して、アイトークの電源を入れます。

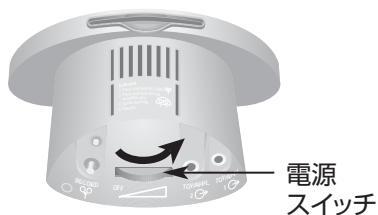

- ②再生したい側の表面スイッチを押します。
途中で再生を中止したい場合は録音ボタンを押してください。

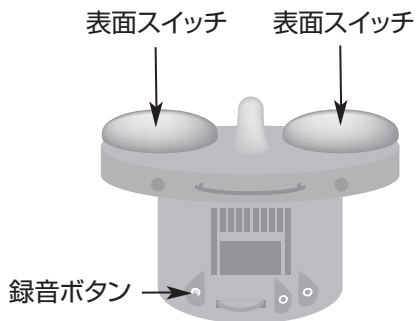


4-5 別のメッセージを録音する場合

別のメッセージを録音する場合は、「**4-3 録音**」の動作を行なってください。
この場合、メッセージは**上書き保存**されますので先に録音されていたメッセージは消去されます。

5 機器・おもちゃを接続して動かす

付属のトイケーブルを使用することによって乾電池で作動する機器・おもちゃ（接続する機器は最大24V、1Aまで）を動かすことができます。録音されているメッセージが再生されている間、機器が動きます。付属のトイケーブルを「TOY/APPL1」「TOY/APPL2」と記されている端子に接続し、もう一方を「BDアダプター」（別売：電池用のアダプター）に接続します。トイケーブルに接続した機器・おもちゃはそれぞれの表面スイッチに対応します。

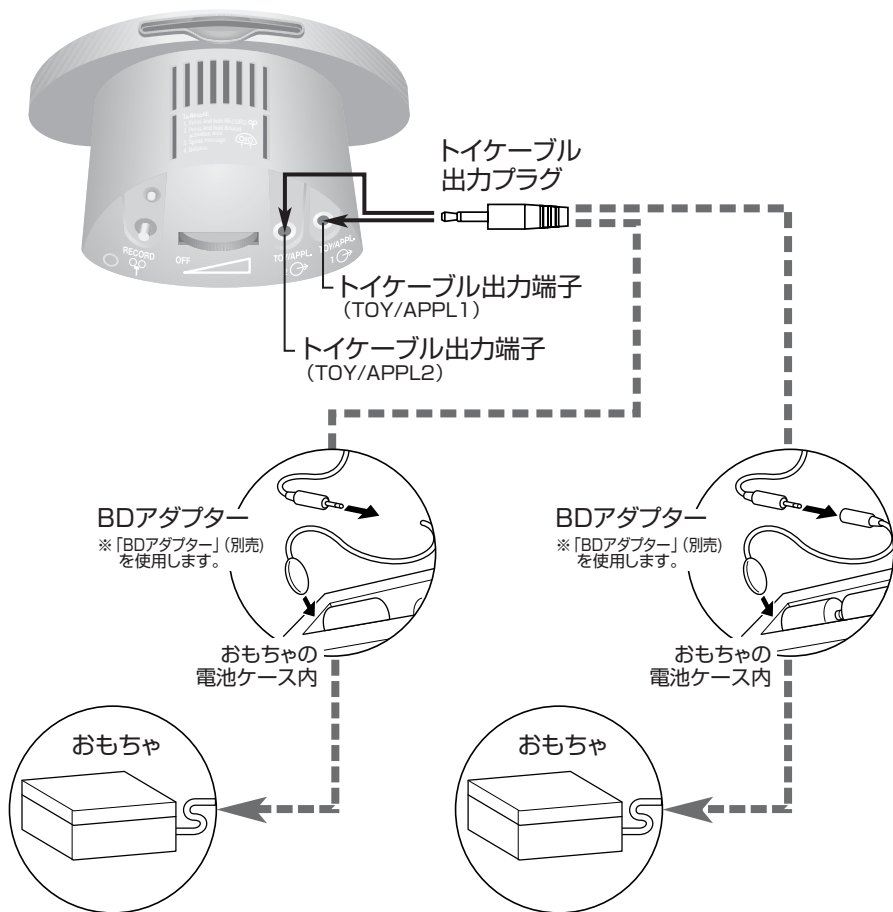

⚠ 注意

- 生命にかかわる場合に緊急用として本製品を使用しないでください。
- ドライヤーや暖房器具などの熱器具、ミキサーや扇風機などの回転機器を接続する場合は、取り扱いには十分注意してください。一人のみで使用せず、介助の方が一緒に付き添うようにしてください。
- 本製品と接続する機器やBDアダプタについては、その製品に付属の取扱説明書をよくお読みになり指示に従ってください。

6 スナップスイッチキャップ

付属のスナップスイッチキャップは表面スイッチをぴったりと覆う丈夫なプラスチックカバーです。

表面スイッチにシンボルや写真を置いてスナップスイッチキャップを被せれば、シンボルや写真を保護することができます。

6-1 取付方法

表面スイッチにシンボルや写真を置いてスナップスイッチキャップを被せ、スナップスイッチキャップ外面の周囲を押して下さい。

⚠ 注意 スナップスイッチキャップにシンボルや写真を置く際はインクを十分に乾かして下さい。インクに含まれる溶剤がスナップスイッチキャップの表面に移る恐れがあります。

6-2 取外し方法

スナップスイッチキャップの端を爪でこじ開けるようにして取り外して下さい。

⚠ 注意 取外す際、手をケガしないようにご注意ください。

7 シンボル保管ケース

アイトークの本体上部には、シンボル（約4cmx4cm大）を数枚保管できるケースがあります。

ユーザーの参加する活動場面において、適切なシンボルへ速やかに変えられるようにご活用ください。



8 お手入れの方法

- 本体が汚れた場合は、湿った布か少量の中性洗剤を水で薄めてよく絞った布で拭いてください。
- アルコールやシンナーなどはご使用にならないで下さい。

9 仕様

スイッチ端子	φ3.5mm
電源	9V アルカリ角型乾電池 (006P)
スイッチ直径	63mm

10 困った時には…

故障内容	解決方法
録音・再生しない	電池が消耗していないか、アルカリ電池以外の電池を使用していないか、あるいはしっかりと電池が接続されているか、確認して下さい。
他の機器（おもちゃなど）が作動しない	<ul style="list-style-type: none">●他の機器（おもちゃなど）の電源が入っているか確認して下さい。●表面スイッチと一致するトイケーブル出力端子にトイケーブルのプラグを差し込んでいるか確認して下さい。●本製品の電源が入っているか確認して下さい。

以上の方法で解決されない場合、故障が考えられますので販売店までご連絡下さい。

●エーブルネット社 日本総代理店

k Pacific Supply

パシフィックサプライ株式会社

■ **本社** 〒574-0064
Head Office 大阪府大東市御領1-12-1
TEL:072-875-8008 FAX:072-875-8010

■ **札幌営業所** 〒003-0023
Sapporo 札幌市白石区南郷通り14丁目北2-33
TEL:011-862-1136 FAX:011-862-1002

■ **仙台営業所** 〒980-0871
Sendai 仙台市青葉区八幡1-4-22
TEL:022-224-3261 FAX:022-264-6935

■ **東京営業所** 〒160-0022
Tokyo 東京都新宿区新宿2-3-12 (グレイスビル2F)
TEL:03-3352-0757 FAX:03-3355-3154

■ **大阪営業所** 〒574-0064
Osaka 大阪府大東市御領1-12-1
TEL:072-875-8011 FAX:072-875-8015

■ **福岡営業所** 〒812-0054
Fukuoka 福岡市東区馬出2-2-12
TEL:092-641-8151 FAX:092-641-0444

<http://www.p-supply.co.jp/>

販売店・お問い合わせ先