

# 電動ハサミ 取扱説明書

この度は電動ハサミをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

Sep '01

## ● 内容品

ご使用前に下記のものが入っていることをお確かめください。


『電動ハサミ本体』…1台、『ベルクロ™』…雄・雌1枚ずつ、『ゴム片』…2個

※ 乾電池は付属していません。

## ● 電池の入れ方

本体底面にあるフタを側方にスライドさせて取り外し、単3乾電池2個【別売品】を入れます。

(図1参照)

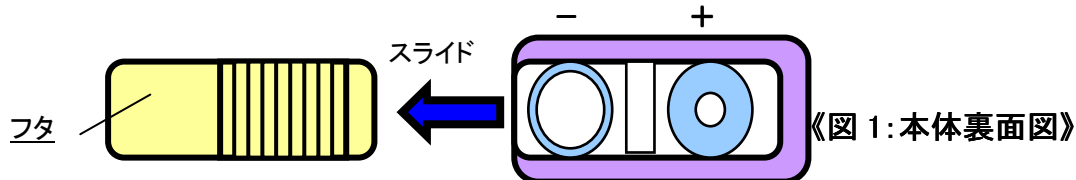


### ！ 注意

- 乾電池は本体側面の極性表示(+と-)のシールにあわせて正しく入れてください。
- 安定した作動のため、アルカリ電池をご使用ください。(マンガン電池との併用はお止めください。)
- ご使用にならない時は、本体及び乾電池はお子様の手の届かない場所で保管してください。また、長時間使わない場合は、安全のため、乾電池を取り出しておいてください。

## ● 使用方法

### ① 電動ハサミ単独で使用する場合


本体側面にある青色のON/OFFスイッチを押すと、ハサミの刃が動きます。(図2参照)

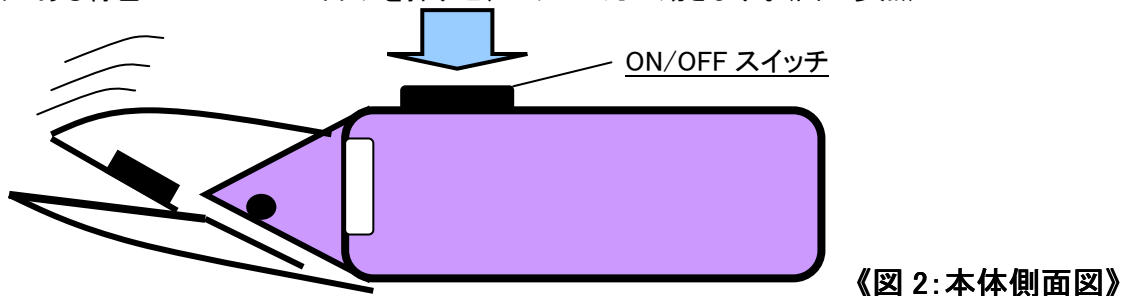


### ② 外部スイッチに接続して使用する場合

1. BDアダプター(小)【別売品】のコードを通すために、市販の丸ヤスリ等でフタ近くの本体に2~3mm程の切れ目を入れます。<図3参照>

《図3: 本体裏面図》

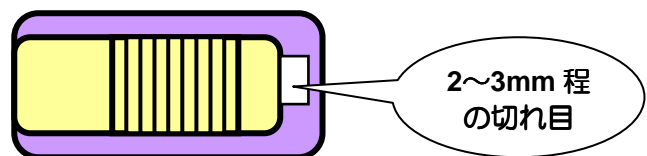

2. BDアダプター(小)の銅片部分を乾電池と(フタの裏側にある)電池接地部分に挟み込み、フタを閉めます。(図4参照)

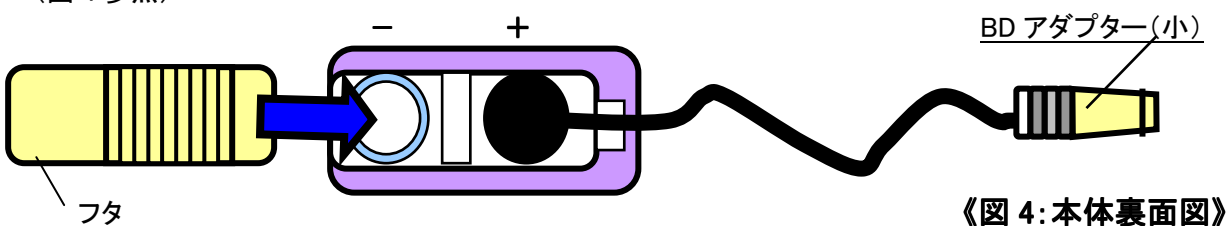


3. BDアダプター(小)を外部スイッチに接続します。

4. スイッチラッチ&タイマー【別売品】を接続することで、設定に応じて電動ハサミを作動させることができます。(詳しくは、スイッチラッチ&タイマーの取扱説明書をご覧ください。)

## ◎ 外部スイッチでお使いいただくために

本製品を外部スイッチに接続して使用する場合、付属品のゴム片とベルクロ™(雄・雌)を取付けて、本体のON/OFFスイッチを常に押し続けている状態にしなければなりません。

- ① ゴム片裏側に付いているシールを外し、ON/OFFスイッチに取付けます。その際、ゴム片の端とON/OFFスイッチの端を合わせてから取付けてください。(図6参照)
- ② 雌のベルクロ™のシールを取外し、ON/OFFスイッチすぐ下の本体側面から巻き付けるようにして取付けます。(図6参照)
- ③ 雄のベルクロ™をON/OFFスイッチに取付けられたゴム片の上からかぶせるようにして巻き付けます。その際、ON/OFFスイッチがONの状態になるようにしっかりと巻き付けてください。(図7参照)

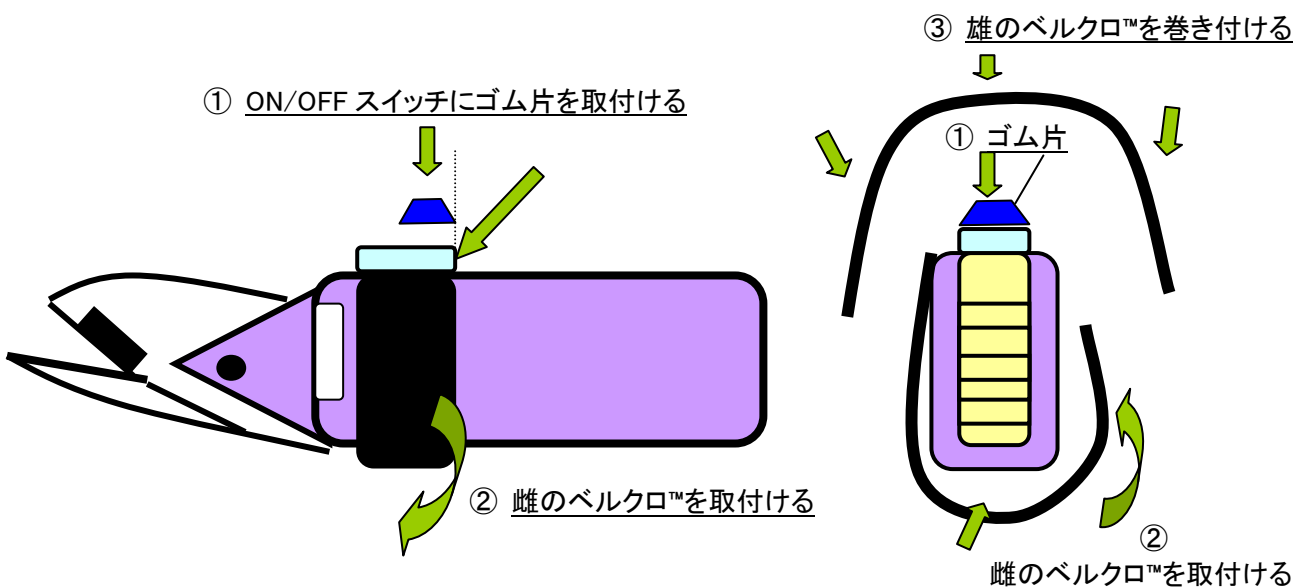

《図6:側面図》

《図7:底面図》

## ▲使用上の注意

- 乾電池を交換する時は、ON/OFFスイッチがOFFになっていることを確認してください。
- 使用中は危険ですので、刃を指先に近づけたり、人に向けしないでください。特に、外部スイッチで使用される場合は、ハサミの向きにご注意ください。
- 髪や爪、布、または厚紙など厚みのあるもの、固いものは切らないでください。
- 火元の近くや湿気が多い場所でのご使用は避けてください。また、絶対に水に浸さないでください。
- 使用する方及び介助する方による分解や改造は絶対にお止めください。

## ● お手入れ

- 本体表面の汚れは布で拭き取るか、場合によっては少量の石鹼水でしぼった布で拭いてください。

●輸入・発売元



パシフィックサプライ株式会社

本社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL(072)875-8008(代) FAX(072)875-8010