

- フラットパッドマウント (品番 19010073)
- フラットパッドマウントアーム付 (品番 19010074)

取扱説明書

■特徴■



フラットパッドマウント

- VOCA やスイッチを固定するためのパッドです。
- 底面に滑り止めパッドが付いており、表面にはベルクロが付いていますので平らな場所に置くだけでしっかり安定します。
- 本製品の土台部分は耐久性に優れたプラスチック製（ラテックスフリー）です。

フラットパッドマウントアーム付

- フラットパッドマウントに小型のアームを取りつけた、VOCA やスイッチを固定するためのマウントです。
- ノブで VOCA やスイッチの取り付け角度を変えることができます。
- 底面に滑り止めが付いていますのでしっかり安定します。

■使用方法■

取り付け

- ほこりや油分の付いていない平らな場所をお選び、上から少し押しして設置します。

取り外し

- 卓上などから本製品を取り外す場合は、本製品の吸着パッド部分のどこかをめくるように持ち上げると簡単に取り外す事が出来ます。

■注意■

- パッド部分はほこりなどが付着しやすい素材となっていますのでご注意ください。
- しっかりと吸引力を保つ為に、ゴム部分の底面を綺麗に保ち、設置場所はほこりや油分のない所を選んで下さい。

■付属品■

フラットパッドマウント	ベルクロ 4枚
フラットパッドマウントアーム付	ベルクロ 4枚

●イーブルネット社 日本総代理店

k パシフィックサプライ株式会社

本社営業部 〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1	TEL(072)875-8011	FAX(072)875-8015
札幌営業所 〒060-0051 札幌市中央区南 1 条東 6 丁目 2-12 松浦ビル 1F	TEL(011)218-5801	FAX(011)218-5805
盛岡出張所	TEL(019)661-5407	FAX(019)661-5408
東京営業所 〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-12 グレイスビル 2F	TEL(03)3352-0757	FAX(03)3355-3154
名古屋営業所 〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西 3-5	TEL(0568)34-2696	FAX(0568)34-2697
広島営業所 〒733-0035 広島市西区南観音 7-5-13 ロイヤルシャット-中田 1F	TEL(082)293-6255	FAX(082)293-6299
福岡営業所 〒812-0054 福岡市東区馬出 2-2-12	TEL(092)641-8151	FAX(092)641-0444