


感覚統合器具

スイングサポートフレーム

取扱説明書

Vol. 6

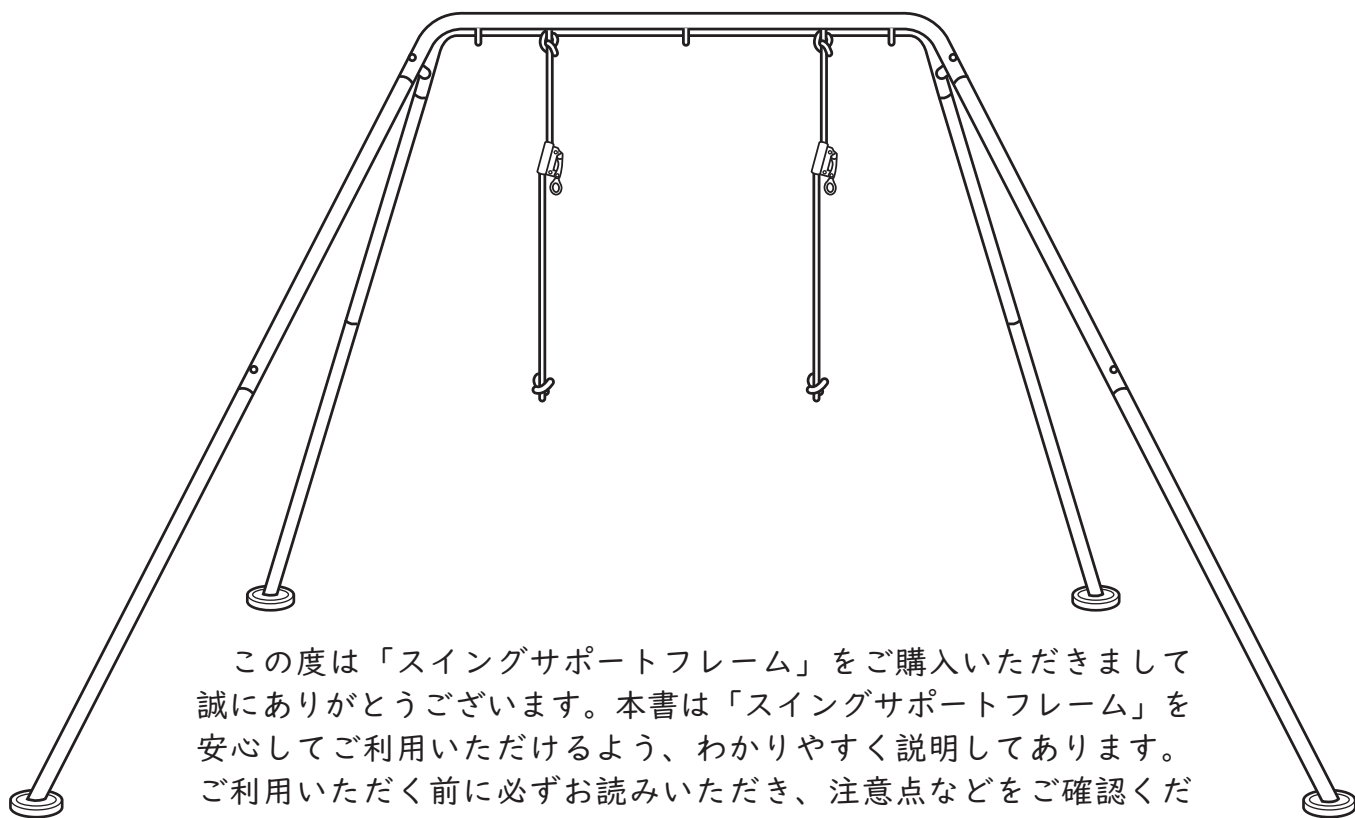

この度は「スイングサポートフレーム」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書は「スイングサポートフレーム」を安心してご利用いただけるよう、わかりやすく説明してあります。ご利用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

目次

1. 安全にご使用いただくために	2ページ
2. 各部の名称と仕様	4ページ
3. 設置方法	5ページ
4. 設置後の点検	8ページ
5. 日常の保守点検	8ページ
6. お手入れの方法	8ページ
7. 保管方法	8ページ
8. 修理・改造について	9ページ
9. 保証書	10ページ

gadadga

k Pacific Supply

1. 安全にご使用いただくために

「スイングサポートフレーム」の機能を十分に生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく読み内容を理解してください。その後大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

この取扱説明書では様々な絵表示を使用しています。これは「スイングサポートフレーム」を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

1-1. 警告に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 本製品の使用は必ず医療関係従事者などの専門家の指導のもとで行ってください。また、使用中は必ず作業療法士などのリハビリテーション関連スタッフが付き添ってください。
- 本製品の耐荷重は135kgです。本製品に取り付ける遊具と使用される方の総荷重が135kg以下になる範囲でご使用ください。135kgを超える荷重で使用すると事故等につながる恐れがあります。
- 本製品は確実に組み立ててください。組み立てが不十分な場合、使用中に落下して事故等につながる恐れがあります。正しい組立方法は P5の「3. 設置方法」をご参照ください。
- 本書に規定していない方法でロープを縛らないでください。使用中に結び目がほどけたり、破損したりする恐れがあります。P7の「ロープの取り付け方法」をご参照ください。
- 各種の部品は確実に取り付けてください。取付が不十分な場合、使用中に金具類がはずれて事故等につながる恐れがあります。
- 本製品を使用している時は、各フレームより2m以内に近づかないでください。
- 本製品を使用する時は、使用方法や取扱注意事項等が理解できるまで本製品をご使用にならないでください。
- 本製品を使用していない時は、分解して安全な場所に保管してください。
- 本製品の脚は固定しないでください。
- 本製品の設置場所は平坦な場所で使用してください。傾斜地に設置すると倒れる場合があります。
- 本製品を使用中に本製品のフレームが浮いた場合、それ以上ゆらさないでください。

1-2. 注意に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害や物的損害の発生が想定される内容を示します。


- 本体を持ち上げる際は必ず4名以上で行ってください。
- 常温の範囲で使用してください。常温範囲以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 直射日光のあたる場所や炎天下の車内での長時間の放置、熱器具（ストーブ等）の近くでの使用はしないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。また変形した製品は使用しないでください。
- 保守点検は使用前に本製品使用者または本製品管理者が必ず行ってください。また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し販売店に修理交換をご相談ください。
- 本製品を修理改造しないでください。破損等が生じた場合は必ず販売店に修理交換をご相談ください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品の不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場合があります。不明な事柄については弊社まで問い合わせてください。
- 本製品は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。
- 本書に規定した方法以外での使い方はしないでください。
- 本書中の図は一部を省略したり抽象化した表現になっているものがあります。
- 本書は製品とともに常に手元に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。
- 本書を紛失または損傷した場合は速やかに弊社までご連絡ください。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れなどに気付いた場合は弊社までご連絡ください。

2. 各部の名称と仕様


構成部品と各部の名称

本製品は次のような部品で構成されています。付属品に不足等はないか点検してください。

●組立時

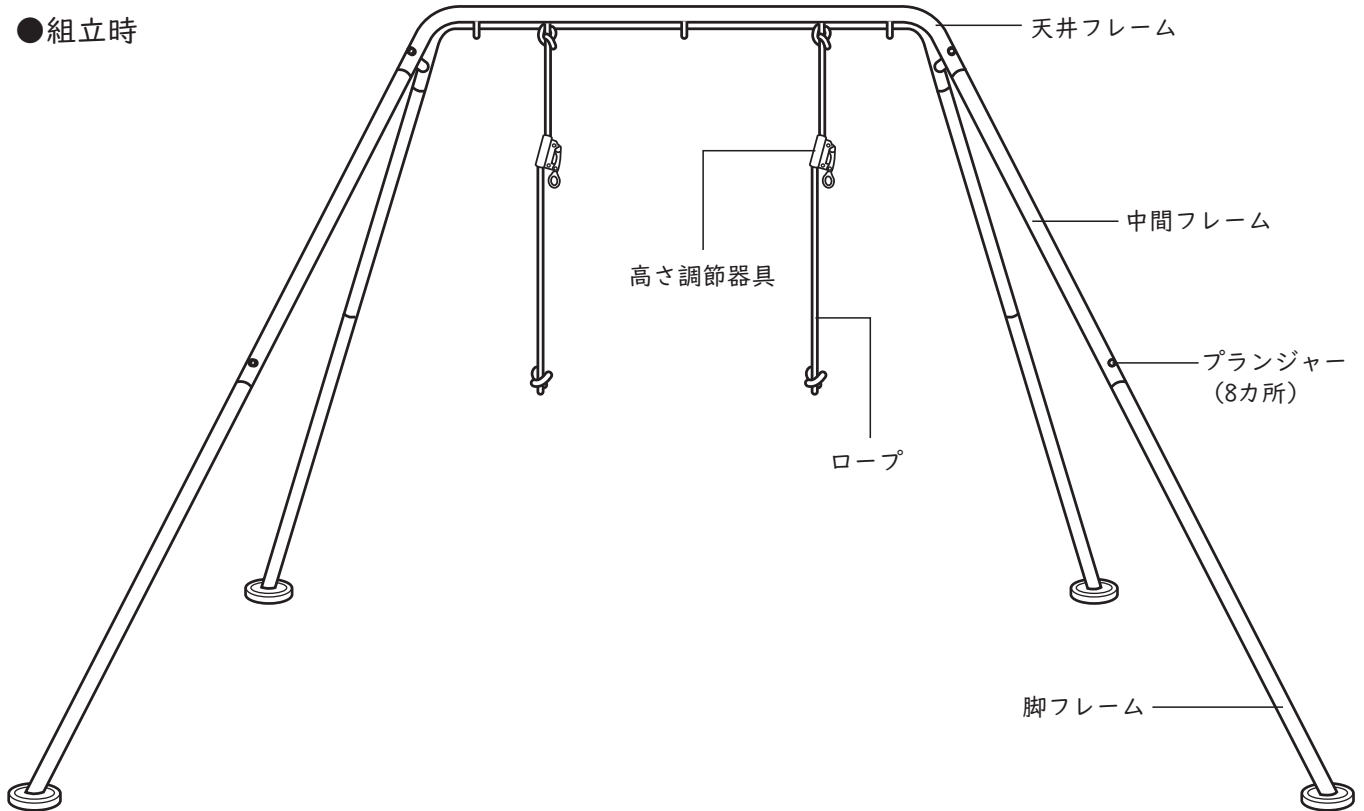

●分解時

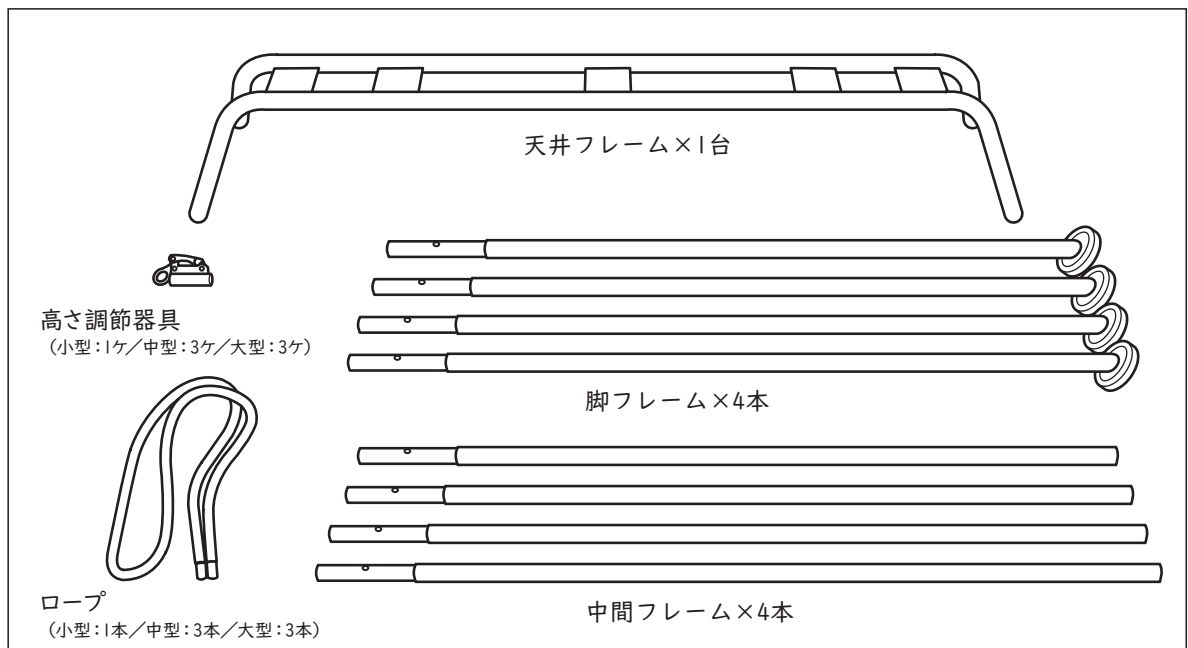

●材 質

名 称	材 質	仕 様
本体フレーム	ステンレス	直径：φ42.7mm×厚さ2.0mm
ロープ	ポリエステル	直径：φ16mm
高さ調節器具	スチール	クロームメッキ
ゴム	合成ゴム	硬度：ショア50

3. 設置方法

フレームの組立方法 (必ず4人以上で組み立てを行ってください)

フレームの正しい差し込み方 (天井フレームに中間フレームを差し込む場合)




差し込む時、指をはさむ恐れがありますので十分注意しながら作業してください。



差し込んだ後、プランジャーが外に出ている事を必ず確認してください。


差し込む前

プランジャーを押し
ながら差し込みます

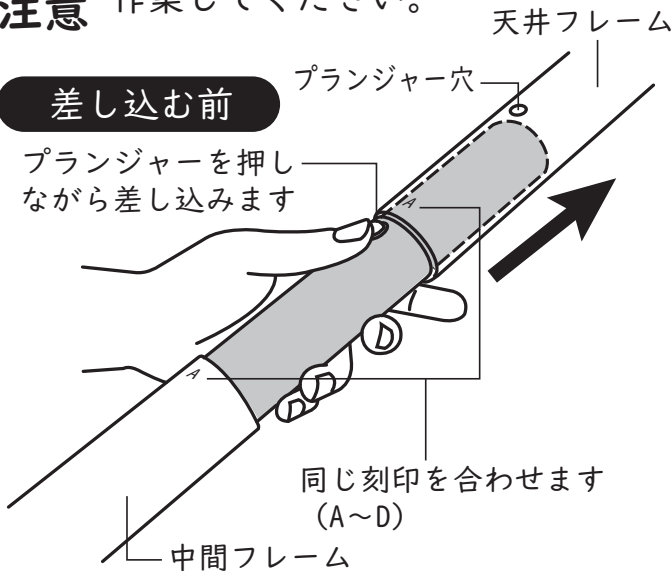

差し込んだ後

プランジャーが
穴から出ている

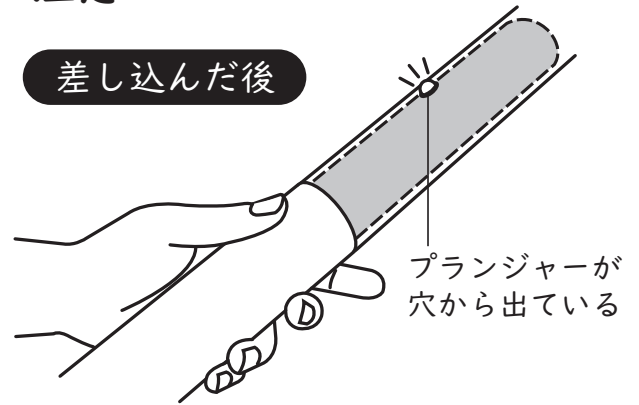

※外す場合は、棒状のものを利用してプランジャーを下に押し込むと抜きやすくなります。


① 平坦な場所を選んでください。

② 天井フレームに中間フレームを差し込みます。(4箇所)

※差し込む時に刻印(A~D)の確認を行ってください。



本製品の設置場所は、十分に使用に耐えうる強度がある場所を選んでください。

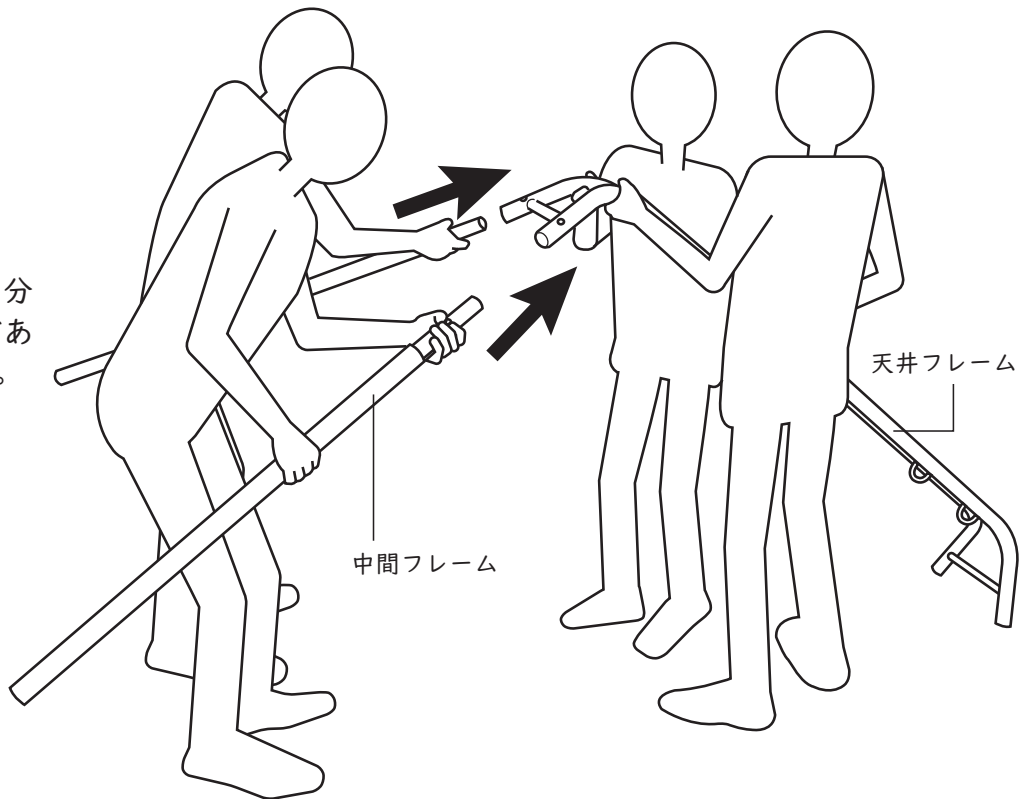


③ 片方にも同様に差し込みます。

※差し込む時に刻印(A~D)の確認を行ってください。



④ 中間フレームに脚フレームを差し込みます。(4箇所)


※差し込む時に刻印(A~D)の確認を行ってください。

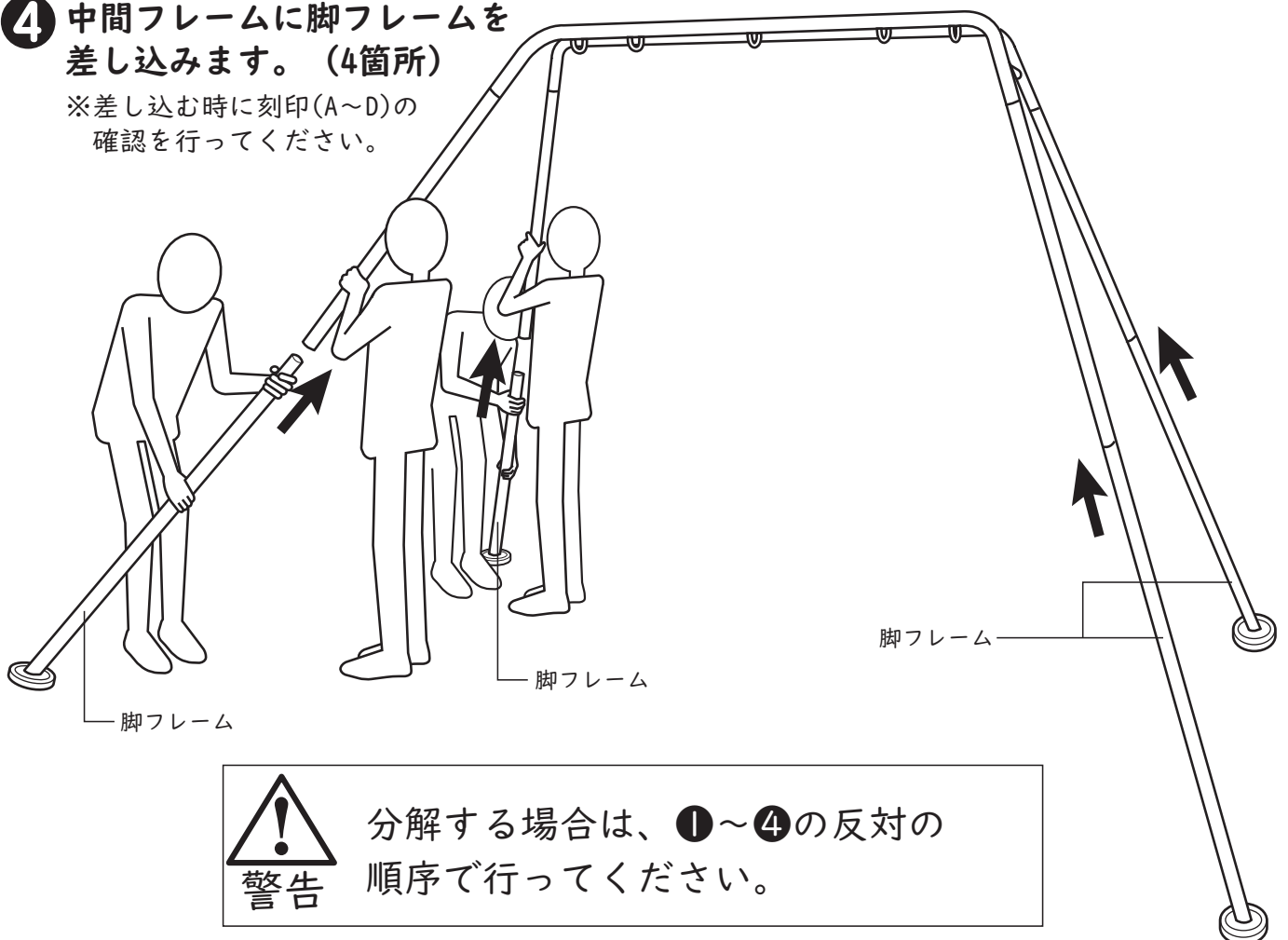

分解する場合は、①～④の反対の順序で行ってください。

ロープの取り付け方法

⑤ 天井フレームにロープを取り付けます。

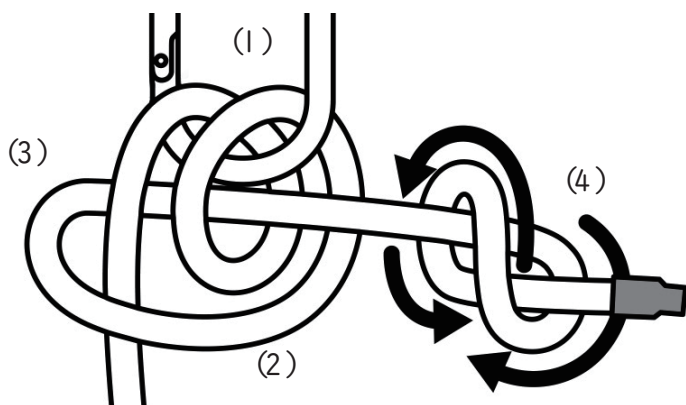

ロープの結び方

途中にスナップを使わず直接結びつけて吊るすことをお勧めします。この結び方は金具をしっかり締め付ける事が出来ます。

ロープの一方を金具に2回(1)巻き付け2つのループの正面に持ってきて(2)、そのループの中に通します(3)。

さらに念のためロープの先端を一つ結びしておく(4)と強く結ぶ事が出来ます。外す際は(2)の部分引っ張りおろすと、楽にゆるめる事が出来ます。



ロープの取り付け方を動画でご覧いただけます。



警告

上記以外の方法でロープを取り付けないでください。上記以外の方法でロープを取り付けると訓練中に結び目がほどけたりロープがすり切れて破損し、落下する恐れがあります。



警告

ロープは、金具と接する面が曲面の部分に取り付けてください。かどばったものなどに取り付けると使用中にロープがすり切れて破損し、落下する恐れがあります。

マットの設置方法

⑥ 本製品の真下にマットを敷きます。



注意

転落時のけがを防止するため、使用時は必ずマットを敷いてください。

高さ調節器具の取り付け方法

⑦ ロープに高さ調節器具を通します。



警告

各遊具の取り付けについては各遊具の取扱説明書をよくお読みの上、取り付けてください。

高さ調節器具

高さ調節器具については、写真のようにフックが下になるように、ロープに通し固定してください。

カラビナ (各遊具に付属)
(別売品)



フック

4. 設置後の点検

以下の項目を点検してください。



警告

●各種の部品は確実に取り付けてください。取り付けが不十分な場合、使用中にはずれて事故等につながる恐れがあります。

- ①設置場所が平坦であるか。
- ②マットが敷いてあるか。
- ③カラビナや高さ調節器具に破損や損傷はないか。
- ④ロープの結び目にゆるみはないか。
- ⑤ロープに損傷や裂け等はないか。
- ⑥その他の異常を発見した場合は使用を直ちに中止し、販売店にご相談ください。
- ⑦異常状態のまま使用しないでください。

5. 日常の保守点検

以下の項目を点検してください。



注意

●保守点検は使用前に本製品使用者または本製品管理者が必ず行なってください。また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。

●保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し弊社に修理交換をご相談ください。

●保守点検が必要な部分

- ・プランジャーに損傷はないか。
- ・ロープの結び目にゆるみはないか。
- ・ロープに損傷や裂け等はないか。
- ・ゴム足に損傷(割れ・ヒビ)やいちじるしい摩耗はないか。
- ・その他の異常を発見した場合も使用を直ちに中止し、販売店に修理交換をご相談ください。
- ・異常状態のまま使用しないでください。

6. お手入れの方法

金属部分

- 日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。

7. 保管方法

- 常温の範囲で保管してください。常温以外で保管すると変形や破損を生じる恐れがあります。
- フレームにサビの発生を防ぐ為に、湿気の少ない風通しのよい場所に保管してください。
- 本製品の上に重いものをのせないでください。製品が変形または破損する恐れがあります。
- 本書は常に製品とともに手元に保管し紛失しないようにしてください。
- 本書を紛失または損傷した場合は速やかに弊社までご連絡ください。

8. 修理・改造について

本製品管理者や本製品使用者による修理・部品交換・改造等は絶対に行なわないでください。
本製品の修理・部品交換・改造等が必要と思われる場合は販売店にご相談ください。

9. 保証書

保証書

本製品は当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規定に基づき無料修理いたします。その際は現品に本保証書を添えて弊社へご提出ください。

品名 : スイングサポートフレーム	
ご購入年月日	
お客様名	
ご住所	〒
TEL	
販売店	
保証期間	1年保証

- (1)ご購入年月日、お客様名や販売店の欄に記入のない場合は無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は、直ちに販売店にお申し出ください。
- (2)本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- (3)この保証書は、本書および保証規定に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- (4)保証期間が過ぎた後の修理等についてご不明の場合は、販売店までお問い合わせください。

※保証規定は次頁をご覧ください。

保証規定

(1)保証期間はご購入の日から1年間です。保証期間内に発生した故障については無料修理致します。

※安心パックを登録された方はこの限りではありません。安心パック用の保証書の保証期間をご参照ください。

(2)保証の対象となる部分はこの製品一式です。ただし、ロープや各部の劣化による故障・損傷、本製品を取り付けた建物への影響は除きます。

(3)無料修理には保証書の提出が必要です。

(4)次の場合には保証できませんが、特にご希望の方には実費にて修理致します。

- ① 保証書を紛失された場合
- ② 誤ったご使用方法による故障・損傷
(※本製品管理者や本製品使用者による修理・部品交換・改造が理由で故障・損傷した場合は修理致しません)
- ③ 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
- ④ 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、不当変更を加えられた場合
- ⑤ ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷

(5)ご相談窓口は販売店にて承ります。

(6)設置する施設を変更した場合は新しいご住所と電話番号を販売店までご連絡ください。

(7)その他

- ① 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ② 本書の再発行はいたしません。

● 販売元

パシフィックサプライ株式会社

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072 (875) 8008 FAX 072 (875) 8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店