

高さ調節器具

この度は「高さ調節器具」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書は器具を安心してご利用いただけるよう、わかりやすく説明してあります。ご利用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様をお願いします。

1. 安全にご使用いただくために

この取扱説明書では色々な絵表示をしています、これは「高さ調節器具」を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。

その表示と意味は次のようになっています、内容をよく理解の上で本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 本製品の耐荷重は 127kg までです。本製品で使用する方の総荷重が 127kg 以下になる範囲でご使用ください。127kg 以上の荷重で使用すると事故等につながる恐れがあります。




注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。
- 指導者は、使用方法や取扱注意事項等が理解できるまで、ご使用にならないでください。
- 指導者のもとでご使用ください。
- 弊社のロープ以外には使用しないでください。太さの違うロープでは滑り止めが十分効かない恐れがあります。
- 本製品は確実に取り付けてください。取り付けが不十分な場合、使用中に落下して事故等につながる恐れがあります。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し販売店に修理交換をご相談ください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。
- 本製品は改良のため予告なしに変更する場合があります。

2. 取り付け方法

- 丸環部分を下にして、グリップ部分をにぎるように上に動かすとロックが解除された状態になります(下図右)。ロックを解除した状態で、本製品にSI用ロープを通して取り付けてください。

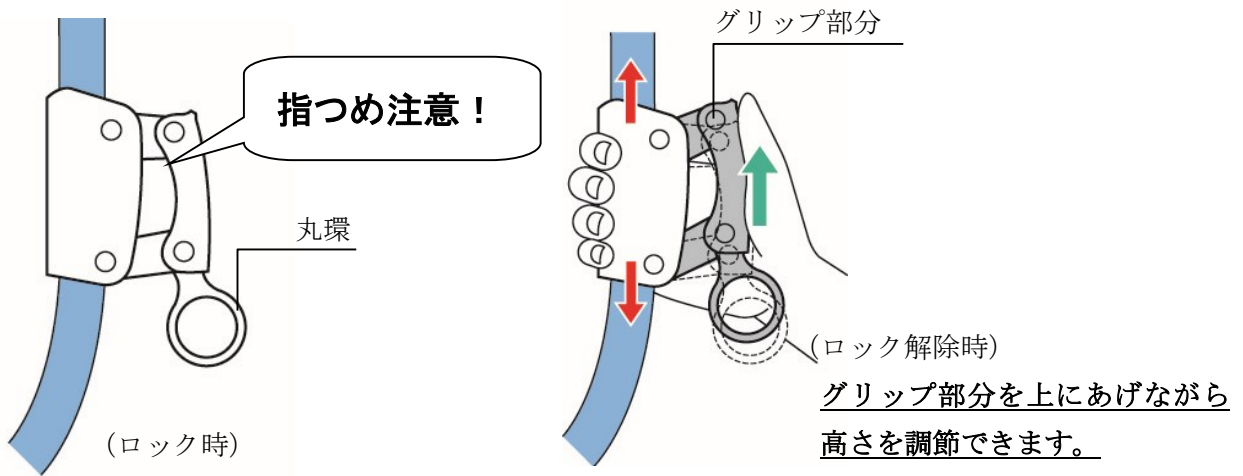

- ロックを解除した状態でスイングの高さを調節してください。その際に、スイングを持ち上げるなど、荷重が本製品にかからないようにしてください。



- 荷重がかかっていない場合には、ロックしている状態でも本製品は上下します。SI用ロープの摩耗につながりますので、本製品を上下させるときはロックを解除させてください。丸環に荷重がかかると、グリップ部分がSI用ロープに食い込むことでしっかりと固定されます。
- 本製品およびスイングがゆれている場合、それらのゆり戻しにご注意ください。不意に身体にあたり事故等につながる恐れがあります。
- 取り付け、取り外しのときは、指をはさんだりしないように注意してください。
- 丸環部分に摩耗があるかどうかを確認するようにしてください。摩耗が激しいときは使用を中止し、交換をご検討ください。

- 販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本社 〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1
TEL 072(875)8008 FAX 072(875)8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2023.4 改訂