

# 感覚統合器具 (バランスボードシリーズ)

(本取扱説明書の対応製品)

バランスボードN型 15mm・30mm・40mm・55mm・70mm  
バランスボードII型



この度は「感覚統合器具バランスボードシリーズ」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
本書は器具を安心してご利用いただけるよう、わかりやすく説明してあります。  
ご利用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。  
また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

製品に関するお問い合わせは本取扱説明書最終ページをご参照ください。  
取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様をお願いします。

# バランスボードについて

---

## バランスボードとは

バランスボードは、両脚立ち、片脚立ち、前立ち、後立ち、側方立ち、回転、飛び乗り、腹臥位でのバランス、座位でのバランスなどの運動ができます。器具の特性を生かして頂き、自由な発想でお子さんの可能性を展開していきましょう。

## 目次

|                  |        |
|------------------|--------|
| 1. 安全にご使用いただくために | 3 ページ  |
| 2. 梱包の解き方        | 5 ページ  |
| 3. 各部の名称と仕様      | 6 ページ  |
| 4. 設置            | 7 ページ  |
| 5. 設置後の点検        | 7 ページ  |
| 6. 使用方法          | 8 ページ  |
| 7. 日常の保守点検       | 10 ページ |
| 8. お手入れの方法       | 10 ページ |
| 9. 保管方法          | 10 ページ |
| 10. 修理について       | 11 ページ |
| 11. 廃棄方法         | 11 ページ |
| 12. 保証書          | 11 ページ |

# 1. 安全にご使用いただくために

「感覚統合器具バランスボード」の機能を十分に生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく読み内容を理解してください。

その後大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは「感覚統合器具バランスボード」を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

## 1-1. 警告に関する事項



### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 本製品を使用する場合は必ず医療関係従事者などの専門家のもとで行ってください。また、使用中は必ず作業療法士などのリハビリテーション関連スタッフが付き添ってください。
- 本製品の耐荷重は70kgまでです。本製品で使用する方の総荷重が70kg以下になる範囲でご使用ください。70kg以上の荷重で使用すると事故等につながる恐れがあります。
- 本製品に飛びのったり、飛びおりたりしないでください。事故等につながる恐れがあります。
- 各種の部品は確実に取り付けてください。取り付けが不十分な場合、使用中に金具類が外れて事故等につながる恐れがあります。
- 車輪に指を近づけないでください。指が車輪に挟まる恐れがあります。
- 付属ロープの結び目は絶対にほどかないでください。使用中にはずれて事故等につながる恐れがあります。
- 本製品を使用している時は、操作者以外近づかないでください。不意に身体にあたり事故などにつながる恐れがあります。
- 本製品を使用する場合は、使用方法や取扱注意事項等が理解できるまで本製品をご使用にならないでください。
- 本製品を使用していない場合は、安全な場所に保管してください。

# 1. 安全にご使用いただくために

## 1-2. 注意に関する事項



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、  
傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 保守点検は使用前に本製品使用者または本製品管理者が必ず行なってください。  
また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し販売店に修理交換をご相談ください。
- 本製品を修理改造しないでください。破損等が生じた場合は必ず弊社へ修理交換をご相談ください。
- 常温の範囲で使用してください。常温範囲以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 直射日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブ等）の近くで使用しないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。変形した製品は使用しないでください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。
- 本書中の図は一部を省略したり抽象化した表現になっているものがあります。
- 本書は製品とともに常に手元に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。
- 製品の不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場合があります。不明な事柄については弊社まで問い合わせてください。
- 本書を紛失または損傷した場合は速やかに弊社までご連絡ください。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁記載漏れなどに気付いた場合は弊社までご連絡ください。
- 本製品は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で転載複製することを禁止します。

## 2. 梱包の解き方

---

### 2-1. ダンボールの開梱

本製品はダンボール箱で配送されます。箱の中でエアークッションに包まれています。開梱の際にカッター等で製品を傷つけないように注意してください。



### 注意

開梱の際にカッター等で製品を傷つけないようにしてください。

### 2-2. 内容物(構成部品)の確認

ダンボール箱の中に「3. 各部の名称と仕様」(6 ページ 参照)に記載されている部品類が全て入っているか確認します。

### 2-3. 製品の確認


製品に傷や損傷がないか確認します。もしなにかありましたら、販売店(最終ページ参照)へお問合せください。

### 3. 各部の名称と仕様

#### 構成部品と各部の名称

本製品は次のような部品で構成されています。付属品に不足等はないか点検してください。

バランスボードN型 15mm・30mm・40mm・55mm・70mm

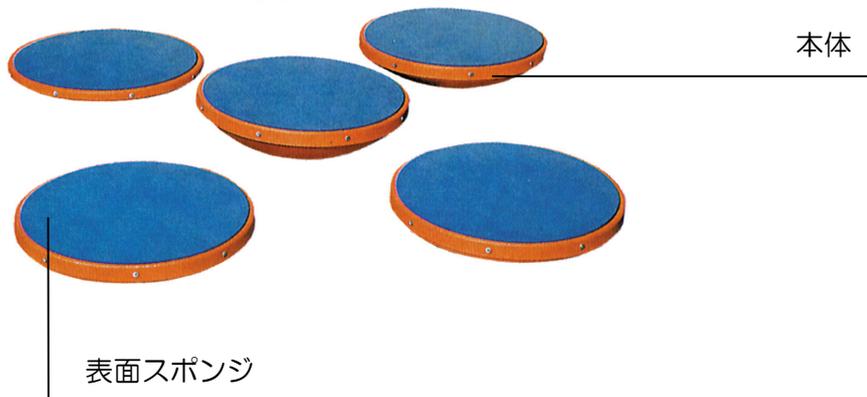

耐荷重:各70kg

バランスボードⅡ型



耐荷重:130kg

| 製品名                                       | 構成部品   | 材質       | 仕様                |
|---|--------|----------|-------------------|
| バランスボードN型<br>15mm・30mm・40mm・<br>55mm・70mm | 本体     | プラスチック   | 直径30mm            |
|   | 表面スポンジ | 発砲ポリエチレン | 厚さ5mm             |
| バランスボードⅡ型                                 | 天板     | ターポリン    | ウレタンフォーム10mm・15mm |
|   | 本体フレーム | スチール     | シルバー塗装            |

## 4. 設置

---

設置する前に

設置場所を確認してください。



### 警告

- 本製品を使用する場合は周りに人や物が無いことを確認してください。不意に身体に当たったり、転倒したり等の事故などにつながる恐れがあります。
- 各種の部品が確実に取り付けであることを確認してください。取付けが不十分な場合、使用中に金具などが外れて事故などにつながる恐れがあります。



### 注意

- 本製品に鋭利な物を当てないでください。カバーが破れて、事故につながる恐れがあります。
- 常温の範囲でご使用ください。常温以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブなど）の近くで使用しないでください、熱により変色や変形する恐れがあります。変形した製品は使用しないでください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。

## 5. 設置後の点検

---



### 注意

- 設置後の点検は使用前に操作者または本製品管理者が必ず行ってください。また、設置後の点検を行っていない製品は使用しないでください
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し、販売店に修理交換をご相談ください。

#### ■チェック項目

- 十分に使用に耐えうる強度がある床・場所に本製品が置かれているか。
- 製品の下に手・足や物がないか。
- 周りに人や物がないか。
- 付属品が取付けられているか。

## 6. 使用方法

### 6-1. 本製品を使用する前に



## 警告

- 本製品を使用する場合は必ず医療関係従事者などの専門家の指導のもとで行ってください。また、使用中は必ず、作業療法士などのリハビリテーション関連スタッフが付き添ってください。
- 使用例以外の方法で使用しないでください。事故等につながる恐れがあります。
- 本製品を使用する場合は周りに人や物が無いことを確認してください。不意に身体にあたり、転倒などの事故などにつながる恐れがあります。
- 本製品は絶対に分解しないでください。使用中に外れて事故などにつながる恐れがあります。
- 各種の部品が確実に取り付けであることを確認してください。取付けが不十分な場合、使用中に金具などが外れて事故などにつながる恐れがあります。
- 本製品が揺れているときは、操作者以外近づかないでください。不意に身体にあたり事故などにつながる恐れがあります。
- 本製品を使用する場合は、使用方法や取扱注意事項などがご理解いただけるまでご使用にならないでください。
- 本製品を修理改造しないでください。破損などが生じた場合は必ず販売店へ修理交換をご相談ください。
- 本製品に鋭利な物を当てないでください。カバーが破れて、事故につながる恐れがあります。
- 常温の範囲でご使用ください。常温以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブなど）の近くで使用しないでください。熱により、変色や変形する恐れがあります。変形した製品は使用しないでください。
- 保守点検は使用前に操作者または本製品管理者が必ず行ってください。また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し販売店に修理交換をご相談ください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 転落時のけがを防止するため、使用時は本製品の真下に必ずマットを敷いてください。
- 本製品の耐荷重は「3. 各部の名称と仕様」の項目に記載の各製品の耐荷重に従い、製品を使用する方の総荷重が各製品の耐荷重以下になる範囲でご使用ください。それ以上の荷重で使用すると事故等につながる恐れがあります。

# 6. 使用方法


## 6-2. 使用例

使用例

### ● バランスボードN型



座位でのバランス感覚

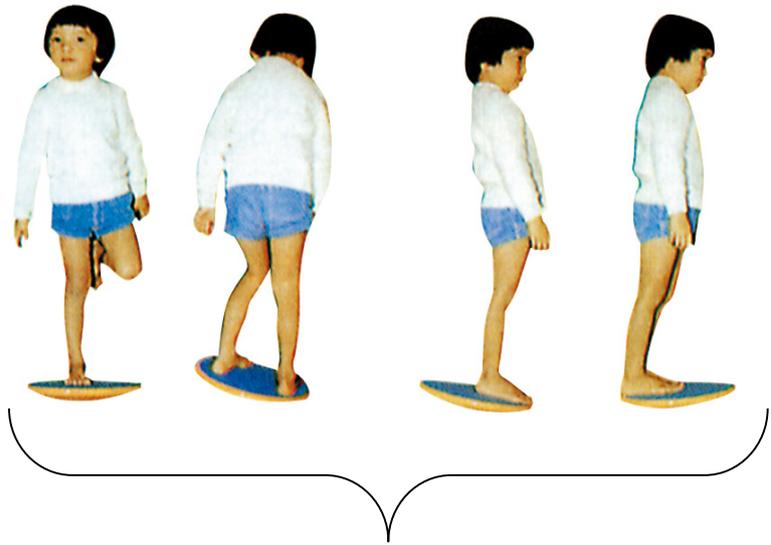

両脚立ち、片脚立ち、側方立ち、前立ち、後立ち

### ● バランスボードⅡ型



腹這いで揺れる

# 日常の保守点検

下記の保守点検を行ってください。また、保守点検を行っていない場合は使用しないでください。



## 注意

- 保守点検は使用前に操作者または本製品管理者が必ず行ってください。また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し、販売店に修理交換をご相談ください。

### ■チェック項目

- 十分に使用に耐えうる強度がある床・場所に本製品が置かれているか。
- 製品の下に手・足や物がないか。
- 周りに人や物がないか。
- 付属品が取付けられているか。

## 8. お手入れの方法

### 8-1. 本体カバー

- ほこりなどの汚れは、ブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- 日常のお手入れは、乾いたやらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- シンナーやアルコール系の溶剤は、絶対に使用しないでください。
- 飲み物をこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れがとれなくなります。

### 8-2. 金属部分

- 日常のお手入れは、乾いたやらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。

## 9. 保管方法

- 常温の範囲で保管してください。常温以外で保管すると変形や破損を生じる恐れがあります。
- 湿気の少ない、風通しのよい場所に保管してください。
- 本製品の上に重い物をのせないでください。製品が変形または破損する恐れがあります。
- 本書は常に製品とともに手元に保管し紛失しないようにしてください。
- 本書を紛失または損傷した場合は速やかに弊社までご連絡ください。

## 10. 修理について

- 無断で修理・部品交換・改造などは絶対に行わないでください。
- 本製品の修理・部品交換・改造などが必要と思われる場合は販売店にご相談ください。

## 11. 廃棄方法

- 本製品の材質は、「3. 各部の名称と仕様」のページを参照ください。
- 廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。

## 12. 保証書

# 保証書

本製品は品質管理・検査のもとに皆様にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規定に基づき無料修理いたします。その際は現品に本保証書を添えてご購入の販売店へご提出ください。

|        |      |
|--------|------|
| 品名     |      |
| ご購入年月日 |      |
| お客様名   |      |
| ご住所    |      |
| 電話番号   |      |
| 販売店    |      |
| 保証期間   | 1年保証 |

- ご購入年月日、お客様名の欄に記入のない場合は無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。ご記入のない場合は、直ちに販売店にお申し出てください。
- 本書は再発行はしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書および保証規定に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間が過ぎた後の修理などについてご不明の場合は、販売店までお問合せください。

※保証規程は次ページをご覧ください。

# 保証規程

(1)保証期間はご購入の日から1年間です。保証期間内に発生した故障につきましては無料修理いたします。

※安心パックを登録された方はこの限りではありません。安心パック用の保証書内容の保証期間をご参照下さい

(2) 保証の対象となる部分はこの製品一式です。ただし、本製品を取り付けた建物への影響や、布地・張地の劣化による故障・損傷や鋭利な物による破損、裂傷は除きます。消耗品についても除きます。

(3)無料修理には保証書の提出を要します。

(4)次の場合には保証できませんが、特にご希望の方には実費にて修理致します。

その際、出張・配送費用をいただく場合があります。

- ① 保証書を紛失された場合
- ② 誤ったご使用方法による故障・損傷
- ③ 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
- ④ 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合
- ⑤ ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷

(5)ご相談窓口は販売店にて承ります。

(6)転居・引越し・譲渡をされる場合は新しいご住所と電話番号を販売店までご連絡ください。

(7)その他

- ①本書は日本国内においてのみ有効です。
- ②本書の再発行はいたしません。

●販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本 社

〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1  
TEL 072(875)8008 FAX 072(875)8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2022.10 改訂