


ブースト

携帯型拡大読書器

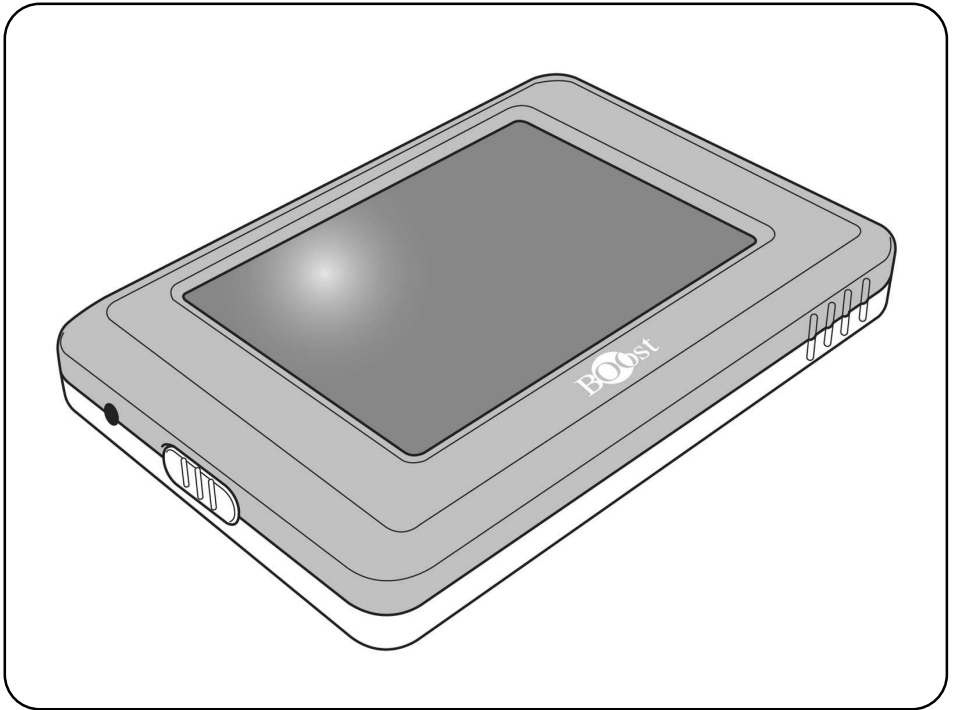

この度はエーブルネット社製携帯型拡大読書器「ブースト」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書は機器を安心してご使用いただけるよう、分かりやすく説明しています。ご使用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

 Pacific Supply

- 製品に関するお問合せ先は裏面をご覧ください。
- 取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。
- 必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様をお願いします。

「ブースト」について

「ブースト」とは…

- 携帯性に優れた簡易型拡大読書器です。
- 3 モードの画像切り替えと画面固定機能があります。
- 拡大倍率は 2 種類の切り替えができます。

目次

1. 安全にご使用いただくために…………… 2 ページ
2. 各部の名称と仕様…………… 4 ページ
3. 使用方法…………… 5 ページ
4. お手入れ・保管・廃棄…………… 7 ページ

1. 安全にご使用いただくために

「ブースト」を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

1-1. 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは「ブースト」を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐ目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

1-2. 警告に関する事項



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



警告

「ブースト」の使用により障害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。



警告

修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。



警告

使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。



警告

使用する方または支援する方は「ブースト」の使用法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。



警告

本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

1-3. 注意に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。



本製品は精密な電子部品が組み込まれております。以下のような場所で本製品を使用又は保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてください。

- (1) 直射日光のあたる場所、高温多湿な場所、ほこり・ちりの多い場所
- (2) 極端かつ急激な温度や湿度の変化にさらされる場合
- (3) 冷暖房機器・加湿器のそば
- (4) 水に濡れやすい場所
- (5) 振動のある場所



濡れた手で「ブースト」に触れないでください。故障及び感電の恐れがあります。



必ず付属のACアダプターにて充電してください。他のACアダプターをご使用されると、故障の原因となります。



「ブースト」本体に唾液、水、粉塵、ごみ等がかからないようにしてください。動作不良や、故障の原因となります。



本品を強くたたいたり、振動させたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



ベンジン、シンナー、アルコール等で拭かないでください。材質の変色や変形の原因となります。



炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブなど）の近くで使用しないでください。本体内部の電子部品が破損したり、熱により変形を起こす原因となります。



酸素やオゾン等、腐食性ガスの発生する場所でのご使用はお止めください。



本製品の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問い合わせください。



本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気づいた場合は販売店までご連絡ください。



本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。



本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。




本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

2. 各部の名称と仕様

2-1. 構成部品と各部の名称

「ブースト」は次の部品で構成されています。付属品に不足はないかご確認ください。

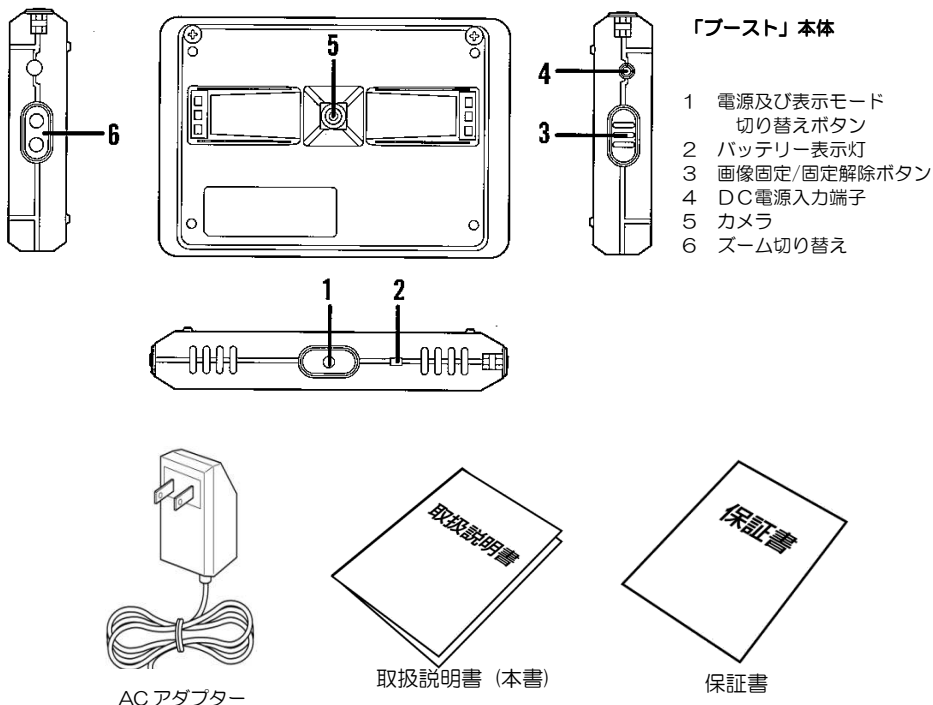

2-2. 製品仕様

部分名称	仕様	
ブースト 本体	高さ×幅×奥行	約 105×72×17(mm)
	重量	約 120g
	拡大倍率	1.9~13.6倍
	拡大レベル	2段階
	画面	3.5インチ TFT 液晶
	充電時間	2.5~3時間
	使用時間	約 2.5時間
	表示モード	3種類(カラー、白黒、白黒反転)
	画面固定機能	あり

3. 使用方法

3-1. 使用する前に



警告

「ブースト」の使用により障害を生じる可能性があります。使用中に、身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。



警告

修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。



警告

使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。



警告

使用する方または支援する方は「ブースト」の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。



警告

本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

3-2. 本体の電源を ON にする

電源を入れるには、電源ボタンを 4 秒押し続けます。電源を切るには、電源ボタンを 4 秒押し続けます。
最適な画質を見る為に、ブーストをご覧になる物体から 3cm 程離してください。

3-3. 拡大倍率の指定

本体右側面のズーム切替ボタンを押すと倍率が切り替わります。拡大倍率は 1.9 倍から 13.6 倍です。

3-4. 表示モードの切り替え

フルカラーモード：物体をフルカラーで表示します。
白黒反転モード：黒字の背景に絵や文字が白く表示されます。
白黒モード：背景とのコントラスト（明暗差）を高めて表示します。白地の背景に絵や文字が黒く表示されます。

3-5. 画面の固定

画像固定ボタンを押すと、画面に表示されている映像が固定されます。クリアな画像で確認することができます。この状態でも、表示モードを切り替えることができます、拡大倍率の切り替えはできません。

3-6. バッテリー表示灯

表示モード切替ボタンの隣の LED 表示灯は、バッテリー表示灯です。

表示灯の種類

- ・赤の点灯：バッテリーの充電が必要であることを示します。
- ・緑の点灯：バッテリーが充電中であることを示します。満充電に達すると表示灯は自動的に消えます。

3-7. 使用場面の一例

文字の小さな文書を読む方
照明の光が弱いレストランでメニューを読む方
新聞や雑誌をゆっくり読んでいる高齢者の方

3-8. 充電について

ブーストは充電式です。充電には必ず付属のACアダプターをご使用ください。他のACアダプターをご使用されると、ブースト本体が故障する原因となります。

4. お手入れ・保管・廃棄

- 「ブースト」のお手入れの際は、固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。カメラのレンズには手を触れないでください。洗浄剤や研磨剤はキズの原因になりますので使用しないでください。
- 「ブースト」は湿気やほこりの多い場所、5 度以下、あるいは40 度以上の高温になる場所や振動のある場所には、保管しないでください。故障の原因となります。
- 「ブースト」が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- 「ブースト」を廃棄する際は、各自自治体の規則に従ってください。

(販売元)

パシフィックサプライ株式会社

大阪営業所	〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1 TEL 072 (875) 8011 FAX 072 (875) 8015
札幌営業所	〒003-0023 札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F TEL 011 (218) 5801 FAX 011 (218) 5805
盛岡営業所	TEL 019 (661) 5407 FAX 019 (661) 5408
東京営業所	〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-12 グレイスビル2F TEL 03 (3352) 0757 FAX 03 (3355) 3154
名古屋営業所	〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西 3-5 TEL 0568 (34) 2696 FAX 0568 (34) 2697
広島営業所	〒733-0035 広島市西区南観音 7-5-13 日舞ビル中田1F TEL 082 (293) 6255 FAX 082 (293) 6299
福岡営業所	〒812-0054 福岡市東区馬出 2-2-12 TEL 092 (641) 8151 FAX 092 (641) 0444

<http://www.p-supply.co.jp/>

(販売店)



※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。