

# 保証書

品名	CSTレーニング			
お客様	ご住所 〒			
	(フリガナ)			
	お名前			
ご購入年月日	西暦	年	月	日
販売店名				
保証期間	ご購入日より 2ヶ月間			

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、弊社もしくはご購入の販売店までご連絡ください。
- 保証期間が過ぎた後の故障等についてご不明の場合、弊社またはご購入の販売店までお問い合わせください。

## 保証規程

1. 保証期間はご購入日から2ヶ月間です。保証期間内に発生した故障については、無償修理致します。
2. 無償修理には、保証書の提出を要します。
3. 次の場合には保証は致しかねます。
  - (1) 保証書を紛失された場合
  - (2) 取扱説明書に記載されていない誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造・分解による故障・損傷
  - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
  - (4) 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合
  - (5) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
4. ご相談窓口は、弊社営業所またはご購入の販売店にて承ります。
5. 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無償修理致します。
6. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
7. 保証書の再発行はいたしません。

パワーファインド社 正規販売代理店

**パシフィックサプライ株式会社** (本社) 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.072-875-8008(代) FAX.072-875-8010(代)

2015.06

 BAUERFEIND®

# CSトレーニング

## 取扱説明書



## SUPPORTING ATHLETES

バウアーファインドのサポーターに関しては、  
下記サイトにも多くの情報を掲載しています。

バウアーファインド 特設サイトはこちら ▶

<http://www.p-supply.co.jp/bauerfeind/index.html>



バウアーファインド フェイスブックはこちら ▶

<http://www.facebook.com/BauerfeindJPN>



パウアーファインド社発行の取扱説明書（多言語対応版）を製品へ封入しておりますが、日本語ページについては、こちらの取扱説明書をご覧ください。



## CSトレーニング



### 注意

- 装着の際は、手が濡れていないことを確かめください。また、爪をひっかけることのないよう、お気をつけください。過剰な力を加えて引っ張りあげると、製品が破損するおそれがあります。詳しくは下記装着方法をご確認ください。
- 脂分やクリーム、軟膏などが製品に付着しないように注意してください。
- サイズの合わないシューズ等でストッキング生地を傷付けることのないよう、ご注意ください。
- 本製品は消耗品です。ご使用とともに劣化が生じます。正しい使用のもと最長6ヶ月を目安としてお使いいただくことをお勧めいたします。

CSトレーニングは筋緊張と足関節を同時にコントロールするソックスです。


- 運動中の筋肉のプレを調整します。
- アキレス腱への摩擦や圧迫を防ぎます。
- 足首周辺のクロスステーピング効果により関節の安定性とコントロール性が向上します。

### 主な 適応

- \* 脚のむくみ \* 筋肉痛 \* 捻挫の予防(完全に予防するものではありません)

## CSトレーニングの装着方法

**図1** かかと部分が表にくるように裏返します。足底部を中に入れ、つま先・足の甲を内部へ滑るようにしてフィットさせます。

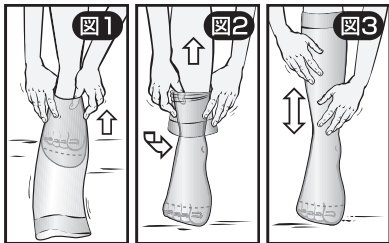

**図2** 完全にかかと部分までくるように上げながら伸ばします。かかととつま先が正しい位置に沿っているか、確認してください。

**図3** ニット素材のソックス部分を注意しながらしっかりとつかみ、ニット地が脚部に均等にくるよう、少しずつ上げながら履き、製品上部のゴム部分を引っ張らないでください。

## お手入れの方法



### 注意

- 洗濯は**中性洗剤**を使用して、**30℃以下のお湯**で行なってください。
- 洗濯機使用時はネットに入れて洗濯してください。
- ドライヤーやヒーターでは乾かさず、日陰で自然乾燥させてください。
- ドライクリーニングは行なわないでください。



洗濯機使用時  
ネットに入れて  
洗濯可



×漂白剤



×アイロン




×ドライクリーニング



×乾燥機

### サイズ (cm)

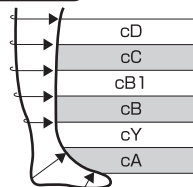

サイズ	S	M	L
cD	29~38	32~42	34~45
cC	31~40	34~44	37~47
cB1	25~31	27~34	29~37
cB	20~22	22~25	25~28
cY	29~33	31~35	34~40
cA	19~24	22~27	25~31

\*本製品は改良のため、予告なく変更を行う場合があります。

\*廃棄については各自自治体の指示に従ってください。