

保証書

品名	ゲニユTrain P3			
お客様	ご住所 〒			
	(フリガナ)			
	お名前			
ご購入年月日	西暦	年	月	日
販売店名				
保証期間	ご購入日より 2ヶ月間			

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、弊社もしくはご購入の販売店までご連絡ください。
- 保証期間が過ぎた後の故障等についてご不明の場合、弊社またはご購入の販売店までお問い合わせください。

保証規程

1. 保証期間はご購入日から2ヶ月間です。保証期間内に発生した故障については、無償修理致します。
2. 無償修理には、保証書の提出を要します。
3. 次の場合には保証は致しかねます。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 取扱説明書に記載されていない誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造・分解による故障・損傷
 - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - (4) 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合
 - (5) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
4. ご相談窓口は、弊社営業所またはご購入の販売店にて承ります。
5. 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無償修理致します。
6. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
7. 保証書の再発行はいたしません。

パワーファインド社 正規販売代理店

パシフィックサプライ株式会社 (本社) 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.072-875-8008(代) FAX.072-875-8010(代)

2015.06

ゲニユTrain P3 取扱説明書



SUPPORTING ATHLETES

バウアーファインドのサポーターに関しては、
下記サイトにも多くの情報を掲載しています。

バウアーファインド 特設サイトはこちら ▶

<http://www.p-supply.co.jp/bauerfeind/index.html>



バウアーファインド フェイスブックはこちら ▶

<http://www.facebook.com/BauerfeindJPN>



パウアーファインド社発行の取扱説明書（多言語対応版）を製品へ封入しておりますが、日本語ページについては、こちらの取扱説明書をご覧ください。

ゲニューTrain P3



注意

- スポーツ時など、激しい運動をされる際にお使いください。
- 長時間身体を動かさない（座るなど）時には、使用をお控えください。

ゲニューTrain P3は膝の不安から解き放つ、スポーツに最適なサポーターです。

- ひざの上のパッドが膝蓋骨を正しい位置にキープ。
- 三角パッドが太もも外側の筋肉と靭帯の痛みを和らげます。
- ゲニューTrainよりもサポート感が強いタイプです。



主な適応

- * 膝蓋骨周辺の痛み、変位、脱臼
- * ランナー膝（腸脛靭帯の痛み）
- * 不安定症

ゲニューTrain P3の装着方法

- 図1** 本体上部を持ち、足に通します。
- 図2** 膝まで引っ張り上げ、シリコンインサートがしっかり膝蓋骨を囲むように調整してください。
※その際、爪等でサポーター本体を傷つけないようにご注意ください。
- 図3** 大腿部内側のストラップを引っ張ることで、膝蓋骨外側のサポートを調整することができます。
※ストラップの引っ張りすぎにご注意ください。
- 図4** サポーターを外す際には、下部を引っ張るようにして外してください。
※上部をめくって外すのはおやめください。
ステーや本体の破損につながるおそれがあります。

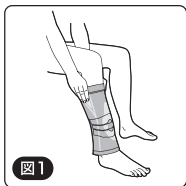


図1

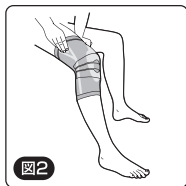


図2

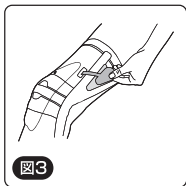


図3



図4

お手入れの方法



注意

- 洗濯は中性洗剤を使用して、30℃以下のお湯で行なってください。
- 洗濯機使用時はネットに入れて洗濯してください。
- ドライヤーやヒーターでは乾かさず、日陰で自然乾燥させてください。
- ドライクリーニングは行わないでください。



洗濯機使用時
ネットに入れて
洗濯可



×漂白剤



×アイロン



×ドライクリーニング



×乾燥機

サイズ (cm)



※本製品は改良のため、予告なく変更を行なう場合があります。
※廃棄については各自治体の指示に従ってください。

サイズ	周囲①	周囲②
1	28~31cm	39~42cm

サイズ	周囲①	周囲②
2	31~34cm	42~45cm

サイズ	周囲①	周囲②
3	34~37cm	45~48cm

サイズ	周囲①	周囲②
4	37~40cm	48~51cm

サイズ	周囲①	周囲②
5	40~43cm	51~54cm

サイズ	周囲①	周囲②
6	43~46cm	54~57cm