


使用する方及び介助する方用取扱説明書



ステップバイステップ  
ウィズレベル

Step-by-Step with Levels

## 取扱説明書

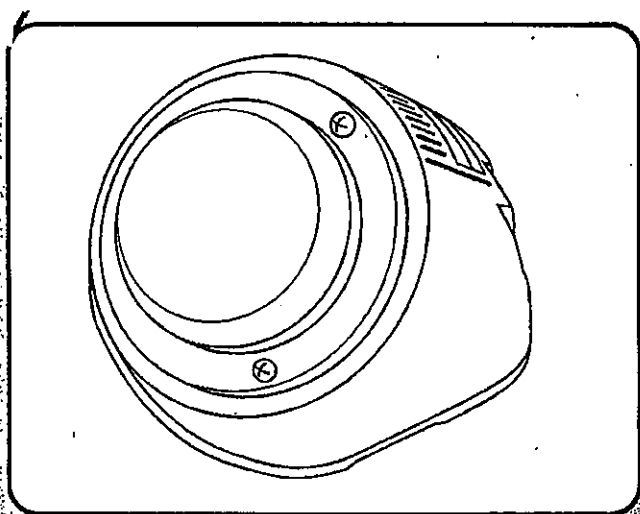

この度は「ステップバイステップウィズレベル」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に活かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。その後、大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読み下さい。

**Pacific Supply**

製品に関するお問い合わせは、本取扱説明書最終ページをご参照下さい。

転載複写厳禁




# 目次

1.「ステップバイステップウィズレベル」とは	P 4
2.安全にご使用していただくために…	P 6
絵表示について	P 6
警告に関する事項	P 7
注意に関する事項	P 9
3.各部の名称と仕様	P 12
4.電池の入れ方	P 16
5-1.メッセージの録音方法	P 18
5-2.新たなレベルを追加・録音したい場合	P 20
6-1.メッセージの再生方法	P 24
6-2.次のレベルのメッセージを再生する場合	P 25
6-3.希望のレベルに手早く合わせて再生する	P 26
6-4.繰り返してメッセージを再生する	P 28
7-1.トイケーブルを使ってみよう!	P 30
7-2.メッセージ再生後、おもちゃを作動させる方法	P 31
8.どんな使い方ができるの?	P 38
9.車いすなどへ本体の取り付けについて	P 40
10.「ステップバイステップウィズレベル」を2台以上つなぎ合わせて 固定する場合	P 41
11.お手入れと保管	P 42
12.故障かな?と思ったら	P 43

# 1 「ステップバイステップウィズレベル」とは・・・

メッセージを録音・再生することで簡単にコミュニケーションができます。

「あいさつする時」や、「食事をする時」などのように場面毎のメッセージをグループ分けして録音・再生することができます。工夫してレベル機能をご活用下さい。

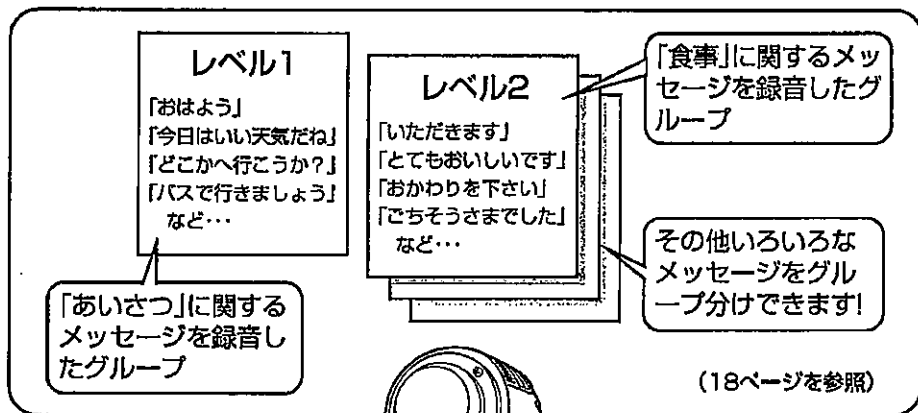

新しいレベル

レベル A B C

レベルはいくつでもつくれます!  
(20ページを参照)

変わったレベル

僕の番だ!

次のレベル

レベルの切り替えが簡単!  
(25ページを参照)

いきなり僕の番!


レベル 3 1 2

希望するレベルへすぐ移動可能!  
(26ページを参照)


●メッセージは合計で最大75秒間録音できます(スピーカーとマイクがついています)

**75秒間**  
録音OK!

接続した電化製品や、おもちゃなどをスイッチ操作する外部出力機能があります。

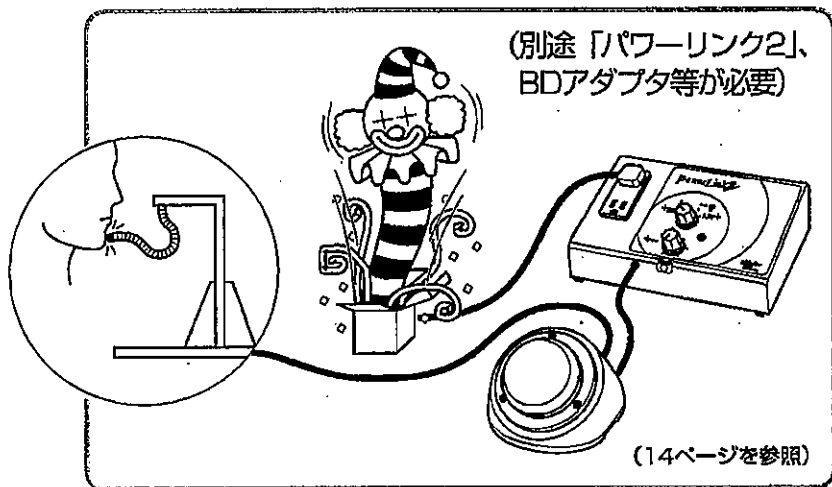

メッセージを再生しながら接続した電化製品・おもちゃなどをスイッチ操作することもできます。

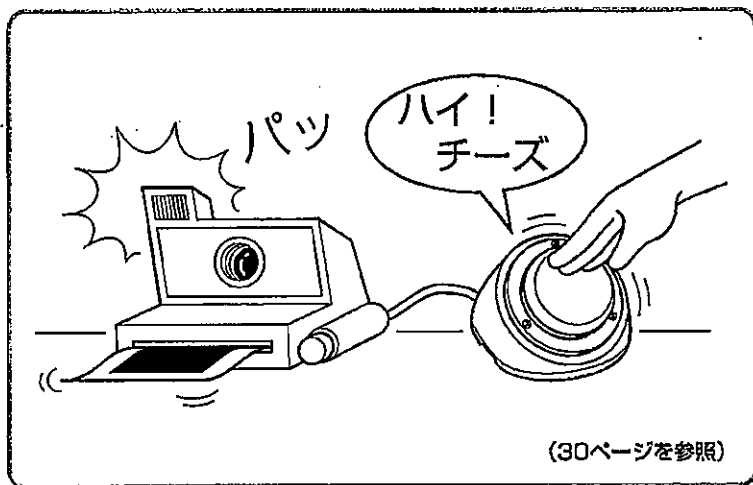




## 2 安全にご使用していただくために


本製品の機能を十分に生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。その後、大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読み下さい。

### 絵表示について

この取扱説明書では、色々な絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人に加える恐れのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっていますので、内容をよくご理解の上、本文をお読み下さい。

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示します。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容」を示します。

「」の記号は「気をつけてほしいこと(注意)」の内容です(警告を含む)。

「」の記号は「してはいけないこと(禁止)」の内容です。

## 「警告」に関する事項



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示します。

### 接続する機器に関して

- ・ ドライヤー・暖房器具などの熱器具や、ミキサー・扇風機などの回転機器を接続する場合は十分取扱いに注意して下さい。一人のみで使用せず、介助の方が一緒に付き添うようにして下さい。
- ・ 本製品と接続する機器についてはその取扱説明書をよくお読みになり、その指示に従って下さい。

※一部の電化製品の接続には別途「パワーリンク2」が必要です。

### 万一、異常や故障が発生した場合は

次のような場合はすぐに使用をやめ、乾電池を取り外して、販売店にご連絡下さい。そのまま使用されますと、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電につながる恐れがあります。

- ・ 煙が出ている、異常に熱い、変なにおいがする
- ・ 本製品内部に水や異物が入った
- ・ 音がでない、スイッチ機能が働かない（故障状態）
- ・ 落下したり、踏んだりして外装ケースが破損したり、本製品に大きな衝撃を与えた

### 設置・使用する場所に関して

- ・ 生命にかかわる場合に緊急用として本製品を使用しないで下さい。


## 「警告」に関する事項



### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示します。

#### 乾電池に関して

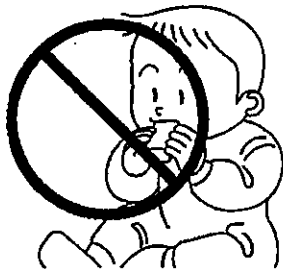

乾電池は乳幼児や幼児の手の届く所に置かないようにして下さい。万一、飲み込んだ時は、すぐ医師にご相談下さい。

#### その他

- 本製品を使用する方または介助する方は、使用方法や取扱注意事項が理解できるまで本製品を使用しないで下さい。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従って下さい。
- 本書に規定した方法以外での使用方法に対して安全性は保証できません。
- 本書中の図は一部を省略したり抽象化した表現になっているものがあります。



## 「注意」に関する事項



# 注意


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容」を示します。

### 設置・使用する場所に関して


- 次のような場合は内部部品が破損したり、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電につながる恐れがありますので、ご注意ください。




油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い所で使わない。

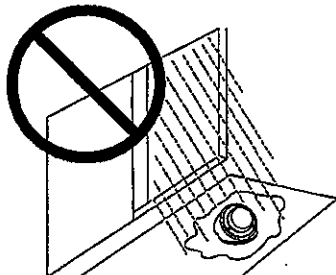

水をかけたり、ぬらしたりしない。

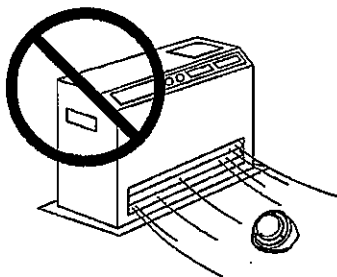

高温になる所に放置しない。

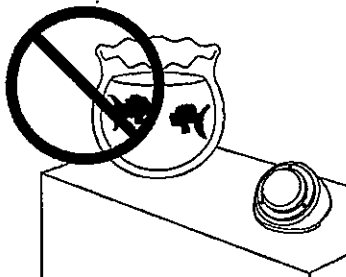

本製品の回りに花瓶、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器を置かない。

- 直射日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブなど）の近くで使用しないで下さい。熱により変色・変形や故障の原因になります。




## 「注意」に関する事項



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容」を示します。

### 乾電池に関して

- 乾電池は誤った使い方をしますと液もれや破裂することがありますので、次の点について注意して下さい。

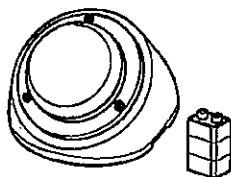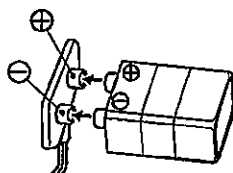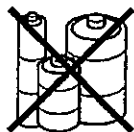


乾電池は必ず、9Vの角形乾電池(例:006P乾電池)を使用して下さい。それ以外の乾電池は使用できません。

本製品の極性表示(+と-)に合わせて乾電池を正しく入れて下さい。

本製品を長時間使わないときは、安全のため、乾電池を抜いて下さい。

(※16ページ参照)

### 修理・分解に関して

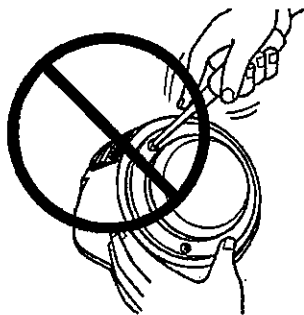

使用する方及び介助する方による分解や改造は絶対におやめ下さい。火災・感電・故障につながる恐れがあります。修理や内部の点検は、必ず販売店にご依頼下さい。

## 注意


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容」を示します。

### その他

- 常温の範囲で保管して下さい（※42ページ参照）。常温範囲以外で保管しますと、変形や破損、故障の原因になります。
- 本製品を使用する方及び介助する方は常に本書を手元に保管し、必要に応じて繰り返しお読み下さい。
- 本製品の不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場合があります。不明な事柄については当社までお問い合わせ下さい（最終ページ参照）。
- 本書を紛失または損傷した場合は速やかに当社までご連絡下さい（最終ページ参照）。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れなどに気づいた場合は当社までご連絡下さい（最終ページ参照）。
- 本製品は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本書の全部又は一部を無断で転載複製することを禁止します。

# 3 各部の名称と仕様 (構成部品と各部の名称)


## 前面

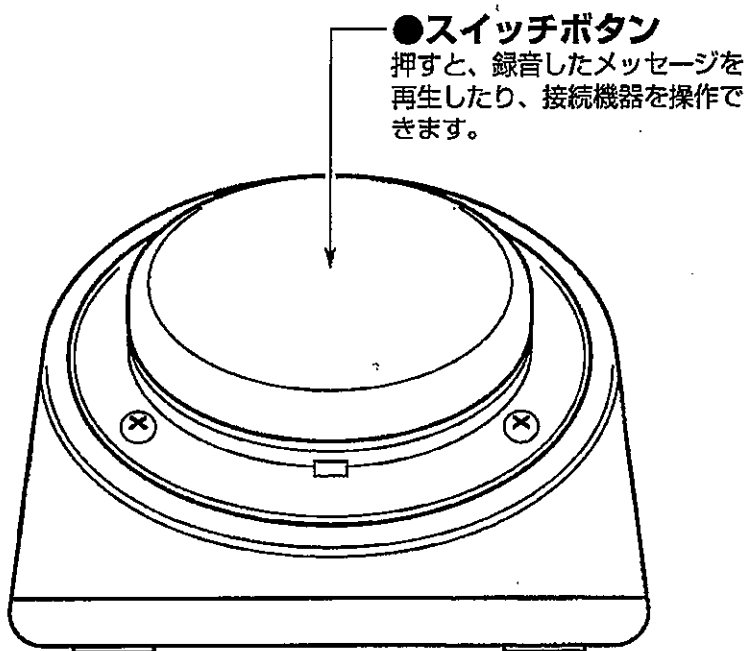

### 電源ON/ OFFスイッチについて

「ステップバイステップウイズレベル」を使用しない場合は、誤作動を防ぎ、乾電池を長持ちさせるために本体後面の電源を切ってください。「電源ON/OFFスイッチ・ボリュームコントロール」を右へ回すと電源ON、左へ回すと電源OFFになります。  
(どちらも「カチッ」という音がするのを確認して下さい)

### (付属品)

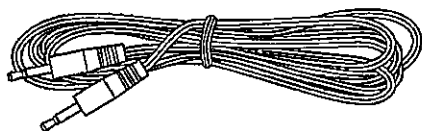

トイケーブル




固定具 (Able Link)

後面

●スピーカー／  
マイク

●電源ON/OFFスイッチ・  
ボリュームコントロール  
電源のON/OFFとボリュームを  
調節できます。

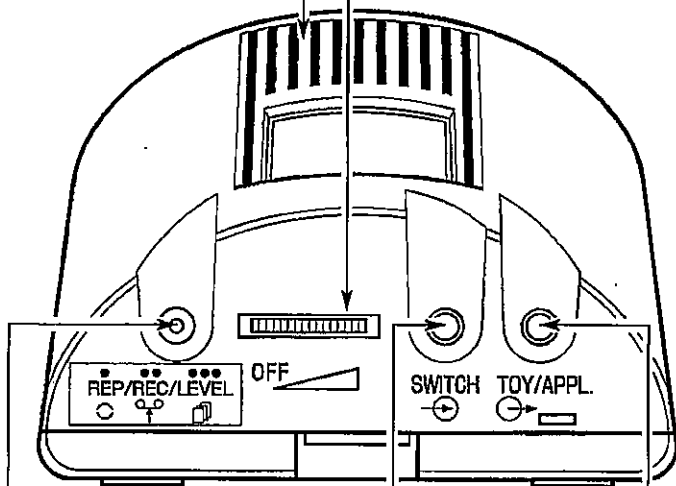

●REP/REC/LEVEL  
ボタン

3つの機能を設定できます。  
REP /リピート機能  
REC /録音機能  
LEVEL/レベル切替機能

●外部入力端子  
(SWITCH)


外部スイッチ機器【別売】を  
接続することができます。

●トイケーブル  
出力端子  
(TOY/APPL.)

付属のトイケーブルを使用  
して電動おもちゃなど  
を接続できます。

(仕様)

製品名	ステップバイステップウイズレベル (Step-by-Step with Levels)
用途	メッセージの録音・再生及び接続機器のスイッチ操作
外形寸法	直径90×高さ70 (mm)
重量	400 (g)
録音時間	75秒
電源	9V乾電池×1 (例：006P乾電池)
付属品	トイケーブル、固定具 (Able Link)

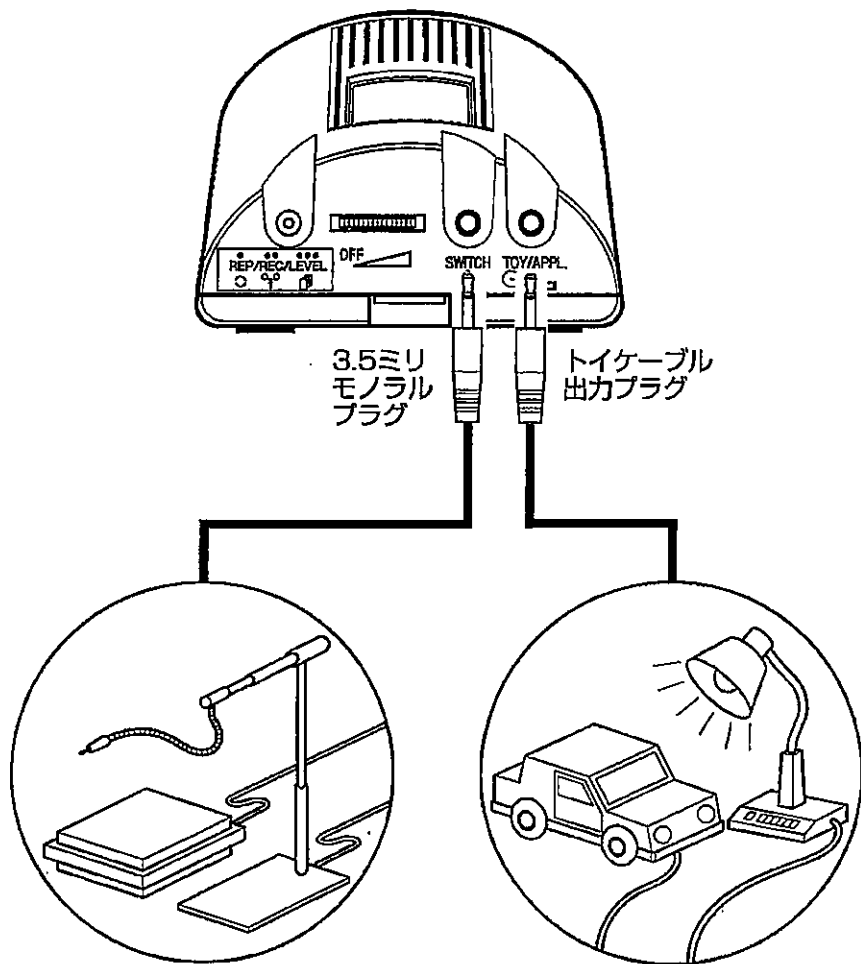


●外部スイッチを接続する場合

外部スイッチに市販の3.5ミリスイッチまたは3.5ミリモノラルプラグが付属していれば、本体後部の「外部入力端子 (SWITCH)」に接続して利用できます。外部スイッチと本体上面のスイッチボタンのどちらからでも「ステップバイステップウイズレベル」を操作できます。

●トイケーブル付おもちゃ・電化製品を接続する場合

(BDアダプター又は「パワーリンク2」を使用します)

## 「REP/REC/LEVELボタン」について

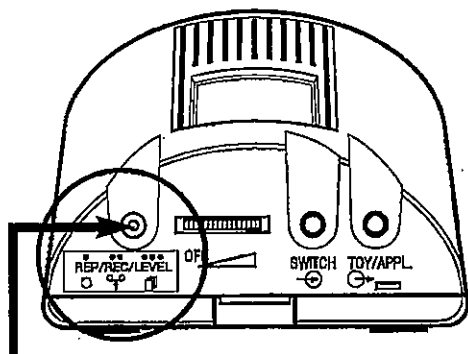


本体の操作をスムーズにして頂くために、本体後部の「REP/REC/LEVELボタン」の3つの押し方を覚えることをおすすめします。

1回押す…………… (REP: リピートモード)  
一つのメッセージを繰り返し再生させます。  
(接続機器動作設定モード)  
接続機器を作動させる設定を行います (P28~参照)




2回押す…………… (REC: 録音モード)  
録音モードを開始・終了させます。  
(P18~参照)

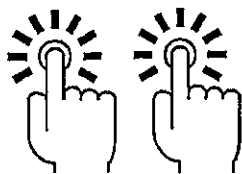

**1秒以内に2回押して  
ください!**


3回押す…………… (LEVEL: レベルモード)  
録音・再生モードで次のレベルに移動させます。(P20~参照)

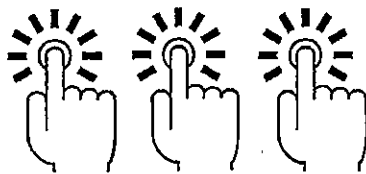

**2秒以内に3回押して  
ください!**


# 4 電池の入れ方

- 1 本体裏面の解除タブを引っ張りながら、マウンティングベースを後方にスライドさせ、取り外します。

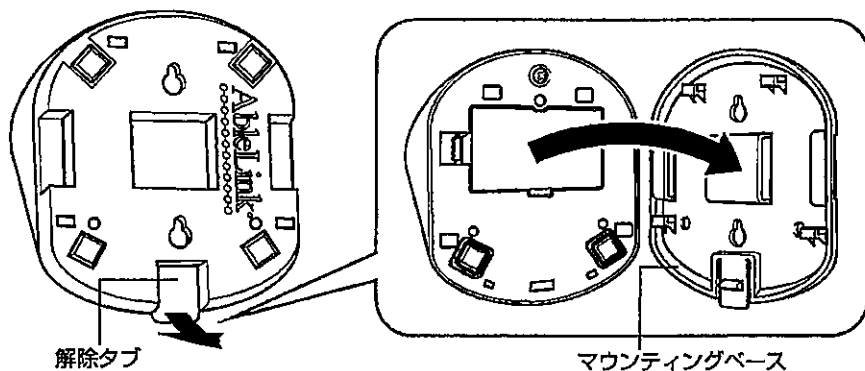


※「解除タブ」は乱暴に扱いますと、破損しますので、やさしく扱って下さい。

- 2 フタを外し、9ボルト電池を入れます。

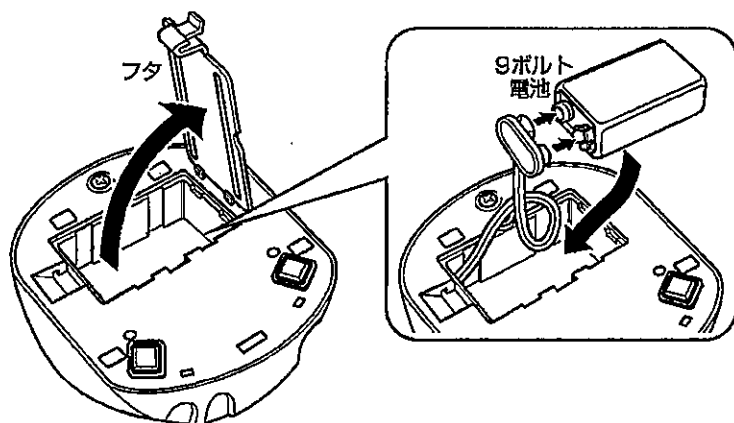



**3** フタを開け、マウンティングベースを取り付けて下さい。

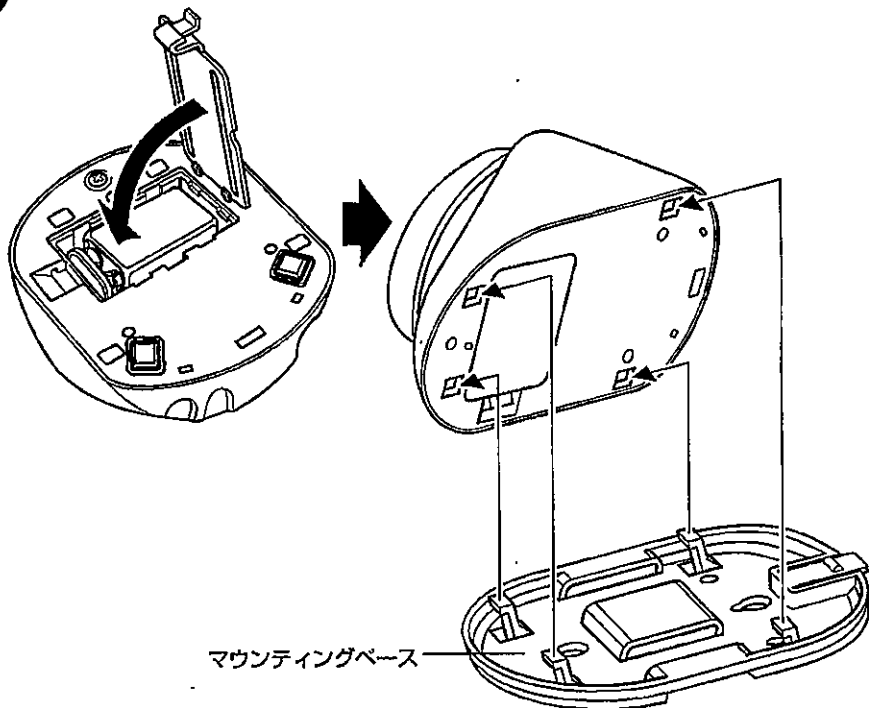

**!** 注意


- 乾電池は誤った使い方をしますと液もれや破裂することがありますので、次の点について注意して下さい。
- 乾電池は必ず、9Vの角形乾電池(例：006P乾電池)を使用して下さい。それ以外の乾電池は使用できません。
- 本製品の極性表示(＋と－)に合わせて乾電池を正しく入れて下さい。
- 本製品を長時間使わないときは、安全のため、乾電池を抜いて下さい。

# 5-1 メッセージの録音方法

出荷時、音声は録音されておりませんので、最初に録音する必要があります。

## ① 電源をONにする


ボリュームコントロールが「カチッ」という音がするまで右に回します。

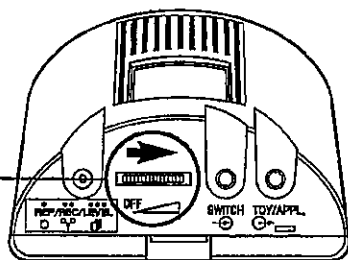

## ② 「録音モードにする」

本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を2回押します。(録音モード開始)

**1秒以内に2回押して  
ください!**

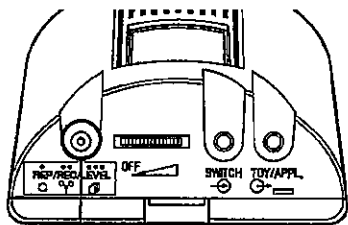


2回押す



## ③ メッセージを録音する

口をマイクから20~25cm程離して本体上面のスイッチボタンを押さえたまま、マイクに向かってメッセージを吹き込みます。

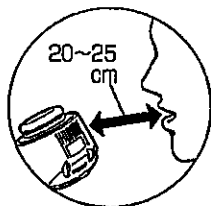


口をマイクから  
20~25cm程  
離す

スイッチボタンを  
押したまま


+

マイクに向かって  
メッセージを吹き込む

前面

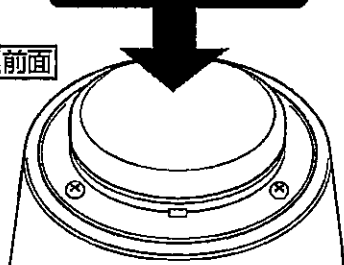


後面

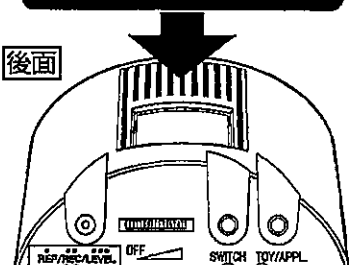

## 4 メッセージの録音終了

メッセージの吹き込みが終わると、押さえていたスイッチボタンを離します。これで1番目のメッセージの録音が終わりました。

スイッチボタンを  
離します

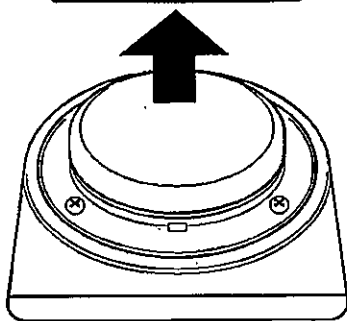


## 5 続けてメッセージを録音する場合


続けてメッセージを録音する場合は、④④を繰り返して行って下さい。

### 「録音モード」終了の場合

本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を2回押します。(録音モード解除)

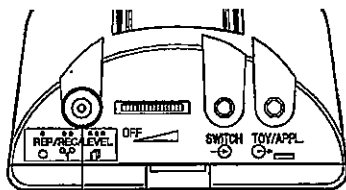

2回押す

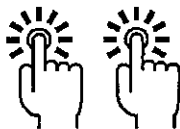


※この操作を実行しませんでした、録音したメッセージを再生することができません。

### 新レベルを追加する場合

今のレベルのメッセージ録音を終了して新たなレベルを追加、録音したい場合は、P21 ⑥へ進んで下さい。

# 5-2 新たなレベルを追加・録音したい場合

今のレベルと違った内容のメッセージを録音する場合は新たなレベルを追加して録音すると整理しやすくなります。

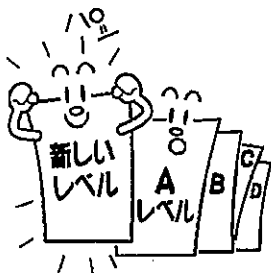


本体の電源を切っている場合は ❶ から進んで下さい。

本体がすでに「録音モード」に入っている場合は P21 ❸ から進んで下さい。

## ❶ 電源をONにする


ボリュームコントロールが「カチッ」という音がするまで右に回します。

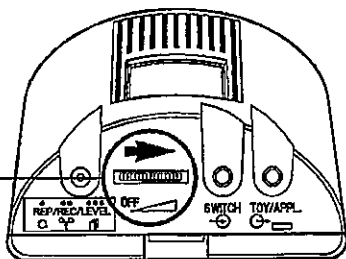


## ❷ 「録音モードにする」

本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を2回押します。(録音モード開始)

**1秒以内に2回押してください！**

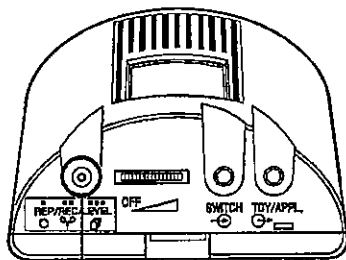


2回押す

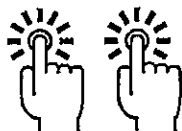

### 3 新しいレベルを追加する

本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を3回押します。これで新たなレベルが追加されました。

**2秒以内に3回押して  
ください!**

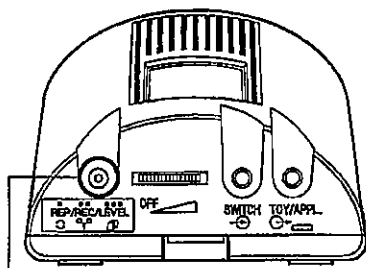


3回押す



### 4 メッセージを録音する

口をマイクから20~25cm程離して本体上面のスイッチボタンを押さえたまま、マイクに向かってメッセージを吹き込みます。

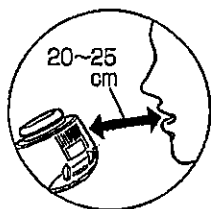


口をマイクから  
20~25cm程  
離す

スイッチボタンを  
押したまま


+

マイクに向かって  
メッセージを吹き込む

前面

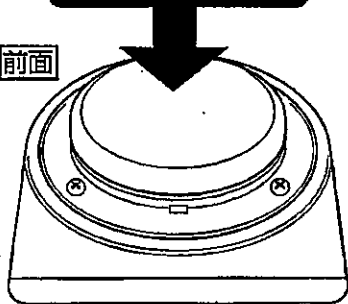

後面

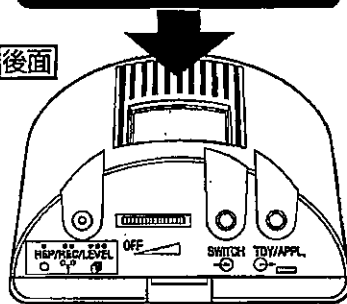


次のページへ続く

## 5 メッセージの録音終了

メッセージの吹き込みが終わると、押さえていたスイッチボタンを離します。これで1番目のメッセージの録音が終わりました。

スイッチボタンを  
離します

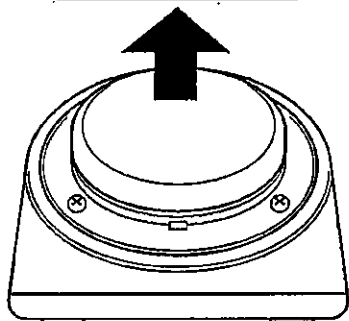


## 6 連続してメッセージを録音する

続けて2番目のメッセージを録音する場合は、**6 6**を繰り返して行って下さい。


## 7 さらに新たなレベルを追加したい場合

本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を3回押して、**4 6**を繰り返しメッセージを吹き込みます。

**2秒以内に3回押して  
ください!**

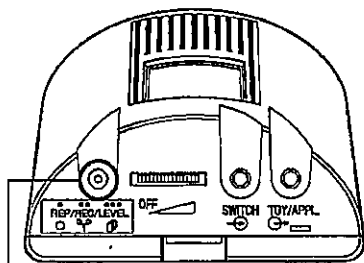

3回押す

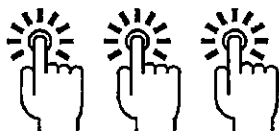


## ⑧ 「録音モード」を終了する

本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を2回押します。(録音モード解除)

**1秒以内に2回押して  
ください!**

※この操作を実行しないと、  
録音したメッセージを再生  
することができません。

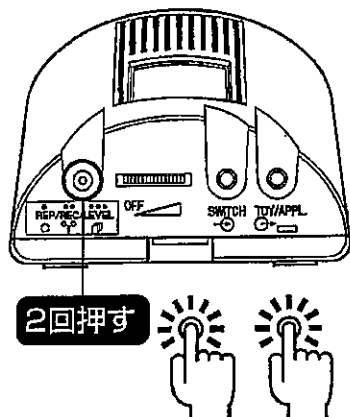

### \* 録音するときの注意点 \*


- 録音されたメッセージ及びレベルは、部分的に修正・削除できません。また、レベルの追加は可能ですが、同一レベル内でのメッセージの追加はできません。
- メッセージ、レベルを部分的に修正・削除したい場合、または同一レベル内でメッセージを追加したい場合、すべて録音しなおす必要があります。
- 録音がスムーズにできるように、あらかじめ録音したいメッセージを書きとめて、原稿として利用されることをお勧めします。今後のために原稿は保管しておいた方が便利です。
- 75秒間以内であれば、レベル数、メッセージ数をいくつでも録音できます。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

# 6-1 メッセージの再生方法

## 基本の再生動作




### 1 電源をONにする

ボリュームコントロールが「カチッ」という音がするまで右に回します。

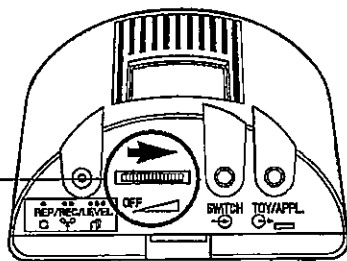

### 2 メッセージを再生する


本体上面のスイッチボタンを押すとメッセージを再生します。

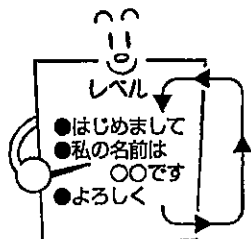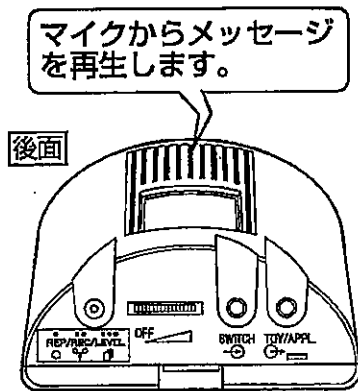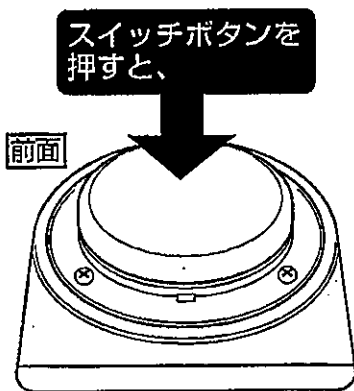

- メッセージは本体上面のスイッチボタンを押す毎に、レベル内にそれぞれ録音した順に再生されます。
- そのレベル内の最後までメッセージが再生された後、本体上面のスイッチボタンを押せばもう一度初めから再生できます。




# 6-2 次のレベルのメッセージを再生する場合

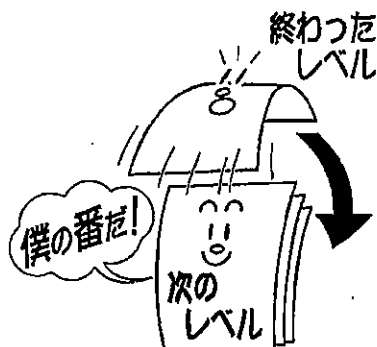


## 1 次のレベルへ移動する

本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を3回押すと次のレベルへ移動、その中のメッセージを再生できます。

**2秒以内に3回押してください!**

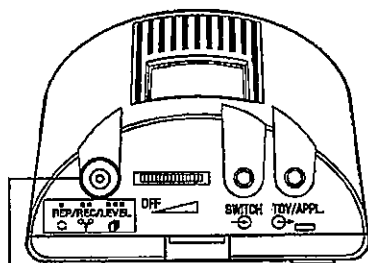

## 2 メッセージを再生する

P24 と同じ方法でメッセージを再生します。

# 6-3 希望のレベルに手早く合わせて再生する

本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を3回押すだけで素早くご希望のレベルにあわせることができます。

(下記の説明は本体に電源が入っている状態から説明します)




「例：レベル1のメッセージを再生後、レベル2を飛ばしてレベル3から再生したい」場合

## 1 レベル1からレベル2へ

本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を3回押すとレベル2へ移動します。

2秒以内に3回押してください!

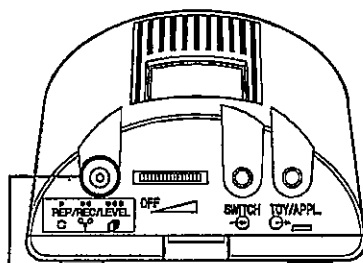

3回押す





## 2 約2秒の間おいて下さい。

### ③ レベル2からレベル3へ

本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」をもう一度3回押します。これでレベル3のメッセージを流す準備ができます。

**2秒以内に3回押してください！**

3回押す

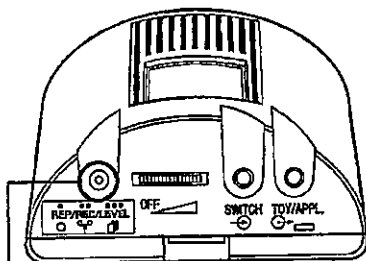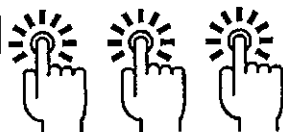


### ④ レベル3のメッセージを再生する

本体上面のスイッチボタンを押すとレベル3のメッセージが再生されます。


スイッチボタンを押すと、

前面

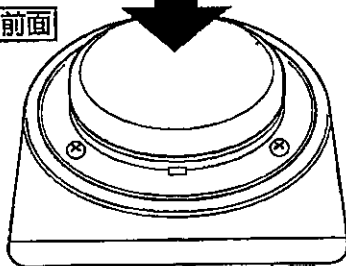


レベル3のメッセージを再生します。

後面

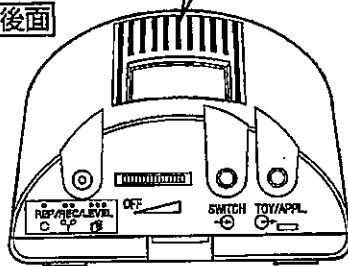

※本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を3回押した後、再度3回押す場合は必ず2秒の間をおいてから行って下さい。


# 6-4 繰り返してメッセージを再生する

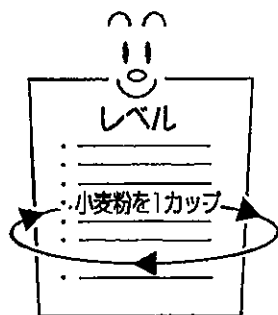

例：料理の調理方法の説明の中で“小麦粉を1カップという一つのメッセージを繰り返し機能解除まで繰り返し再生したい場合。


## 1 メッセージを選ぶ

繰り返して再生したいメッセージが流れるまで再生する。

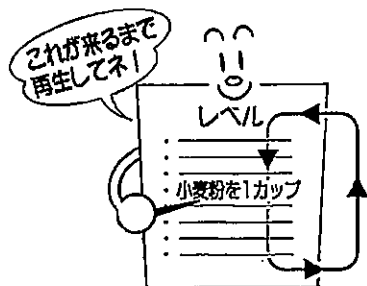


スイッチボタンを押します

前面

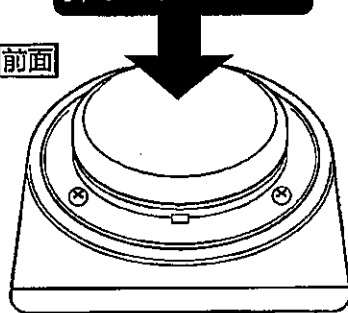

## 2 繰り返し再生モードに入る

本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を1回押します。


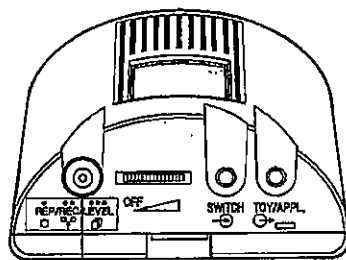


1回押す




### 3 繰り返し再生する

スイッチボタンを押す毎に同じメッセージが繰り返し再生されます。

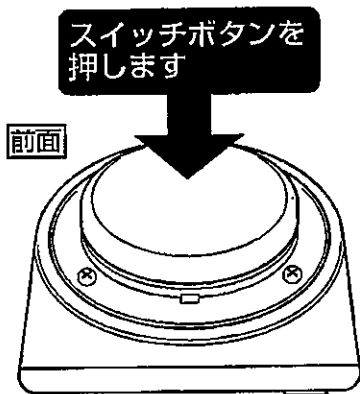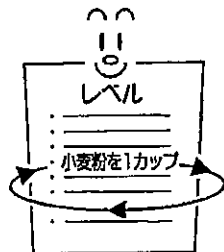

### 4 繰り返し再生モードを終了する

繰り返し再生機能を終了させるには、本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を1回押します。

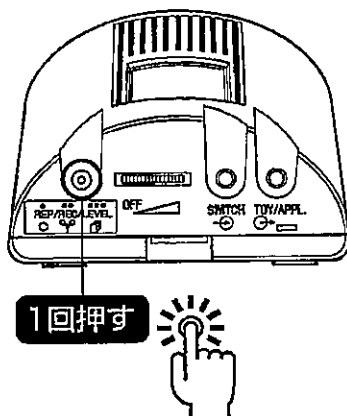

※繰り返し機能を利用中は選ばれた一つのメッセージのみ有効で、その他のメッセージは再生されません。


※どのメッセージでも“繰り返し機能”を利用できます。

※繰り返しの機能は、前に録音されたメッセージを後に使用する人のために残しておきたい時にも利用できます。  
残しておきたいメッセージのところで繰り返し機能を利用してメッセージを保留します。そうすれば次のユーザーはメッセージを再生できます。

# 7-1 トイケーブルを使ってみよう!

本体は、「メッセージ再生後おもちゃなどを作動させる」機能と「メッセージ再生のみの機能」にわけて設定することができます。

本体後部の「トイケーブル出力端子 (TOY/APPL.)」とおもちゃなどを付属のトイケーブルで接続すると、メッセージ再生後0.5秒間のみ接続したおもちゃなどが作動します。

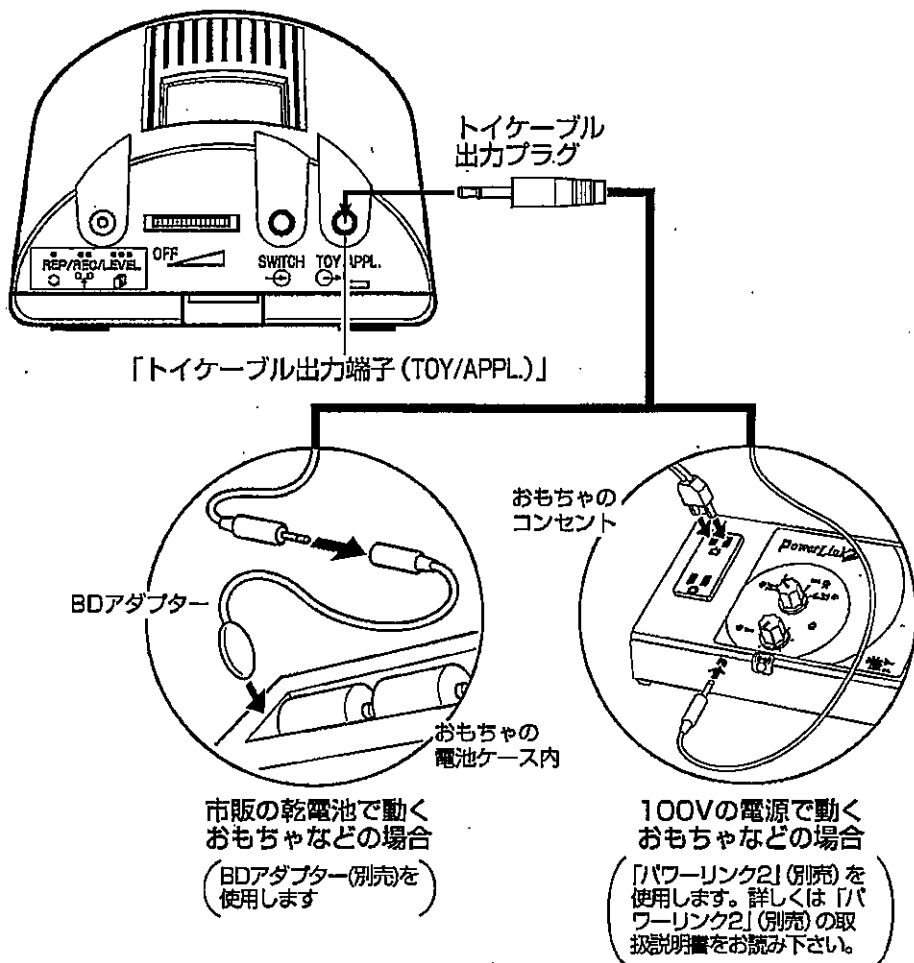

付属のトイケーブルは「トイケーブル出力端子 (TOY/APPL.)」以外の端子へ接続しないで下さい。


誤って「トイケーブル出力端子 (TOY/APPL.)」以外の「外部入力端子 (SWITCH)」などへ接続すると録音が出来なくなるなど故障の原因になります。

# 7-2 メッセージ再生後、おもちゃを作動させる方法

例えば、下の4コマストーリーを見て下さい。

トイケーブルを利用して本体と電動ボックスを接続した例で、①～②の場面までは1、2番目のメッセージのみを再生させています。そして③～④の場面は3番目のメッセージ再生後、電動ボックスを作動させています。(P32～37参照)


## ① 1番目のメッセージを再生

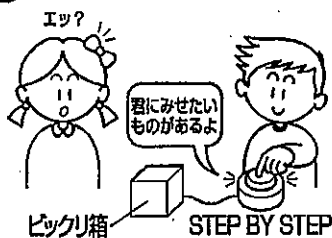

## ② 2番目のメッセージを再生



## ③ 3番目のメッセージを再生

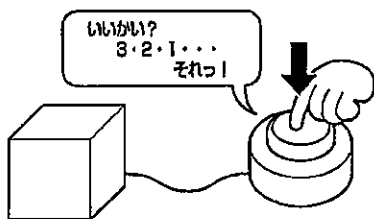


## ④ 電動ボックスが作動



### その他の操作方法としては・・・

1スイッチボラロイドカメラを接続すれば、「ハイ、チーズ!」のメッセージ再生後、グッドタイミングでシャッターをきれます。

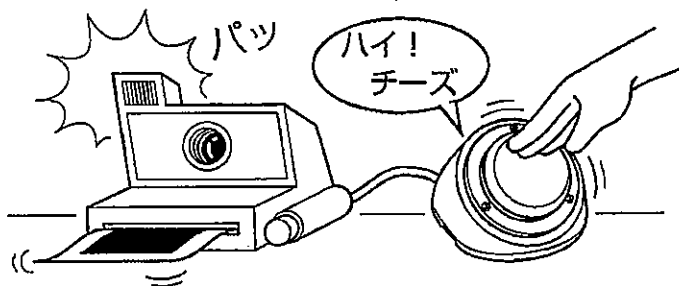


例：3番目のメッセージ再生後、接続したおもちゃを 作動させたい場合

(※1、2番目のメッセージは再生のみです)

## 1 電源をONにする

ボリュームコントロールが「カチッ」という音がするまで右に回します。


本体の電源をONにする

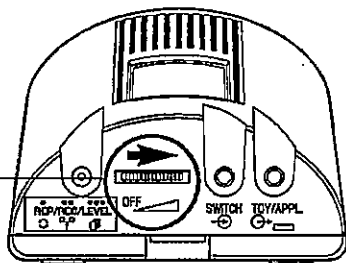


## 2 「録音モードにする」

本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を2回押します。(録音モード開始)

1秒以内に2回押してください!

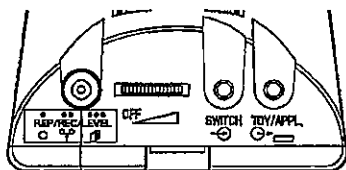


2回押す

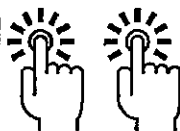

## 3 1番目のメッセージを録音開始

口をマイクから20~25cm程離して本体上面のスイッチボタンを押さえたまま、マイクに向かってメッセージを吹き込みます。

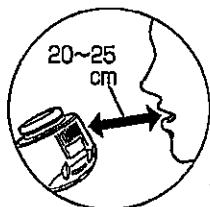


口をマイクから20~25cm程離す

スイッチボタンを押したまま


+

マイクに向かってメッセージを吹き込む

前面

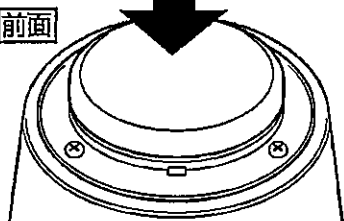

後面

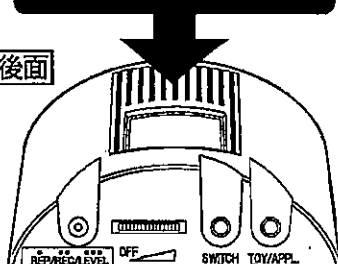




## 4 1番目のメッセージを録音終了

押さえていたスイッチボタンを離します。  
これで1番目のメッセージの録音が終わりました。


スイッチボタンを  
離します

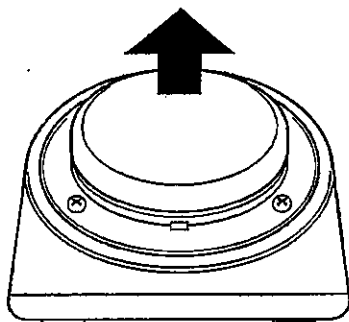

## 5 続いて2番目のメッセージを録音する

④ を繰り返し行って下さい。

## 6 3番目のメッセージの録音開始

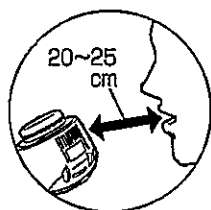


口をマイクから  
20~25cm程  
離す

スイッチボタンを  
押したまま


+

マイクに向かって  
メッセージを吹き込む  
(※メッセージ録音後、スイッチ  
ボタンはまだ離しません)

前面

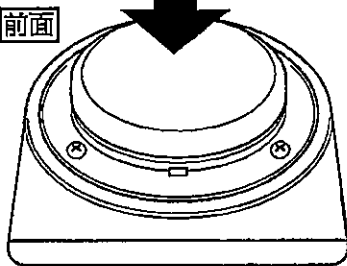

後面

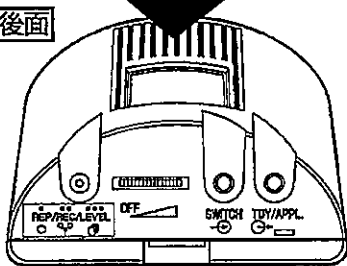

※スイッチボタンは押したまま、次のページへ進めて下さい。

## 7 おもちゃが作動する設定を行う


メッセージの吹き込みが終わると、本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を1回押して押さえていたスイッチボタンを離します。

(※スイッチボタンは押したまま)


「REP/REC/LEVELボタン」を1回押します

スイッチボタンを離します

後面

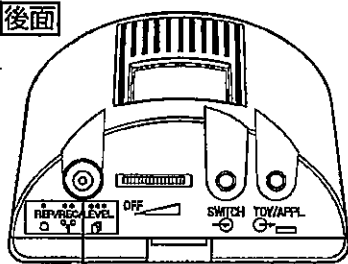

前面

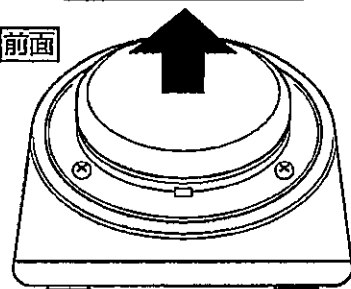

1回押す




これで「3番目のメッセージ再生後、おもちゃが作動する設定」ができました。

## 8 「録音モード」を終了する


本体後面の「REP/REC/LEVELボタン」を2回押します。(録音モード終了)

1秒以内に2回押してください！


※この操作を実行しないと、録音したメッセージを再生することができません。

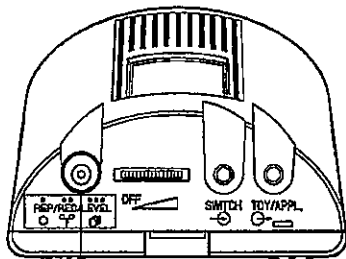

2回押す

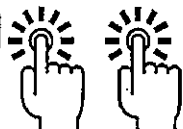

## ⑨ 接続する機器およびトイケーブルを接続します

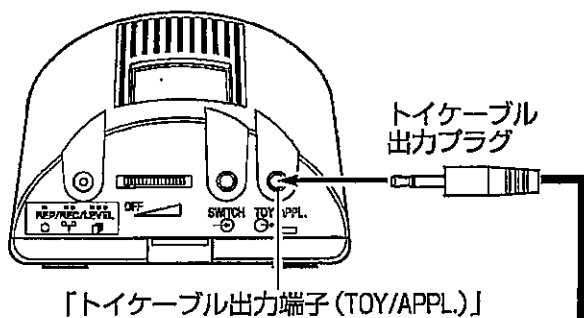

市販の乾電池で動く  
おもちゃなどの場合

(BDアダプター(別売)を  
使用します)

BDアダプター

おもちゃの  
電池ケース内

100Vの電源で動く  
おもちゃなどの場合

(「パワーリンク2」(別売)を  
使用します。詳しくは「パ  
ワーリンク2」(別売)の取  
扱説明書をお読み下さい。)

おもちゃの  
コンセント

おもちゃ


## ⑩ これで「メッセージを再生後0.5秒間、おもちゃを 作動させる」ための準備ができました

それでは実際におもちゃを作動させてみましょう。


次のページへ続く

P31～P35で設定したメッセージを再生させてみます。

## 1 1番目のメッセージを再生する

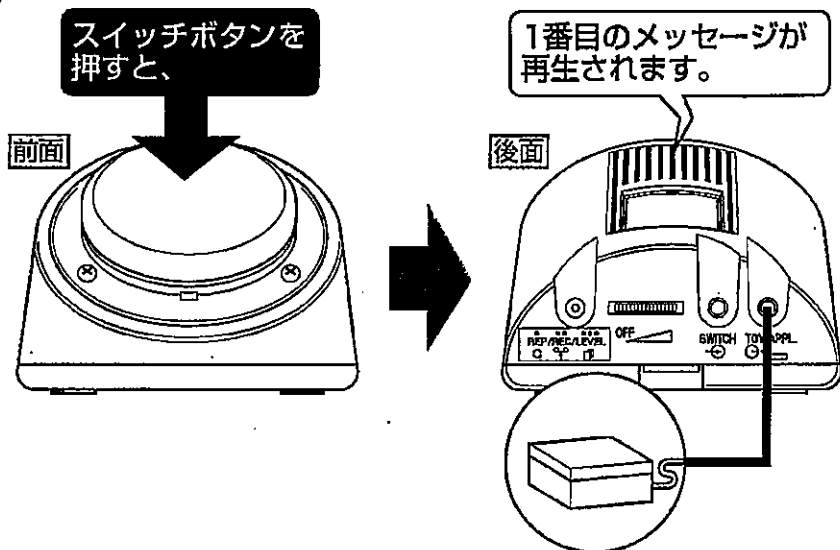


## 2 2番目のメッセージを再生する

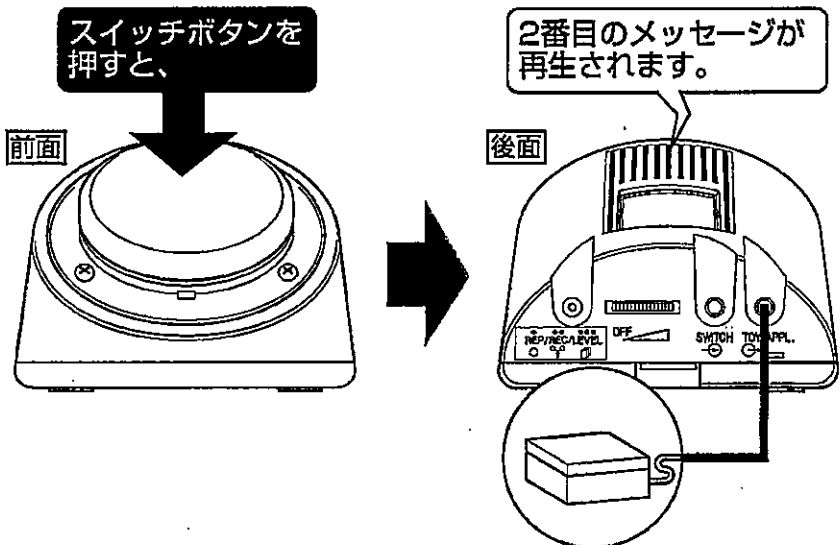

## ③ 3番目のメッセージを再生すると・・・

3番目のメッセージが再生された後、接続されたおもちゃが0.5秒間作動します。

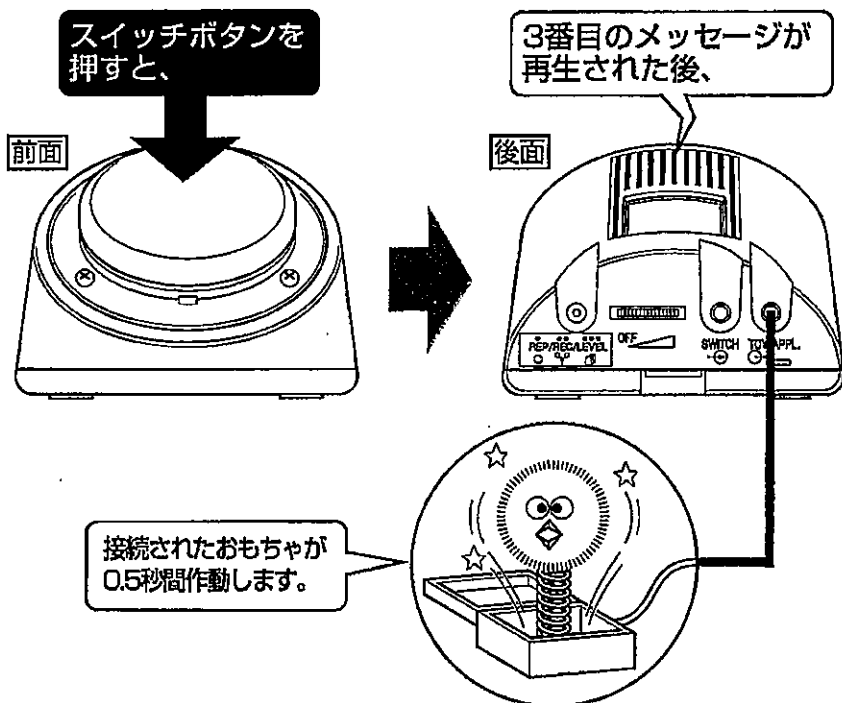

### 警告

- ドライヤー・暖房器具などの熱器具や、ミキサー・扇風機などの回転機器を接続する場合は十分取扱いに注意して下さい。一人のみで使用せず、介助の方が一緒に付き添うようにして下さい。
- 生命にかかわる場合に緊急用として本製品を使用しないで下さい。


※もし、録音したメッセージが再生されなかったり、接続されたおもちゃが作動しない場合はもう一度初めからやり直して下さい。

# 8 どんな使い方ができるの？

レベルを活用してみる  
「レベル」とは、登録するメッセージを分類して録音しておく場面別の見出しと考えて下さい。

## 例 1


人の名前は「レベル1」で録音して、お茶のお誘いは「レベル2」で、あいさつや近況報告は「レベル3」というように活動にあわせて希望のレベルのメッセージにアクセスできます。

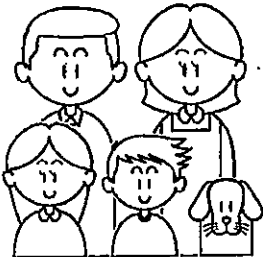

ファミリーに対して

### レベル1【人の名前】


- ・お父さん
- ・お母さん
- ・とし君
- ・モモ～（愛犬）
- ・みんなそろった？など…

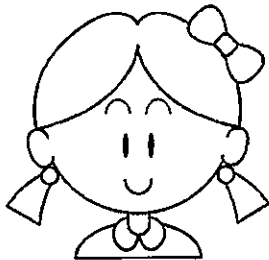

ガールフレンドに対して

### レベル2【お茶のお誘い】

- ・ねえ、ちょっといいですか？
- ・一緒にお茶しよう。
- ・何にする？
- ・私は冷たい飲み物。など…

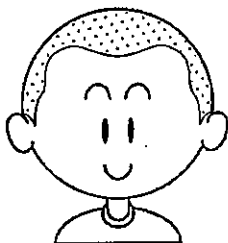


友人に対して

### レベル3【あいさつや近況報告】

- ・おはよう！
- ・げんき？
- ・週末は何してたの？
- ・私は海にいったよ
- ・すごく楽しかった。など…

## 例2

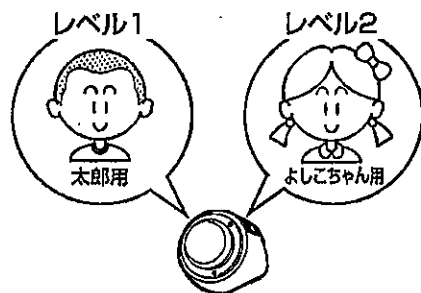


「レベル1」は太郎君用、「レベル2」はよしこちゃん用というように何人かのメッセージを入れて切り替えて利用すれば順番にみんなで使うことも出来ます。

その他、いろいろな使い方があります。使用目的に応じてお楽しみ下さい。

- ・ 進行の内容を順番に録音しておけば、学校では朝の会やお楽しみ会の司会役に。
- ・ 友達の名前を録音しておけば出席確認ができます。  
（「佐藤さんはいますか？」「山田くんはいますか？」）
- ・ 劇で台詞を言う場合に。
- ・ 本のストーリーを録音しておいてページをめくるように再生を聞いて楽しむ。
- ・ インタビューを行う。一度に一つの質問をする場合に。
- ・ 仕事の手順を説明する場合に。
- ・ お料理のレシピを録音すればみんなに手順を教えるお料理の先生などに。
- ・ 食べ物の注文をする場合に。  
（「ポテトのしをふたつ」「コーヒーとアイスティーをください」）
- ・ クイズの問題を録音しておいて、友達と遊ぼう。
- ・ グー、チョキ、パーでじゃんけん大会に。
- ・ あっちむいてホイやだるまさんがころんだ、旗揚げゲームで遊ぼう。
- ・ ウォークラリーゲームで音声で道案内などに。

## 9 車いすなどへの本体の取り付けについて

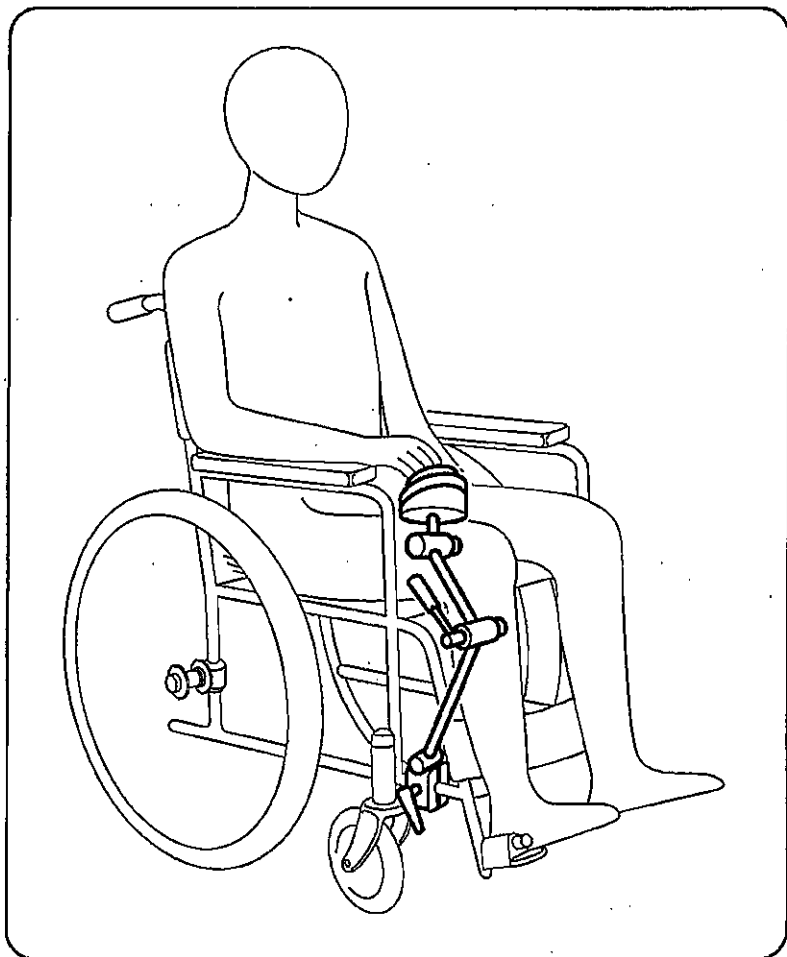


車いすに「ステップバイステップウイズレベル」を固定するために「三角プレート(小)【別売】」と「ユニバーサルアーム【別売】」または、「スリムアームストロングシステム【別売】」を使用することもできます。

※詳しくはお買い上げの販売店にご相談下さい。




# 10 「ステップバイステップウィズレベル」を 2台以上つなぎ合わせて固定する場合

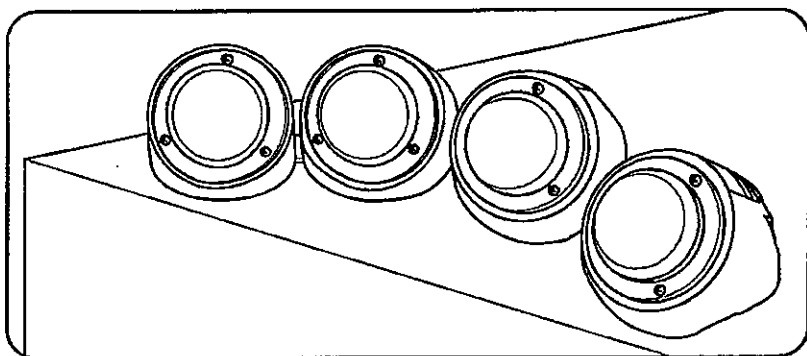


「固定具 (Able-Link)」を用いて、「ステップバイステップウィズレベル」を2台3台と簡単につなぎ合わせることができます。

## つなぎ合わせ方法

1

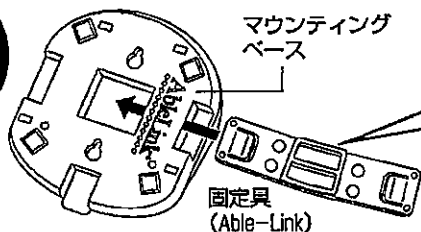


付属の「固定具 (Able-Link)」をマウンティングベースに接続します。

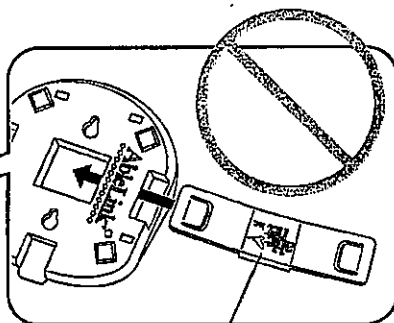

「固定具 (Able-Link)」の表にロゴマークがある状態で差し込まないで下さい。抜けなくなる恐れがあります。

2

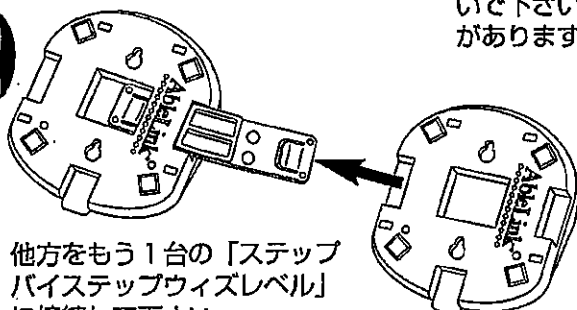

他方をもう1台の「ステップバイステップウィズレベル」に接続して下さい。

# 11 お手入れと保管

「ステップバイステップウィズレベル」を長期間使用して頂くために次のようなお手入れ、保管を行って下さい。

●本体が汚れた場合、湿った布か、少量の中性洗剤を水で薄めてよくしぼった布で拭いて下さい。

●スピーカーや各ボタン類の回りは水を控えめにして下さい。また、水にひたしてはいけません。

●録音されたメッセージは、新しい録音をしない限り消えません。

●保管や移動時に包む時には、柔らかい布で巻いて下さい。



## 注意

●常温の範囲で保管して下さい。常温範囲以外で保管しますと、変形や破損、故障の原因になります。

# 12 故障かな?と思ったら

「ステップバイステップウイズレベル」を正しく操作できない時には、下記に従ってください。それでも問題が解決しない場合は、当社までご連絡ください（本書最終ページを参照）。

こんなときには・・・

## ●動作が不安定（録音できたり、できなかったりする）

- ・2分間電源を切って下さい。その後、再度作動させて下さい。

## ●メッセージが再生できない

- ・乾電池は新しく、しっかり装填されていますか？
- ・メッセージは確実に録音されていますか？疑わしい場合は録音し直して下さい（P18～23を参照）。
- ・メッセージ再生の時は「ボリューム」を最大にして下さい。
- ・外部スイッチを接続する際は、それが作動するか確認して下さい。
- ・外部スイッチを接続する際は、市販の3.5ミリスイッチまたは3.5ミリモノラルプラグが付属していますか？
- ・外部スイッチを接続する際は、「ステップバイステップウイズレベル」本体後部の「外部入力端子（SWITCH）」に接続されているか確認して下さい（P14を参照）。

## ●メッセージの一部のみ消えている

- ・メッセージ録音時間が75秒間を越えています。75秒間を越えると、そのメッセージが録音されません。メッセージ録音時間を短くして録音し直して下さい（P18～23を参照）。
- ・録音モードにてスイッチボタンをしっかりと押さえないとメッセージが録音されない場合があります（P18～23を参照）。

## ●音声かひずむ

- ・録音の際、マイクに近づき過ぎたことが考えられます。マイクから20～25センチ離れて録音し直して下さい（P18、21、32、33を参照）。
- ・乾電池が消耗している可能性があります。新しい乾電池に交換して下さい（P16～17を参照）。

## ●電動おもちゃや接続機器が作動しない

- ・電動おもちゃや機器そのものが正常に作動するか調べて下さい。
- ・3.5mmケーブルやトイケーブルは「ステップバイステップウイズレベル」本体後部にしっかりと接続されていますか？（P14、30を参照）
- ・おもちゃなど接続機器の取扱説明書をよくお読みなり、使用の手順に従ってもう一度やり直して下さい。

## ●再生速度が遅い

- ・乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換して下さい。（P16～17を参照）。

●製品に関するお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡下さい

## パシフィックサプライ株式会社

- 本社 社 574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
- 札幌営業所 〒003-0023 札幌市白石区南郷通り14-北2-39 パブリックシャイン1F  
TEL: 011-862-1136 FAX: 011-862-1002
- 仙台営業所 〒980-0871 仙台市青葉区八幡1-4-22 義栄ハイツ1F  
TEL: 022-224-3261 FAX: 022-264-6935
- 東京営業所 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-12 グレイスビル2F  
TEL: 03-3362-0757 FAX: 03-3355-3154
- 大阪営業所 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1  
TEL: 072-876-8011 FAX: 072-876-8015
- 福岡営業所 〒812-0054 福岡市東区馬出2-2-12  
TEL: 092-641-8151 FAX: 092-641-0444

お買い上げ日:                      年                      月                      日

販 売 店

担 当 者