

Southpaw 社製ローテーター

この度は「ローテーター」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書は器具を安心してご利用いただけるよう、わかりやすく説明してあります。ご利用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様をお願いします。

1. 安全にご使用いただくために

この取扱説明書では色々な絵表示をしています、これは「ローテーター」を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。

その表示と意味は次のようになっています、内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 万一届いた商品に傷等がございましたらご使用前に弊社までご連絡ください。
 - 天井フックの取り付けが十分でないと非常に危険です。カラビナ等を取り付ける前に必ずご確認ください。
 - ローテーターのベアリング部分に埃(ほこり)・ゴミまたは土や砂が入らないように取り付けてください。
 - 活動や訓練の内容、使用される吊り遊具の仕様・規格によって使用環境は異なります。また、荷重時には吊り遊具の高さが変動することを考慮して、高さを設定してください。
 - 天井フックの摩耗の程度と動きにご注意ください。天井フックに破損や磨耗が見られる場合は、直ちにローテーター・カラビナのご使用をお止めください。
- ※天井フックの仕様・取り付けに関しましては、天井フックの設置業者にお問い合わせください。
- ご使用前に、カラビナのロックがしっかりと閉じられていることや、ロックのピンが全て留まっていることをご確認ください。
 - スイング等の吊り遊具の下またはその周辺には必ず適当な厚さのマットを敷いてご使用ください。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ご使用前にローテーターに摩耗した部分がないか必ず確認してください。
- ローテーターおよびカラビナの摩耗がひどい場合、直ちにご使用をお止めください。
- 併用するカラビナにつきましては、付属のカラビナまたは弊社推奨のカラビナを必ずご使用ください。ただし、併用するカラビナが破損や磨耗している場合は、直ちにご使用をお止めください。
- ローテーターのクロスピンのエッジが尖っていないことや、クロスピンが潰れていないことをご確認ください。クロスピンに不具合がある場合は、直ちにご使用をお止めください。
- ローテーターがスムーズに回転しなくなったり、回転のたびに音が鳴ったり、またはご使用中に破片が落ちてきた場合は、直ちにご使用をお止めください。




注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、
傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- カラビナの代わりに、ロープ等を代用される場合は、ご使用の度に結び目の磨耗やゆるみがないことをご確認ください。
- スイング等の吊り遊具を使用する場合、必要に応じて安全用ヘルメットを着用してご使用ください。
- 保守点検は使用前に本製品使用者または本製品管理者が必ず行なってください。また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。

2. 取り付け方法

- カラビナをローテーターに通してから天井フックや高さ調節器具に取り付けます。その際、ローテーターのラベルの向きに注意してください。
※「Southpaw」のラベルが逆さにならないように取り付けます。
- スイング等の吊り遊具はカラビナに取り付けて使用してください。

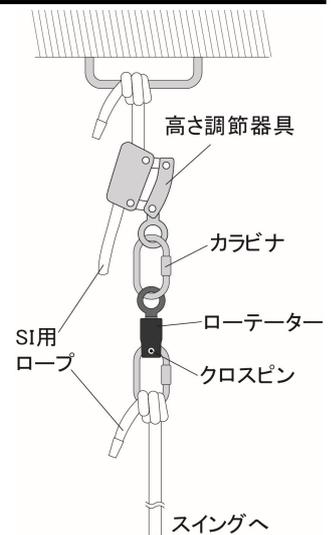

注意

- 吊り遊具は床面から 20cm~30cm 程度間隔を空けて吊り下げてください。
- 壁や障害物等に接触しないように、2m 以上のスペースを空けて取り付けてください。
- 別売りのスイングサポートフレームを使用される場合、吊り遊具使用中にフレームに接触しないように環境を設定してください。

3. メンテナンス・保管について

- 汚れが目立ってきた場合は、エアークロス等で埃（ほこり）を吹き飛ばして清掃してください。
- ご使用の際にローテーターのフック部分が黒く変色することがございますが、回転には影響ございません。
- オイル、グリース、水またはシンナー等での清掃は絶対になさらないでください。
- 本製品を洗淨したり、水の中に浸さないでください。
- 吊り具（ローテーター・カラビナ）類は全て直射日光の当たらない場所で保管してください。
- 適切な監督のもと、湿気のないところで保管してください。

●販売元

k パシフィックサプライ株式会社

本社 〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1
TEL 072(875)8008 FAX 072(875)8010

●仕様

サイズ	全長 11.4 cm × 本体径 3.2 cm
重量	約 184g(本体)
耐荷重	155kg
付属品	カラビナ 1 個
製造国	アメリカ

<https://www.p-supply.co.jp/>

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。