

グドマン

Guldmann™

テレスコピックスロープ

取扱説明書



この度はグドマン社製テレスコピックスロープをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用していただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み頂き、注意点等をご確認ください。また本書は保管して必要に応じて繰り返しお読みください。

※製品に関するお問い合わせ先は裏面をご覧ください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更されることがあります。

※必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認していただきます様をお願いします。

R パシフィックサプライ株式会社

テレスコピックスロープについて

テレスコピックスロープとは・・・

- 車椅子用のスロープです。
- 2本1組の構成で、強度が高いアルミ製のスロープです。
- スロープ長の調整はスライド式で、調整範囲内であれば任意の位置で設置できます。

もくじ

| | |
|------------------------|---|
| 1. 安全にご使用いただくために | 3 |
| 2. 各部の名称と仕様 | 5 |
| 3. 使用方法 | 6 |
| 4. お手入れ・保管・廃棄 | 6 |
| 5. 保証書 | 7 |

1. 安全にご使用いただくために

ここに記した注意事項は、本製品を安全に正しくご使用していただき、お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですのでよくお読みいただき、正しくお使いください。

ご使用前に

- スロープをご使用する前にすべての操作手順をご確認ください。
- スロープは玄関先の段差や同様の障害物を超える際の使用に適しています。
- このスロープは段差に固定しません。
- 車椅子用です。（電動、手動）
- 電動3輪車にはご使用できません。

1-1 絵表示について

この取扱説明書では様々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上本文をお読みください。

<注意事項> 誤った取り扱いによって生じることが想定される内容を、危害や損害の程度に応じて「警告」と「注意」の2つに区分し、説明しています。必ず守ってください。

| | |
|---|--|
|  警告 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|  注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。 |

- ※取扱説明書をお読みにになった後は、いつでも見られるところに保管してください。
- ※レンタルなどで本製品を貸し出す場合には、この取扱説明書も一緒に貸し出してください。また、説明書をよく読んでから使用するようにご指導してください。

1-2 警告に関する事項



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- スロープを使用する前に本書をよく読み、内容を理解してください。
内容を理解し実行できない方には使用させないでください。
- スロープの引き出し時や収納時に手指をはさまない様にご注意ください。
本体のエッジ部分や滑り止め部分などでけがをすることがあります。

1-3 注意に関する事項



注意


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的破損の発生が想定される内容を示しています。

- 事故につながる可能性があるため、お客様ご自身でのスロープの分解は絶対にお止めください。
- 誤ったかけ方での使用、または耐荷重量・使用角度を超える使用は非常に危険ですでお止めください。
- ご使用になる際は上端部をしっかりと段にかけて、安全をご確認の上ご使用ください。
- スロープをかける段が平らであることを確認し、段に対してスロープが直角になるようにご使用ください。
- スライド防止用ロックがかかってないと、持ち運ぶ際にスロープが勝手にスライドすることがあります。
- ご使用の際、片方のハンドルが2本のスロープの間になります。スロープの間を歩く際は当たったり、引っかかったりしないようハンドルを折りたたみください。
- 本製品の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問合せください。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気づいた場合は販売店までご連絡ください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証されません。またその際発生した損傷、利害損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- 本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品とは異なっている場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

2. 各部の名称と仕様

2-1 構成部品と各部の名称

本製品は次の部品で構成されています。付属品に不足はないかご確認ください。

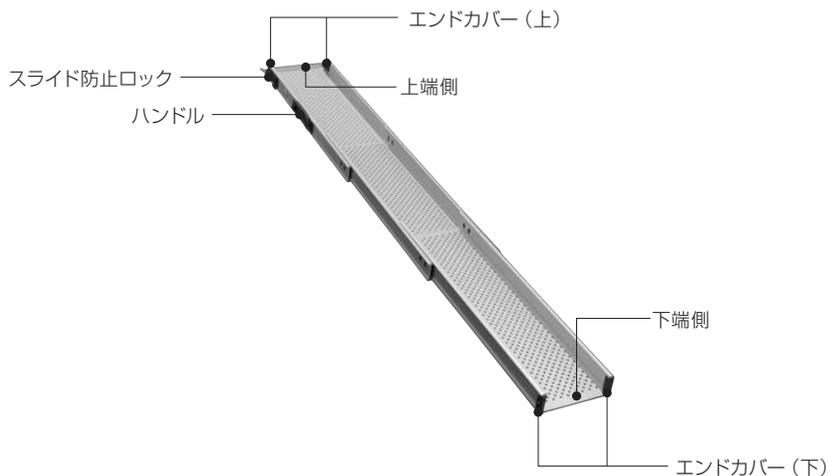

| 品番 | 品名 | 使用時 (cm) | 重量(kg) / 1本(セット) | 外寸 (mm) | 内寸 (mm) | エッジ高 (mm) | 耐荷重(kg) / 1本(セット) | 最大 使用角 (度) [*] |
|----------|--------------------------|--------------|---------------------|------------|------------|--------------|----------------------|-------------------------------|
| 18440004 | テレスコピック スロープ 193cm | 87 } 193 | 6.5 (13.0) | 235 | 170 | 55 | 150 (300) | 12 |
| 18440005 | テレスコピック スロープ 282cm | 116 } 282 | 8.2 (16.4) | 235 | 170 | 55 | 125 (250) | 12 |

※安全な使用角度は車椅子使用者の体格・体幹バランス・介助者の体力・車椅子の機能・設置場所等によって異なります。

- 製造国 デンマーク ●材質 本体:アルミニウム
エッジガード・ハンドル部:耐衝撃性プラスチック
ブラケット:ステンレス

| 品番 | TAISコード | JANコード |
|----------|-------------|---------------|
| 18440004 | 01087-00059 | 4524491007424 |
| 18440005 | 01087-00060 | 4524491007417 |

3. 使用方法

スロープの適合高さを確認します。段差とスロープ長さは下記を参考にしてください。

段差：スロープの長さ=1:6(勾配約10°)を推奨します。

製品の設置の最大角度は12°ですので1:5(勾配約11.5°)以下での使用は止めてください。

| 段差 | <推奨> スロープの長さ | <最大角度> スロープの長さ |
|------|-----------------|-------------------|
| 15cm | 90cm | — |
| 20cm | 120cm | 100cm |
| 30cm | 180cm | 150cm |
| 40cm | 240cm | 200cm |
| 50cm | 300cm | 250cm |
| 60cm | — | 300cm |



推奨する角度で使用する場合、テレスコピックスロープ
193cmは段差が14~47cm、
282cmは段差が17~56cmに適用します。

設置 1) スライド防止ロックを外します。

2) ベロ全体(先端部の角度のついた部分)を段差に乗せて、本品の長さ、2本の幅を調整します。

※本体の長さは段差に合わせて任意の長さにしてください。

※2本のスロープは同じ長さにしてご使用ください。

※スライド防止ロックは外したままで使用します。

※車椅子使用時の全幅は、車椅子の前輪の内側と後輪のハンド
リムの内側が、本品の走行面を通るように設置します。



介助者による使用方法

介助者の方はスロープの上を歩かず、2本のスロープの
間を歩いてください。

※車椅子前側が斜面に対して高い方となるように
移動してください。介助者は上り、下りとも段差の
低い側から車椅子を移動させてください。



収納 1) 段差からスロープを外して最小の長さに縮めます。

2) スライド防止ロックを掛け、本体を固定します。

3) もう1本のスロープも同様に収納します。

※ロックが掛かり、本体が固定されたことを確認してください。

※使用時にハンドルを折りたたむことにより、コンパクトに収納できます。

(幅：ハンドル使用時/280 mm、折りたたみ時/243 mm)



4. お手入れ・保管・廃棄

●スロープは腐食しにくいように加工されています。

中性洗剤を布片やスポンジに染み込ませて汚れを拭き取ってください。

●漂白剤のご使用またはオートクレーブ(加圧滅菌)による洗浄はお止めください。

●スロープのレール部分が汚れた場合は、布片等で汚れを拭き取って乾かしてください。

●湿度の高い部屋(70%以上)に保管しないでください。

●廃棄は各自治体の指示に従い処分してください。

5. 保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一故障した場合は保証規程に基づき無料交換致します。その際は現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店へご提出ください。

| | | | |
|------|---------------------------|-----|-------|
| 品名 | テレスコピックスロープ 193cm / 282cm | | |
| お客様 | ご住所 〒 | TEL | |
| | (フリガナ) | | |
| | お名前 | | |
| | ご購入日 | 西暦 | 年 月 日 |
| 販売店名 | | | |
| 保証期間 | 1年間 | | |

- 「ご購入日」「お客様」「販売店」に記載のない場合は、無効となります。必ず有無をご確認ください。もし記載がない場合は、直ちに販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障または不具合が発生した場合、弊社またはご購入の販売店までご連絡ください。
- 保証期間が過ぎた後の故障等についてご不明の場合は、弊社またはご購入の販売店までお問い合わせください。

保証規程

1. 保証期間は、ご購入日から1年です。保証期間内に発生した故障については、無料修理致します。
2. 保証の対象となる部分はこの商品一式です。ただし、各消耗品（ハンドル・スロープ先端のプラスチック）、また各部の劣化による故障、損傷は除きます。
3. 無償修理には、保証書の提出を要します。
4. 次の場合には保証はできませんが、特にご希望の方には有償にて修理致します。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造・分解による故障・損傷
 - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - (4) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
5. ご相談窓口は、販売店および弊社営業所にて承ります。
6. 保証書の保証対象とならない故障及び損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無料修理致します。
7. その他
 - (1) 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - (2) 保証書の再発行はいたしません。
 - (3) 送料につきましては、保証期間内は弊社負担、保証期間外はお客様負担とさせていただきます。（保証規程6.の場合を除く）

●販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072 (875) 8008 FAX 072 (875) 8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店