

AbleNet[®]

クイックレディ マウンティングプレート

取扱説明書



この度は『クイックレディ マウンティングプレート』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解ください。その後、大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

※製品に関するお問合せ先は裏面をご覧ください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。

※必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様をお願いします。

R パシフィックサプライ株式会社


「クイックレディ マウンティングプレート」について


- VOCAやスイッチをアームに固定するためのプレートです。
- ユニバーサルアーム（ノブ式・レバー式）、スタンダードアームに対応。（別売）
- 本製品を使用する為には別途、アーム・VOCA・スイッチ等が必要です。

もくじ

1. 安全にご使用いただくために 3
2. 各部の名称と仕様 4
3. ご使用前に 5
4. 取付け方法 5~6
5. お手入れ・保管・廃棄 6
6. 保証書 7

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用者に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
---	--

	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
---	---

1. 安全にご使用いただくために

本製品を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品を生命維持に関係する装置として一切使用しないでください。
- 本製品の使用により、傷害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行わないでください。
- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的破損の発生が想定される内容を示しています。

- ご使用前はすべてのマウントの接続部が確実に固定されているか、確認してください。
- 本製品の角・縁が身体に当たらないようにご注意ください。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ベンジン、シンナー、アルコール等で拭かないでください。材質の変色や変形の原因となります。
- 直接日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブ等）の近くで使用しないでください。
- 本製品の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問い合わせください。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気付いた場合は販売店までご連絡ください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負いませんので、ご了承ください。
- 本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

2. 各部の名称と仕様

2-1 構成部品と各部の名称

本製品は次の部品で構成されています。付属品に不足はないかご確認ください。



マウンティングプレート



ロックノブ



デュアルロック（面ファスナー）／4セット 8枚

※材質についてアレルギー反応の原因となる性質は報告されておりません。
※商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ねじ等の紛失にご注意ください。

3. ご使用前に



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の使用により、傷害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行わないでください。
- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

4. 取付け方法

クイックレディ マウンティングプレートは、プレート本体部分は樹脂、ボルト部分は金属で作られています。

プレートとボルトの接続部分に圧力がかかると根元から折れてしまう可能性がありますので、付属している《ロックノブ》を必ず用いてアームに固定してください。

※ベースプレートを利用し固定する場合は、必ず上記の方法で取り扱ってください。



プレート



ロックノブ



ベースプレート・ロックノブ接続

スイッチ等を取り付けている場合はネジがありますが、プレート側に止まるまで回してください。

4-1 アームの取付方法

- ①プレート本体にロックノブを取り付け、プレート側を持ちアームへ回しながら接続します。ロックノブとアームが少し接触するまで回します。



- ②ロックノブを反時計回りに回し、確実にプレートの固定を行ってください。



軽く触れるあたりで回すのを止めてください。それ以上回し続けた場合、プレートとボルトの接続部分に圧力がかかるので折れる可能性があります。

- ③取り外す際は、逆工程を行い取り外してください。

4-2 VOCA、スイッチの取付方法

デュアルロックを使用し、製品にプレートを取り付けてください。

5. お手入れ・保管・廃棄

- 本製品のお手入れの際は、固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 本製品は湿気やほこりの多い場所、高温になる場所や振動のある場所には、保管しないでください。故障の原因となります。
- 本製品が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- 本製品を廃棄する際は、各自治体の規則に従ってください。

6.保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元お届けしておりますが、万一故障した場合には保証規程に基づき無償修理致します。その際は現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店までご提出ください。

品名	クイックレディ マウンティングプレート
お客様	ご住所 〒 TEL
	(フリガナ)
	お名前
お買い上げ日 西暦 年 月 日	
販売店名	
保証期間	2年間

- 「お買い上げ日」「お客様」「販売店」に記載のない場合は、無効となります。必ず有無をご確認ください。もし、記載がない場合は、直ちに販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規程

1. 保証期間はご購入日から2年間です。保証期間内に発生した故障については、無料修理致します。
2. 保証の対象となる部分はこの商品一式です。ただし、各消耗品及び各部の劣化による故障、損傷は除きます。
3. 無償修理には、保証書の提出を要します。
4. 次の場合には保証はできませんが、特にご希望の方には有償にて修理致します。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造による故障・損傷
 - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - (4) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
5. ご相談窓口は、販売店および弊社営業所にて承ります。
6. 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無料修理致します。
7. その他
 - (1) 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 - (2) 保証書の再発行はいたしません。
 - (3) 送料につきましては、保証期間内は弊社負担、保証期間外はお客様ご負担とさせていただきます。
(保証規程6.の場合を除く)

●販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072 (875) 8008 FAX 072 (875) 8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店