

# デンタルクッション



COBI REHAB®  
The Positioning Company

LASAL

## 取扱説明書



この度は『デンタルクッション』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解ください。その後、大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合があります。  
必ずご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認ください。

 パシフィックサプライ株式会社

転載複写厳禁

※Kマークは川村義肢株式会社の登録商標です。  
※製品に関するお問い合わせは本取扱説明書最終ページをご参照ください。

# デンタルクッションについて

デンタルクッションは、歯科診療台用として、専用に開発されたクッションです。診療中の不安や、診療台上での不安定性がある方に、適しています。

- 患者様と診療台に簡単に調整することができます。
- 洗濯・消毒可能なカバーを使用しています。
- 頭・首・腕・脚・背部をサポートするクッションがあります。
- 不随意運動を最小限に抑えることができます。
- スウェーデンの歯科衛生士と共同で開発されました。

## もくじ

1. 安全にご使用いただくために	3
2. 各種の名称	4
3. 各種仕様	5
4. お手入れ・保管・廃棄	6
5. 保証書	7

## 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
---	---

 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
---	--

# 1. 安全にご使用いただくために



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品を火のそばに置かないでください。引火する恐れがあります。
- 本製品を絶対に口に被せたり、口の中に入れてください。窒息などの危険があります。
- 本製品の使用により、傷害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行わないでください。
- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- はさみやナイフ、カッターなどの鋭利な刃物を近づけないでください。
- 過度の重量・衝撃が加わると破損の原因となる場合がございますのでご注意ください。
- ベンジン、シンナー、アルコール（消毒用を除く）等で拭かないでください。  
材質の変色や変形の原因となります。
- 直接日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブ等）の近くで使用しないでください。
- 本製品の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。  
本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問い合わせください。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気付いた場合は販売店までご連絡ください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。  
またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負いませんので、ご了承ください。
- 本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

## 2. 各種の名称



デンタルネッククッション



デンタルネッククッションU型



デンタルヘッドサポート  
クッション アシンメトリ



デンタルヘッドサポート  
クッション シンメトリ



デンタルクレセントクッション



デンタルセーフガーダークッション



デンタルフットクッション



デンタルレッグクッション  
リラックス Adult



デンタルレッグクッション  
リラックス Child



デンタルレッグクッション  
Adult




デンタルシートクッション  
Child

本体カバー	PU、ポリエステル
本体内部	極小ポリスチレンビーズ
クッションカバー	PU、ポリエステル

\*いずれのカバーも抗バクテリア加工が施されています


\*商品仕様は予告なく変更する場合がございます

# 3. 各種仕様

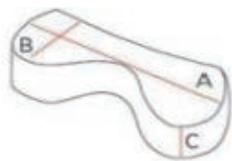


デンタルネッククッション

A:長さ	B:幅	C:高さ
36cm	6.5cm	10cm

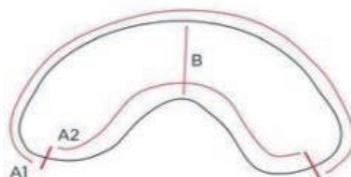


デンタルネッククッションU型

A1:外周	A2:内周	B:幅
113cm	57cm	21cm

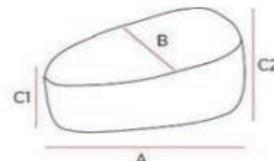


デンタルヘッドサポート  
クッション アシンメトリ

A:長さ	B:幅	C1:高さ	C2:高さ
35cm	24cm	10cm	13cm

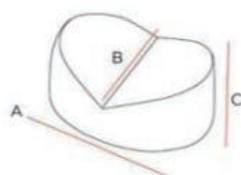


デンタルヘッドサポート  
クッション シンメトリ

A:長さ	B:幅	C:高さ
35cm	24cm	13cm

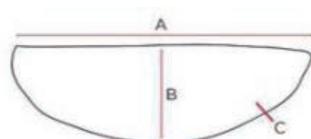


デンタルクレセントクッション

A:長さ	B:幅	C:高さ
46.5cm	22cm	3.5cm

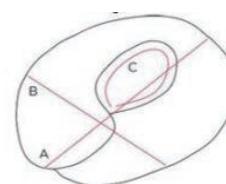


デンタルセーフガーダー  
クッション Adult

A:長さ	B:幅	C:内周
91cm	81cm	127cm

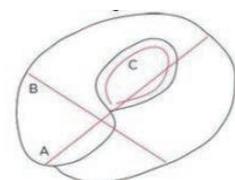


デンタルセーフガーダー  
クッション Child

A:長さ	B:幅	C:内周
79cm	59cm	93cm

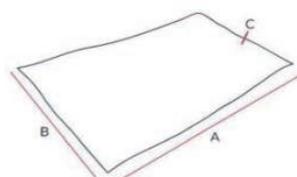


デンタルフットクッション

A:長さ	B:幅	C:高さ
72cm	42cm	8cm

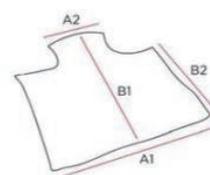


デンタルレッグクッション  
リラックス Adult

A1:長さ	A2:長さ	B1:幅	B2:幅
80cm	30cm	83cm	61cm

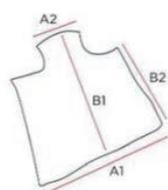


デンタルレッグクッション  
リラックス Child

A1:長さ	A2:長さ	B1:幅	B2:幅
60cm	20cm	100cm	81cm

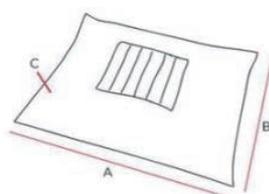

デンタルレッグクッション Adult

A:長さ	B:幅	C:高さ
79cm	58cm	10cm

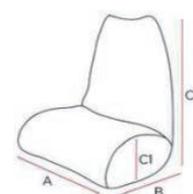

デンタルシートクッション Child

A:長さ	B:幅	C1:高さ	C2:高さ
50cm	39cm	15cm	49cm

\*詳しい使用方法等については、弊社ホームページをご覧ください。  
<https://www.p-supply.co.jp/>

## 4. お手入れ・保管・廃棄

	洗濯	乾燥
クッション カバー	<ul style="list-style-type: none"><li>・洗濯機の水 flow、すすぎ洗い可（洗濯水は90℃まで）</li><li>・消毒用エタノール、次亜塩素酸水の使用可</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・タンブル乾燥可</li><li>・アイロン使用不可</li></ul>
本 体	<ul style="list-style-type: none"><li>・中性洗剤または消毒用エタノールを含ませた清潔なガーゼなどで表面を拭いてください</li><li>・水洗い／ドライクリーニング／オートクレープ洗浄はすべて使用不可</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・タンブル乾燥不可</li><li>・アイロン使用不可</li></ul>

- 本製品が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- 本製品を廃棄する際は、各自治体の規則に従ってください。

# 5. 保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規程に基づき無償修理致します。その際は現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店までご提出ください。

品名	デンタルクッション			
お客様	ご住所 〒			
		TEL		
	(フリガナ)			
	お名前			
ご購入日 西暦 年 月 日				
販売店名				
保証期間	3年間			

- 「ご購入日」「お客様」「販売店」に記載のない場合は、無効となります。必ず有無をご確認ください。  
もし、記載がない場合は、直ちに販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## 保証規程

- 保証期間はご購入日から3年間です。保証期間内に発生した故障については、無料修理致します。
- 保証の対象となる部分はこの商品一式です。ただし、各消耗品及び各部の劣化による故障、損傷は除きます。
- 無償修理には、保証書の提出を要します。
- 次の場合には保証はできませんが、特にご希望の方には有償にて修理致します。
  - 保証書を紛失された場合
  - 誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造による故障・損傷
  - 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
  - ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
- ご相談窓口は、販売店および弊社営業所にて承ります。
- 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無料修理致します。
- その他
  - 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
  - 保証書の再発行はいたしません。
  - 送料につきましては、保証期間内は弊社負担、保証期間外はお客様ご負担とさせていただきます。  
(保証規程6.の場合を除く)

●販売元

# パシフィックサプライ株式会社

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1  
TEL 072 (875) 8008 FAX 072 (875) 8010

---

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店