

オルトトップクッションフィットシリーズ 取扱説明書

<本製品の特徴>

本製品の機能を十分に生かし、かつ安全にご使用いただくご使用前に必ず本取扱説明書をお読み下さい。


- これひとつで高齢者の多くのユーザーのニーズに対応できます。
- 難しい調整はなく、特殊にカットされたパッドの位置を替えるだけで、片足こぎや腰を安定させるための座位を簡単に作ることができます。(4つのケースに対応)
- 骨盤周辺は低反発のフォームを使用しているので、長時間座っても快適です。
- 肌ざわりがよく、伸縮性に富んだカバーを使用していますので、快適でムレにくくなっています。




使用方法

出荷時は、**スタンダードタイプ** に設定されています。
他のタイプで使用する場合は以下の手順に従い、変更を行ってください。


1 前方部のファスナーを開けてください。

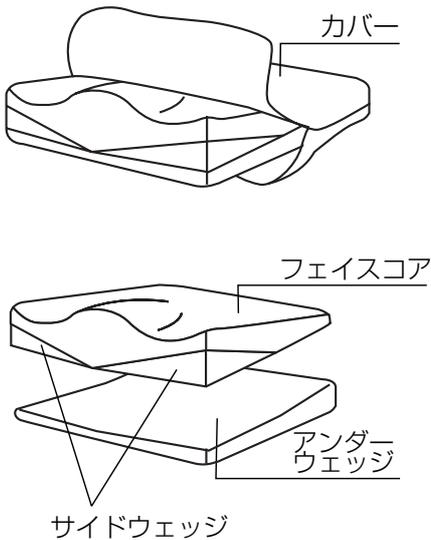


2 **ライトハイタイプ** で使用する場合
サイドウェッジ2枚を右側にきれいに重ねてください。
(アンダーウェッジの低い方が前側になっていることを確認してください)

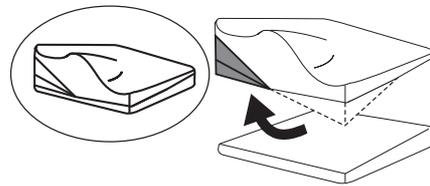

レフトハイタイプ で使用する場合
サイドウェッジ2枚を左側にきれいに重ねてください。
(アンダーウェッジの低い方が前側になっていることを確認してください)

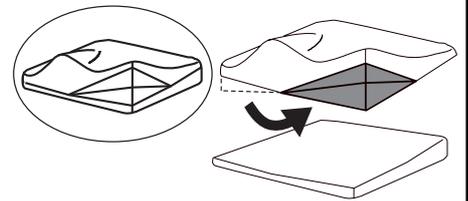

フロントハイタイプ で使用する場合
サイドウェッジをスタンダードタイプに戻し、アンダーウェッジを前後入れ替え、高い方が前に来るように重ねてください。

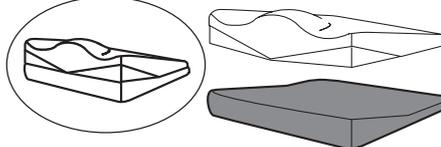

3 中身がきれいに重ねられていることを確認し、ファスナーを最後までしめてください。

品名	重量	クッション部材質	カバー表材質	カバー裏材質
クッション フィット	600g	特殊ウレタンフォーム	ナイロン・ポリエステル	ポリエステル
クッション フィット 防水	720g			PVC
クッション フィット ゲル	925g	特殊ウレタンフォーム/ゲル		ポリエステル
クッション フィット ゲル 防水	1045g			PVC

●サイズ:全長40×全幅40×高さ5cm(4~7cmに調整可能)

<お手入れ方法>

洗濯機の弱水流(ネット使用)または弱い手洗い(押し洗い)が可能です。(液温は40℃を限界とし、中性洗剤をご使用ください)。



- ※塩素系漂白剤による漂白はできません。
- ※アイロンは使えません。
- ※ドライクリーニングはできません。
- ※カバー以外は洗濯できません。
- ※消毒液ご使用の際は、営業担当者にご確認ください
- ※その他、ご質問の際は販売店までご連絡ください。

注意

- 形状を選択する場合、医師やセラピストの指示に従い、その状況に応じたタイプを選択してください。
- カバーのファスナー部分を前方にしてお使いください。
- ファスナーは最後までしっかりとしめてください。
- 寸法が合わない場合、無理に使用しないで下さい。身体に負担がかかり、床ずれ、変形などを誘発する危険があります。
- 本書に記載されている以外の方法でのご使用はお止め下さい。
- 本製品に対して改造は行わないで下さい。
- 本製品は改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。

- 発売元：パシフィックサプライ株式会社
- 製造元：株式会社クオリ
- 企画開発：川村義肢株式会社