

# オルトα / こみち取扱説明書

この度はオルトα / こみちをご購入いただきまして誠にありがとうございます。ご使用いただく前に本取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

**⚠ 警告** ※この項目を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不都合を生じ、重傷を負う可能性があります。

- ①ベルトは必ず取り付けてご使用ください。取り付けない状態でご使用された場合、転倒の恐れがあります。
- ②ベルトは正しい方向で取り付けてください。
- ③面ファスナーはしっかり押さえて（圧力をかけて）ご使用ください。不十分な場合、接着力が得られず危険です。
- ④ベルトの調節の際は、面ファスナーで指を傷つけないようにご注意ください。

**⚠ 注意** ※この項目を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不都合を生じ、傷害を負ったり物的損害が発生する可能性があります。

- ①洗濯時は漂白剤を使用しないでください。変色する恐れがあります。
- ②洗濯時は中性洗剤をご使用ください。
- ③洗濯時は手洗い（手押し洗い）して、陰干ししてください。
- ④火のそばで保管または使用しないでください。軟化または、変形する恐れがあります。
- ⑤ワックスのかけてある場所やぬれている場所でのご使用は避けてください。

## ● 品質表示

表素材：ポリエステル 100%

内素材：ポリエステル 100%（抗菌防臭）

底材：合成底

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。

必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認いただきますようお願いいたします。

## ●その他の特徴

- ①表素材は撥水加工しています。
- ②内素材は抗菌防臭加工しています。
- ③底材は、適切な部分にグリップ性のある特殊なゴムを使用しています。
- ④交換用の中敷及びカップインソール(こみち用)は別売しています。


## ●ベルトの長さ調節方法

この靴のベルトには、長さ調節機能があります。  
ベルトの長さを調節するには下記の方法にておこなってください。

- ①靴のカン側の面ファスナーを剥がして、ベルトを取り外してください(図1)。
- ②ベルトを適切な位置で折り、カンに折った部分まで通してください(図2)。

※ベルトは下記の範囲で折り返してください。下記の範囲以外で折り返した場合、ベルトが破損する恐れがあります。

- ③面ファスナーがずれないように重ねて、しっかり押さえて貼り合わせてください。

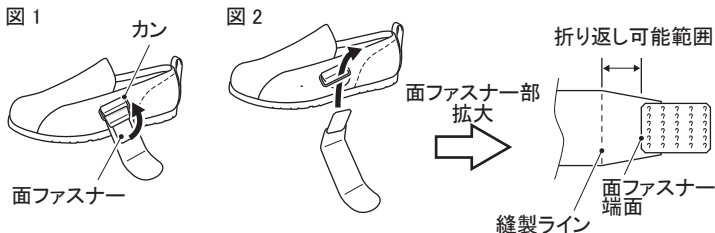

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の内容の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

オルトαこみち取扱説明書 / 改訂2017.06 / パシフィックサプライ(株) TEL:072-875-8008