

4. お手入れ・保管・廃棄

- 市販の洗浄液やぬるま湯で手洗いしてください。
- 吊るして、もしくは平干しで乾燥させてください。
- 洗濯機や乾燥機は使用しないでください。
- 直接熱が伝わる場所や温度が高くなる場所を避けて保管してください。
- 各地方自治体の指示に従い廃棄処分してください。

(販売元)

k Pacific Supply株式会社

- 本社営業部 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072-875-8011 FAX 072-875-8015
- 札幌営業所 〒060-0051 札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F
TEL 011-218-5801 FAX 011-218-5805
- 盛岡出張所 TEL 019-661-5407 FAX 019-661-5408
- 東京営業所 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-12 グレイスビル2F
TEL 03-3352-0757 FAX 03-3355-3154
- 名古屋営業所 〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西3-5
TEL 0568-34-2696 FAX 0568-34-2697
- 広島営業所 〒733-0035 広島市西区南観音7-5-13 ロイヤルシャトー中田1F
TEL 082-293-6255 FAX 082-293-6299
- 福岡営業所 〒812-0054 福岡市東区馬出2-2-12
TEL 092-641-8151 FAX 092-641-0444

<http://www.p-supply.co.jp/>

(販売店)

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2011.06 作成

取扱説明書

Think Possibility!


クリップ&プル -Clip&Pull-

Clip & Pull™

この度はDignified Living社製「クリップ&プル」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書は本製品を安心してご使用いただけるよう、分かりやすく説明しています。ご使用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

「クリップ&プル」とは・・・

- クリップ & プルは、かがむことなく片手で簡単に着替えができるようにサポートする補助器具です。
- 特別な構造のクリップにより、弱い力でクリップを留めることができ、強い力で引いても衣服からはずれません。
- 股関節・膝関節を深く曲げずに、座ったまま使用していただけます。

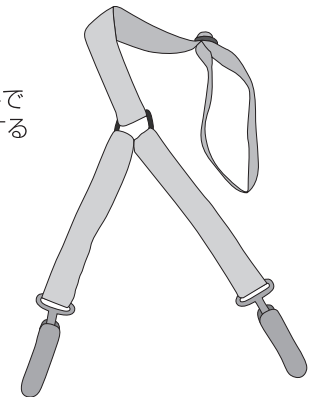

目次

- | | |
|-----------------------|------|
| 1. 安全にご使用いただくために…………… | 2ページ |
| 2. 製品仕様…………… | 3ページ |
| 3. 使用方法…………… | 4ページ |
| 4. お手入れ・保管・廃棄…………… | 8ページ |

k Pacific Supply

- 製品に関するお問合せ先は裏面をご覧ください。
- 取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。
- 必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様にお願いします。

1. 安全にご使用いただくために

「クリップ&プル」を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

1-1. 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは「クリップ&プル」を安全に正しくご使用していただき、ご自身や他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐ目印となるものです。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します

1-2. 警告に関する事項



警告

ズボンやスカートなどの着衣に使用される場合は、クリップ&プルは必ず座ったままでご使用ください。



警告

クリップ&プルをご使用後は、必ずクリップをはずし、衣服から取り外してください。



警告

クリップ&プルを直接体に取り付けしないでください。



警告

使用する方法または支援する方は「クリップ&プル」の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください





警告

本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

3-6. 使用方法【洋服の背中中のジッパーを上げる】



ワンピースやドレスなど、洋服の背中中のジッパーを上げる。

- ① ジッパーの受け側にクリップをとめます。
- ② 洋服を着ます。
- ③ クリップ&プルのひも部分を肩の上まで持ち上げます。

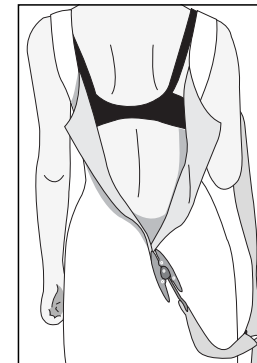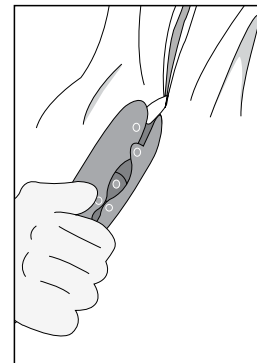



●両手の場合

- ④ もう一方の手で洋服のジッパーの端を軽くつまみます。
- ⑤ クリップ&プルを引き上げます。

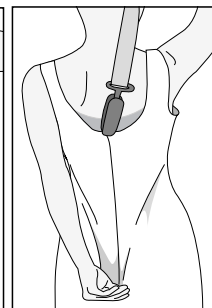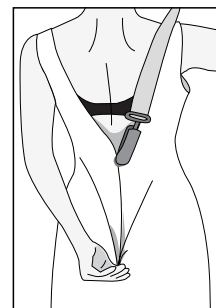

●片手の場合

- ④ 洋服を引っ張るために、いすに座ります。
- ⑤ クリップ&プルを引き上げます。

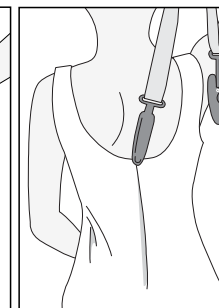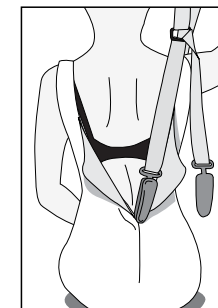


※背面にとめたクリップ&プルをはずす時は
壁や硬い面にクリップを押し当ててはずします。

3-4. 使用方法【ジッパーを上げる】

片手が使用できない方が、ジャケットやコートなどのジッパーを上げる。


- ① ジッパーの受け側にクリップをとめます。
- ② クリップ&プルの端を足で踏んで、衣服をピンと張ります。
- ③ ジッパーを受け側に差し込み、引き上げます。

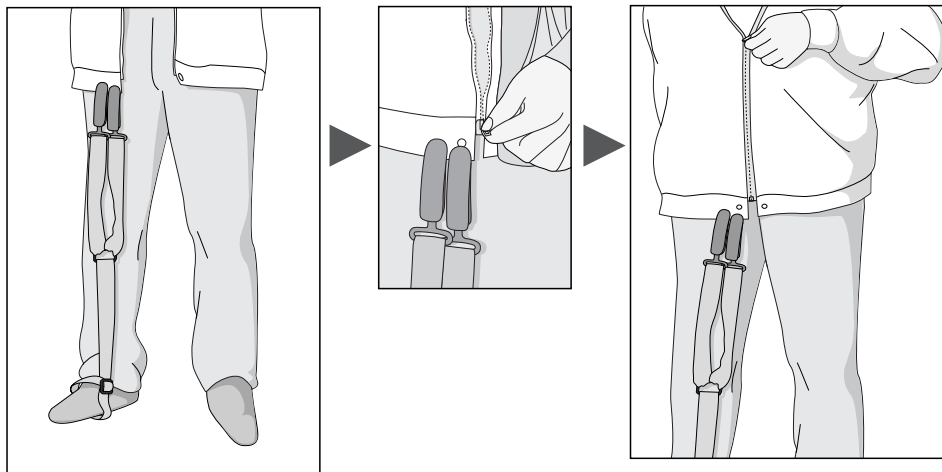

3-5. 使用方法【タオルで足を拭く】

腰を曲げたり、手を使わずに、足を拭いたり、タオルを拾い上げる。

- ① タオルの端にクリップを留め、床に落とします。
- ③ 足を拭きます。
- ④ 拭き終わったら、足をタオルから下ろします。
- ⑤ クリップ&プルを引き上げ、タオルを拾います。

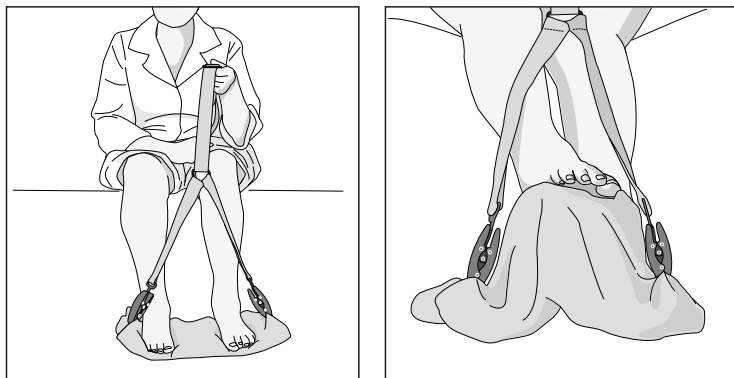

1-3. 注意に関する事項

- 注意** 本製品の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問い合わせください。
- 注意** 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気づいた場合は販売店までご連絡ください。
- 注意** 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- 注意** 本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。
- 注意** 本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

2. 製品仕様

商品名	クリップ&プル
全長	83cm～101cm

3. 使用方法

3-1. 使用する前に



ズボンやスカートなどの着衣に使用される場合は、クリップ&プルは必ず座ったままでご使用ください。



使用する方または支援する方は「クリップ&プル」の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください



クリップの取り付け・取り外し時に、クリップを強く握りすぎないでください。




本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。


3-2. 使用方法【下着（ズボン・スカート）をはく】

腰を曲げたり、手を使わずに、下着（ズボン・スカート）をはく。


- ① 衣服を膝の上、もしくは平らな場所に置きます。
- ② 衣服のウェスト部分にクリップを留めます。

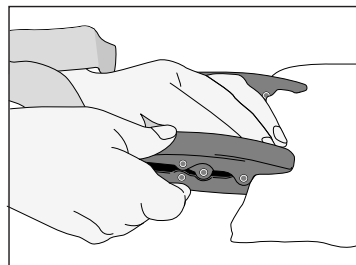


- ③ 座ったまま、衣服を床に下ろします。

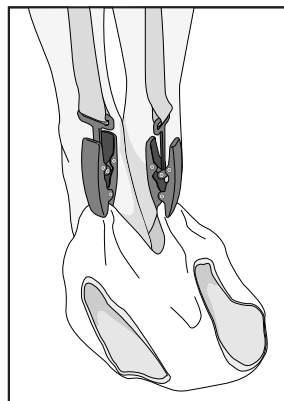

- ④ 足を一本ずつ衣服に通します。
(足が衣服に引っかかっていないことを確認してください)

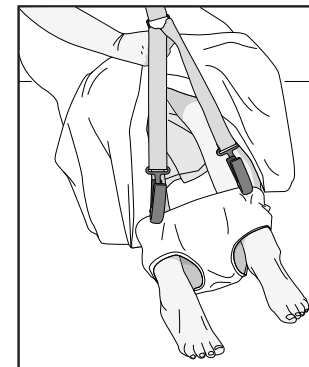

- ⑤ 衣服が手元にくるまで衣服をクリップ&プルで引き上げます。

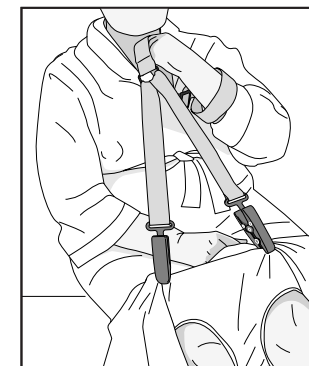

3-3. 使用方法【ボタンを留める】

片手が使用できない方が、ジャケットやコートなどのボタンを留める。

- ① 衣服の端にクリップをとめます。
- ② クリップ&プルの端を足で踏んで、衣服をピンと張ります。
- ③ ボタンを留めます。

