

コミュニケーション機器の選び方

～「ボイスキャリーペチャラ」「レッツ・チャット」「伝の心」の違い～


機器選択の参考のため「ボイスキャリーペチャラ」「レッツ・チャット」「伝の心」の違いをご紹介します。

	ボイスキャリーペチャラ	レッツ・チャット	伝の心
写真			
文字の入力方法	直接文字のキーを押す	本体の文字盤が光っているところで外部のスイッチを操作する (オートスキャン・ステップスキャン)	画面上の文字盤が選択されているところで外部スイッチを操作する (オートスキャン)
直接入力	できる	できない	できない
スイッチによる入力	できない	できる	できる
漢字変換	できない	できない	できる
機器構成	専用機	専用機	ベースにパソコンを使用 →介助者の方にパソコンの知識があった方がよい
使える可能性のある方	キーボードの範囲に手を動かすことができ、キーを押すことができる方	スイッチが操作できてスキャンの入力が理解できる方	スイッチが操作できてスキャンの入力が理解できる方
対象者(詳細)	(1) 発声・発話によるコミュニケーションが困難な方 (2) 脳性麻痺の方 (3) 脳血管障害がいによる構音障害がいのある方 (4) 神経疾患の方 (5) 自閉症の方 (6) その他の言語障害がいのある方	(1) 言語障害がいおよび上肢障害がいのある方で、随意にスイッチを操作できる方。 (2) 脳性麻痺の方や、ALS など神経疾患の方等。	(1) 重度肢体不自由の方で発声ができない方。 (2) 特殊なマウスや代替キーボードの使用が困難で、指先や眼球のわずかな動きを利用して機器を操作する必要のある方。(主にALS等神経疾患の方)

・ 文字の入力方法

<ボイスキャリー ペチャラ>

直接文字キーを押します。

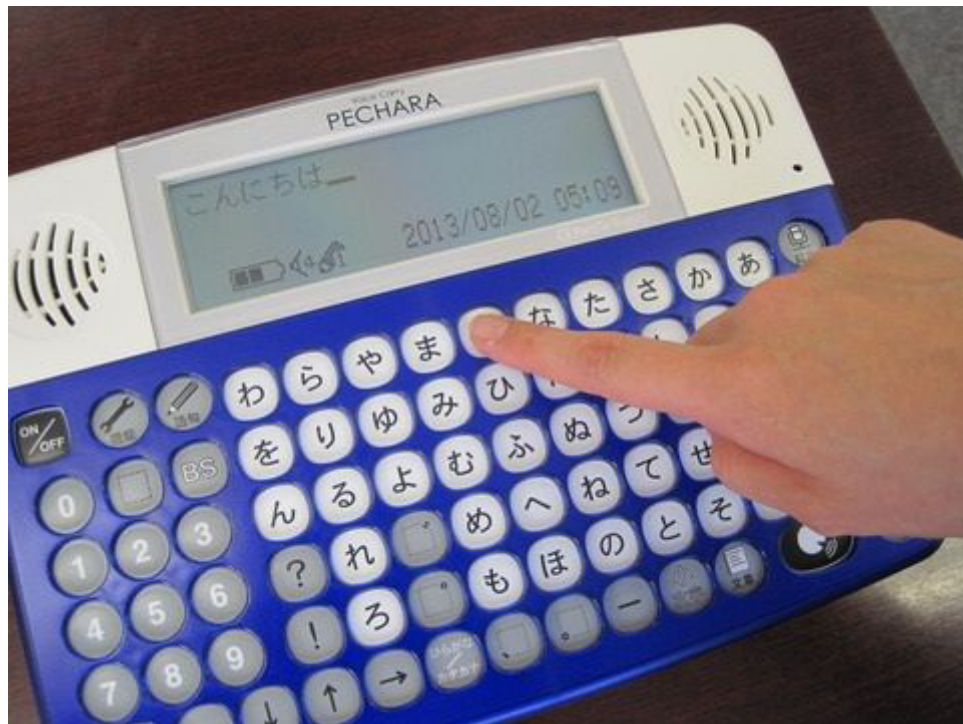

ボイスキャリー ペチャラ(パツとレンタル用) :

<https://www.p-supply.co.jp/products/512>

<レッツ・チャット>

本体の文字盤が光っているところで外部のスイッチを操作します。
光が移動するタイミング(スピード)は変更できます。



レッツ・チャット(パツとレンタル用) :

<https://www.p-supply.co.jp/products/513>

<伝の心>

画面上の文字盤が選択されているところで外部スイッチを操作します。
移動するタイミング(スピード)は変更できます。



伝の心(パツとレンタル用) :

<https://www.p-supply.co.jp/products/218>

- 「レッツ・チャット」「伝の心」のレンタル品には入力用のスイッチとしてジェリービーンスイッチ・スペックスイッチが付属します。
- 別途スイッチセット(PPSスイッチ・ポイントタッチスイッチ・ピンタッチスイッチ)をご使用いただくことも可能です。