
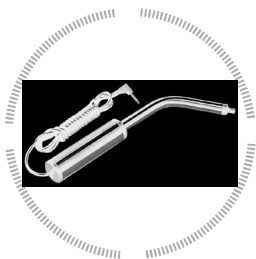


クイックスタートガイド

1入力、2入力、複数入力スイッチ

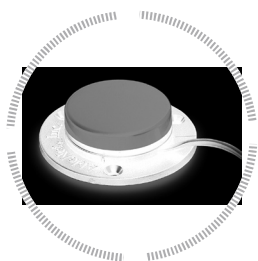

an ablenet company

www.ablenetinc.com

スイッチの外部機器との接続



1入力スイッチ

(ビッグスイッチ® ジェリービーン® パディボタン、等)

3.5mmのモノラルジャックがある、スイッチに適応した機器に1入力スイッチを差し込みます。

2入力スイッチ

(ロッカー、空気圧式スイッチ)

3.5mmのステレオジャックがある、スイッチに適応した機器に2入力スイッチを差し込みます。

注：3.5mmのモノラルジャックがある、スイッチに適応した機器に対しては、どちらか一方のスイッチ入力のみ作動します。

複数入力スイッチ

(スター、ウェイファー、ペンタ、ミニジョイスティック、等)

準拠したD-sub9ピン端子のある機器に、複数入力スイッチを差し込みます。


注：直接パソコンと接続しても動作しません。パソコン操作には、スイッチ接続コネクタ(別売)が必要です。

1入力スイッチを作動させる (例)



スイッチを接続してから、表面スイッチを押して、接続された外部機器を制御します。

2入力スイッチを作動させる (例)

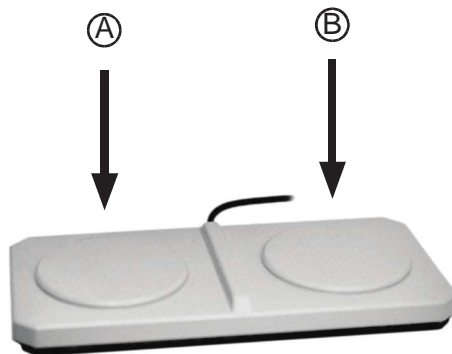


スイッチを接続してから、いずれかの表面スイッチを押して、接続された外部機器を制御します。それぞれのスイッチが別個のスイッチとして機能します。

上記の例：スイッチ (A) で選択肢を操作し、スイッチ (B) を押して外部機器を作動させています。

注：接続された機器により、動作・反応の性質は異なります。詳しくは、外部機器メーカーが作成した文書を参照してください。

複数入力スイッチを作動させる (例)

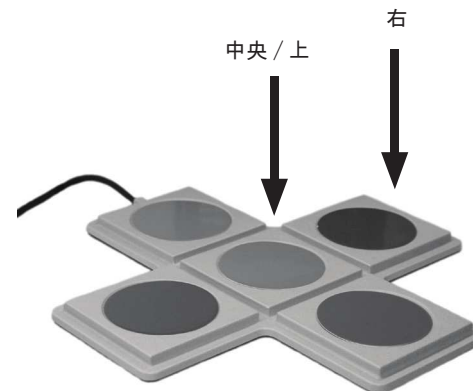

スイッチを接続してから、どれか一つの表面スイッチを押して、接続された外部機器を制御します。それぞれのスイッチが別個のスイッチとして機能します。

上記の例：右のスイッチで選択肢を操作し、中央か上(ジョイスティック使用の場合)を押して外部機器を作動させています。

注：接続された機器により、動作・反応の性質は異なります。詳しくは、外部機器メーカーが作成した文書を参照してください。