
ロック - Rock -

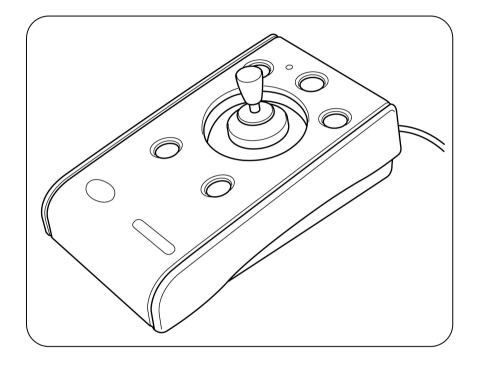



この度はジョイスティック「ロック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書は機器を安心してご使用いただけるよう、分かりやすく説明しています。ご使用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

Pacific Supply

- ●製品に関するお問合せ先は裏面をご覧ください。
- ●取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。
- ●必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様にお願いします。

「ロック」について

「ロック」とは...

- ●パソコンの画面上のマウスカーソルを操作できるジョイスティックです。
- ●肢体不自由のある方が、本体上にあるジョイスティックと 安定した本体部分にある各ボタンの操作よってパソコン操作を 支援する機器です。
- ●左・右クリックボタンに加え、ダブルクリックボタンと左クリックを 押した状態を保持する「ドラッグボタン」、ジョイスティックの動きを 横・縦のみに限定したりマウスのホイールのような役割をする 「ロックボタン」を備えています。
- ●左・右クリックボタン、ダブルクリックボタン、ドラッグボタン、 ロックボタンの色を変えることで誤操作を防止します。
- ●外部スイッチを使用して左・右クリック操作を行なうことが可能です。
- ●USB もしくは PS/2 で動作します。 ※PS/2 での使用の際は付属の変換コネクタを使用します。
- ●Windows パソコンもしくは Mac で動作します。

目次

1.	安全にご使用いただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2ページ
2.	各部の名称と仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4ページ
3.	使用方法	5ページ
4.	学習モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8ページ
5.	スイッチ設定モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10 ページ
6.	お手入れ・保管・廃棄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11 ページ

1.安全にご使用いただくために

「ロック」を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

1 - 1 . 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは「ロック」を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐ目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

1 - 2 . 警告に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



本製品は肢体不自由のある方がパソコン操作を行なうための入力支援機器です。他の目的で使用しないでください。特に生命維持に関係する装置には一切使用しないでください。



「ロック」の使用により障害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。



落雷の恐れがある状況下でのご使用はお止めください。



修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。



使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。



使用する方または支援する方は「ロック」の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまで ご使用にならないでください。



本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

1 - 3 . 注意に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的 損害の発生が想定される内容を示します。



本製品は精密な電子部品が組み込まれております。以下のような場所で本製品を使用又は保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてください。

- (1) 直射日光のあたる場所、高温多湿な場所、ほこり・ちりの多い場所
- (2) 冷暖房機器・加湿器のそば
- (3) 水に濡れやすい場所
- (4) 振動のある場所



濡れた手で「ロック」本体や接続ケーブル、接続コネクタに触れないでください。故障及び感電の恐れがあります。



「ロック」本体に唾液、水、粉塵、ごみ等がかからないようにしてください。動作不良や、故障の原因となります。



落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



ベンジン、シンナー、アルコール等で拭かないでください。材質の変色や変形の原因となります。



直接日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具(ストーブなど)の近くで使用しないでください。熱により変形を起こす原因となります。



酸素やオゾン等、腐食性ガスの発生する場所でのご使用はお止めください。



本製品の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問い合わせください。



本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気づいた場合は販売店までご連絡ください。



本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。



本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。




本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

2. 各部の名称と仕様

2-1.構成部品と各部の名称

本製品は次の部品で構成されています。付属品に不足はないかご確認ください。

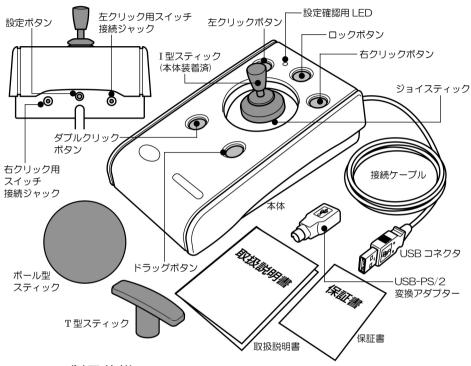

2 - 2 . 製品仕様

部分名称	仕様		
	高さ×幅×奥行	約 71×130×235(mm)	
	重量	約 840g	
本体	接続ケーブル長	約 2m	
4	スイッチ用ジャック	3.5mm モノラルジャック	
	接続方式	USB もしくは PS/2(※変換アダプター使用)	
	動作 OS	Windows:Windows98SE 以降 Macintosh:MacOS 9/MacOS X 10.1 以降	

※ 上記の動作環境を満たす機器であっても全ての機器での動作を保証するものではありません。

3.使用方法

3 - 1 . 使用する前に

	ì	\	誓	女	쓷
_	i	,	١.		

本製品は肢体不自由のある方がパソコン操作を行なうための入力支援機器です。他の目的で使用しないでください。特に生命維持に関係する装置には一切使用しないでください。



「ロック」の使用により障害を生じる可能性があります。使用中に、身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。



落雷の恐れがある状況下でのご使用はお止めください。



修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。




使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに 使用を中止し、販売店にご相談ください。



使用する方または支援する方は「ロック」の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。

3 - 2 . 各部の機能に関して

各部名称	機能説明
ジョイスティック	マウスカーソルの操作を行ないます。 ジョイスティックを傾けた方向によりマウスカーソルの移動方向が決定し ます。傾きが大きくなるとマウスカーソルの移動が速くなります。
左クリックボタン(赤)	マウスの左クリックと同じ動作をします。
右クリックボタン(黄)	マウスの右クリックと同じ動作をします。
ダブルクリックボタン(緑)	マウスの左ダブルクリックと同じ動作をします。
ドラッグボタン(青)	1 回押すと左クリックボタンを押した状態(ドラッグ状態)になります。もう 1 回押すと左クリックボタンのドラッグ状態が解除されます。
ロックボタン(黒)	ジョイスティックの動きを横・縦のみに限定したり、マウスのホイールと同様の操作を可能にするボタンです。
左・右クリック用 スイッチ接続ジャック	外部スイッチを接続することでそれぞれ左クリックボタン・右クリックボタ ンを代替します
USB コネクタ	パソコンの USB ポートに接続します。
USB-PS/2 変換アダプタ	パソコンの PS/2 ポートに接続する際に USB コネクタを PS/2 コネクタ に変換します。

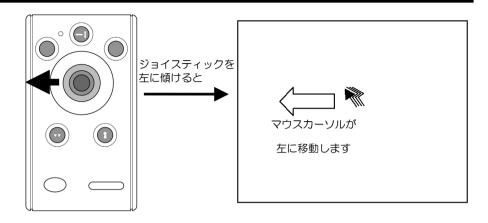


ジョイスティックの傾きとマウスカーソルの移動方向

<u>3 - 3</u> . USB ポートに接続する

- ・「ロック」の USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続してください。自動的に使用できる状態になります。
- ・「ロック」をパソコンの USB ポートに接続する ときや、取り外しを行なう際にパソコンの電源を オフにする必要はありません。


※USB ポートに接続する場合、Windows もしくは Mac で動作します。対応 OS は 4 ページの製品仕様でご確 認ください。

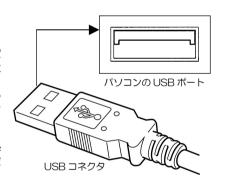

3 - 4 . PS/2 ポートに接続する

- ・「ロック」の USB コネクタに USB-PS/2 変換コネクタを取り付けます。
- ・**電源がオフになっている状態**で、「ロック」の PS/2 コネクタをパソコンの PS/2 ポート に接続します。

「ロック」をパソコンの PS/2 ポートに接続するときや、取り外しを行なう際には**必ずパソコンの電源をオフ**にしてください。

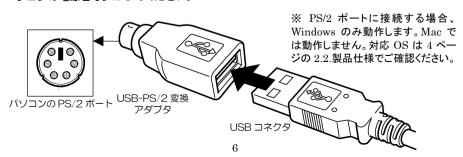


3 - 5 . スイッチの接続

- ●「ロック」の左・右クリックボタンの操作が難しい場合、 外部スイッチで操作を代替することが可能です。
- ●本体上面にある「左クリック用スイッチ接続ジャック」は左クリックボタンを、「右クリック用スイッチ接続ジャック」は右クリックボタンを代替します。
- ●ジェリービーンスイッチ、スペックスイッチといったエーブルネット製の スイッチはもとより、パシフィックサプライ製スイッチなど 3.5mm モノラルプラグ形状 のスイッチが接続可能です。

3-6.マウスカーソルの移動スピードの調節

- ●ジョイスティックを傾けるとマウスカーソルが移動します。ジョイスティックを大きく傾けると移動スピードが速くなります。
- ●「ロック」はマウスカーソルの移動スピードを4段階で調節することが可能です。 本体上面の設定ボタンを押すと「ピピピ」と3回ブザーが鳴り
- 1 段階移動スピードが遅くなります(一番遅い設定の場合は一番速い設定になります)。

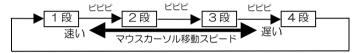

3 - 7 . ロックボタン


- ●ロックボタンはマウスカーソルの動きを横・縦のみに限定したりマウスのホイールと同じような動作をするためのボタンです。
- ●ロックボタンを押すたびにジョイスティックを操作したときの動作が 以下のように切り替わります。
 - (1) 通常のジョイスティックの動きをします。 (動作確認用 LED は<u>**点灯**</u>状態)
 - ↓ ロックボタンを押す (「ピ」と1回ブザーが鳴ります)
 - (2) 横方向にのみ動きを限定します。 (動作確認用 LED は**点滅**状態) ↓ ロックボタンを押す (「ピ」と 1 回ブザーが鳴ります)
 - (3) 縦方向にのみ動きを限定します。 (動作確認用 LED は**点滅**状態)
 - ↓ ロックボタンを押す (「ピ」と 1 回ブザーが鳴ります)
 - (4) マウスのホイールと同様の動作をします (動作確認用 LED は<u>点滅</u>状態)
 - ※ アクティブになっているウィンドウ上でジョイスティックを 上下に移動すると縦方向にスクロールバーが移動します。
 - この状態のときは、マウスカーソルは移動しません。
 - ↓ ロックボタンを押す(「ピ」と1回ブザーが鳴ります)
 - (5) (1)に戻ります。

3-6.ジョイスティックの取り替え

●本製品はI型スティック(下図左)、T型スティック(中)、ボール型スティック(右)があり、使用する方に合わせて差し替えることが可能です。





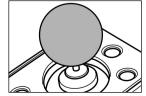


4.学習モード

4 - 1.「学習モード」とは

- ●より「ロック」を使いやすくするための設定機能です。
- ●ジョイスティックの上方向を変更することが可能です。
- ●各ボタンを押したときに出るブザー音の有無を設定できます。
- ●「左クリックボタン」と「右クリックボタンを入れ替えることができます。

4 - 2 . 「学習モード」手順

学習モードは以下の手順で設定を行ないます。

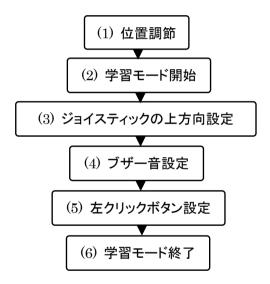

4 - 2(1) 位置調節 「ロック」をジョイスティックの上の方向をはっきりと決めるために、右の図のように置いてください。 上の方向

4 - 2(2) 学習モード開始

設定ボタンを「ピロピロ」とブザーが鳴り、設定確認用 LED が緑で点滅するまで押し続けてください。学習モードが開始されます。

4 - 2(3) ジョイスティックの上方向設定

ジョイスティックでマウスカーソルを上に動かしたい方向に傾けてください。マウスカーソルが上に動きます。

4 - 2(4) ブザー音設定

ダブルクリックボタン、ドラッグボタン、ロックボタン操作時にブザー音を鳴らすか どうかを設定します。

ブザー音を鳴らす場合は「<u>赤ボタン</u>(初期設定は左クリックボタン)」、鳴らさない場合は「<u>黄ボタン</u>(初期設定は右クリックボタン)」を押してください。

4 - 2(5) 左クリックボタン設定

左クリックボタンを赤・黄ボタンのどちらに割り付けるかを設定します。

赤ボタンに割り付ける場合は「赤ボタン」、黄ボタンに割り付ける場合は「黄ボタン」を押してください。

※ 赤ボタンを左クリックボタンに設定した場合は黄ボタンが右クリックボタンに、 黄ボタンを左クリックボタンに設定した場合は赤ボタンが右クリックボタンになります。

4 - 2(6) 学習モード終了

左クリックボタン設定が終了すると、「ピロピロ」とブザーが鳴り設定確認用 LED が 点灯に変わることで学習モードが終了したことを示します。学習モードが終了すると 設定内容が反映された状態で「ロック」を使用することが可能となります。設定は「ロック」本体内のメモリに記憶されますので、パソコンを再起動した場合や USB コネクタの抜差しを行なった場合でも学習モード終了時の設定で「ロック」は動作します。

[※] 学習モードは全ての設定を行なわないと終了することができません。誤って設定を行なった場合は、再度設定を行なってください。

[※] 学習モードでは各設定を行なう場合は**ボタンの色(赤・黄)**で設定を行ないます。

5.スイッチ設定モード

5 - 1.「スイッチ設定モード」とは

●「左・右クリック用スイッチ接続ジャック」に接続したスイッチに、マウス操作を割り付ける機能です。ダブルクリック機能、ドラッグ機能、ロック機能をスイッチで操作することができます。

5 - 2(1) スイッチ設定モード開始

設定ボタンと左クリックボタン(赤)を同時に押し「ピロピロ」とブザーが鳴り、設定確 認用 LED が赤で点滅するまで押し続けてください。スイッチ設定モードが開始されま す。

5 - 2(2) 左クリック用スイッチ接続ジャック割り付け

左クリック用スイッチ接続ジャックに割り付ける機能を選択します。「左クリックボタン」「右クリックボタン」「ダブルクリックボタン」「ドラッグボタン」「ロックボタン」の中から割り付けたいボタンを押してください。

5 - 2(3) 右クリック用スイッチ接続ジャック割り付け

右クリック用スイッチ接続ジャックに割り付ける機能を選択します。「左クリックボタン」「右クリックボタン」「ダブルクリックボタン」「ドラッグボタン」「ロックボタン」の中から割り付けたいボタンを押してください。

5 - 2(4) スイッチ設定モード終了

右クリック用スイッチ接続ジャック割り付けが終了すると、「ピロピロ」とブザーが鳴り設定確認用 LED が緑の点灯に変わることでスイッチ設定モードが終了したことを示します。スイッチ設定モードが終了すると設定内容が反映された状態で「ロック」を使用することが可能となります。設定は「ロック」本体内のメモリに記憶されますので、パソコンを再起動した場合や USB コネクタの抜差しを行なった場合でもスイッチ設定モード終了時の設定で「ロック」は動作します。

[※] スイッチ設定モードは設定ボタンの長押しで途中で設定を終了することが可能です。ただし、途中まで設定した内容は保存されません。

[※] 設定を間違えた場合は再度スイッチ設定を行なってください。

6.お手入れ・保管・廃棄

- ・「ロック」のお手入れの際は、固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- ・「ロック」は湿気やほこりの多い場所、高温になる場所や振動のある場所には、保管しないでください。故障の原因となります。
- ・「ロック」が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- ・「ロック」を廃棄する際は、各自治体の規則に従ってください。

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Macintosh、Mac、Mac OS は米国 Apple Inc.の登録商標です。

(販売元)

ロパシフィックサプライ株式会社

〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1 FAX 072 (875) 8015 TEL 072 (875) 8011 札. 幌 〒003-0023 札幌市白石区南郷通り14-北2-33 パブリックシャイン1F 営 TEL 011 (862) 1136 FAX 011 (862) 1002 田 ж 所 TEL 019 (661) 5407 FAX 019 (661) 5408 京 〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-12 グレイスビル 2F TEL 03 (3352) 0757 FAX 03 (3355) 3154 〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西 3-5 名 古 屋 営 業 TEL 0568 (34) 2696 FAX 0568 (34) 2697 〒733-0035 広島市西区南観音 7-5-13 ロイヤルシャト-中田 1 F TEL 082 (293) 6255 FAX 082 (293) 6299 〒812-0054 福岡市東区馬出 2-2-12 TEL 092 (641) 8151 FAX 092 (641) 0444 http://www.p-supply.co.jp/

(販売店)

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、 許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。