

医師・理学療法士・作業療法士・義肢装具士

Think Possibility!

医療ソーシャルワーカー・言語聴覚士・教員・施設職員用取扱説明書

感覚統合器具 (バランスボードシリーズ)

(本取扱説明書の対応製品)

バランスボードN型 15mm・30mm・40mm・55mm・70mm
バランスボードII型



この度は「感覚統合器具バランスボードシリーズ」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書は「感覚統合器具バランスボードシリーズ」を安心してご利用いただけるよう、わかりやすく説明してあります。ご利用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

ik Pacific Supply

取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様をお願いします。

製品に関するお問い合わせは本取扱説明書最終ページをご参照ください。

バランスボードについて

バランスボードとは

バランスボードは、両脚立ち、片脚立ち、前立ち、後立ち、側方立ち、回転、飛び乗り、腹臥位でのバランス、座位でのバランスなどの運動ができます。器具の特性を生かして頂き、自由な発想でお子さんの可能性を展開していきましょう。

目次

1. 安全にご使用いただくために	3 ページ
2. 梱包の解き方	5 ページ
3. 各部の名称と仕様	6 ページ
4. 設置	7 ページ
5. 設置後の点検	7 ページ
6. 使用方法	8 ページ
7. 日常の保守点検	10 ページ
8. お手入れの方法	10 ページ
9. 保管方法	11 ページ
10. 修理について	11 ページ
11. 廃棄方法	11 ページ
12. アフターサービスについて	12 ページ
13. 保証書	13 ページ

1. 安全にご使用いただくために

「感覚統合器具バランスボード」の機能を十分に生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく読み内容を理解してください。その後大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは「感覚統合器具バランスボード」を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

1-1. 警告に関する事項



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



警告

本製品を使用する場合は必ず医師・理学療法士・作業療法士・義肢装具士・医療ソーシャルワーカー・言語聴覚士などの専門家のもとで行ってください。また、使用中は必ず監督者が付き添ってください。



警告

本製品の耐荷重は70kg までです。本製品で使用する方の総荷重が70kg 以下になる範囲でご使用ください。70kg 以上の荷重で使用すると事故等につながる恐れがあります。



警告

本製品に飛び乗ったり、飛び降りたりしないでください。事故等につながる恐れがあります。



警告

各種の部品は確実に取り付けてください。取り付けが不十分な場合、使用中に金具類がはずれて事故等につながる恐れがあります。



警告

製品と床の間に指を近づけないでください。指を挟む恐れがあります。



警告

本製品を使用している時は、操作者以外近づかないでください。事故などにつながる恐れがあります。



警告

本製品を使用する場合は、使用方法や取扱注意事項等が理解できるまで本製品をご使用にならないでください。

1-2. 注意に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。



注意

保守点検は使用前に本製品使用者または本製品管理者が必ず行なってください。また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。



注意

保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し販売店に修理交換をご相談ください。



注意

本製品を修理改造しないでください。破損等が生じた場合は必ず弊社へ修理交換をご相談ください。



注意

常温の範囲で使用してください。常温範囲以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。



注意

直射日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具(ストーブ等)の近くで使用しないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。変形した製品は使用しないでください。



注意

本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。



注意

本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。



注意

本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。



注意

本書中の図は一部を省略したり抽象化した表現になっているものがあります。



注意

本書は製品とともに常に手元に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。



注意

製品の不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場合があります。不明な事柄については弊社まで問い合わせてください。



注意

本書を紛失または損傷した場合は速やかに弊社までご連絡ください。



注意

本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁記載漏れなどに気付いた場合は弊社までご連絡ください。



注意

本製品は改良のため予告なしに変更する場合があります。



注意

本書の全部または一部を無断で転載複製することを禁止します。



注意

開梱の際にカッター等で製品を傷つけないようにしてください。

2. 梱包の解き方

2-1. ダンボールの開梱

本製品はダンボール箱で配送されます。箱の中でエアークッションに包まれています。開梱の際にカッター等で製品を傷つけないように注意してください。



注意

開梱の際にカッター等で製品を傷つけないようにしてください。

2-2. 内容物(構成部品)の確認

ダンボール箱の中に「3. 各部の名称と仕様」(6ページ参照)に記載されている部品類が全て入っているか確認します。

2-3. 製品の確認


製品に傷や損傷がないか確認します。もしなにかありましたら、販売店(最終ページ参照)へお問合せください。

3. 各部の名称と仕様

構成部品と各部の名称

本製品は次のような部品で構成されています。付属品に不足等はないか点検してください。

バランスボードN型 15mm・30mm・40mm・55mm・70mm

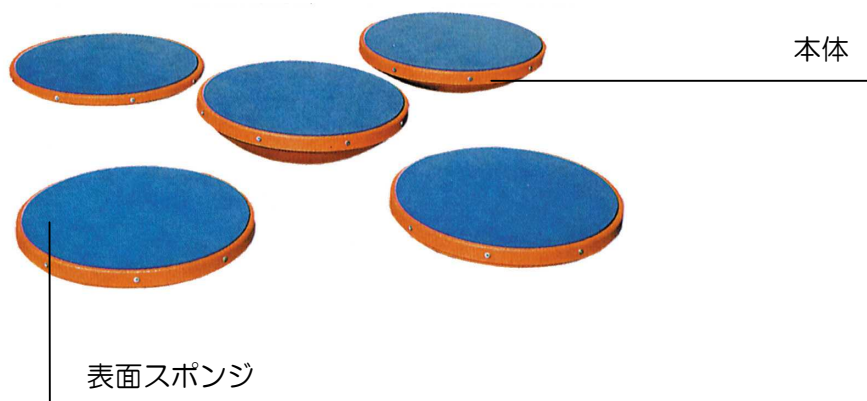

バランスボードⅡ型



製品名	構成部品	材質	仕様
バランスボードN型 15mm・30mm・40mm・ 55mm・70mm	本体	プラスチック	直径30mm
	表面スポンジ	発砲ポリエチレン	厚さ5mm
バランスボードⅡ型	天板	ターポリン	ウレタンフォーム10mm・15mm
	本体フレーム	スチール	シルバー塗装

4. 設置

設置する前に

設置場所を確認してください。



警告

本製品を使用する場合は周りに人や物が無いことを確認してください。不意に身体にあたり、転倒したり等の事故などにつながる恐れがあります。



警告

各種の部品が確実に取り付けられていることを確認してください。取付けが不十分な場合、使用中に金具などが外れて事故などにつながる恐れがあります。



注意

本製品に鋭利な物を当てないでください。カバーが破れて、事故につながる恐れがあります。



注意

常温の範囲でご使用ください。常温以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。



注意

直射日光の当たる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具(ストーブなど)の近くで使用しないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。変形した製品は使用しないでください。



注意

本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。

5. 設置後の点検



注意

設置後の点検は使用前に操作者または本製品管理者が必ず行ってください。また、設置後の点検を行っていない製品は使用しないでください。



注意

保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し、販売店に修理交換をご相談ください。

■チェック項目

- 十分に使用に耐えうる強度がある床・場所に本製品が置かれているか。
- 製品の下に手・足や物がないか。
- 周りに人や物がないか。
- 付属品が取付けられているか。

6. 使用方法

6-1. 本製品を使用する前に



警告

本製品を使用する場合は必ず医師や作業療法士・理学療法士などの専門家の指導のもとで行ってください。また、使用中は必ず、作業療法士などのリハビリテーション関連スタッフが付き添ってください。



警告

本製品を使用する場合は周りに人や物が無いことを確認してください。不意に身体にあたり、転倒などの事故などにつながる恐れがあります。



警告

本製品は絶対に分解しないでください。使用中に外れて事故などにつながる恐れがあります。



警告

各種の部品が確実に取り付けられていることを確認してください。取付けが不十分な場合、使用中に金具などが外れて事故などにつながる恐れがあります。



警告

本製品が揺れているときは、操作者以外近づかないでください。不意に身体にあたり事故などにつながる恐れがあります。



警告

本製品を使用する場合は、使用方法や取扱注意事項などがご理解いただけるまでご使用にならないでください。



警告

本製品を修理改造しないでください。破損などが生じた場合は必ず販売店へ修理交換をご相談ください。



警告

本製品に鋭利な物を当てないでください。カバーが破れて、事故につながる恐れがあります。



警告

常温の範囲でご使用ください。常温以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。



警告

直射日光の当たる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具(ストーブなど)の近くで使用しないでください。熱により、変色や変形する恐れがあります。変形した製品は使用しないでください。



警告

保守点検は使用前に操作者または本製品管理者が必ず行ってください。また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。



警告

保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し販売店に修理交換をご相談ください。



警告

本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。



警告

転落時のけがを防止するため、使用時は本製品の真下に必ずマットを敷いてください。



警告

本製品の耐荷重は「3. 各部の名称と仕様」の項目に記載の各製品ごとの耐荷重に従い、製品を使用する方の総荷重が各製品ごとの耐荷重以下になる範囲でご使用ください。それ以上の荷重で使用すると事故等につながる恐れがあります。

6. 使用方法

6-2. 使用例



警告

本製品を使用する場合は必ず医師・理学療法士・作業療法士・義肢装具士・医療ソーシャルワーカー・言語聴覚士などの専門家のもとで行ってください。また、使用中は必ず監督者が付き添ってください。



警告


使用例以外の方法で使用しないでください。事故等につながる恐れがあります。

使用例

● バランスボードN型



座位でのバランス感覚

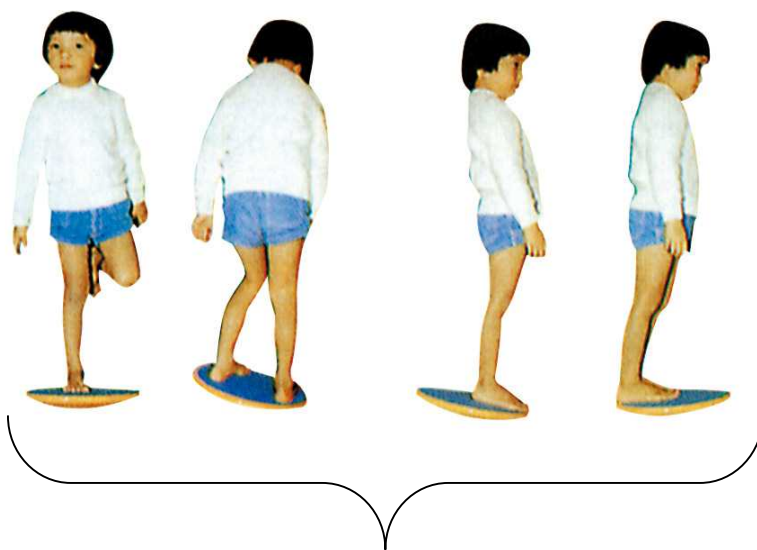

両脚立ち、片脚立ち、側方立ち、前立ち、後立ち

● バランスボードⅡ型



腹這いで揺れる

7. 日常の保守点検

下記の保守点検を行ってください。また、保守点検を行っていない場合は使用しないでください。



注意

保守点検は使用前に操作者または本製品管理者が必ず行ってください。また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。



注意

保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し、販売店に修理交換をご相談ください。

■チェック項目

- 十分に使用に耐えうる強度がある床・場所に本製品が置かれているか。
- 製品の下に手・足や物がないか。
- 周りに人や物がないか。
- 付属品が取付けられているか。

8. お手入れの方法

8-1. 本体カバー

- ほこりなどの汚れは、ブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- 日常のお手入れは、乾いたやらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- シンナーやアルコール系の溶剤は、絶対に使用しないでください。
- 飲み物をこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れがとれなくなります。

8-2. 金属部分

- 日常のお手入れは、乾いたやらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。

9. 保管方法

- 常温の範囲で保管してください。常温以外で保管すると変形や破損を生じる恐れがあります。
- 湿気の少ない、風通しのよい場所に保管してください。
- 本製品の上に重い物をのせないでください。製品が変形または破損する恐れがあります。
- 本書は常に製品とともに手元に保管し紛失しないようにしてください。
- 本書を紛失または損傷した場合は速やかに弊社までご連絡ください。

10. 修理について

- 無断で修理・部品交換・改造などは絶対に行わないでください。
- 本製品の修理・部品交換・改造などが必要と思われる場合は販売店にご相談ください。

11. 廃棄方法

- 本製品の材質は、「3. 各部の名称と仕様」のページを参照ください。
- 廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。

12. アフターサービスについて

お客さまに安心・安全に感覚統合療法を行っていただけるよう、保証延長と定期点検をパックにしたお得なメニュー「安心パック」をご用意いたしました。専門技術を持ったテクニカルスタッフが訪問点検することにより、お使いの器具を安心サポートいたします。ぜひ、ご利用ください。

● 保証期間の延長と定期点検をパック



パック内容

- ① 通常1年の保証期間を2年延長して3年になります。
- ② ご購入後、弊社テクニカルスタッフが24ヶ月点検、36ヶ月点検にお伺いたします。点検時に交換が必要と分かった保証対象部品は、無償にて交換いたします。

実施月	12ヶ月目	24ヶ月目	36ヶ月目
標準コース	1年保証		
安心パック	1年保証 (通常)	保証期間が3年に延長 定期点検	

対象商品



がついている感覚統合器具が安心パックの対象となります。
※随時サービスを拡充して参ります。最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。
<http://www.p-supply.co.jp/>

保証対象部品

保証期間内は下記内容に関して部品を無償交換いたします。

生地への磨り減りや破れによる生地交換

芯材等部品の破損による部品交換

タイヤチューブの摩耗による交換

※お預かり期間は代替え品をご用意いたします。

保証外

下記部品は消耗品につき、部品交換には費用をご負担いただきます。

- ・ロープ ・カラビナ ・フログスイング、スペースホッパーのゴム ・遊び台/飛び石の足ゴム
- ・スイングサポートフレームの足ゴム ・スクーターボードの車輪

専門テクニカルスタッフによる安心点検

弊社の専門教育を受けたスタッフが自身を持って点検・整備を致します。

明瞭な料金プラン

保証期間延長と定期点検をパックにしたサービスです。

点検時期もお任せください

弊社より点検のご案内を致します。お客様が点検時期をお忘れになられても安心して点検を受けて頂けます。

12. 保証書

保証書

本製品は品質管理・検査のもとに皆様にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規程に基づき無料修理いたします。その際は販売店までご連絡ください。その際、本書が必要になりますので、大切に保管してください。

品名		
ご購入年月日		
お客様名		
ご住所		
電話番号		
販売店		
保証期間	<input checked="" type="checkbox"/> 1年保証	<input type="checkbox"/> 3年保証(安心パック)

- (1) ご購入年月日、販売店の欄に記入のない場合は無効となります。
必ず記入の有無をご確認ください。ご記入のない場合は、直ちに販売店にお申し出ください。
- (2) 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- (3) この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- (4) 保証期間が過ぎた後の修理などについてご不明の場合は、販売店までお問合せください。

※保証規程は次ページをご覧ください。

保証規程

- (1)保証期間はご購入の日から1年間です。保証期間内に発生した故障につきましては無料修理いたします。
- (2)保証の対象となる部分はこの製品一式です。ただし、本製品を取り付けた建物への影響や、布地・張地の劣化による故障・損傷や鋭利な物による破損、裂傷は除きます。消耗品についても除きます。(カラビナ・高さ調整金具・ロープ等)
- (3)無料修理には保証書の提出を要します。
- (4)次の場合には保証できませんが、特にご希望の方には実費にて修理致します。その際、出張・配送費用をいただく場合があります。
- ① 保証書を紛失された場合
 - ② 誤ったご使用方法による故障・損傷
 - ③ 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - ④ 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合
 - ⑤ ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
- (5)ご相談窓口は販売店にて承ります。
- (6)転居・引越し・譲渡をされる場合は新しいご住所と電話番号を販売店までご連絡ください。
- (7)その他
- ①本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ②本書の再発行はいたしません。
 - ③他人への譲渡を行った場合は無効となります。

メ

パシフィックサプライ株式会社

(販売元)

大阪営業所 〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1
TEL 072 (875) 8011 FAX 072 (875) 8015

札幌営業所 〒980-0873 札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F
TEL 011 (218) 5801 FAX 011 (218) 5805

仙台営業所 〒160-0022 宮城県仙台市青葉区広瀬町 3-3 ハイアット広瀬町 102
TEL 022 (227) 1820 FAX 022 (227) 1821

東京営業所 〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-12 グレイスビル 2F
TEL 03 (3352) 0757 FAX 03 (3355) 3154

名古屋営業所 〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西 3-5
TEL 0568 (34) 2696 FAX 0568 (34) 2697

広島営業所 〒733-0035 広島市西区南観音 7-5-13 日ヶ丘ビル 中田 1F
TEL 082 (293) 6255 FAX 082 (293) 6299

福岡営業所 〒812-0054 福岡市東区馬出 2-2-12
TEL 092 (641) 8151 FAX 092 (641) 0444

<http://www.p-supply.co.jp/>

(販売店)

取扱説明書・施工説明書(マニュアル)の著作権は川村義肢株式会社/パシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書・施工説明書(マニュアル)の内容の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2013.2. 改訂