


リハビリ器具

「セラピーマット」シリーズ

取扱説明書

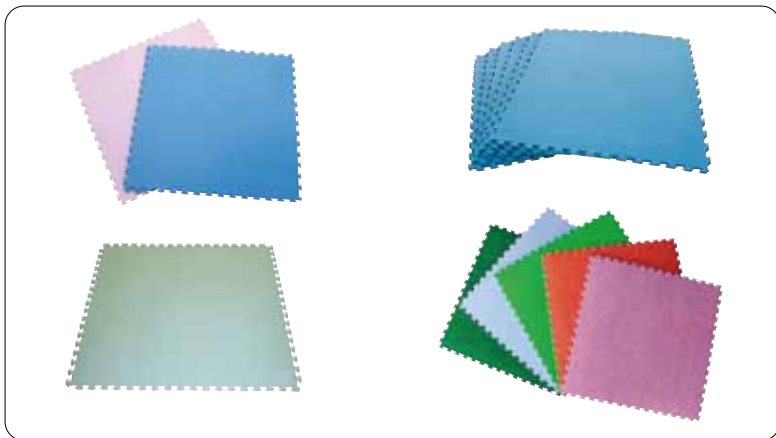

この度は『セラピーマット』各種製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解ください。その後、大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合があります。必ずご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認ください。

1. 各商品の仕様について

商品名	色	サイズ(cm)	厚さ(cm)	材質	防災	抗菌加工	シボ加工	耐久性	防水性
セラピーマット	ブルー、ピンク	92×92	1.4	ポリエチレン	×	なし	両面	○	○
スーパーセラピーマット	ブルー、ピンク	92×92	1.4	ポリエチレン	○	あり	両面	○	○
セラピーマット スポーツタイプ	ブルー	90×90	2.0	ポリエチレン	×	なし	両面	△	◎
セラピーフロアー	モスグリーン	110×110	1.5	ポリエチレン	×	なし	片面	◎	○
セラピーフロアー-Eタイプ	モスグリーン	110×110	1.5	ポリエチレン	×	なし	両面	◎	○
セラピーマット防災タイプ	グリーン、 ライトブルー、 ライトグリーン、 オレンジ、ピンク	87.5×87.5	1.5	ポリエチレン	○	なし	なし	○	△

※セラピーマットとスーパーセラピーマットはジョイントが可能です。

その他の製品同士はサイズやジョイント部の形状が異なるため、ジョイントできません。ご注意ください。

※製品の性質上、サイズや厚みには多少の誤差が生じることがございます。

2.使用・保管方法



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 平らな場所に広げてご使用ください。その際、直射日光の当たらない場所でご使用ください。直射日光の当たる場所で使用・保管すると変形・変色のおそれがあります。
- ジョイントして使用する際は、ジョイント部が平らになるよう、しっかりとめ込んでください。つまり、怪我をするおそれがあります。
- 製品の性質上、寒暖差により収縮することがあります。床暖房などの使用にはご注意ください。
- 使用・保管の際は、火気に近づけないでください。
- 製品の製造工程の都合上、使用し始めの際に、においがする場合がございます。あまりに強いにおいがする場合には、陰干しして発散させてください。なお品質には影響はありません。

3.お手入れ方法



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 汚れがひどい場合は、アルコール消毒、または洗剤等の入った水およびぬるま湯（40℃）で布拭きしてください。タワシや磨き粉・研磨剤入りのスポンジなどは絶対に使用しないでください。
- 乾燥は、40℃以下で直射日光の当たらないところで陰干ししてください。直射日光を当てたり、熱湯をかけたりすると変形・変色のおそれがあります。
- シンナー・有機溶剤は絶対に使用しないでください。マットが劣化・破損し怪我をするおそれがあります。

4.廃棄方法

廃棄については、各自自治体の指示にしたがってください。

5.保証

保証書	
品名	<input type="checkbox"/> セラビーマット <input type="checkbox"/> スーパーセラビーマット <input type="checkbox"/> セラビーマット スポーツタイプ <input type="checkbox"/> セラビーフローア <input type="checkbox"/> セラビーフローア-Eタイプ <input type="checkbox"/> セラビーマット防炎タイプ
お客様	ご住所 〒
	(フリガナ)
	お名前
お買い上げ日	西暦 年 月 日
販売店名	
保証期間	6ヶ月

本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。本書を紛失した場合や、取扱説明書に記載されていない誤った使用をされた場合は保証の対象外です。

本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

その他ご不明な点は下記連絡先までご連絡ください。

2014.09.30作成

●販売元

K パシフィックサプライ株式会社

〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL:072 (875) 8008 FAX:072 (875) 8010

転載複写厳禁