


ステップバイステップ チョイスウィズレベル

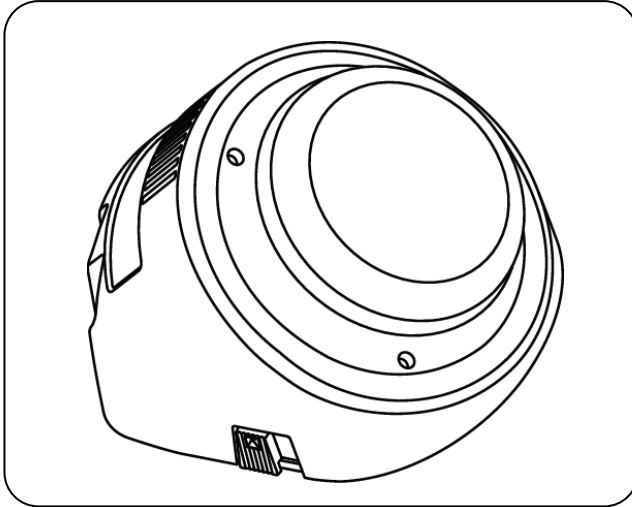

この度はエーブルネット社製 VOCA「ステップバイステップチョイスウィズレベル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書は機器を安心してご使用いただけるよう、分かりやすく説明しています。ご使用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

K Pacific Supply

- 製品に関するお問合せ先は裏面をご覧ください。
- 取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。
- 必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様をお願いします。

「ステップバイステップチョイスウィズレベル」について

「ステップバイステップチョイスウィズレベル」とは…

- 複数のメッセージを録音・再生できるVOCA (Voice Output Communication Aid)です。
- 希望する順番のメッセージを選択して再生できます。
- メッセージ再生中に次のメッセージが再生できます。
- メッセージを3つのレベルに分けて録音・再生することができます。
- 合計で240秒間の音声を録音・再生できます。
- メッセージの数は録音可能時間の範囲であれば無制限です。
- 外部出力（電動おもちゃ等）の接続が可能です。おもちゃを動かす設定にされたメッセージが再生されている間、おもちゃが動きます。
電動おもちゃが動きます。
- 外部スイッチを接続することが可能です。

目次

1. 安全にご使用いただくために……………	4 ページ
2. 各部の名称と仕様……………	6 ページ
3. 使用方法……………	7 ページ
4. バッテリー低下のお知らせ……………	9 ページ
5. お手入れ・保管・廃棄……………	9 ページ
6. 保証書……………	10 ページ

1. 安全にご使用いただくために

「ステップバイステップチョイスウィズレベル」を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

1-1. 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは「ステップバイステップチョイスウィズレベル」を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐ目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

1-2. 警告に関する事項



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



警告

「ステップバイステップチョイスウィズレベル」は音声録音・再生タイプの会話補助装置（VOCA）です。生命維持に関係する装置には一切使用しないでください。



警告

「ステップバイステップチョイスウィズレベル」の使用により傷害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。



警告

修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。



警告

使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。



警告

使用する方または支援する方は「ステップバイステップチョイスウィズレベル」の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。



警告

本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

1-3. 注意に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。



本製品は精密な電子部品が組み込まれております。以下のような場所で本製品を使用又は保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてください。

- (1) 直射日光のあたる場所、高温多湿な場所、ほこり・ちりの多い場所
- (2) 冷暖房機器・加湿器のそば
- (3) 水に濡れやすい場所
- (4) 振動のある場所



濡れた手で「ステップバイステップチョイスウィズレベル」に触れないでください。故障及び感電の恐れがあります。



「ステップバイステップチョイスウィズレベル」本体に唾液、水、粉塵、ごみ等がかからないようにしてください。動作不良や、故障の原因となります。



落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



ベンジン、シンナー、アルコール等で拭かないでください。材質の変色や変形の原因となります。



炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブなど）の近くで使用しないでください。熱により変形を起こす原因となります。



酸素やオゾン等、腐食性ガスの発生する場所でのご使用はお止めください。



本製品の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問い合わせください。



本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気づいた場合は販売店までご連絡ください。



本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。



本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。




本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

2. 各部の名称と仕様

2-1. 構成部品と各部の名称

「ステップバイステップチョイスウイズレベル」は次の部品で構成されています。付属品に不足はないかご確認ください。

本体

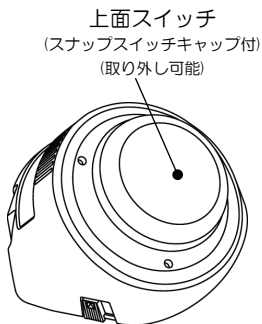


レベルスイッチ




取替用上面
スイッチ
(3色)

スナップスイッチキャップ
(上面スイッチに装着済)



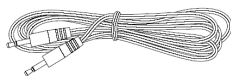


トイケーブル

(本体背面)

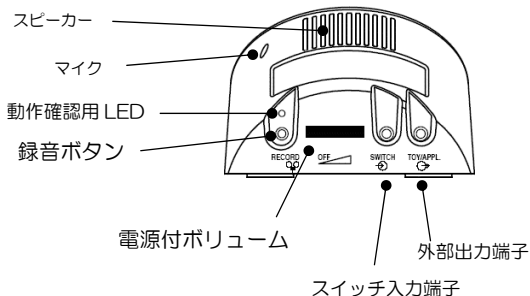

(本体底面)

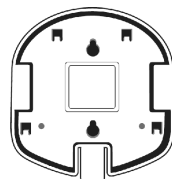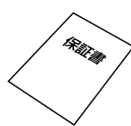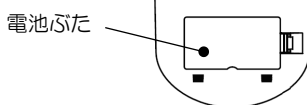

マウンティングベース
(本体底面に装着済)
(本体の固定に使用)

2-2. 製品仕様

名称	仕様	ステップバイステップチョイスウイズレベル
ステップバイステップ チョイスウイズレベル 本体	高さ×幅×奥行	約 76×102×102(mm)
	重量	約 240g
	スイッチ数	1 個
	録音時間	合計 240 秒
	スイッチ入力/外部出力	3.5mm モノラルジャック
	電源	9V アルカリ角電池
	再生時間	約 4.7 時間(10 秒間の録音を約 1500 回、240 秒の録音で約 70 回再生可能)

3. 使用方法

3-1. 使用する前に



警告

「ステップバイステップチョイスウィズレベル」は音声録音・再生タイプの会話補助装置 (VOCA) です。**生命維持に関係する装置には一切使用しないでください。**



警告

「ステップバイステップチョイスウィズレベル」の使用により傷害を生じる可能性があります。使用中に、身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。



警告

修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。



警告

使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。



警告


使用する方または支援する方は「ステップバイステップチョイスウィズレベル」の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。



注意

本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

3-2. 上面スイッチの取り付け、取り外し

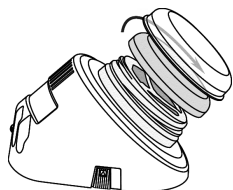


お好みの上面スイッチの色を選んで本体に取り付けて下さい。

取り付けを行なうときには、上面スイッチを右に回してください。

取り外しを行なうときには、上面スイッチを左に回してください。


3-3. 電池の取り付け

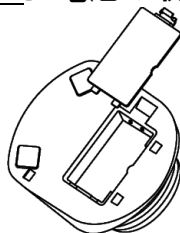

マウンティングベースを取り外し、本体底面の電池ふたを開けます。

＋－の極性に注意して 9V アルカリ角電池を取り付けて、電池ふたを閉めてください。

3-4. 電源の ON/OFF

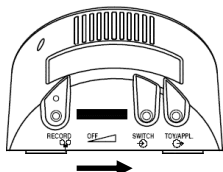

本体背面の電源付ボリュームをカチッという音がするまで右(左図矢印方向)に回すと電源が ON になります。そのまま回すと音量が調整できます。電源を OFF にする場合は、電源付ボリュームをカチッと音がするまで左にまわしてください。

電源とボリュームの動作イメージ

OFF ON(カチ) 音量 最大

3-5. 録音方法

- (1) 本体背面の録音ボタンを、動作確認用 LED が赤く点灯するまで、押し続けてください。「録音モード」となります。点灯後は押すのを止めてください。
- (2) レベルスイッチをメッセージの録音を行う番号に合わせます。
- (3) 上面スイッチを押している間、音声が入ります。
録音されている間、動作確認用 LED は赤で点滅します。
- (4) 上面スイッチから手を離すと録音が終了します。
動作確認用 LED は赤の点灯に代わります。
- (5) (3)・(4)を繰り返して再生したいメッセージの録音を行いません。
- (6) 別のレベルにメッセージを録音する場合、レベルスイッチを録音したい番号に合わせて(3)～(5)を繰り返し、再生したいメッセージを録音してください。
- (7) 「録音モード」を終了するには録音ボタンを押します。動作確認用 LED が消灯します。あるいは 20 秒ほど何もしないと録音モードが終了します。

- ※ 口とマイクの距離は 30～50cm 離します。近すぎると再生の際、音声が割れることがあります。
- ※ 録音可能時間が 10 秒を切ると動作確認用 LED の点灯・点滅の色が赤から黄に変わります。
- ※ 音声を消去するには、録音ボタンを 30 秒間程、黄色のランプが点滅するまで押し続けます。あるいはメッセージを入れずに録音を行なってください。

3-6. 再生方法

再生するレベルにレベルスイッチを合わせ、希望するメッセージの順番分、上面スイッチを操作するとそのメッセージを再生できます。

※例：10 個中 3 番目のメッセージを再生する。

3 回続けてスイッチを操作すると、3 番目のメッセージが再生されます。その次操作した際（1 回押す）には最初のメッセージから再生します。

(リピート機能)

再生する際、1 回録音ボタンを押すとリピートモードに入り、上面スイッチを押すと直前のメッセージが繰り返し再生されます。もう 1 回録音ボタンを押すとリピートモードが解除されます。

- ※ 録音した順番に再生することはできません。他のステップバイステップとは異なります。
- ※ メッセージを再生中に上面スイッチを押すと、次のメッセージが再生されます。
続けてスイッチを操作することが難しい場合に利用できます。
- ※ 電池劣化について：再生中に、電池の残量が低下してくると動作確認用 LED が点滅します。

3-7. 電動おもちゃなどを動かしたい場合

ステップバイステップチョイススイッチレベルでおもちゃが動くように設定したメッセージの再生中、外部出力端子に接続した電動おもちゃなどを動かすことができます。おもちゃを動かすための録音方法は以下のとおりです。

(電動おもちゃとの接続には BD アダプター(別売)などをご使用ください)

- (1) 本体背面の録音ボタンを、押し続けて「録音モード」にしてください。
- (2) 電動おもちゃを動かさないメッセージへは「3-5 録音方法」を参照の上、録音を行なってください。
- (3) 電動おもちゃを動かすメッセージへは、上面スイッチを押して録音をしている間に、録音ボタンを1回押してください。動作確認 LED が一瞬黄に変わりすぐ赤に戻ります。
- (4) (2)・(3)を繰り返し録音を行なった後、「録音モード」を終了してください。

3-8. 外部スイッチを使用して操作する場合

上面スイッチを押すことが難しい場合、スイッチ入力端子に接続した外部スイッチでステップバイステップチョイススイッチレベルを操作することができます。

3-9. スナップスイッチキャップの使用(絵カードの使用)

スナップスイッチキャップの中に絵カードをはさむことで上面スイッチに絵カードを表示することができます。

4. バッテリー低下のお知らせ


本体側面、電源付ボリューム脇に直径 3mm ほどのランプがあります。
点灯状態により、乾電池の残量が分かります。

1)通常再生時

上面スイッチを押した際に、1回赤く点滅します。

2)乾電池の残量が少なくなった時

上面スイッチを押した際に、1回赤く点滅し、その後(約5秒後)、3回赤く点滅します。

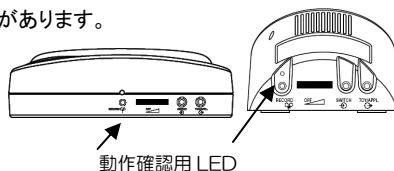

※乾電池の残量が少なくなると、再生時の音声が小さくなったり、途切れたりします。

新しいアルカリ乾電池をご使用ください。

※乾電池の残量が少なくなると、電圧(9V)が低下します。そのため、再生に必要な電圧が確保できず、こうした症状が起ります。マンガン電池は電池の特性上、電圧の低下が早いため、アルカリ電池使用を推奨致します。

5. お手入れ・保管・廃棄

- 「ステップバイステップチョイススイッチレベル」のお手入れの際は、固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 「ステップバイステップチョイススイッチレベル」は湿気やほこりの多い場所、高温になる場所や振動のある場所には、保管しないでください。故障の原因となります。
- 「ステップバイステップチョイススイッチレベル」が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- 「ステップバイステップチョイススイッチレベル」を廃棄する際は、各自自治体の規則に従ってください。

6. 保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規程に基づき無償修理致します。その際は現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店までご提出ください。

品 名	ステップバイステップチョイスウィズレベル		
お客様	ご住所	〒 _____	
	フリガナ		
	お名前		
お買い上げ日 西暦 年 月 日			
販売店			

- 「お買い上げ日」「お客様」「販売店」に記載のない場合は、無効となります。必ず有無をご確認ください。もし、記載がない場合は、直ちに販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間が過ぎた後の修理等についてご不明の場合は、ご購入の販売店までお問い合わせください。

※保証規定内容は次ページをご覧ください。

〈保証規程〉

1. 保証期間はご購入日から2年間です。保証期間内に発生した故障については、無料修理致します。
2. 保証の対象となる部分はこの商品一式です。**ただし、各消耗品及び各部の劣化による故障、損傷は除きます。**
3. 無償修理には、保証書の提出を要します。
4. 次の場合には保証はできませんが、特にご希望の方には実費にて修理致します。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造による故障・損傷
 - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - (4) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
5. ご相談窓口は、販売店および弊社営業所にて承ります。
6. 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無料修理致します。
7. その他
 - (1) 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 - (2) 保証書の再発行はいたしません。
 - (3) 送料につきましては、保証期間内は弊社負担、保証期間外はお客様ご負担とさせていただきます。
(保証規程 6.の場合を除く)

(販売元)

R パシフィックサプライ株式会社

<http://www.p-supply.co.jp/>

本社 営業部	〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1	TEL:072 (875) 8011	FAX:072 (875) 8015
札幌 営業所	〒060-0051 札幌市中央区南 1 条東 6-2-12 松浦ビル 1F	TEL:011 (218) 5801	FAX:011 (218) 5805
仙台 営業所	〒980-0873 宮城県仙台市青葉区広瀬町 3-3 ハイアット広瀬町 102	TEL:022 (227) 1820	FAX:022 (227) 1821
東京 営業所	〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-12 グレイスビル 2F	TEL:03 (3352) 0757	FAX:03 (3355) 3154
名古屋 営業所	〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西 3-5	TEL:0568 (34) 2696	FAX:0568 (34) 2697
広島 営業所	〒733-0035 広島市西区南観音 7-5-13 日野ビル 中田 1F	TEL:082 (293) 6255	FAX:082 (293) 6299
福岡 営業所	〒812-0054 福岡市東区馬出 2-2-12	TEL:092 (641) 8151	FAX:092 (641) 0444

(販売店)

※取扱説明書の著作権は、パシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2012.10 Pacific Supply