

BAUERFEIND

ソフテック Genu
(25-4401-)


! 使用上の注意

- ①本製品は医師の処方によりお使い頂くものです。
- ②ステー（支柱）の修正は必ず、医師または義肢装具士が行います。装着者または介護者による修正は行なわないで下さい。
- ③使用にあたってはこの取扱説明書に従って下さい。また特定の適応症以外の方は使用できません。
- ④過度にきつく装着すると、局部的に圧力がかかることがあり、装着部位の下層部の血管や神経を収縮圧迫することがありますのでご注意下さい。
- ⑤以下の場合、製品を使用される前に医師にご相談下さい。
 - 1. 製品の装着部位に皮膚の疾患／疾病、特に炎症が見られる場合。同様に、腫れが伴い、傷が隆起している場合、または赤みや過度の発熱が見られる場合。
 - 2. 重度の静脈瘤、特に逆流を伴う場合。
 - 3. リンパ機能に障害ある場合（装着部から離れた部位で軟部組織の浮腫がある場合も含みます）。
 - 4. 脚部に知覚障害または循環障害がある場合。（例：糖尿病）
- ⑥傷口が開いている場合は、消毒し、包帯を巻いてからご使用下さい。
- ⑦本製品を他の方に転用（再利用）された場合の事故等につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ⑧本製品のニット部を修理・改造された場合、本来の機能は保証されません。
- ⑨本製品を運動やスポーツの間に使用する場合は、ステー（支柱）の屈曲角を制限しないで下さい。伸展角は0°まで制限することができます。適切な設定は医師または義肢装具士にご相談下さい。
- ⑩本製品は外傷、特に接触の激しいスポーツをする際の損傷を防止するものではありません。
- ⑪万一、症状の悪化などの異常に気付いた場合、直ちに使用を中止し医師へ御相談下さい。
- ⑫本製品と他の製品を併用する場合、医師へ御相談下さい。
- ⑬休憩時には、マジックテープ®のストラップを緩めていただくこともできます。
- ⑭製品の保証期間は弊社出荷日より1年間です。
- ⑮本製品の耐久使用年数は2年です。2年以上はご使用にならないで下さい。
- ⑯軟膏、ローション、またはグリースや酸を含む物質が製品に付着しないように注意して下さい。
- ⑰直射日光にさらしたり、車の中や暖房器具の側には置かないで下さい。
- ⑱廃棄は各自治体の指示に従って下さい。


! お手入れの方法

●洗濯は中性洗剤を使用して、30℃以下のお湯で行なって下さい。また、洗濯は以下の順序によりステー（支柱）を取り外して行います。


ステー（支柱）
取外し方法

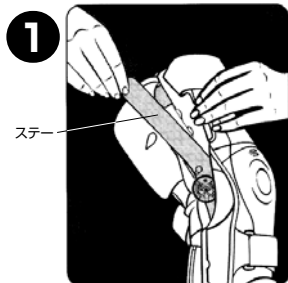

大腿部の2つのストラップをバックルから取り外し、ストラップの端をマジックテープ®に固定させて下さい。マジックテープ®全体を側方に引っ張って、ステー（支柱）用のサイドポケットを開けて下さい。次にステー（支柱）を取り出して下さい。

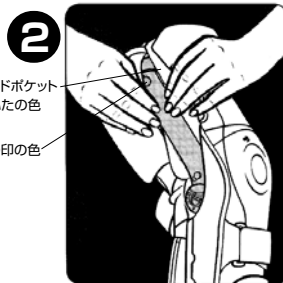

再度ステー（支柱）をサイドポケットに挿入する場合、ステー（支柱）の近位（大腿の方にある）バーに記されている●印の色とサイドポケットのふたの色が合っていることを確認して下さい。また、ステー（支柱）の向きにもご注意下さい。

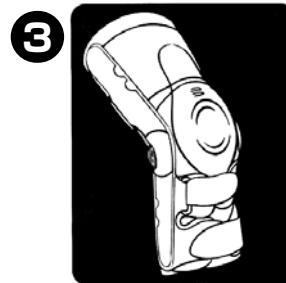


挿入後、サイドポケットのマジックテープ®を閉じて下さい。



手洗い




×漂白剤

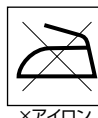

×アイロン



×ドライクリーニング

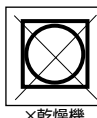


×乾燥機

- ・ドライヤーやヒーターでは乾かさず、日陰で自然乾燥させて下さい。
- ・洗濯前にはステーを取り外して下さい。またニット生地及び共に洗濯する衣服などが傷まないように、すべてのマジックテープを合わせて下さい。
- ・ドライヤーやヒーターでは乾かさず、日陰で自然乾燥させて下さい。


ソフテックGenuの装着方法

図1

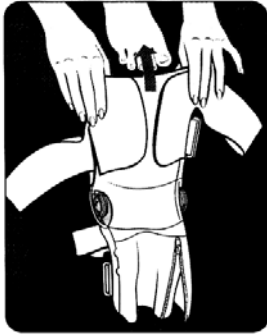


ファスナーを開け、ストラップのマジックテープ®を全て外します。マジックテープ®をバックルから引き抜きます。ストラップをバックルに通さずにマジックテープ®の端にとめます。両手で製品上端(ラベルが付いている方が上)を持ちます。ファスナーのある方が前方になるようにします。

図2

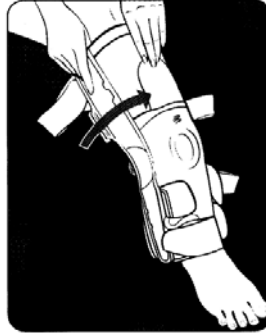


製品の下端が踵上部に位置するまで引っ張り、その状態で180°回転させます。

図3

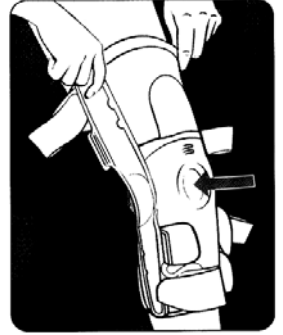


膝蓋骨がシリコンインサートの中央に位置するまで引っ張ります。

図4

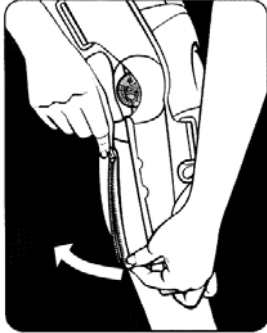

製品の下端を持ちながらファスナーをしめます。

図5

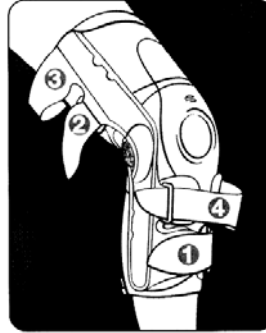

マジックテープ®のストラップを全てバックルに通してから緩めにとめて下さい。その後、以下の順番でしっかりと固定させて下さい。


- 1) 膝から一番下にあるストラップ(①)をしめて下さい。
- 2) 膝に最も近い大腿部のストラップ(②)をしめて下さい。
- 3) 膝から一番上にある大腿部のストラップ(③)をしめて下さい。
- 4) 膝の直ぐ下にあるストラップ(④)をしめて下さい。

取外し方 製品を取り外す場合は、上記の逆の順番で取り外して下さい。



製品が適切に装着されているか確認して下さい。きつすぎるストラップがあれば緩めて下さい。ステー(支柱)がある部分に圧迫を感じる場合は、義肢装具士にご相談下さい。

サイズ (cm)

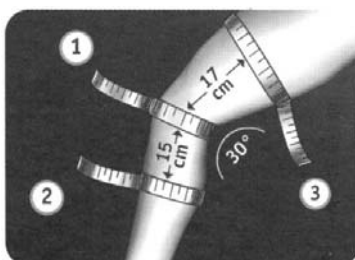

サイズ	周囲①	周囲②	周囲③
1	29~32	28~32	38~42

サイズ	周囲①	周囲②	周囲③
2	32~35	31~35	41~45

サイズ	周囲①	周囲②	周囲③
3	35~38	34~38	44~49

サイズ	周囲①	周囲②	周囲③
4	38~41	36~40	48~53

サイズ	周囲①	周囲②	周囲③
5	41~44	39~43	51~57

サイズ	周囲①	周囲②	周囲③
6	44~47	42~46	54~60

本製品は改良のため、予告なく変更を行なう場合があります。