

ステップレス・敷居用スロープ取扱説明書

ステップレス

この度はグルドマン社製ステップレス・ドアステップをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本取扱説明書は保管して必要に応じて繰り返しお読みください。


アルミニウム製ですので、安定性と強度に優れています。

表面は滑り止め加工されていますので、使用中に滑りにくく、衝撃を吸収します。



適度な角度がついており、ドアサッシの段差を解消してくれます。

- 十分な強度と安定性を考慮して設計されています。スクーターや電動車いすにもご利用いただけます。
- 公共施設や店舗の入口など同じ場所で使用される場合、上り下りともに容易にご利用いただけます。

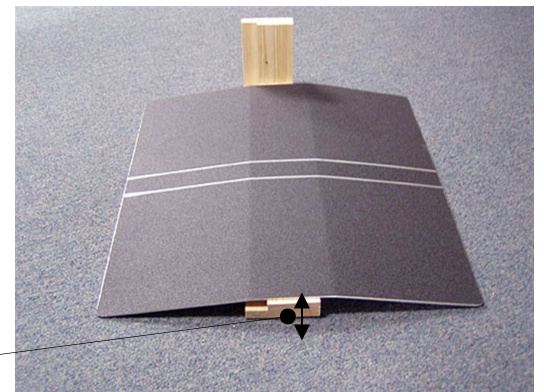

ドアサッシ最大高さ：2.5 cm

<設置例>



製造国 デンマーク 材質 アルミニウム（本体）

品番	品名	サイズ 全長×全幅×全高 (cm)	重量 (kg)	耐荷重 (kg)
39167	ステップレス・ドアステップ 67cm	67×60×2.5	3.4	350
39177	ステップレス・ドアステップ 77cm	77×60×2.5	4.3	350



使用上の注意！

- 事故につながる可能性があるため、スロープの分解は絶対にお止めください。
- 誤ったかけ方での使用、または耐荷重量を超える使用は非常に危険ですのでお止めください。
- ご使用になる際はしっかりとした平らな面に置き、安全をご確認の上ご使用ください。
- スロープを置く地面が平らであることを確認し、ドアサッシに対してスロープが直角になるようにご使用ください。
- 表面の滑り止め加工部分で身体を傷付けないように十分に気を付けてご使用ください。
- 本製品の無いようにについては改良のため予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問合せください。
- 本書の無いように関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気づいた場合は販売店までご連絡ください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証されません。またその際発生した損傷、利害損失に関しては弊社では責任を負うこととはできませんのでご了承ください。
- 本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品とは異なっている場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

お手入れ・廃棄方法

- スロープは腐食しにくいように加工されています。
中性洗剤を布片やスポンジに染み込ませて汚れを拭き取ってください。
- 漂白剤のご使用またはオートクレーブ（加圧滅菌）による洗浄はお止めください。
- スロープのレール部分が汚れた場合は、布片等で汚れを拭き取って乾かしてください。
- 各自治体の指示に従い廃棄処分してください。

● 輸入・販売元

K パシフィックサプライ株式会社

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072 (875) 8008
FAX 072 (875) 8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

販売店