

保証書

品名	エルゴパッド			
お客様	ご住所 〒			
	(フリガナ)			
	お名前			
ご購入年月日	西暦	年	月	日
販売店名				
保証期間	ご購入日より 2ヶ月間			

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、弊社もしくはご購入の販売店までご連絡ください。
- 保証期間が過ぎた後の故障等についてご不明の場合、弊社またはご購入の販売店までお問い合わせください。

保証規程

1. 保証期間はご購入日から2ヶ月間です。保証期間内に発生した故障については、無償修理致します。
2. 無償修理には、保証書の提出を要します。
3. 次の場合には保証は致しかねます。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 取扱説明書に記載されていない誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造・分解による故障・損傷
 - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - (4) 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合
 - (5) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
4. ご相談窓口は、弊社営業所またはご購入の販売店にて承ります。
5. 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無償修理致します。
6. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
7. 保証書の再発行はいたしません。

パワーファインド社 正規販売代理店

パシフィックサプライ株式会社 (本社) 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.072-875-8008(代) FAX.072-875-8010(代)

2015.06

 BAUERFEIND®

エルゴパッド

ボール&ラケット
ラン&ウォーク
スキー&スケート

取扱説明書



SUPPORTING ATHLETES

バウアーファインドのサポーターに関しては、
下記サイトにも多くの情報を掲載しています。

バウアーファインド 特設サイトはこちら ▶

<http://www.p-supply.co.jp/bauerfeind/index.html>



バウアーファインド フェイスブックはこちら ▶

<http://www.facebook.com/BauerfeindJPN>



パウアーファインド社発行の取扱説明書（多言語対応版）を製品へ封入しておりますが、日本語ページについては、こちらの取扱説明書をご覧ください。

エルゴパッド

ボール&ラケット
ラン&ウォーク
スキー&スケート



注意

- 必ず両足揃えた状態でご使用ください。
- 左右の足のサイズが異なる場合は、サイズの大きい方をお選びください。
- 足の赤みや圧迫などの変化が無いが、フィッティング状態を定期的にチェックすることをお勧めします。

エルゴパッドはそれぞれのスポーツに適したシューズの履き心地を高め、動作を安定させるインソールです。


- 中心にはプラスチックが組み込まれ、足のアーチを支えます。
- 足の筋を刺激し、固有受容覚の改善へ繋がります。
- 表面カバーには殺菌効果があり、臭いの発生を防ぎます。

主な
適応

かかと・アキレス腱・すねの痛みの緩和
動作のサポート

エルゴパッドの装着方法

- 図1** インソールの着脱に十分なスペースがあるか確認してください。また、靴に付属のインソールは抜いてください。
- 図2** インソールの上に足を置き、つま先との間に最低1cmの隙間があるか確認してください。
- 図3** 前足部(C¹)、中足部(C²)、後足部(C³)が均等に支えられるようにし、インソールの端に足がかからないか確認してください。
- 図4** インソールを靴底へしっかり挿入してください。

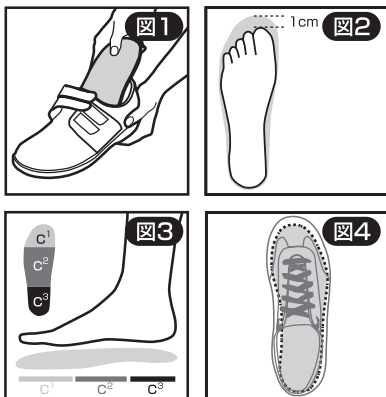

お手入れの方法



注意

- 使用後は必ず取り外し、湿気を外に逃がすようお手入れをお願いします。
- 洗濯機はご使用いただけません。
- 表面カバー部分は液体洗剤を付けたスポンジで汚れをふき取ってください。液体洗剤が残らないように、完全にふき取ってください。放熱器、ヘアドライヤーや直射日光に当たらないよう、製品を乾かしてください。



手洗い



×漂白剤



×アイロン



×ドライクリーニング




×乾燥機

サイズ (cm)

サイズ	35	36	37	38	39	40	41
①足長実寸 (cm)	21.5-22.5	22.5-23.5	23.0-24.0	23.0-24.5	24.0-25.0	24.5-26.0	25.5-26.5
②踵～メタパッド上端 (cm)	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0

サイズ	42	43	44	45	46	47	48
①足長実寸 (cm)	26.0-27.0	27.0-28.0	27.5-28.5	28.5-29.5	29.0-30.0	30.0-31.0	31.0-32.0
②踵～メタパッド上端 (cm)	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5

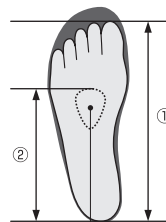

メタパッド

※必ずかかとをあわせ、指先までの足の実際の寸法を測ってサイズをお確かめください。

※メタパッドの位置を必ずお確かめください。

前足部(MTP関節)に干渉しないようにご注意ください。