

フックプラス

iデバイス*を操作するためのスイッチインターフェイス



製品特徴

- iデバイス*に直接ケーブル接続することで安定した使用環境を提供
- iOS7以降でライトニングジャックを装備したiデバイスのアクセシビリティ機能「スイッチコントロール」を利用して操作
- 本機電源はiデバイスのバッテリーを利用、本機付属のケーブルを利用しiデバイスを充電しながらの利用も可能
- 最大4つの外部スイッチ（別売）が利用でき、初期設定も簡単

* iデバイスとは

本機で操作できる対応機種の内総称です。

- iPhone® 6s Plus
- iPhone® 6s
- iPhone® 6 Plus
- iPhone® 6
- iPhone® 5s
- iPhone® 5c
- iPhone® 5
- iPad® Air 2
- iPad® Air
- iPad® (第4世代)
- iPad® mini 3
- iPad® mini 2
- iPad® mini
- iPod touch® (第5世代)

※ 「iPad®」「iPhone®」「iPod touch®」はApple®社の登録商標です。



フックプラスは、iデバイス（おもて面参照）を外部スイッチ（別売）で操作するためのスイッチインターフェイスです。iデバイスに直接触れて操作する事が難しい方にとって、このフックプラスは自分の動きの中にある外部スイッチを利用して、iデバイスのほとんどの操作を快適に行う事ができます。

< 設定方法 >

iデバイスの標準App「設定」をタップ後、「一般>アクセシビリティ>スイッチコントロール」を選択し、スイッチコントロール機能をONにします。

その後、外部スイッチを接続したフックプラスをiデバイスに接続すれば、iデバイスが外部スイッチを認識し、操作が可能になります。

※1スイッチを利用したオートスキャン、複数のスイッチを利用したステップスキャン等で、利用する方に合わせて操作方法を設定できます。

品番	本体ケーブル長/重量	付属ケーブル	価格
19010127	148mm/29g	マイクロUSBケーブル USB2.0(A)オス - USB2.0(Micro-B)オス	¥35,000(税抜)

パシフィックサプライ株式会社

●本 社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

●東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

- 札幌営業所 TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805
- 仙台営業所 TEL.022-227-1820 FAX.022-227-1821
- 東京営業所 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
- 名古屋営業所 TEL.0568-34-2696 FAX.0568-34-2697
- 大阪営業所 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015
- 広島営業所 TEL.082-293-6255 FAX.082-293-6299
- 福岡営業所 TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444

<https://www.p-supply.co.jp/>

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。