

右膝の場合（左膝の場合は反対になります）

1 準備&設定



Boaダイヤルを引き上げて
同時に2本のストラップを
上下させながら引き出します。

2 装着



- 1 継手が天井を向くように、装具を回した状態で履くと、足関節を通しやすくなります。
- 2 足関節を通した後、継手が脚の内側にくるように回して、
- 3 継手と装具本体の両方を握って、引き上げながら装着します。

※一部分を握ったり、急激な力で引き上げると、破損に繋がるのでご注意ください。



- 1 少し膝を曲げた姿勢で、膝蓋骨マークの中へ膝蓋骨が収まる位置まで装具を引き上げます。
- 2 膝を80度程度に曲げて下腿部のストラップをしっかり締めます。

3 調整



Boaダイヤルを押し込み時計回りに回します。
目盛り「5」程度で痛みが軽減する場合がありますが、用途に応じて調整します。

取り外し



Boaダイヤルを引き上げて同時に2本のストラップを上下させながら引き出します。

【1. 準備&設定 参照】

下腿ストラップを緩め、継手を握りながら装具を引き下げます。

装具の縁に、滑り止め用のシリコーンがついているので、慎重に外してください。

※ご注意ください

次のような場合は、身体に装具が適合していない恐れがあります。弊社へご連絡ください。



マジックテープが外れた



ストラップが外れた



ストラップマジックによる毛羽たち
※ストラップマジックがスリーブに当たると毛羽たちを起こします。

Q.O.L.の向上

国際関節症
研究会議 (OARSI)


推奨・
変形性膝関節症
ガイドライン

アンローダーワンをご使用いただくと痛みが減り、活動しやすくなるため、ユーザーのQOL (SF-12での測定) が高まります。移動能力が復元すると、患者は常にやってくる膝の痛みを気にすることなく様々な活動を行うことができます。また、変形性膝関節症の症状を悪化させる体重増加を回避することもできます。

Steadman Philippon Research Instituteによる臨床研究によると、以下の高い割合の患者において装着後6ヶ月で投薬使用の低減があったと報告された。



SF-12 ($p < 0.05$) に示すとおり、装着者はQ.O.L.の物理的な構成要素において著しい改善が見られた。*

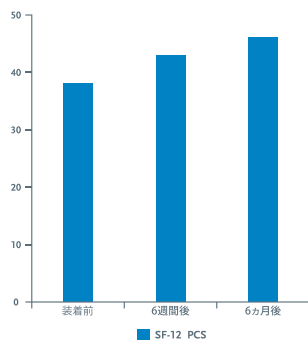

k パシフィックサプライ株式会社

●本社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

●東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

●札幌営業所 TEL.011-218-5801
●仙台営業所 TEL.022-227-1820
●東京営業所 TEL.03-5635-5015
●名古屋営業所 TEL.0568-34-2696

●大阪営業所 TEL.072-875-8011
●広島営業所 TEL.082-535-8300
●福岡営業所 TEL.092-641-8151

<https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 検索