

## 右膝の場合（左膝の場合は反対になります）

### 1 準備&設定

大腿側と下腿側のバックルが外れ、ストラップが緩んでいることを確認します。



ストラップを緩めるときは**ストラップを引きながら**Boaダイヤルを反時計回り（左回り）に回し黄色印を右端に位置させます。Boaダイヤルを回すだけではワイヤーが絡まり破損の原因になります。

### 2 装着



膝を伸ばした姿勢で、**①**膝の内側に装具の継手 **②**大腿側に黄色●、**③**下腿側に青色●がくるように装具を設置し、**④**膝蓋骨の中央と装具の継手中心を揃えます。



※外側支柱(屈曲コントロールキット)を装着している場合は、膝の外側にも装具の継手がきます。



下腿シェルの青●の穴へ青●のストラップをいれて、バックルを固定します。



膝を曲げた姿勢で、大腿シェルの黄色●の穴へ黄色●のストラップをいれて、バックルを固定します。

### 3 調整



立ち上がる前に、大腿部のBoaダイヤルを回し、溝の中央へ黄色が位置するまで時計回りに回します。次に下腿部のBoaダイヤルも同様に回します。



装着者から見た図

### 取り外し

下腿部と大腿部のBoaダイヤルを「0」の位置まで緩めた後、大腿部と下腿部のバックルを外してください。

### ※ご注意ください



ストラップが外れた



バックルを締めてもストラップが緩い



マジックテープが外れた

## k パシフィックサプライ株式会社

●本社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010  
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

●東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016  
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

●札幌営業所 TEL.011-218-5801 ●大阪営業所 TEL.072-875-8011  
●仙台営業所 TEL.022-227-1820 ●広島営業所 TEL.082-535-8300  
●東京営業所 TEL.03-5635-5015 ●福岡営業所 TEL.092-641-8151  
●名古屋営業所 TEL.0568-34-2696

<https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 検索

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。 ※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。