

左膝の場合（右膝の場合は反対になります）

1 装着



膝関節を約90°屈曲させた状態で、膝蓋骨中心と装具の膝継手中心が揃うように装具を装着します。右図は正面からの図。



下から3番目のベルトを締めます。



下から2番目のベルトを締めます。



下から4番目のベルトを締めます（一番上）。



下から1番目のベルトを締めます。



下腿(すね)の前を走路するベルトを締めます。

裏面へ



装着完了。

※ご注意ください

次のような場合は装具が身体に適合していない恐れがあります、弊社へご連絡ください。



ネジが外れた




バックル締めてもストラップが緩い




Q.O.L.の向上

アンローダーダウンをご使用いただくと痛みが減り、活動しやすくなるため、ユーザーのQOL (SF-12での測定) が高まります。移動能力が復元すると、患者は常にやってくる膝の痛みを気にすることなく様々な活動を行うことができます。また、変形性膝関節症の症状を悪化させる体重増加を回避することもできます。

Steadman Philippon Research Instituteによる臨床研究によると、以下の高い割合の患者において装着後6ヶ月で投薬使用の低減があったと報告された。

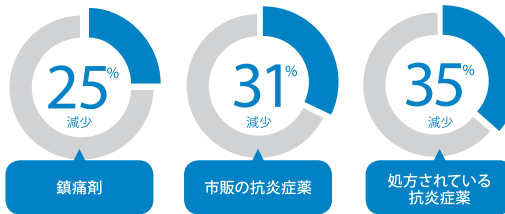

SF-12 ($p < 0.05$) に示すとおり、装着者はQ.O.L.の物理的な構成要素において著しい改善が見られた。¹

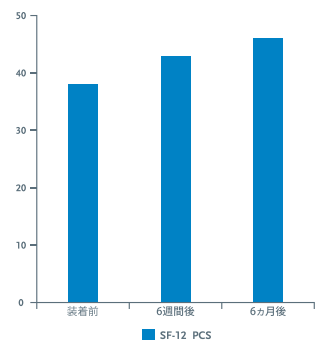

1. Briggs KK, Matheny LM, Steadman JR. Improvement in quality of life with use of an Unloader knee brace in active patients with OA: A prospective cohort study. J Knee Surg 2012; Advance online publication. Retrieved 23rd August 2012. doi:10.1055/s-0032-1313748
2. McAlindon TE, Bannuru RR, Sullivan MC, Arden NK, Berenbaum F, Bierma-Zeinstra SM, et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2014 Mar;22(3):363-88. その他研究結果は www.ossur.com まで。

k パシフィックサプライ株式会社

●本社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

●東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

- 札幌営業所 TEL.011-218-5801
- 大阪営業所 TEL.072-875-8011
- 仙台営業所 TEL.022-227-1820
- 広島営業所 TEL.082-535-8300
- 東京営業所 TEL.03-5635-5015
- 福岡営業所 TEL.092-641-8151
- 名古屋営業所 TEL.0568-34-2696

<https://www.p-supply.co.jp/>

パシフィックサプライ 検索