

# 洗える座クッション サポーション

## 取扱説明書

この度は「洗える座クッションサポーション」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書は「洗える座クッションサポーション」の機能を十分に活かし、かつ安全にご使用いただくよう、わかりやすく説明してあります。ご利用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また読まれたあとも大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

### 本製品の特徴

姿勢の「安定と活動」を考えたクッションです。前すべりを防ぐアンカーサポートと動きをサポートする骨盤後方サポートの形状を採用し、底面は座シートのたわみにも対応する船底形状を採用しております。  
ポリエステル素材で蒸れにくく、丸洗い出来て清潔です

### ご使用上の注意



注意

- 本製品には前後があります。カバー及びクッション材の“後ろ”と表記された方を後ろにセットしてご使用ください。
- 洗濯する時は、カバーとクッション材を別々にして洗ってください。
- 洗濯機の蓋が閉まらない場合は手洗いしてください。
- 直射日光のあたる場所や炎天下での車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブ等）の近くで使用しないでください。
- 消毒液・アルコール等の使用をおやめください。
- 本製品に対して修理改造は行わないでください。
- クッション材は濡らさないでください。万が一濡れた場合は、陰干しにして完全に乾いた状態でご使用ください。

### お手入れ方法

カバーとクッション材は別々にし、洗濯機の弱水流（ネット使用）または手洗い（押し洗い）が可能です（液温は40°Cを限界とし、中性洗剤をご使用ください）。洗濯後は陰干ししてください。  
※塩素系漂白剤による漂白は出来ません。  
※アイロンは使えません。  
※ドライクリーニングは出来ません。

### 仕様

サイズ及び重量：S 37cm×38cm 520g  
M 41cm×40cm 600g  
L 45cm×42cm 680g  
材質：クッション材 ポリエステル100%  
カバー 表 ポリエステル100%  
裏 塩ビレザー

#### ●製造元

**パシフィックサプライ株式会社**

本社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1  
TEL 072 (875) 8008 FAX 072 (875) 8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店