
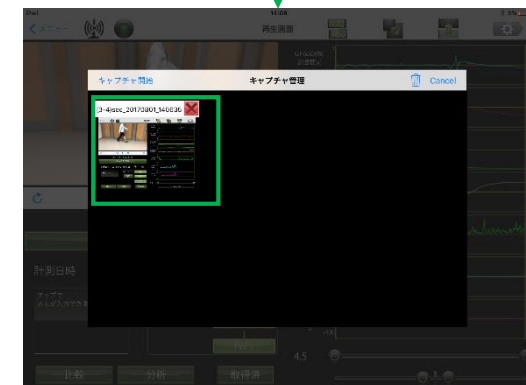


クラウド用動画作成

## 【クラウド用動画作成】


Gait Judge Cloudへアップロードするためのキャプチャ動画を作成することができます (1つのデータにつき最大6個まで)

- ①再生位置調整バーを使用しアップロードしたい部分を選択する
- ②クラウドボタンを押す
- ③キャプチャ開始ボタンを押す

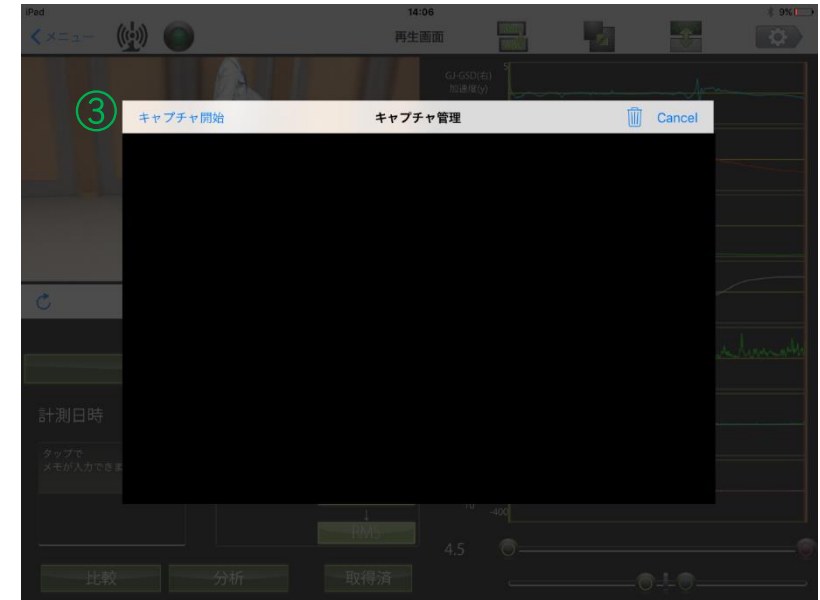

クラウド用動画のPCへの出力

【出力データの選択・各データについて（GJアプリも同様）】

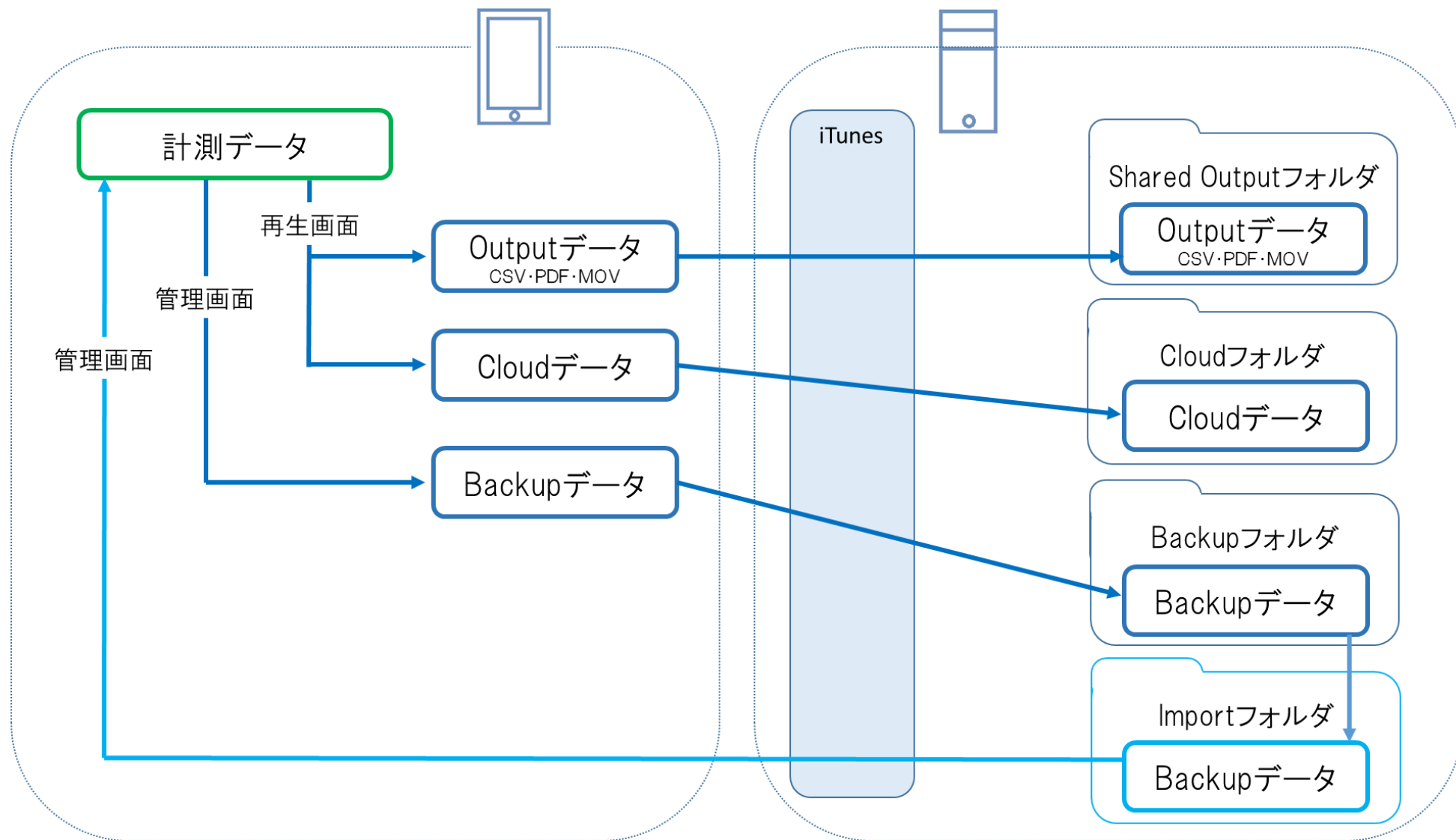

## 【出力データの選択】 (GJアプリも同様)



PCへ出力させたいOutputデータ・Cloudデータの選択ができます

- ①出力データ選択ボタン
- ②出力データ選択
- ③出力データの共有
- ④完了



## PCへの出力手順

- ①「Shared Output」を選択します
  - ②PCへ出力したいデータを選択します
  - ③「出力データ共有」を選択します
  - ④データは共有している出力データで確認できます
- ※データはiTunes経由で出力してください  
OutputデータはShared Outputフォルダに  
CloudデータはCloudフォルダに出力されます

