

# フックプラス2

ablenet®

## 取扱説明書

この度は「フックプラス2」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解ください。その後、大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。



**k** パシフィックサプライ株式会社

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合があります。

※必ずご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認ください。

転載複写厳禁

# 「フックプラス2」の特徴

「フックプラス2」とは…

- Apple®社でMFi認証されたスイッチインターフェースです。  
Lightningジャックを装備している「iPad®」「iPhone®」を本機に接続した外部スイッチで操作を可能にします。
- iOS8以降のアクセシビリティ機能「スイッチコントロール」を利用し、外部スイッチ1個～4個の操作で好きな事を自分の意思で行う事ができます。



※ 「iPad®」「iPhone®」はApple®社の登録商標です。

## もくじ



1. 安全にご使用いただくために……………	3～4
2. 各部の名称・仕様……………	5
3. 初期設定……………	6～9
4. お手入れ・保管・廃棄方法……………	9
5. 保証書……………	10
6. 修理……………	11

# 1. 安全にご使用いただくために

本製品を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

## 1-1 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

## 1-2 警告に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の使用により傷害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行わないでください。
- 使用中に異音や異臭、機器からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

### 1-3 注意に関する事項




この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 本製品は精密な電子部品が組み込まれております。以下のような場所で本製品を使用又は保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてください。
  - (1)直射日光の当たる場所、高温多湿な場所、ほこり・ちりの多い場所
  - (2)冷暖房機・加湿器のそば
  - (3)水に濡れやすい場所
  - (4)振動のある場所
- 濡れた手で本製品に触れないでください。故障及び感電の恐れがあります。
- 本製品本体に唾液、水、粉塵、ごみ等がかからないようにしてください。動作不良や故障の原因となります。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- ベンジン、シンナー、アルコール等で拭かないでください。材質の変色や変形の原因となります。
- 直射日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具(ストーブなど)の近くで使用しないでください。熱により変形を起こす原因となります。
- 酸素やオゾン等、腐食性ガスの発生する場所でのご使用はお止めください。
- 本製品の内容については改良の為予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までご連絡ください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません、またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- 本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。
- ケーブルを曲げたり、引っばったり、強い力を加えないでください。断線する恐れがあります。

# 2.各部の名称・仕様

## 2-1 構成部品と各部の名称

「フックプラス2」は次の部品で構成されています。付属品に不足はないかご確認ください。

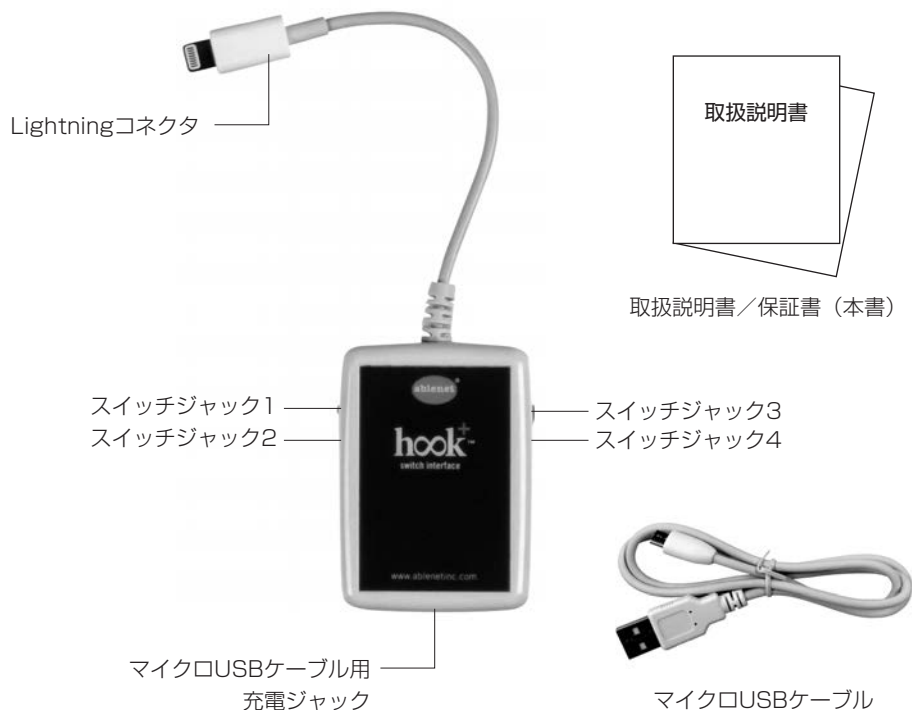

※「iPad®」「iPhone®」は別途ご用意ください。（「iデバイス」とします。）

※スイッチジャックに取り付ける外部スイッチは別売

## 2-2 製品仕様

名 称	仕 様	
フックプラス2	本体サイズ	縦61×横44×厚み19(mm)
	本体ケーブル長	148mm
	重量	29g
	電源	iデバイスのバッテリーを使用
	充電・データ転送用 マイクロUSBケーブル	USB2.0[A]オス-USB2.0[Micro-B]オス

※マイクロUSBケーブルを破損、紛失した場合は、お近くの家電量販店でお求めください。

# 3. 初期設定

## 3-1 ご使用前に



### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の使用により傷害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行わないでください。
- 使用中に異音や異臭、機器からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

## はじめに

### フックプラス2アプリについて

フックプラス2は専用アプリケーションが用意されています。

これは、iOSがアップデートされた際に、フックプラス内のデータをアップデートし、新しいiOSに対応するためのものです。

本アプリを利用し、フックプラス2をiOSに対応させてご利用してください。

### インストール方法

- 1) 外部スイッチを接続したフックプラス2を動作させたい機器につなぎます。
- 2) APPストアよりフックプラス2アプリが表示されますので、インストールします。（されない際、あるいは表示を消した際にはAPPストア内でablenetと入力して検索してください。）
- 3) インストール後、フックプラス2アプリを起動してフックプラス内データを最新の状態にしてください。アプリはフックプラス2とiデバイスが接続されている時のみ、動作します。
- 4) スイッチとフックプラス2とiデバイスの接続は完了しました。

\*iデバイスとは、本機で動作するiPhone、iPadの総称です。

## 3-2 スイッチコントロールをオンにする

iデバイスのディスプレイ上の設定アプリを選び、一般>アクセシビリティ>スイッチコントロールのページでスイッチコントロールを「ON」にします。

《ご注意》同じアクセシビリティ内の、AssistiveTouch は「オフ」にしてください。  
スイッチコントロールとの同時使用はできません。




## 3-3 外部スイッチの設定

- ・フックプラス2には外部スイッチを最大4個接続する事ができます。  
→利用する方の希望や状態に合わせて外部スイッチを接続してください。

最初に、フックプラス2本体のスイッチジャック1※1またはスイッチジャック2※2に入力スイッチを接続します。  
対応するスイッチは、3.5mmモノラルジャックにて接続できるスイッチです。

- ※1 自動ハイライトで1入力にて操作をする場合、  
スイッチジャック①のみに入力スイッチを接続する
- ※2 手動ハイライトで2入力にて操作をする場合、  
スイッチジャック①と②に入力スイッチを接続する

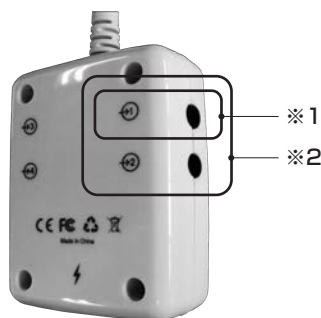

- 1) スイッチ接続後、フックプラス2本体のLightningコネクタをデバイス本体のLightningポートへ接続します。
- 2) 接続後、スイッチコントロールページのスイッチ箇所には1または2と表示されます。
- 3) 表示されれば自動認識完了です。下記画像の接続方法では、スイッチジャック1に差し込んだ入力スイッチで「項目を選択」、スイッチジャック2に差し込んだ入力スイッチで「次の項目に移動」の操作が行えます。

※入力スイッチに自動で割り当てられたアクションは、スイッチコントロール>スイッチ>登録されたスイッチを選択するとアクション項目が表示され、好みのアクションに変更ができます。

※ 「項目を選択」「次の項目に移動」ではアクションが不足しているという場合、スイッチジャック3に「前の項目に移動」やスイッチジャック4に「ホームボタン」などを登録して活用することもできます。

⇒スイッチジャック3、スイッチジャック4へスイッチを設定する場合、3-4をご覧ください。

※スイッチ数の増減を行い利用する場合、ディスプレイ上の設定アプリ>一般>アクセシビリティ>スイッチコントロール>スイッチ>登録しているスイッチ名の部分を左にフリックし登録している全ての入力スイッチを削除してから再度入力スイッチを登録してください。




※操作について 各アプリの仕様により、スイッチコントロールのハイライト箇所や順番が異なり、スイッチ操作がうまくできない場合があります。

※iOSのバージョンによって利用できる設定が違います。

### 3-4 外部スイッチの手動設定

フックプラス2本体のスイッチジャック3、同4を利用し入力スイッチで操作をする場合、上記3-3の設定後、手動で入力スイッチの設定を行います。

- 1) 1度、フックプラス2本体をiデバイスから抜き、スイッチジャック3 (と4) へ入力スイッチを接続後、再度フックプラス2本体をiデバイスへ接続します。
- 2) スwitchコントロール>スイッチ>新しいスイッチを追加>外部>外部スイッチをアクティベートしてください、と表示されたらスイッチジャック3またはスイッチジャック4に差し込んでいる入力スイッチを1度押してスイッチ名の登録と利用するアクションを選択してください。
- 3) アクションを選択後、スイッチジャック3またはスイッチジャック4に登録したアクションで操作ができます。

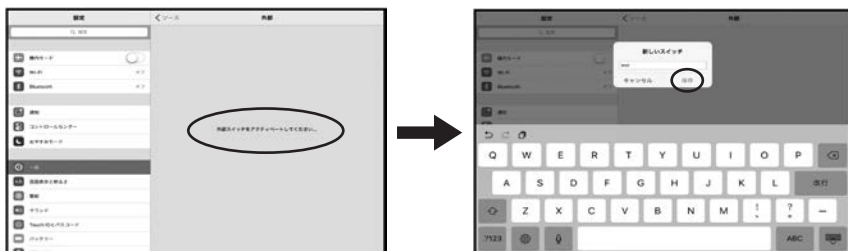




### 3-5 バッテリーの充電方法

---

- (1) 利用しているiデバイスのUSB充電アダプターにマイクロUSBケーブルを差し込み、USB充電アダプターをコンセントジャックに差し込みます。
- (2) マイクロUSBケーブルを、フックプラス2のマイクロUSBケーブル用充電ジャックに差し込みます。
- (3) 充電を行いながら、iデバイスの操作ができます。

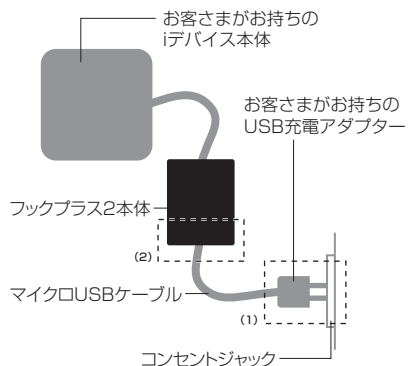

### 3-6 Apple® 社製品の使い方について

---

- Apple®社ホームページURL <http://www.apple.com/jp/>
- Apple®社ホームページサポートURL <http://www.apple.com/jp/support/>

## 4. お手入れ・保管・廃棄方法

---

- 本製品のお手入れの際は、まず接続されているスイッチ、機器を全て外してください。
- 固く絞った布で汚れを拭き取ってください。
- 本製品は湿気やほこりの多い場所、高温になる場所や振動のある場所には保管しないでください。
- 本製品が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- 本製品を廃棄する際は、各自治体の規則に従ってください。

# 5.保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規程に基づき無償修理致します。その際は現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店までご提出ください。

品名	フックプラス2			
お客様	ご住所 〒	TEL		
	(フリガナ)			
	お名前			
お買い上げ日 西暦 年 月 日				
販売店名				
保証期間	2年間			

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、弊社もしくはご購入の販売店までご連絡ください。

## 保証規程

- 保証期間はご購入日から2年間です。保証期間内に発生した故障については、無償修理致します。
- 無償修理には、保証書の提出を要します。
- 次の場合には保証はできませんが、特にご希望の方には実費にて修理致します。
  - 保証書を紛失された場合
  - 取扱説明書に記載されていない誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造・分解による故障・損傷
  - 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
  - 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合
  - ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
- ご相談窓口は、弊社営業所またはご購入の販売店にて承ります。
- 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無償修理致します。
  - 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
  - 保証書の再発行はいたしません。
- ケーブルは消耗品ですので、修理のご依頼は受付けておりません。
- iデバイス本体の修理に関しては受付けておりません。ご購入の店舗もしくはお近くのApple Storeへご相談ください。

# 6.修理

---

故障した場合はお買い上げ頂きました販売店を通じて修理を致します。

- 本製品の修理は、ご購入後3年目以降5年目迄は有償にてお受けいたします。
- ご購入後5年以降の修理については、お受けできません。
- 本製品の保証期間内による故障については、保証規定に従い、  
無償修理又は有償修理となります。
- 保証期間経過後も本書は保管してください。無償、有償を問わず修理には、  
保証書の提示を要します。
- 修理は部品の補修、取り換えではなく、新品との交換となります。

● 輸入・販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1  
TEL 072 (875) 8008 FAX 072 (875) 8010

---

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2018.4