

トラッカープロ2

ablenet®

取扱説明書



この度は『トラッカープロ2』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解ください。その後、大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

※製品に関するお問合せ先は裏面をご覧ください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。

※必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様をお願いします。

R パシフィックサプライ株式会社

トラッカープロ2について

「トラッカープロ2」とは…

- ヘッドマウスとしてハンズフリーマウスコントロールができます。
- 小型カメラで使用者に装着した小さな反射マーカを読み取ることでマウスカーソルの動作を制御します。
- 左クリックと右クリックの操作は、スイッチ(別売)を接続して操作するか、ソフトウェア(別売)をインストールして操作します。
- USBで接続します。

もくじ



1. 安全にご使用いただくために	3
2. 各部の名称と仕様	5
3. 使用方法	6
4. お手入れ・保管・廃棄	8
5. 保証書	9
6. 修理	10

1. 安全にご使用いただくために

本製品を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

1-1 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは本製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用者に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

1-2 警告に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品はパソコン操作を行なうための入力支援機器です。他の目的で使用しないでください。
特に生命維持に関係する装置には一切使用しないでください。
- 本製品の使用により障害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 落雷の恐れがある状況下でのご使用はお止めください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。
- 使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

1-3 注意に関する事項




この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的破損の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は精密な電子部品が組み込まれております。以下のような場所で本製品を使用又は保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてください。
 - (1)直射日光のあたる場所、高温多湿な場所、ほこり・ちりの多い場所
 - (2)冷暖房機器・加湿器のそば
 - (3)水に濡れやすい場所
 - (4)振動のある場所
- 濡れた手で本製品本体や接続ケーブル、接続コネクタに触れないでください。故障及び感電の恐れがあります。
- 本製品本体に唾液、水、粉塵、ごみ等がかからないようにしてください。動作不良や、故障の原因となります。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- ベンジン、シンナー、アルコール等で拭かないでください。材質の変色や変形の原因となります。
- 直接日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具(ストーブなど)の近くで使用しないでください。熱により変形を起こす原因となります。
- 酸素やオゾン等、腐食性ガスの発生する場所でのご使用はお止めください。
- 本製品の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問い合わせください。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気づいた場合は販売店までご連絡ください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- 本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

2. 各部の名称と仕様

2-1 構成部品と各部の名称

本製品は次の部品で構成されています。付属品に不足はないかご確認ください。

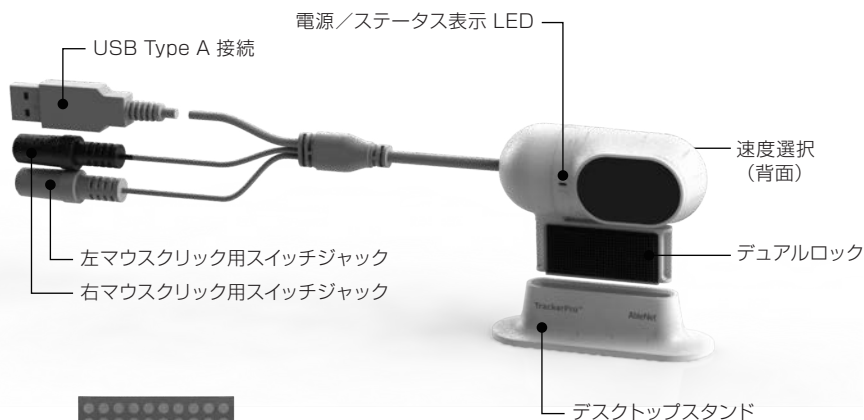

2-2 製品仕様

部分名称	仕様	
本体	高さ×幅×奥行	約50×73×31(mm) (デスクトップスタンド含む)
	重量	約68g
	接続ケーブル長	約52cm
	スイッチ用ジャック	3.5mmモノラルジャック
	接続方式	USB
	動作OS	Windows:Windows98SE以降 Mac:MacOS 9/MacOS X 10.1以降

3. 使用方法

3-1 使用する前に



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品はパソコン操作を行なうための入力支援機器です。他の目的で使用しないでください。特に生命維持に関係する装置には一切使用しないでください。
- 本製品の使用により障害を生じる可能性があります。使用中に、身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。
- 落雷の恐れがある状況下でのご使用はお止めください。
- 修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行わないでください。
- 使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 使用する方または支援する方は本製品の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。

3-2 各部の機能に関して

各部名称	機能説明
ボール	マウスカーソルの操作を行ないます。 ボールを転がす方向にマウスカーソルが移動します。
左クリックボタン	マウスの左クリックと同じ動作をします。
右クリックボタン	マウスの右クリックと同じ動作をします。
USBコネクタ	機器のUSBポートに接続します。

3-3 準備

- ①トラッカープロ2本体を使用者の前に設置します。設置は同梱のデュアルロックを利用して本体をモニターに装着するか、同梱のデスクトップスタンドを利用して平らな面に置くことが出来ます。
- ②トラッカープロ2本体を使用する機器のUSBポートに接続します。本体の電源/ステータス表示が赤色に点灯します。
- ③反射シールを使用者の額に貼り付けます。シールは、眼鏡のフレームや帽子に貼っても良いです。
- ④トラッカープロ2本体と使用者に貼り付けた反射シールの距離は30cmから90cm位にして正対すると、動作を検知しやすくなります。
- ⑤トラッカープロ2本体の電源/ステータス表示は反射シールを検知すると緑色に点灯します。
- ⑥これで、使用者の頭部の動作によりコンピューター上のマウス・カーソルが動きます。使用者が画面全体にわたってマウス・カーソルを動かすことが出来ない際には、コンピューターの設定から、マウス・カーソルの速度を調節してください。



3-4 マウスのクリックについて

マウスのクリックはスイッチ(別売)を接続して操作できます。

白色のスイッチジャックは左クリック、黒色のスイッチジャックは右クリックの操作をします。

ジェリービーンスイッチツイスト等、3.5mmモノラルプラグのスイッチが接続できます。

スイッチ無しでの操作の場合、ソフトウェアを利用することで操作できます。

《参考》

Windows: Dwell Clicker 2(別売、英語版)

MacOS Mojave またはそれ以降のバージョン: キーボードのアクセシビリティ設定を変更。



3-5 マウスカーソルの移動スピードの調節

本体背面の速度選択スイッチで、マウスカーソルの速度を調整できます。

I = 遅い

II = 速い

さらに詳細に設定する際には、使用するコンピューターの設定にて調整してください。

●Windows・MacOS 9の場合、「コントロールパネル」内の「マウス」で調節を行なってください。

●MacOS X 10.1以降の場合、「システム環境設定」内の「キーボードとマウス」で調節を行なってください。

4. お手入れ・保管・廃棄

- 本製品のお手入れの際は、固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 本製品は湿気やほこりの多い場所、高温になる場所や振動のある場所には、保管しないでください。故障の原因となります。
- 本製品が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- 本製品を廃棄する際は、各自治体の規則に従ってください。

※Windowsは米国 Microsoft Corporationの登録商標です。

※Macintosh、Mac、Mac OSは米国Apple Inc.の登録商標です。

5. 保証書

本製品は、当社の品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規程に基づき無償修理致します。その際は現品に本保証書を添えて弊社またはご購入の販売店までご提出ください。

品名	トラッカープロ2		
お客様	ご住所 〒	TEL	
	(フリガナ)		
	お名前		
ご購入日 西暦 年 月 日			
販売店名			
保証期間	2年間		

- 「ご購入日」「お客様」「販売店」に記載のない場合は、無効となります。必ず有無をご確認ください。もし、記載がない場合は、直ちに販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規程

1. 保証期間はご購入日から2年間です。保証期間内に発生した故障については、無料修理致します。
2. 保証の対象となる部分はこの商品一式です。ただし、各消耗品及び各部の劣化による故障、損傷は除きます。
3. 無償修理には、保証書の提出を要します。
4. 次の場合には保証はできませんが、特にご希望の方には有償にて修理致します。
 - (1) 保証書を紛失された場合
 - (2) 誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造による故障・損傷
 - (3) 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - (4) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
5. ご相談窓口は、販売店および弊社営業所にて承ります。
6. 保証書の保証対象とならない故障および損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無料修理致します。
7. その他
 - (1) 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 - (2) 保証書の再発行はいたしません。
 - (3) 送料につきましては、保証期間内は弊社負担、保証期間外はお客様ご負担とさせていただきます。
(保証規程6.の場合を除く)

6. 修理

故障した場合はお買い上げ頂きました販売店を通じて修理を致します。

- 本製品の修理は、ご購入後3年目以降5年目迄は有償にてお受けいたします。
- ご購入後5年以降の修理については、お受けできません。
- 本製品の保証期間内による故障については、保証規程に従い、
無償修理又は有償修理となります。
- 保証期間経過後も本書は保管してください。無償、有償を問わず修理には、
保証書の提示を要します。
- 修理は部品の補修、取り換えではなく、新品との交換となります。

7. ㄨㄜ

●販売元

 **パシフィックサプライ株式会社**

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072 (875) 8008 FAX 072 (875) 8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

販売店