

ORTOP®

オルトトップ

AFO

LHプラス


Long&Hard PAT.P

側壁なしタイプ


この度は「オルトトップ®AFO LHプラス」をお買いあげ頂き、誠にありがとうございます。本装具を正しくしかも安全に使用して頂くため、必ずこの取扱説明書をご覧頂くようお願い致します。

⚠ 使用上の注意


- 本装具の使用に関しては必ず医師の指示に従って下さい。
- 水に濡れると、マジックテープ®などの粘着力が低下する恐れがあります。洗濯・水洗いなどは行わないで下さい。
- ベルト類は交換することができます。お買い上げ頂いた弊社担当者にご用命下さい。(有料)
- 足部近位、遠位ベルトを取り付けるためのベルクロ®シールを貼りつけて下さい。
- 各ベルトがしっかりと取り付けられているか確認して下さい。
- マジックテープ®類にはがれ等がないかどうか確認して下さい。
- 変形の原因になりますので火気の近くに置かないで下さい。
- 本装具使用中または使用後に痛み等の症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師にご相談下さい。
- リングストラップは左右どちらにでも使用できるように致しました。

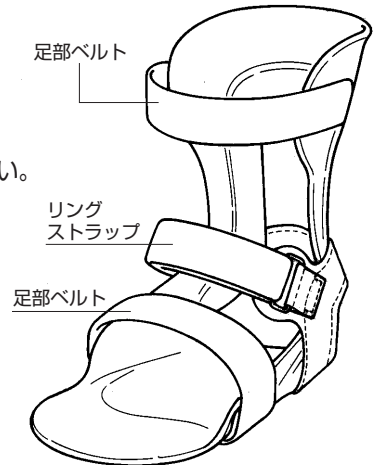


装着方法 ※下図は左足用です。

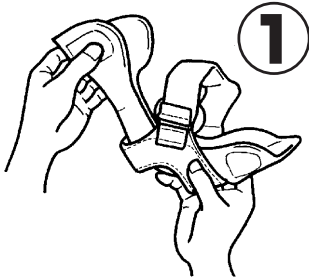

(内カン方式の場合)

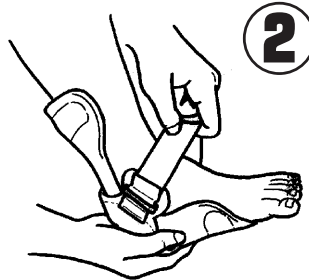


(内カン方式の場合)

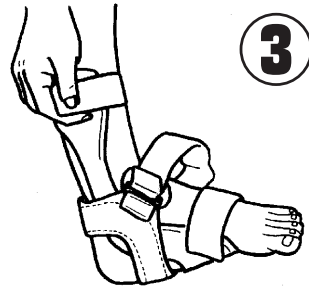


(内カン方式の場合)




(内カン方式の場合)

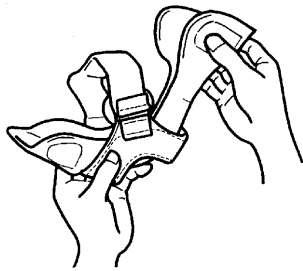


(外カン方式の場合)

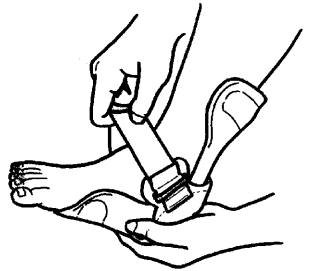

(外カン方式の場合)

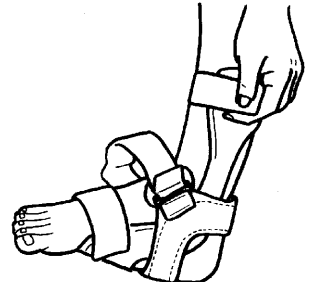

(外カン方式の場合)

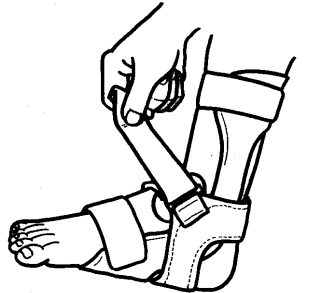

(外カン方式の場合)

リングストラップのベルトを伸ばし(ベルトをカンから外さないように)、内側にあるマジック®で本体に取り付けます。

本体に取り付けたリングストラップのベルトに足を通します。

上・下のベルトにて、本体を足に固定します。(ベルトが長い時はハサミなどで切って調整して下さい)

足部のベルトで足と本体を固定します。

お問い合わせ先は

リングストラップおよび本体の保証期間は90日間です。加工を施していないもので正常な使用方法においてリングストラップや本体に破損が発生した場合は、無償交換致します。破損品を弊社担当者に送付下さい。(送料:販売店様ご負担)破損を確認次第、代替品を送付させて頂きます。

販売元

KAWAMURAGISHI DesignRoom TAGA 2003.1

ORTOP®

オルトトップ

AFO

LHプラス


Long&Hard PAT.P

側壁有りタイプ


この度は「オルトトップ®AFO LHプラス」をお買いあげ頂き、誠にありがとうございます。本装具を正しくしかも安全に使用して頂くため、必ずこの取扱説明書をご覧頂くようお願い致します。

⚠ 使用上の注意

- 本装具の使用に関しては必ず医師の指示に従って下さい。
- 水に濡れると、マジックテープ®などの粘着力が低下する恐れがあります。洗濯・水洗いなどは行わないで下さい。
- ベルト類は交換することができます。お買い上げ頂いた弊社担当者にご用命下さい。(有料)
- 足部近位、遠位ベルトを取り付けるためのベルクロ®シールを貼りつけて下さい。
- 各ベルトがしっかりと取り付けられているか確認して下さい。
- マジックテープ®類にはがれ等がないかどうか確認して下さい。
- 変形の原因になりますので火気の近くに置かないで下さい。
- 本装具使用中または使用後に痛み等の症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師にご相談下さい。
- リングストラップは左右どちらにでも使用できるように致しました。

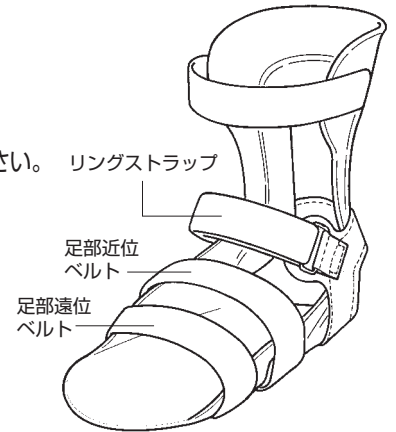

装着方法 ※下図は左足用です。

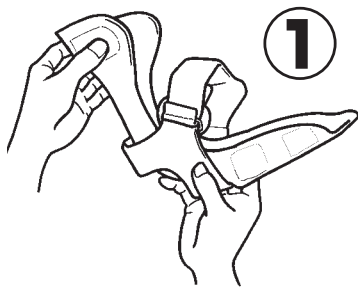


(内カン方式の場合)




(内カン方式の場合)



(内カン方式の場合)

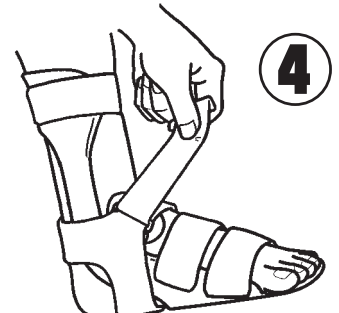


(内カン方式の場合)

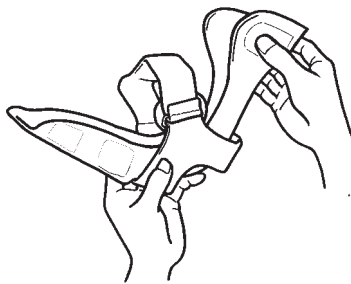

(外カン方式の場合)



(外カン方式の場合)

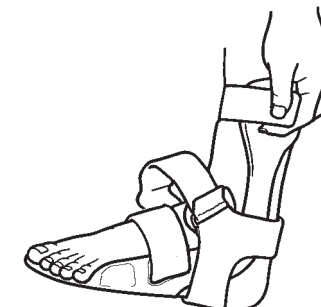

(外カン方式の場合)



(外カン方式の場合)

リングストラップのベルトを伸ばし(ベルトをカンから外さないように)、内側にあるマジック®で本体に取り付けます。

本体に取り付けたリングストラップのベルトに足を通します。

上・下のベルトにて、本体を足に固定します。(ベルトが長い時はハサミなどで切って調整して下さい)

リングストラップのベルトを締め、踵部に本体を固定します。

お問い合わせ先は

リングストラップおよび本体の保証期間は90日間です。加工を施していないもので正常な使用方法においてリングストラップや本体に破損が発生した場合は、無償交換致します。破損品を弊社担当者に送付下さい。(送料:販売店様ご負担)破損を確認次第、代替品を送付させて頂きます。

販売元

ik パシフィックサプライ株式会社

KAWAMURAGISHI DesignRoom TAGA 2003.1