

## 保証書

品名	オールフィット
お客様	ご住所 〒  TEL
	(フリガナ)
	お名前
お買い上げ日 西暦 年 月 日	
販売店名	
保証期間	ご購入日より1年間

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに弊社までお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に不具合が発生した場合、現品と本保証書をご準備の上、弊社までご連絡ください。

### 保証規程

- 保証期間はご購入日より1年間です。  
保証期間内に発生した不具合については、開封・未開封にかかわらず無償交換致します。
- 無償交換には、保証書の提出を要します。
- 次の場合には保証は致しかねます。
  - 保証書を紛失された場合
  - 取扱説明書に記載されてない誤ったご使用方法、あるいは誤った改造・分解による損傷
  - 火災、地震等の天災地変による損傷
  - 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合
  - ご購入後の輸送・移動・落下等による損傷
- ご相談窓口は、弊社にて承ります。
- 保証書の保証対象とならない損傷についても弊社の責任に帰する場合は、保証期間にかかわらず、無償交換致します。
- 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is voided only in Japan
- 保証書の再発行はいたしません。

●輸入・販売元 **R** パシフィックサプライ株式会社

本社営業部 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL (072) 875-8013 FAX (072) 875-8015

## 取扱説明書

Think Possibility!

# オールフィット



## 取扱説明書



この度はオールフィット社製「オールフィット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書は本製品を安心してご使用いただけるよう、分かりやすく説明しています。ご使用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

※製品に関するお問合せ先は裏面をご覧ください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。

※必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様をお願いします。

**R** パシフィックサプライ株式会社

転載複写厳禁

## 製品の特性

- 粒状の低温熱可塑性プラスチックです。
- 65℃以上のお湯に入れ、さまざまな形に成型することができます。
- お湯に再度付けることで再成型が可能です。



## 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 使用者の患部にモールドする際は、柔らかくなったオールフィットの温度を必ず確認してください。やけどの恐れがあります。
- オールフィットは内服用ではありません。傷口や口内には使用しないでください。
- 使用する方または支援する方は「オールフィット」の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。
- オールフィットを直接火にかけないでください。
- オールフィットは120℃まで品質に影響はございません。しかし、お湯が高温の場合はやけどにご注意ください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。


## 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用中に不具合を生じ、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- オールフィットを施した対象物を60℃以上になる場所に放置しないでください（例：直射日光のあたる場所や炎天下の車内、高温のラジエーターや熱器具（ストーブなど）付近）。熱により変形を起こす原因となります。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気づいた場合は販売店までご連絡ください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- 本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

## 使用方法

- ①オールフィットを65℃以上のお湯に入れます。
- ②オールフィットが一塊になり、透明になると成型可能な状態です。
- ③塊を均一にこねます。
- ④対象物にオールフィットを沿わせて、ご希望の形にします。

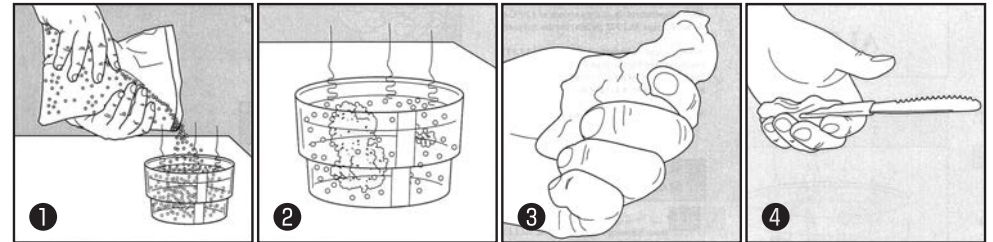

※乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

## お手入れ方法・廃棄方法

- 水やせっけん、食器用洗剤で手洗いしてください。その後しっかりとすすいでください。
- 使用後は可燃ごみとして処分できます。

## 保管方法

- 垂直に立てて、もしくは水平において保管してください。
- 元のパッケージに入れて、涼しい場所で保管してください。
- 一度開封したら、余った材料は袋に戻して保管してください。長期間ご使用にならない場合はできるだけ直射日光を避けてください。
- 使用期限は製造日から約2年になります。保管状況により保管可能期間に差異が生じる場合があります。